



**PRATICIMA**  
healthcare solutions

# FICHES PRODUITS

---



# Sommaire

---

## PARTIE 1 : Circuit du médicament et des DM

### AMÉNAGEMENT PUI

Rayonnage en fil chromé fixe .....	p. 9
Rayonnage télescopique EasyDrawer® .....	p. 13
Rayonnage Optistock® .....	p. 17
Chariots d'approvisionnement Optistock® .....	p. 21
Poste de cueillette .....	p. 25

### STOCKAGE

Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400 .....	p. 27
Colonne et de stockage Modulo® 600 x 400 .....	p. 41
Armoires de stockage Neop® 600 x 400 simple colonne .....	p. 43
Armoires de stockage Neop® 600 x 400 double colonne .....	p. 51
Armoires de stockage Neop® 400 x 600 simple colonne .....	p. 57
Armoires de stockage Neop® 400 x 600 double colonne .....	p. 63
Armoires et colonnes et de stockage Modulo® classic .....	p. 67

### TRANSFERT

Embase de transfert Neop® .....	p. 69
Armoires de transfert à portes .....	p. 73
Chariots de transfert Neop® 600 x 400 .....	p. 73
Armoires de transfert Neop® 600 x 400 .....	p. 79
Armoires de transfert Modulo® classic .....	p. 83
Chariot et boîte de transport .....	p. 85
Cassettes de transport .....	p. 87

### DISTRIBUTION

Chariots de distribution Neop® 600 x 400 .....	p. 89
Chariots de distribution Neop® 400 x 400 simple colonne .....	p. 101
Chariots de distribution Neop® 400 x 400 double colonne .....	p. 107
Chariots de distribution Pili® cart .....	p. 111
Chariot de distribution Hebdo® .....	p. 113
Chariot de distribution Pil 7® .....	p. 115

### PRÉPARATION DU MÉDICAMENT

Broyeur de comprimés électrique Severo® .....	p. 117
Écrase-comprimés manuel Tookan® .....	p. 119
Reconditionnement unitaire .....	p. 121
Pili® Blade .....	p. 123
Solution PDA Pili® .....	p. 125

## **PARTIE 2 : Mobilier de soins et équipements de services**

### **SALLES DE SOINS : MOBILIER FIXE**

Salles de soins menuisées .....	p. 139
---------------------------------	--------

### **SALLES DE SOINS : MOBILIER MOBILE**

Plans de travail mobiles Neop® .....	p. 143
Plans de travail tubulaires Neop® profondeur 400 .....	p. 147
Plans de travail tubulaires Neop® profondeur 600 .....	p. 151
Plans de travail suspendus Neop® .....	p. 155
Caissons suspendus Neop® 600 x 400 .....	p. 157
Caissons suspendus Neop® 400 x 600 .....	p. 161
Caissons mobiles Neop® .....	p. 165
Placard mural Neop® .....	p. 169

### **CHARIOTS DE SOINS**

Chariots de soins Neop® 600 x 400 .....	p. 173
Chariots de soins Neop® 400 x 400 .....	p. 183
Chariot d'anesthésie Neop® 600 x 400 .....	p. 189
Chariot d'intubation Neop® 600 x 400 .....	p. 193
Chariot des traitements Neop® 600 x 400 .....	p. 197
Chariot à plâtre Neop® 600 x 400 .....	p. 201
Chariot de soins multisensoriel Satellite® .....	p. 205

### **GUÉRIDONS DE SOINS**

Guéridons de soins Agily® 600 x 400 .....	p. 211
Guéridons de soins Agily® 400 x 400 .....	p. 221
Guéridons de soins Résine® 600 x 400 .....	p. 231
Guéridons de soins Résine® 400 x 400 .....	p. 233

### **CHARIOTS D'URGENCE**

Chariots d'urgence Neop® 600 x 400 à tiroirs télescopiques .....	p. 235
Chariots d'urgence Neop® 600 x 400 à tiroirs jointifs .....	p. 241
Chariots d'urgence Neop® 400 x 400 .....	p. 245

### **HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE**

Système de nettoyage pour prothèses dentaires C2S PRO® .....	p. 251
Chariot dentaire .....	p. 253

## **PARTIE 3 : Accessoires de parapharmacie**

Broyeurs et coupeurs de comprimés .....	p. 257
Piluliers de poche .....	p. 259
Piluliers compacts .....	p. 261
Piluliers pour patients polymédiqués .....	p. 263
Boîte à dentier .....	p. 265

## **PARTIE 4 : Gestion du linge et des déchets**

### **GAMME LINGE PROPRE**

Chariots de change .....	p. 269
Chariots distri-linge / rayonnage fil chromé mobile .....	p. 273
Armoires de transport .....	p. 277
Chariots de distribution .....	p. 279

### **GAMME LINGE SALE ET DÉCHETS**

Chariots support sac .....	p. 281
Sacs à linge .....	p. 283
Chariots à pince .....	p. 285
Chariots de collecte .....	p. 287
Rolls à linge .....	p. 289

## **PARTIE 5 : Gestion du dossier patient**

Chariots de visite .....	p. 293
Chariots de visite XXL .....	p. 299
Stations informatiques IP .....	p. 303

## **PARTIE 6 : Aides techniques pour le personnel**

### **SOLUTION DE MOTORISATION DES CHARLOTS**

EasyMoove® .....	p. 311
------------------	--------

### **GAMME AIDES MÉCANISÉES**

Multi Bed Mover® .....	p. 315
Plate-forme Step® .....	p. 317
Functional Mover® .....	p. 319
Taureau .....	p. 321
Trotinette électrique .....	p. 323

### **GAMME TRANSFERT**

Planches de transfert Rollbord® Hightec .....	p. 325
Planches de transfert Rollbord® Ecolite .....	p. 327
Système de transfert latéral .....	p. 329
Planches de transfert courbées .....	p. 331
Plateaux et coussins tournants .....	p. 333
Sangles de déplacement .....	p. 335

### **GAMME CONTENTION**

Système de contention Pinel® .....	p. 337
------------------------------------	--------

## **PARTIE 7 : Circuit de la restauration**

Chariot de distribution des repas Neop® meal .....	p. 341
--	--------

## **PARTIE 8 : Accessoires et équipements**

### **AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS**

Bacs-tiroirs .....	p. 349
Bacs pour structures 400 x 400 .....	p. 353
Tiroirs pour structures 600 x 400 .....	p. 355
Bacs à lèvres pour structures 400 x 400 .....	p. 359
Bacs à lèvres pour structures 400 x 600 et 600 x 400 .....	p. 363
Tiroirs télescopiques pour chariots Neop® .....	p. 367
Piluliers et bacs Modulo® classic .....	p. 371
Piluliers Modulo® XL .....	p. 373
Piluliers Modulo® XXL .....	p. 375
Piluliers Eurojour® .....	p. 377
Plateaux de piluliers Adhésia équipements® pour structures 600 x 400 .....	p. 379

### **ACCESSOIRES PÉRIPHÉRIQUES**

Rails et accessoires compatibles .....	p. 383
Portiques et accessoires compatibles .....	p. 387
Supports informatiques .....	p. 391
Accessoires périphériques complémentaires .....	p. 395
Liens de sécurité numérotés .....	p. 397
Accessoires pour guéridons Résine® .....	p. 399

### **SEMAINIERS ADHÉSIA ÉQUIPEMENTS**

Plateaux de piluliers 205 x 400 .....	p. 401
Plateaux de piluliers 450 x 400 .....	p. 403
Bacs et étuis de rangement .....	p. 407

### **AUTRES**

Distribution des liquides .....	p. 409
Unité de distribution journalière .....	p. 413

# PARTIE 1

---

## Circuit du médicament et des DM







## Gamme aménagement PUI

# Rayonnage en fil chromé

Il existe deux types de rayonnages en fil chromé : le rayonnage fixe et le rayonnage mobile.

Grâce à sa structure coulissante, le rayonnage mobile est une véritable solution pour augmenter les superficies de stockage. Le rayonnage fixe peut, quant à lui, être monté linéairement ou en angle.

La flexibilité de cette gamme permet à chacun de trouver une solution adaptée à ses besoins, sans aucune contrainte.



### Points forts

- ▶ Résistant aux lourdes charges
- ▶ Nettoyage simple : évite toute accumulation de poussière
- ▶ Installation rapide : sans écrou, sans boulon, ni outil
- ▶ Rayonnage offrant une vue de l'ensemble des produits
- ▶ Rayonnage totalement personnalisable
- ▶ Extension illimitée



Hygène



Ergonomie

## Gamme aménagement PUI

# Rayonnage en fil chromé

### Caractéristiques techniques

- ▶ Rayonnage mobile ou fixe (montage linéaire ou en angle)
- ▶ Structure en fil d'acier très résistante et légère
- ▶ Montants en tube chromé Ø 25 mm
- ▶ Étagères grillagées réglables en hauteur au pas de 25 mm
- ▶ Pieds munis de vérins réglables permettant de compenser les inégalités du sol
- ▶ Produit livré non monté avec une notice claire et pratique (montage sans outil)
- ▶ Excellente qualité pour les exigences les plus élevées

### Composition Premium

#### Rayonnage chromé en angle : réf. AH10210

Dimensions : L. 1677 x P. 1524 x H. 1600 mm

Équipement de série :


- ▶ 6 montants chromés H. 1600 mm
- ▶ 5 étagères L. 1524 x P. 457 mm
- ▶ 5 étagères L. 1220 x P. 457 mm
- ▶ 10 crochets de fixation



### Composition sur-mesure

#### Montants

	Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
1	Élément de jonction des montants		BF20226
2	Montant en tube chromé Ø 25 mm	L. 900	BF20201
	Montant en tube chromé Ø 25 mm	L. 1600	BF20202
	Montant en tube chromé Ø 25 mm	L. 2000	BF20204

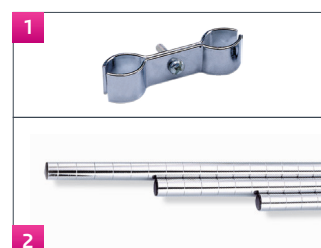

#### Étagères

	Désignation	Dimensions (en mm)	Capacité (en kg)	Référence
3	Étagère fil	L. 762 x P. 457	337,5	BF20205
	Étagère fil	L. 910 x P. 457	315	BF20206
	Étagère fil	L. 1220 x P. 457	270	BF20208
	Étagère fil	L. 1524 x P. 457	225	BF20209
	Étagère fil	L. 1220 x P. 610	180	BF20213
	Étagère fil	L. 1524 x P. 610	135	BF20214
4	2 crochets de fixation pour étagères			BF20227



Les charges maximales indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti.

## Gamme aménagement PUI

## Rayonnage en fil chromé


## 5 Séparateurs

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Séparateur	P. 457 x H. 270	BF00215
Séparateur	P. 610 x H. 270	BF00216




## Porte-étiquettes

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
12 porte-étiquettes avec étiquettes	L. 76 x P. 36	BF03601

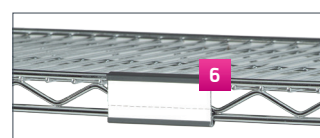


## Penderies

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Penderie extérieure	L. 300	BF20220
Penderie intérieure	L. 865	BF20221

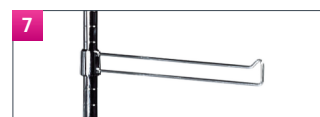

## Paniers et porte-documents

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Porte-document chromé	L. 270 x P. 96 x H. 298	BF20248
Support dossier spécial		BF20250

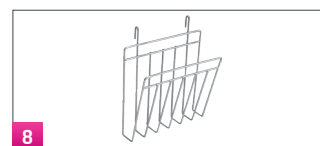


## Poignée

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Poignée chromée	L. 457	BF20217



## Côtés et fixation anti-chute

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Côté anti-chute	L. 450 x H. 100	BF00228
Côté anti-chute	L. 1220 x H. 100	BF00239
Fixation anti-chute	L. 1600	BF00231
Clip de fixation (1 par étagère)		BF00232

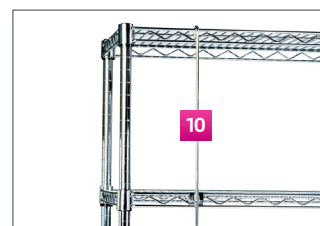


Gamme aménagement PUI

## Rayonnage en fil chromé

### Éléments d'aménagement pour rayonnages mobiles

#### Supports montants

Désignation	Référence
2 supports montants pour tablettes P. 457 mm	BF20243
2 supports montants pour tablettes P. 610 mm	BF20244

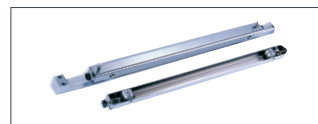


#### Rails intermédiaires et embouts

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
2 rails intermédiaires	L. 1000	BF20246



#### Roues pivotantes

Désignation	Diamètre (en mm)	Référence
4 roues pivotantes dont 2 à frein Avec butées annulaires	125	BF20319

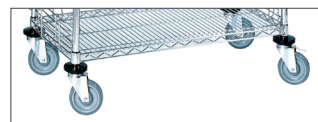

## Gamme aménagement de PUI

# Rayonnage télescopique EasyDrawer®

Le rayonnage télescopique EasyDrawer® est idéal pour le stockage de médicaments. Ce système modulaire et autoportant se monte facilement. Les tiroirs télescopiques se caractérisent par leur système de verrouillage/déverrouillage et leur gamme de séparateurs en métal offrant une grande flexibilité de l'espace produit.

Photos non contractuelles



Hygène



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Espace ajustable en fonction des produits
- ▶ 2 positions : horizontale ou inclinée à 15°
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- ▶ Nombreuses combinaisons grâce aux divers accessoires
- ▶ Rayonnage simple ou double face
- ▶ Installation rapide et facile

Gamme aménagement de PUI


## Rayonnage télescopique EasyDrawer®

### Caractéristiques techniques

- ▶ Matière : acier recouvert époxy coloris blanc
- ▶ Montants perforés au pas de 40 mm, avec patins réglables
- ▶ Panneau arrière inclus dans les rayonnages simples et double face



Rayonnage SIMPLE FACE avec étagères inclinées et horizontales

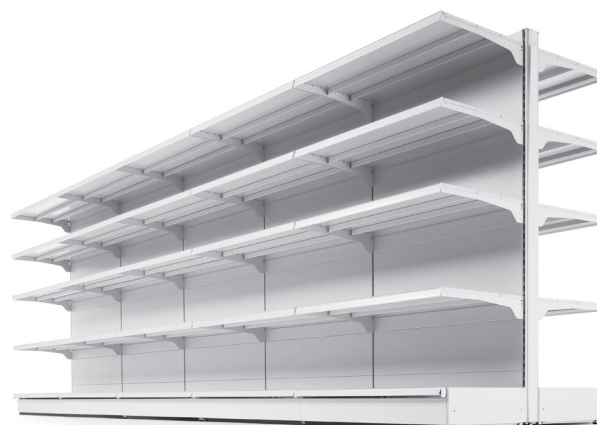

Rayonnage DOUBLE FACE avec étagères horizontales

### Composition Premium

#### Rayonnage simple face EasyDrawer® : réf. 8Q100

Dimensions : L. 1030 x P. 520 x H. 2030 mm

Équipement de série :

- ▶ 1 étagère pour plafond (2 positions)
- ▶ 1 étagère intermédiaire (2 positions)
- ▶ 5 tiroirs télescopiques (2 positions)
- ▶ 30 séparateurs réglables L. 400 mm



### Composition sur-mesure

#### Structure

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Rayonnage simple face BASE	L. 1030 x P. 520 x H. 2030	8QSB40_100
Rayonnage simple face EXTENSION	L. 1000 x P. 520 x H. 2030	8QSE40_100
Rayonnage double face BASE	L. 1030 x P. 930 x H. 2030	8QDB40_100
Rayonnage double face EXTENSION	L. 1000 x P. 930 x H. 2030	8QDE40_100

Gamme aménagement de PUI

## Rayonnage télescopique EasyDrawer®

### Tiroirs télescopiques



Tiroir télescopique



Tiroir avec porte-étiquette adhésif

#### Désignation

Tiroir télescopique blanc largeur 1000 mm

Porte-étiquette adhésif pour tiroir largeur 1000 mm

#### Dimensions (en mm)

L. 1000 x P. 400 x H. 80

H. 42

#### Référence


8QT40\_100

8QPE01\_100

### Cloisonnements des tiroirs



Cloisonnement de tiroir en longueur et en largeur

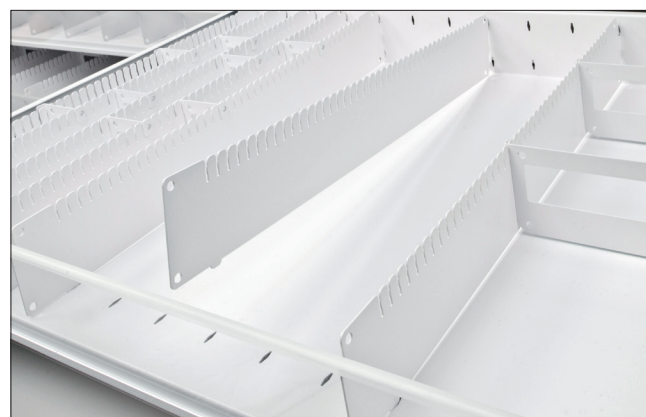

Facilité de réglage des séparations

#### Désignation

Séparateur largeur blanc

Séparateur largeur blanc

Séparateur largeur blanc

Séparateur profondeur blanc (réglable au pas de 48 mm)

#### Dimensions (en mm)

L. 190 x H. 80

L. 96 x H. 80

L. 48 x H. 80

L. 400 x H. 80

#### Référence

8QC01

8QC02


8QC03

8QS40

Gamme aménagement de PUI

# Rayonnage télescopique EasyDrawer®

## Étagères

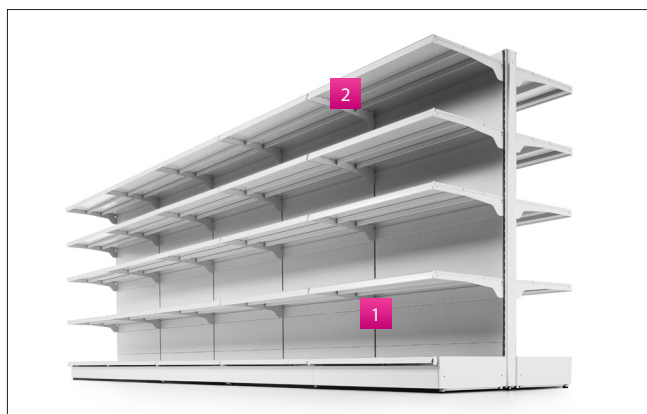

Les étagères intermédiaires sont réglables en 2 positions : horizontale ou inclinée à 15°.

Elles sont livrées avec les équerres de fixations et le porte-étiquette.

Les étagères pour plafond sont utilisables uniquement pour constituer un plafond au rayonnage.

*Désignation*

*Dimensions (en mm)*

*Référence*

1	Étagère intermédiaire blanche monobloc	L. 1000 x P. 400	8QE40P2_100
2	Étagère pour plafond blanche monobloc	L. 1000 x P. 500	8QE40P1_100

## Diviseurs pour étagères

*Désignation*

*Hauteur (en mm)*

*Référence*

Diviseur en fil pour étagère P. 400 mm	60-140	8QDVF01_P40
--	--------	-------------



## Gamme aménagement de PUI

# Rayonnage Optistock®

La ligne Optistock® a été conçue pour le **stockage en réserves** de matériel stérile ou non stérile, déconditionné ou non.

Cette gamme s'utilise dans tous les services (dont la PUI), mais plus particulièrement pour le plateau technique de par ses qualités uniques en matière d'hygiène.

Elle permet une adaptation au plus juste des modes de gestion couramment utilisés dans les établissements de santé, comme la dotation ou le plein / vide.



Hygène



Ergonomique

## Points forts


- ▶ Glissières amovibles et réversibles
- ▶ Produits accessibles des deux côtés
- ▶ Nombreuses possibilités : façades 400, 600 et 1200
- ▶ Résistance : 200 kg / colonne

## Gamme aménagement de PUI

# Rayonnage Optistock®

### Caractéristiques techniques

- ▶ Structure avec fixations et échelles en acier soudé peint époxy, coloris gris
- ▶ Roulettes Ø 100 mm, dont 2 à frein (pour la version mobile)
- ▶ Résistance à la charge : 200 kg par colonne (la résistance peut varier selon l'équipement choisi dans la structure)
- ▶ Montants de la structure en « U » creux et arrondis

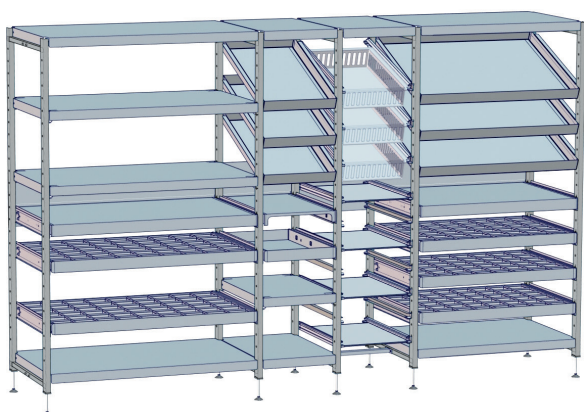

### Composition Premium

#### Rayonnage mobile Optistock® : réf. 8A790

Dimensions : L. 1230 x P. 490 x H. 1980 mm

Équipement de série :

- ▶ 2 étagères fixes
- ▶ 2 étagères inclinées
- ▶ 12 séparateurs pour étagère inclinée
- ▶ 4 tiroirs télescopiques
- ▶ 4 kits de compartimentage pour tiroir télescopique (9 cases)
- ▶ 8 porte-étiquettes autocollants
- ▶ 10 planches de 20 supports étiquettes en PVC




#### Colonne mobile simple 600 x 400 Optistock® : réf. 8A792

Dimensions : L. 730 x P. 490 x H. 1980 mm

Équipement de série :

- ▶ 1 paire de glissières inclinées
- ▶ 7 paires de glissières universelles horizontales
- ▶ 7 bacs à lèvres ajourés gris H. 100 avec butées antichute
- ▶ 1 bac à lèvres ajouré gris H. 200 avec butées antichute

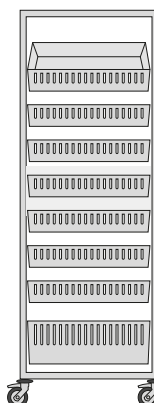

# Gamme aménagement de PUI


## Rayonnage Optistock®

### Composition sur-mesure

#### Structure

Dimensions	STRUCTURES MOBILES				STRUCTURES FIXES	
	Échelle principale simple	Échelle principale double	Échelle principale triple	Échelle secondaire simple	Échelle principale simple	Échelle secondaire simple
<b>L. 400 x P. 600</b>	8A711	8A712	8A713	–	8A710	8A715
<b>L. 600 x P. 400</b>	8A701	8A702	8A703	–	8A700	8A705
<b>L. 1200 x P. 400</b>	8A741	–	–	8A742	8A740	8A745
<b>L. 1200 x P. 600</b>	8A751	–	–	8A752	8A750	8A755

Il est déconseillé d'assembler plus de 3 échelles mobiles. Au delà, utilisez les versions fixes.  
Les structures fixes dont la longueur dépasse 1200 mm ne sont pas livrées montées.

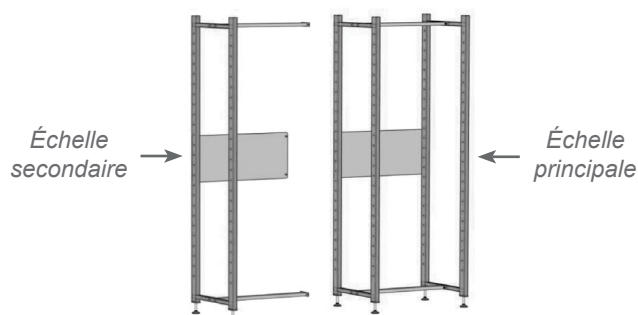

#### Habillages latéraux

Désignation	Référence
Habillage latéral pour 1 côté gauche ou droit de rayonnage L. 600 x P. 400 - bleu pop	8A655
Habillage latéral pour 1 côté gauche ou droit de rayonnage L. 400 x P. 600 - bleu pop	8A656

#### 1 Étagères fixes horizontales

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Étagère fixe peinte époxy gris	L. 400 x P. 600	8A666
Étagère fixe peinte époxy gris	L. 600 x P. 400	8A660
Étagère fixe peinte époxy gris	L. 1200 x P. 400	8A662
Étagère fixe peinte époxy gris	L. 1200 x P. 600	8A668
Étagère en compact pour façade 600 ou 400		8A600
Séparateur pour étagère P. 400	P. 400	8A658
Séparateur pour étagère P. 600	P. 600	8A659


## Gamme aménagement de PUI

# Rayonnage Optistock®

### 2 Étagères fixes inclinées

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Étagère en creux inclinée peinte époxy gris	L. 400 x P. 600 x H. 60	8A669
Étagère en creux inclinée peinte époxy gris	L. 600 x P. 400 x H. 60	8A663
Étagère en creux inclinée peinte époxy gris	L. 1200 x P. 400 x H. 60	8A665
Étagère en creux inclinée peinte époxy gris	L. 1200 x P. 600 x H. 60	8A671
Séparateur pour étagère inclinée	P. 400	8A684
Séparateur pour étagère inclinée	P. 600	8A687

Les étagères fixes horizontales positionnées sur la partie haute, ou basse, servent de plafond, ou de plancher.

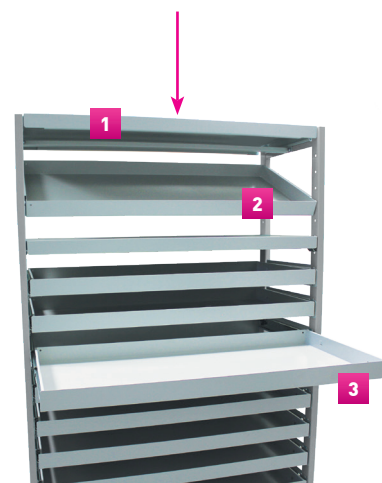

### Étagères télescopiques

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Étagère télescopique peinte époxy gris	L. 400 x P. 600	8A672
Étagère télescopique peinte époxy gris	L. 600 x P. 400	8A675
Étagère télescopique peinte époxy gris	L. 1200 x P. 600	8A674
Étagère télescopique peinte époxy gris	L. 1200 x P. 400	8A677

### 3 Tiroirs et kits de compartimentage

Désignation	Dimension	Référence
Tiroir télescopique peint époxy gris P. 400	L. 1200 x P. 400 x H. 60	8A680
Kit de compartimentage pour tiroir 8A680 - 3 x 4		8A680_3X4
Kit de compartimentage pour tiroir 8A680 - 9 x 1		8A680_9X1
Tiroir télescopique peint époxy gris P. 600	L. 1200 x P. 600 x H. 60	8A683
Kit de compartimentage pour tiroir 8A683 - 6 x 4		8A683_6X4
Kit de compartimentage pour tiroir 8A683 - 9 x 1		8A683_9X1

### 4 Glissières

Désignation	Dimension	Référence
Paire de glissières universelles horizontales pour façade 600	P. 400	8A651
Paire de glissières universelles horizontales pour façade 400	P. 600	8A652
Paire de glissières inclinées pour façade 600	P. 400	77014
Paire de glissières inclinées pour façade 400	P. 600	77016

### Cadres télescopiques

Désignation	Dimension	Référence
Cadre télescopique	L. 600 x P. 400	8A699
Cadre télescopique	L. 400 x P. 600	8A649



## Gamme aménagement de PUI

# Chariots d'approvisionnement Optistock®

Nos chariots Optistock® sont conçus pour l'approvisionnement et le transport des dispositifs médicaux dans les établissements de soins.

Cette gamme s'utilise dans tous les services (dont la PUI), mais plus particulièrement pour le plateau technique de par ses qualités uniques en matière d'hygiène.

Elle permet une adaptation au plus juste des modes de gestion couramment utilisés dans les établissements de santé, comme la dotation ou le plein / vide.



Hygène



Ergonomie

### Points forts

- ▶ Glissières amovibles et réversibles
- ▶ Produits accessibles des deux côtés
- ▶ Façades 400 ou 600
- ▶ Résistance : 200 kg / colonne

## Gamme aménagement de PUI

# Chariots d'approvisionnement Optistock®

### Caractéristiques techniques

- ▶ Échelle en acier soudé traité anti-corrosion à l'époxy
- ▶ Roues Ø 125 mm, bandage simple en caoutchouc non tachant
- ▶ Capacité : 20 niveaux au pas de 65 mm
- ▶ Équipement de série : 2 poignées guidage positionnées à 104 cm du sol
- ▶ Résistance à la charge : 200 kg par colonne (la résistance peut varier selon l'équipement choisi dans la structure)
- ▶ Coloris unique : gris

### Composition Premium

#### Chariot d'approvisionnement Optistock® : réf. 8A791

Dimensions : L. 730 x P. 490 x H. 1630 mm

Équipement de série :

- ▶ 5 paires de glissières universelles horizontales
- ▶ 5 bacs à lèvres ajourés H. 200 mm avec butées anti-chute



### Composition sur-mesure

#### Structure

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Chariot appro simple 1F600 x P400 avec tablette supérieure	L. 730 x P. 490 x H. 1630	8A761
Chariot appro double 2F600 x P400 avec tablette supérieure	L. 1372 x P. 490 x H. 1630	8A762
Chariot appro simple 1F400 x P600 avec tablette supérieure	L. 531 x P. 690 x H. 1630	8A771
Chariot appro double 2F400 x P600 avec tablette supérieure	L. 976 x P. 690 x H. 1630	8A772

#### Équipements

Désignation	Référence
Poignée verticale appro	8A709
Habillage complet pour chariot 1F600	8A727
Habillage complet pour chariot 2F600	8A728
Habillage complet pour chariot 1F400	8A737
Habillage complet pour chariot 2F400	8A738

#### Étagères fixes horizontales

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Étagère fixe peinte époxy gris	L. 400 x P. 600	8A666
Étagère fixe peinte époxy gris	L. 600 x P. 400	8A660
Étagère en compact pour façade 600 ou 400		8A600
Séparateur pour étagère P. 400	P. 400	8A658
Séparateur pour étagère P. 600	P. 600	8A659

Gamme aménagement de PUI

## Chariots d'approvisionnement Optistock®

### Étagères fixes inclinées

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Étagère en creux inclinée peinte époxy gris</b>	L. 400 x P. 600 x H. 60	8A669
<b>Étagère en creux inclinée peinte époxy gris</b>	L. 600 x P. 400 x H. 60	8A663
<b>Séparateur pour étagère inclinée</b>	P. 400	8A684
<b>Séparateur pour étagère inclinée</b>	P. 600	8A687

### Étagères télescopiques

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Étagère télescopique peinte époxy gris</b>	L. 400 x P. 600	8A672
<b>Étagère télescopique peinte époxy gris</b>	L. 600 x P. 400	8A675

### Glissières

Désignation	Dimension	Référence
<b>Paire de glissières universelles horizontales pour façade 600</b>	P. 400	8A651
<b>Paire de glissières universelles horizontales pour façade 400</b>	P. 600	8A652
<b>Paire de glissières inclinées pour façade 600</b>	P. 400	77014
<b>Paire de glissières inclinées pour façade 400</b>	P. 600	77016

### Cadres télescopiques

Désignation	Dimension	Référence
<b>Cadre télescopique</b>	L. 600 x P. 400	8A699
<b>Cadre télescopique</b>	L. 400 x P. 600	8A649





## Gamme aménagement de PUI

# Poste de cueillette

Le poste de cueillette PRATICIMA est totalement **modulable et adaptable aux différents agencements de salles de soins**.

De chaque côté du poste principal, vous pourrez adjoindre un ou deux modules secondaires. Le module secondaire est articulé, permettant de créer un poste de cueillette ergonomique.

De nombreux accessoires, tel qu'un caisson suspendu, un plan de travail, des rails normalisés inclinés... sont disponibles afin de permettre une adaptation totale à votre établissement et à vos habitudes de travail.



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Simple, efficace et robuste
- ▶ Volume utile optimisé
- ▶ Structure totalement modulable : adjonction de postes secondaires mobiles
- ▶ Nombreuses possibilités d'aménagement : bacs, tiroirs, plans de travail, caissons...

# Gamme aménagement de PUI


## Poste de cueillette

### Poste de cueillette mobile

#### Caractéristiques techniques

- ▶ Structure en acier soudé monobloc peint époxy
- ▶ Roulettes Ø 100 mm dont 2 à frein
- ▶ Pare-chocs : 4 butoirs ronds en EVA non tachant
- ▶ Rails pour bacs : acier 20/10<sup>e</sup> et 40/10<sup>e</sup> soudés peints époxy
- ▶ Plafond : acier 20/10<sup>e</sup> soudé peint époxy
- ▶ Coloris unique : gris

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Poste de cueillette principal</b>	L. 1480 x P. 600 x H. 1990	8K000
<b>Module complémentaire droit</b>	L. 1460 x P. 600 x H. 1990	8K003D
<b>Module complémentaire gauche</b>	L. 1460 x P. 600 x H. 1990	8K003G

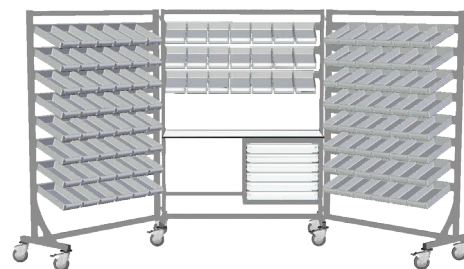

Longueur avec modules pliés à 45° : 3708 mm  
Longueur avec modules droits : 4303 mm

#### Équipements optionnels

Désignation	Référence
<b>Rail pour bacs et tiroirs</b> (par défaut, les rails sont inclinés)	8K001
<b>Plan de travail</b>	8K009
<b>Plan de travail avec 1 caisson nu Neop 600 x 400</b> (à droite)	8K008
<b>Plan de travail pour tiroir</b>	8K007
<b>Option cadre tiroir sous plan de travail</b>	8K010
<b>Plafond amovible</b>	8K002

#### Capacité par rail selon le type de bac

Désignation	Nombre de bacs par rail
<b>Bac-tiroir largeur 1/6</b> (hauteur 70, 110, 150 mm)	14
<b>Bac-tiroir largeur 1/4</b> (hauteur 70 mm)	10
<b>Bac-tiroir largeur 1/3</b> (hauteur 70, 110, 150 ou 230 mm)	7
<b>Bac à bec transparent</b> (taille F1)	12
<b>Bac à bec transparent</b> (taille F4)	9
<b>Tiroir 600 x 400</b>	2



### Poste de cueillette mural

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Rail mural pour cueillette</b> (hors pose)	L. 1600	8A500_160

## Stockage du médicament

# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

Pour assurer le circuit du médicament de la PUI aux services de soins, nous vous proposons des armoires à pharmacie fixes compatibles 600 x 400.

Entièrement modulables, elles peuvent être aménagées en pleine largeur et/ou en colonne 600 x 400 pour accueillir les mêmes tiroirs, bacs ou piluliers que dans vos chariots ou armoires mobiles 600 x 400.



### Points forts

- ▶ 3 volumes d'armoires
- ▶ 2 systèmes de fermeture : porte ou rideau
- ▶ Modulaire et évolutif : compatible standard 600 x 400
- ▶ Gestion du stock en plein/vide ou en simple dotation



Hygiénique



Ergonomique

## Stockage du médicament


# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

### Compositions types d'armoires à rideaux

#### Armoire à pharmacie 36 résidents avec tablette télescopique : réf. ARMOIRE\_1

Armoire L. 1310 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :


- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 1 tablette de liaison
- ▶ 1 tablette télescopique
- ▶ 6 tablettes fixes
- ▶ 36 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 150 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 3 tiroirs télescopiques métalliques H. 115 mm

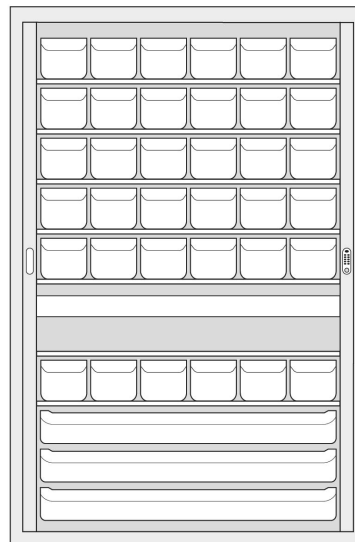

#### Armoire à pharmacie 36 résidents avec coffre à stupéfiants : réf. ARMOIRE\_2

Armoire L. 1310 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :


- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 1 coffre à stupéfiants avec serrure à code petit modèle
- ▶ 1 tablette de liaison
- ▶ 6 tablettes fixes
- ▶ 36 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 150 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 2 tiroirs télescopiques métalliques H. 115 mm

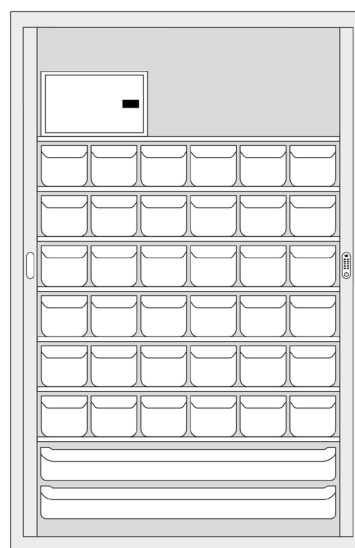

#### Armoire à pharmacie 36 résidents avec coffre à stupéfiants et tablette télescopique : réf. ARMOIRE\_3

Armoire L. 1310 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :

- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 1 coffre à stupéfiants avec serrure à code petit modèle
- ▶ 1 tablette de liaison
- ▶ 1 tablette télescopique
- ▶ 7 tablettes fixes
- ▶ 36 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 150 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 1 tiroir télescopique métallique H. 115 mm

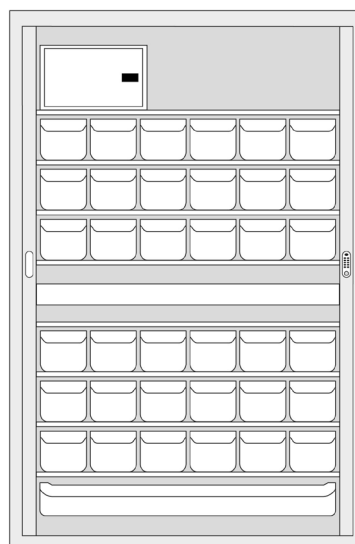

## Stockage du médicament


# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

### Armoire à pharmacie 54 résidents :

**réf. ARMOIRE\_4**

Armoire L. 1550 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :


- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 1 coffre à stupéfiants avec serrure à code petit modèle
- ▶ 1 tablette télescopique
- ▶ 8 tablettes fixes
- ▶ 1 tablette de liaison
- ▶ 54 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 150 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 1 tiroir télescopique métallique H. 115 mm

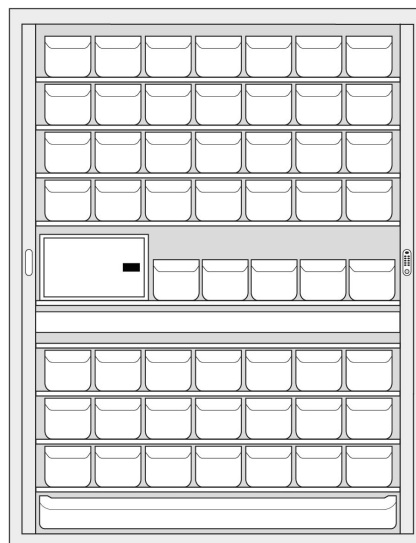

### Armoire à pharmacie 56 résidents avec tiroirs télescopiques : réf. ARMOIRE\_5

Armoire L. 1550 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :


- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 7 tablettes fixes
- ▶ 1 tablette de liaison
- ▶ 56 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 150 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 2 tiroirs télescopiques métalliques H. 115 mm

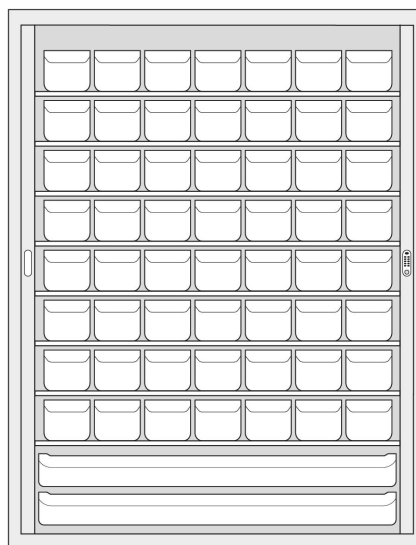

### Armoire à pharmacie 56 résidents avec tablette télescopique : réf. ARMOIRE\_6

Armoire L. 1550 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :

- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 8 tablettes fixes
- ▶ 56 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 150 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 1 tablette télescopique

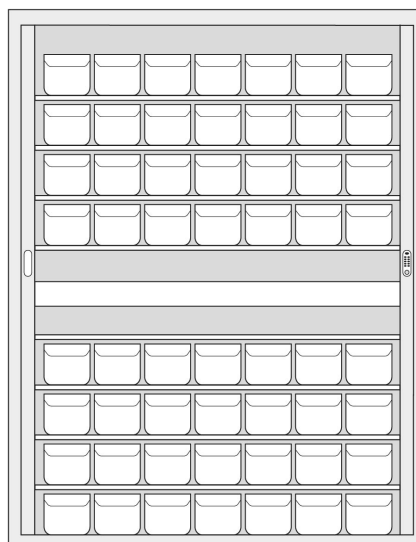


## Stockage du médicament

# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

### Armoire à pharmacie 63 résidents avec tiroir télescopique : réf. ARMOIRE\_7

Armoire L. 1550 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :


- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 8 tablettes fixes
- ▶ 1 tablette de liaison
- ▶ 63 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 150 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 1 tiroir télescopique métallique H. 115 mm

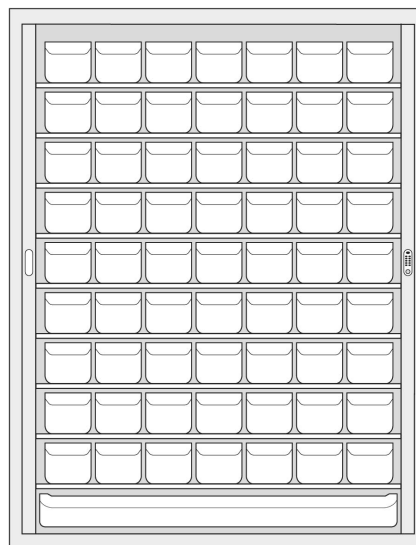

### Armoire à pharmacie 63 résidents avec tablette télescopique : réf. ARMOIRE\_8

Armoire L. 1550 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :


- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 9 tablettes fixes
- ▶ 63 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 150 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 1 tablette télescopique

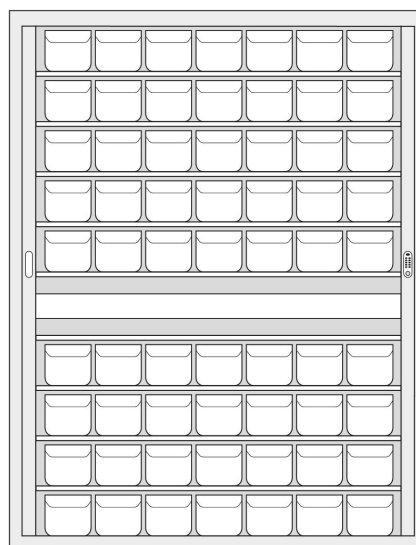

### Armoire à pharmacie 67 résidents : réf. ARMOIRE\_9

Armoire L. 1550 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :

- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 1 coffre à stupéfiants avec serrure à code petit modèle
- ▶ 1 tablette télescopique
- ▶ 10 tablettes fixes
- ▶ 67 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 110 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette

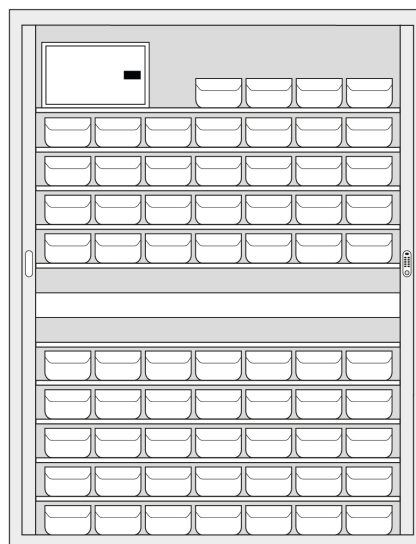

## Stockage du médicament


# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

### Armoire à pharmacie 70 résidents :

réf. **ARMOIRE\_10**

Armoire L. 1550 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :

- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 9 tablettes fixes
- ▶ 70 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 150 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette

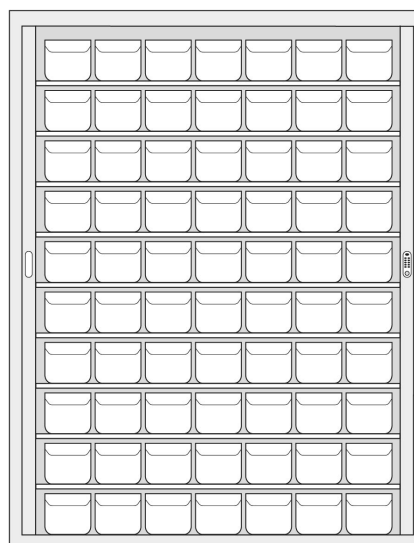


### Armoire à pharmacie 81 résidents :

réf. **ARMOIRE\_11**

Armoire L. 1550 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :

- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 1 coffre à stupéfiants avec serrure à code petit modèle
- ▶ 11 tablettes fixes
- ▶ 81 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 110 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette

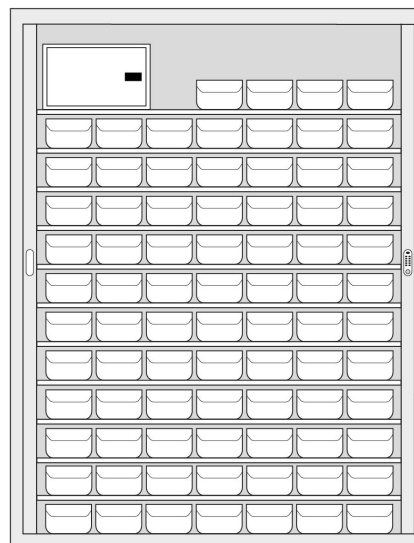


### Armoire à pharmacie 82 résidents :

réf. **ARMOIRE\_12**

Armoire L. 1550 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :

- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 1 coffre à stupéfiants avec serrure à code petit modèle
- ▶ 1 tablette de liaison
- ▶ 1 tablette télescopique
- ▶ 11 tablettes fixes
- ▶ 42 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 70 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 40 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 110 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 1 tiroir télescopique métallique H. 115 mm

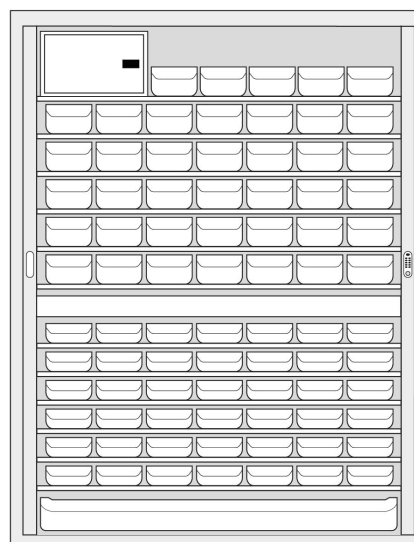

## Stockage du médicament


# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

### Armoire à pharmacie 84 résidents :

réf. **ARMOIRE\_13**

Armoire L. 1550 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :

- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 12 tablettes fixes
- ▶ 84 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 110 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette

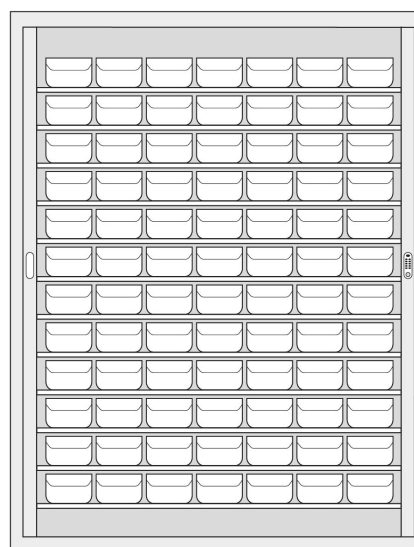


### Armoire à pharmacie 84 résidents

avec tiroirs télescopiques : réf. **ARMOIRE\_14**

Armoire L. 1310 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :


- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à code
- ▶ 1 tablette de liaison
- ▶ 14 tablettes fixes
- ▶ 72 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 70 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 12 bacs tiroirs blancs 1/3 H. 110 mm équipés d'un support étiquette et d'un protège étiquette
- ▶ 2 tiroirs télescopiques métalliques H. 115 mm

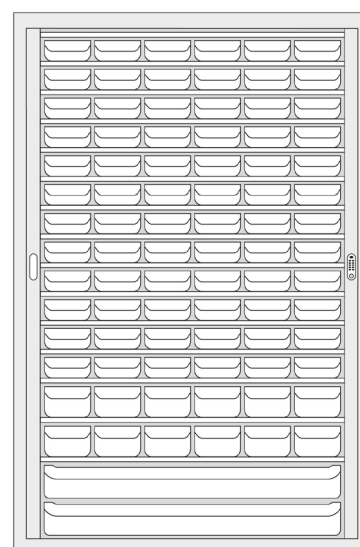

### Armoire 156 à double rideau équipée : réf. **ARMOIRE\_EXT1**

Armoire L. 1550 x P. 535 x H. 2000 mm équipée de :

- ▶ Rideau coulissant
- ▶ Serrure à clé
- ▶ 1 coffre à toxiques petit modèle à code
- ▶ 1 gradin 3 niveaux
- ▶ 70 bacs-tiroirs L. 1/6 H. 70 mm avec support et protège étiquette
- ▶ 7 bacs-tiroirs L. 1/3 H. 110 mm avec support et protège étiquette
- ▶ 7 tablettes fixes
- ▶ 1 tablette télescopique
- ▶ 8 tiroirs 600 x 400 hauteur 75 mm
- ▶ 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- ▶ 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 235 mm

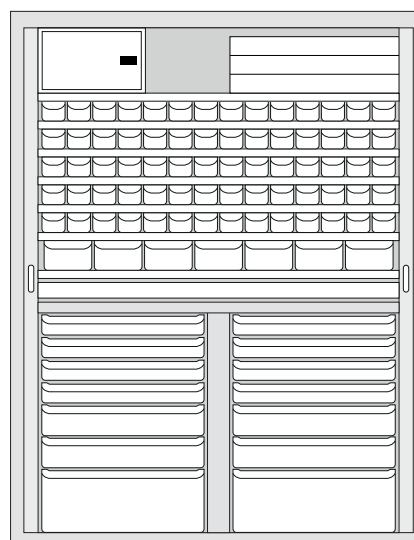



## Stockage du médicament


# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

### Compositions types d'armoires à portes

#### Armoire 74 à porte équipée : réf. ARMOIRE\_15

Armoire L. 735 x P. 660 x H. 2000 mm équipée de :


- ▶ 1 porte avec 16 rangées de 6 bacs basculants
- ▶ Serrure à clé
- ▶ 6 bacs-tiroirs L. 1/3 H. 150 mm avec support et protège étiquette
- ▶ 2 bacs-tiroirs L. 1/6 H. 150 mm avec support et protège étiquette
- ▶ 6 bacs-tiroirs L. 1/3 H. 110 mm avec support et protège étiquette
- ▶ 2 bacs-tiroirs L. 1/6 H. 110 mm avec support et protège étiquette
- ▶ 14 bacs-tiroirs L. 1/6 H. 70 mm avec support et protège étiquette
- ▶ 7 tablettes fixes
- ▶ 1 tablette télescopique
- ▶ 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm sécurisé avec digicode
- ▶ 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- ▶ 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm

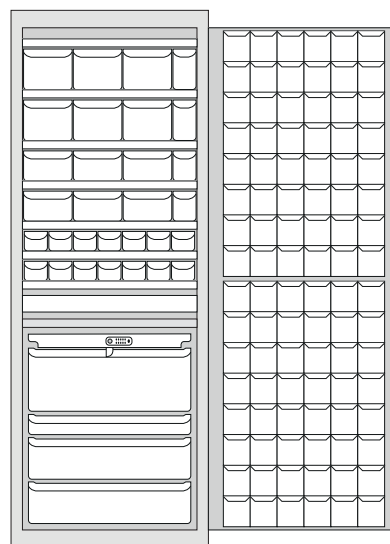

#### Armoire 120 à portes équipée : réf. ARMOIRE\_EX2

Armoire L. 1200 x P. 660 x H. 2000 mm équipée de :

- ▶ 2 portes
- ▶ Serrure à clé
- ▶ 9 rangées de 4 bacs basculants
- ▶ 2 rangées de 6 bacs basculants
- ▶ 2 rangées de 5 bacs basculants
- ▶ 2 rangées de 4 bacs basculants
- ▶ 1 coffre à toxiques petit modèle à code
- ▶ 60 bacs-tiroirs L. 1/6 H. 70 mm avec support et protège étiquette
- ▶ 6 bacs-tiroirs L. 1/3 H. 70 mm avec support et protège étiquette
- ▶ 7 tablettes fixes
- ▶ 1 tablette télescopique
- ▶ 1 tiroir 400 x 400 hauteur 75 mm
- ▶ 3 tiroirs 400 x 400 hauteur 195 mm
- ▶ 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- ▶ 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm

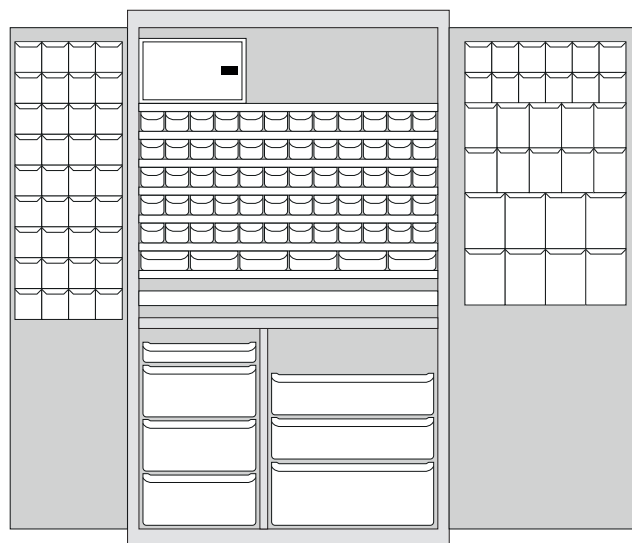

## Stockage du médicament

# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

### Composition sur-mesure d'armoires à rideau(x)

#### Corps d'armoires

- ▶ Corps en acier 10/10<sup>e</sup> traité anticorrosion à l'époxy
- ▶ Rideau coulissant latéralement en PVC avec lame terminale en aluminium
- ▶ Verrouillage du rideau par serrure à clé (serrure à code ou à badge en option)
- ▶ Volume intérieur modulable : cloisonnement en 2 ou 3 colonnes sur tout ou partie de la hauteur

Désignation	Dimensions extérieures (en mm)	Référence
Armoire 80 à simple rideau	L. 805 x P. 535 x H. 2000	7A080
Armoire 130 à double rideau	L. 1310 x P. 535 x H. 2000	7A130
Armoire 156 à double rideau	L. 1550 x P. 535 x H. 2000	7A156

#### Verrouillage

Désignation	Pour armoire 80	Pour armoire 130 ou 156
Option serrure à code	7B010_C	7B020_C
Option serrure à badge simple	7B010_B	7B020_B
Option serrure à badge compatible gestion d'accès	7B010_BGA	7B020_BGA

#### Exemples d'aménagement



- 1 Armoire 80 à rideau
- 2 Armoire 130 à rideau : aménagée sur toute la largeur avec bacs tiroirs transparents, plan de travail télescopique, coffre à stupéfiants et gradin - capacité 250 références
- 3 Armoire 130 cloisonnée : 1 colonne 400 x 400 avec bacs, 1 colonne 600 x 400 avec tiroirs, un plan de travail télescopique, des bacs tiroirs transparents sur toute la largeur



- 4 Armoire 156 à double rideau : aménagée sur toute la largeur avec bacs tiroirs H. 110 blancs pour stockage nominatif
- 5 Armoire 156 à double rideau : cloisonnée partiellement en 2 colonnes équipées de bacs 600 x 400, de bacs tiroirs blancs et transparents sur toute la largeur, coffre à stupéfiants et gradin en partie haute

## Stockage du médicament

# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

### Composition sur-mesure d'armoires à porte(s)

#### Corps d'armoires

- ▶ Corps en acier 10/10° traité anticorrosion à l'époxy
- ▶ Verrouillage des portes par serrure à clé ou à code (serrure à badge en option)
- ▶ Porte(s) aménageable(s) en acier 12/10°
- ▶ Gonds de porte (pas de charnière) pour des raisons de solidité et d'hygiène
- ▶ Ouverture des portes à 180°
- ▶ Choix du sens d'ouverture des portes
- ▶ Volume intérieur modulable : cloisonnement en 2 ou 3 colonnes sur tout ou partie de la hauteur

Désignation	Dimensions extérieures (en mm)	Armoire avec serrure à clé	Armoire avec serrure à code
Armoire 74 à porte	L. 735 x P. 660 x H. 2000	7A073	7A073_CODE
Armoire 120 à portes	L. 1200 x P. 660 x H. 2000	7A120	7A120_CODE
Armoire 142 à portes	L. 1420 x P. 660 x H. 2000	7A142	7A142_CODE

#### Verrouillage

Désignation	Référence
Option serrure à code	7B002
Option serrure à badge simple	7B002_B
Option serrure à badge compatible gestion d'accès	7B002_BGA

#### Exemples d'aménagement



6



7



8



9

6 Armoire 74 à porte

7 Armoire 142 double colonne 600 x 400 : aménagée de tiroirs 600 x 400 et portes équipées pour la gestion plein/vide


8 Armoire 120 cloisonnée : avec 1 colonne de bacs 400 x 400, 1 colonne de tiroirs 600 x 400 avec tablette de condamnation, des bacs tiroirs blancs et transparents sur toute la largeur. Capacité 250 références

9 Armoire 120 avec portes équipées : aménagée de tiroirs télescopiques, de bacs tiroirs sur toute la largeur et d'un coffre à stupéfiants. Capacité 300-350 références

## Stockage du médicament

# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

### Cloisonnement des armoires

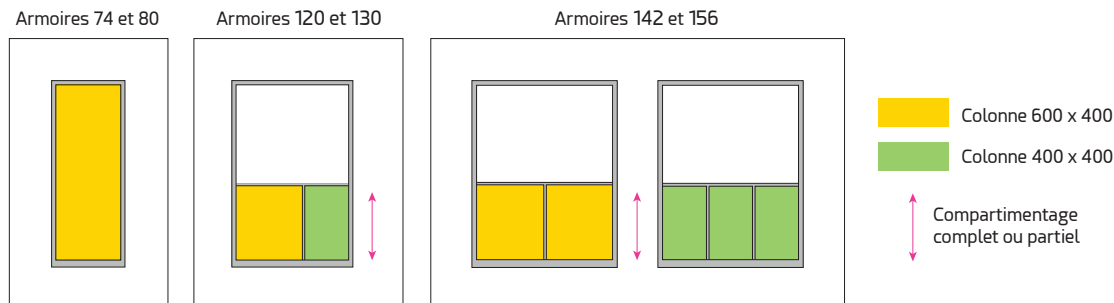

Désignation	Hauteur (en mm)	Référence
Cloison complète	1920	7B120
Cloison partielle - pour créer 2 colonnes dans armoires 120 et 130	875	7B122
Cloison partielle - pour créer 2 colonnes dans armoires 142 et 156	875	7B142
Tablette fixe pour liaison intercalaires - compatible armoires 74 et 80		7B049

### Aménagements intérieurs pour colonne 600 x 400

#### Intercalaires


Désignation	Référence
Paire d'intercalaires - 47 pas de 40 mm pour bac ABS	7A029
Paire d'intercalaires - 19 pas de 40 mm pour bac ABS	7A031
Paire d'intercalaires - 37 pas de 50 mm	7A032

#### Équipements pour intercalaires

##### TIROIRS 600 X 400

Cloisonnement par kits de compartimentage ou bacs tiroirs

	Désignation	Référence
10	Tiroir 600 x 400 - H. 75 mm	8AT075
	Tiroir 600 x 400 - H. 155 mm	8AT155
	Tiroir 600 x 400 - H. 235 mm	8AT235

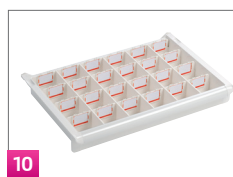

Tiroir 600 x 400 en ABS-PC



Plateaux avec piluliers Modulo® XL

11	PILULIERS MODULO® XL	Référence
	Plateau avec 7 piluliers Modulo® XL - bleu lagon	5AP040BL
	Plateau avec 7 piluliers Modulo® XL - framboise	5AP040FR

Description détaillée dans la fiche produit dédiée



Tablette de condamnation



Tablette coulissante amovible

	AUTRES ÉQUIPEMENTS 600 X 400	Référence
12	Tablette de condamnation avec serrure à clé pour tiroir 600 x 400	8A020
13	Tablette télescopique coulissante et amovible	8A017
14	Tablette amovible 600 x 400 pour bacs tiroirs	8A011
15	Support fixe pour dossiers suspendus (entraxe 330 mm)	8A016_F



Tablette amovible pour bacs tiroirs



Support fixe pour dossiers suspendus

## Stockage du médicament

# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

### Aménagements intérieurs pour colonne 400 x 400

#### 16 BACS 400 X 400

Cloisonnement par kits de compartimentage ou bacs tiroirs *Référence*

Bac 400 x 400 - H. 75 mm	8AS075
Bac 400 x 400 - H. 115 mm	8AS115
Bac 400 x 400 - H. 195 mm	8AS195

#### 17 PILULIER MODULO® CLASSIC

Description détaillée dans la fiche produit dédiée

Plateau avec 7 piluliers Modulo® Classic - bleu lagon	52100
Plateau avec 7 piluliers Modulo® Classic - framboise	52200

#### AUTRES ÉQUIPEMENTS 400 X 400 *Référence*

Paire de glissières pour bacs 400 x 400	7B001
Tablette 400 x 400 pour bacs tiroirs	8N011
Tablette 400 x 400 pour 5 piluliers Modulo XL	8N001



Bacs 400 x 400



Piluliers Modulo® classic


### Aménagements intérieurs pleine largeur

#### Tablettes fixes et équipements compatibles

#### 18 TABLETTE FIXE SUR TAQUETS

POUR BACS TIROIRS *Dimensions (en mm)* *Référence*

Pleine largeur armoires 120 et 130	L. 1115 x P. 347 x H. 30	7B057
Pleine largeur armoires 142 et 156	L. 1345 x P. 347 x H. 30	7B053
Pour colonne 600 x 400 toutes armoires	L. 655 x P. 347 x H. 30	7B051
Pour colonne 400 x 400 armoires 120 et 130	L. 425 x P. 347 x H. 30	7B050

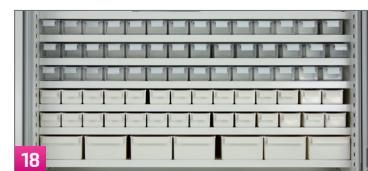

Tablette fixe pour bacs tiroirs

#### 19 BACS TIROIRS

Blancs ou transparents *Dimensions (en mm)* *Référence*

Bac tiroir H. 70 - L. 1/6	L. 90 x P. 370 x H. 71	8AB070_1_6N
Bac tiroir H. 70 - L. 1/3	L. 185 x P. 370 x H. 72	8AB070_1_3
Bac tiroir H. 70 - L. 1/4	L. 135 x P. 370 x H. 71	8AB070_1_4
Bac tiroir H. 110 - L. 1/6	L. 90 x P. 370 x H. 112	8AB110_1_6
Bac tiroir H. 110 - L. 1/3	L. 185 x P. 370 x H. 112	8AB110_1_3
Bac tiroir H. 150 - L. 1/6	L. 90 x P. 370 x H. 150	8AB150_1_6
Bac tiroir H. 150 - L. 1/3	L. 185 x P. 370 x H. 152	8AB150_1_3
Bac tiroir H. 230 - L. 1/3	L. 185 x P. 370 x H. 233	8AB230_1_3



Bacs tiroirs blancs

#### 20 COFFRES À STUPÉFIANTS AVEC TABLETTE AMOVIBLE

scellés sur la tablette fixe *Dimensions (en mm)* *Référence*

Petit modèle serrure à clé	L. 400 x P. 253 x H. 242	27200
Petit modèle serrure à code	L. 400 x P. 253 x H. 242	27206
Grand modèle serrure à clé	L. 560 x P. 254 x H. 386	27202
Grand modèle serrure à code	L. 560 x P. 254 x H. 386	27208



Coffre à stupéfiants

## Stockage du médicament

# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

21	<b>GRADIN</b> <i>En acier traité époxy</i>	<i>Dimensions (en mm)</i>	<i>Référence</i>
	Gradin blanc 3 niveaux	L. 630 x P. 243 x H. 210	74054



Gradin

22	<b>BLOCS-TIROIRS</b>	<i>Dimensions (en mm)</i>	<i>Référence</i>
	Bloc-tiroir taille A	L. 113 x P. 263 x H. 225	49100
	Bloc-tiroir taille B	L. 169 x P. 263 x H. 225	49102
	Bloc-tiroir taille C	L. 225 x P. 263 x H. 225	49101
	Bloc-tiroir taille D	L. 281 x P. 263 x H. 225	49103



Blocs-tiroirs

### Tablettes télescopiques

23	<b>TABLETTES TÉLESCOPIQUES</b>	<i>Dimensions (en mm)</i>	<i>Référence</i>
	Pleine largeur pour armoires 120 et 130	L. 1110 x P. 430 x H. 50	7B063
	Pleine largeur pour armoires 142 et 156	L. 1340 x P. 430 x H. 50	7B062
	Largeur 600 pour toutes les armoires	L. 650 x P. 430 x H. 50	7B061



Tablette télescopique

### Tiroirs télescopiques métalliques

24	<b>TIROIRS POUR COLONNE 600</b>	<i>Dimensions (en mm)</i>	<i>Référence</i>
	Tiroir H. 75	L. 650 x P. 390 x H. 75	7B083
	Kit de compartimentage 3 x 4 = 12 cases pour tiroir 7B083		7B083_3x4
	Tiroir H. 115	L. 650 x P. 390 x H. 115	7B084
	Kit de compartimentage 5 x 4 = 20 cases pour tiroir 7B084		7B084_5x4



Tiroir télescopique 600 x 400

25	<b>TIROIRS PLEINE LARGEUR POUR ARMOIRES 120 ET 130</b>	<i>Dimensions (en mm)</i>	<i>Référence</i>
	Tiroir H. 75	L. 1110 x P. 390 x H. 75	7B088
	Kit de compartimentage 9 x 4 = 36 cases pour tiroir 7B088		7B088_9x4
	Kit de compartimentage 5 x 4 = 20 cases pour tiroir 7B088		7B088_5x4
	Tiroir H. 115	L. 1110 x P. 390 x H. 115	7B089
	Kit de compartimentage 3 x 4 = 12 cases pour tiroir 7B089		7B089_3x4
	Kit de compartimentage 9 x 4 = 36 cases pour tiroir 7B089		7B089_9x4
	Kit de compartimentage 5 x 4 = 20 cases pour tiroir 7B089		7B089_5x4
	Kit de compartimentage 5 x 2 = 10 cases pour tiroir 7B089		7B089_5x2



Tiroir télescopique pleine largeur

	<b>TIROIRS PLEINE LARGEUR POUR ARMOIRES 142 ET 156</b>	<i>Dimensions (en mm)</i>	<i>Référence</i>
	Tiroir H. 75	L. 1340 x P. 390 x H. 75	7B086
	Kit de compartimentage 11 x 4 = 44 cases pour tiroir 7B086		7B086_11x4
	Kit de compartimentage 6 x 2 = 12 cases pour tiroir 7B086		7B086_6x2
	Tiroir H. 115	L. 1340 x P. 390 x H. 115	7B087
	Kit de compartimentage 3 x 4 = 12 cases pour tiroir 7B087		7B087_3x4
	Kit de compartimentage 6 x 4 = 24 cases pour tiroir 7B087		7B087_6x4
	Kit de compartimentage 6 x 2 = 12 cases pour tiroir 7B087		7B087_6x2

## Stockage du médicament


# Armoires à pharmacie compatibles 600 x 400

### Éléments d'aménagement de porte

26	<b>BACS BASCULANTS EN ABS TRANSPARENTS</b> <i>Boîtes basculantes et amovibles</i>	<i>Dimensions (en mm)</i>	<i>Référence</i>
	Rangée de 4 bacs taille 6 sur petite porte	L. 400 x P. 93 x H. 114	28008
	Rangée de 4 bacs	L. 601 x P. 171 x H. 209	47104
	Rangée de 5 bacs	L. 601 x P. 133 x H. 166	47105
	Rangée de 6 bacs	L. 601 x P. 93 x H. 114	47106
<b>AUTRE ÉQUIPEMENT</b>		<i>Dimensions (en mm)</i>	<i>Référence</i>
27	Porte étiquettes pour gestion plein/vide	L. 600 x H. 400	89362



26  
Bacs basculants pour porte

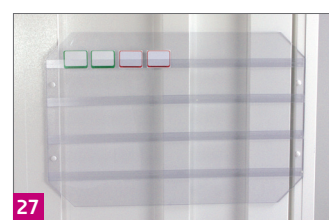

27  
Porte étiquettes pour gestion plein/vide





## Stockage du médicament

# Colonne de stockage Modulo® 600 x 400

Notre colonne de stockage Modulo® 600 x 400 s'inscrit dans une gamme complète pour assurer le circuit logistique du médicament depuis la pharmacie jusqu'au patient. Cette colonne permet un **stockage hebdomadaire** avec le pilulier Modulo® XL ou un **stockage sur 8 à 10 jours** avec le pilulier Modulo® classic sur plateaux 600 x 400.

Photos non contractuelles



Modulable



Hygène



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Grande capacité de stockage
- ▶ Colonne mobile pour un nettoyage facile
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

Stockage du médicament

## Colonne de stockage Modulo® 600 x 400



Plateau avec piluliers Modulo® XL



Plateau avec piluliers Modulo® classic

### Caractéristiques techniques

- ▶ Structure ouverte en tubes 15/10° revêtement époxy
- ▶ 4 roulettes pivotantes en polyamide, ø 100 mm, dont 2 freins en façade
- ▶ 32 paires de glissières espacées de 50 mm
- ▶ Capacité : 32 plateaux de piluliers Modulo 600 x 400
- ▶ Coloris unique : gris perle

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Colonne de stockage mobile 32 niveaux</b>	L. 735 x P. 535 x H. 1858	8F5432

# Neop | Armoires mobiles de stockage 600 x 400 simple colonne

## Stockage des médicaments et des DM

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulaire : large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique : conçu pour le confort du personnel soignant
- Léger et maniable
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Armoire simple colonne
- 2 hauteurs\* : 160 ou 180
- Fermeture à rideau, ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage
- 2 choix d'intercalaires (glissières) en fonction des aménagements intérieurs souhaités
- Hauteur 180 : glissières horizontales ou inclinées, en partie haute

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»

## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs.

Pensez à ajouter la référence couleur de l'armoire.


### MÉDICAMENTS – BACS TIROIRS

Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 30 bacs tiroirs H70 L.1/6 coloris blanc
- 20 bacs tiroirs H70 L.1/4 coloris blanc
- 12 bacs tiroirs H110 L.1/3 coloris blanc
- 15 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm sécurisé par digicode
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm

Référence	Désignation
8YA164H180MEBT2	Armoire mobile NEOP "Premium" 1 col. 600x400 H180 - Médic. - Bacs tiroirs

Courseurs, kits de compartimentage, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire

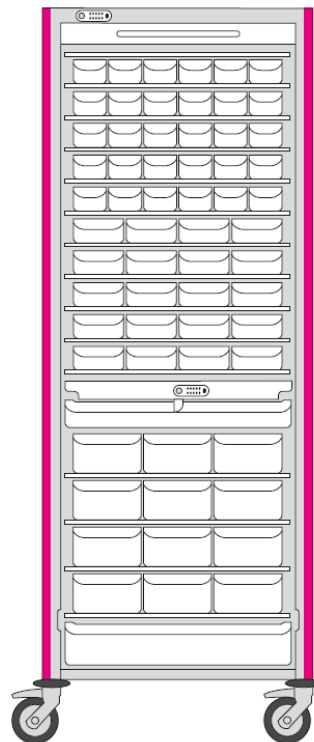


### MÉDICAMENTS – BACS TIROIRS

Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 30 bacs tiroirs H70 L.1/6 coloris blanc
- 20 bacs tiroirs H70 L.1/4 coloris blanc
- 12 bacs tiroirs H110 L.1/3 coloris blanc
- 15 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm

Référence	Désignation
8YA164H180MEBT	Armoire mobile NEOP "Premium" 1 col. 600x400 H180 - Médic. - Bacs tiroirs

Courseurs, kits de compartimentage, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire

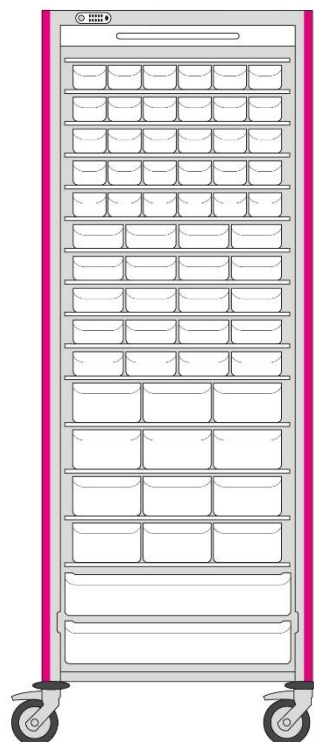


## MÉDICAMENTS – BACS À LÈVRES

Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 10 bacs à lèvres pleins gris H50
- 4 bacs à lèvres ajourés gris H100
- 14 paires de butées anti-chute pour bacs à lèvres

Référence	Désignation
8YA164H180MEBL	Armoire mobile NEOP "Premium" 1 col. 600x400 H180 - Médic. - Bacs à lèvres

*Peignes, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire*

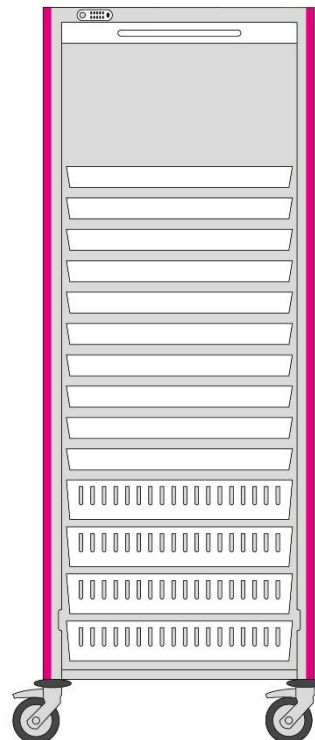


## PLEIN-VIDE

Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 10 bacs à lèvres pleins gris H50 avec butées anti-chute
- 50 peignes courts gris H. 50
- 30 peignes longs gris H. 50
- 4 bacs à lèvres ajourés gris H100 avec butées anti-chute
- 12 peignes courts gris H. 100
- 4 peignes longs gris H. 100
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm sécurisé par digicode
- 136 porte-étiquettes format 1/2 carte de crédit horizontal
- 136 supports étiquettes 1/2 carte de crédit en PVC
- 30 planches de 20 étiquettes blanches enlevables
- 2 porte-étiquettes autocollants

Référence	Désignation
8YA164H180PV	Armoire mobile NEOP "Premium" 1 col. 600x400 H180 – Plein-vide

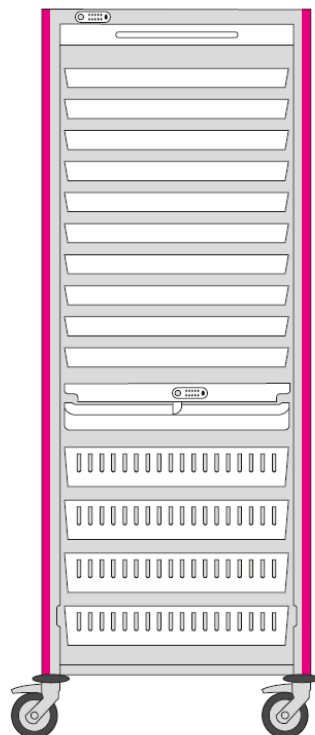


## DM – BACS À LÈVRES

Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 6 bacs à lèvres ajourés gris H100
- 3 bacs à lèvres ajourés gris H200
- 9 paires de butées anti-chute pour bacs à lèvres

Référence	Désignation
8YA164H180DMBL	Armoire mobile NEOP "Premium" 1 col. 600x400 H180 - DM - Bacs à lèvres

*Peignes, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire*

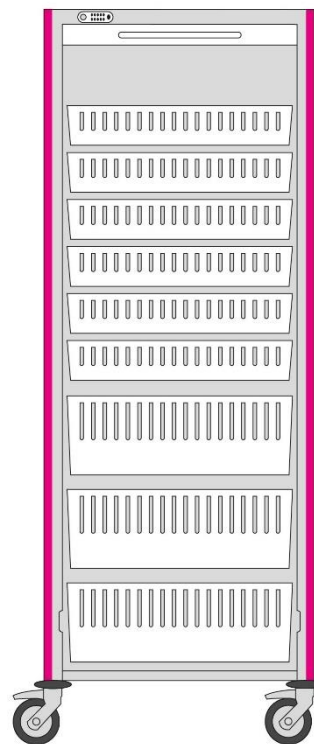


## DM – TIROIRS JOINTIFS

Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :




- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 6 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 235 mm

Référence	Désignation
8YA164H180DMTJ	Armoire mobile NEOP "Premium" 1 col. 600x400 H180 - DM - Tiroirs jointifs

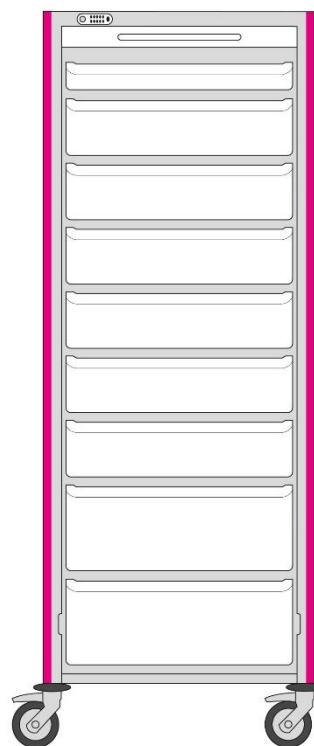*Kits de compartimentage, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire*



## COULEUR DE L'ARMOIRE


Référence	Désignation
8Y004_0018RM	Rose magenta 
8Y004_0018VP	Vert pomme 
8Y004_0018BC	Bleu céleste 

## SONDES




Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 1 tablette porte-sondes avec 6 tringles télescopiques

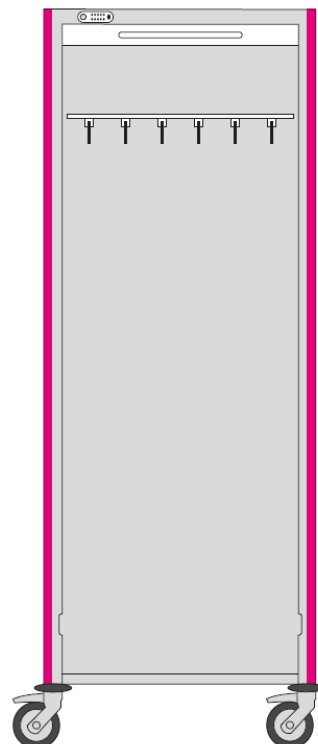Référence	Désignation
8YAH164H180SDE	Armoire mobile NEOP "Premium" 1 col. 600x400 H180 - Sondes



## COULEUR DE L'ARMOIRE

Référence	Désignation
8Y004_0018RM	Rose magenta 
8Y004_0018VP	Vert pomme 
8Y004_0018BC	Bleu céleste 

## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur.

Pensez à ajouter la référence couleur de l'armoire.



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
### ARMOIRES HAUTEUR 160 CM

Référence	Désignation
8YAB164H160FR	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H160 P40 + rideau + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAB164H160FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H160 P40 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAB164H160FRB	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H160 P40 + rideau + serrure badge + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAB164H160P5FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H160 P50 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YABH160FRC_ED	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H160 P62 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur

### ARMOIRES HAUTEUR 180 CM

Référence	Désignation
8YAH164H180	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P40 sans fermeture + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH164H180FR	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P40 + rideau + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH164H180FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P40 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH164H180FRB	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P40 + rideau + serrure badge + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH164H180P5FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P50 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH164H180PIFRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P50 + rideau + serrure code + intercalaires inclinés en partie haute
8YAHH180FRC_ED	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P62 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur

### COULEUR DE L'ARMOIRE

Réf. armoire H. 160	Réf. armoire H. 180	Désignation
8Y004_0016RM	8Y004_0018RM	Rose magenta 
8Y004_0016VP	8Y004_0018VP	Vert pomme 
8Y004_0016BC	8Y004_0018BC	Bleu céleste 



# Composition sur mesure

## ETAPE ① - Structure de l'armoire

Choix de la structure de l'armoire en fonction du type d'intercalaires

	Armoire hauteur 160 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* sans pare-chocs
Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur Pas de 40 mm	8Y164H160P4	8Y164H180P4	8Y164H180SPCP4
Intercalaires standards inclinés en partie haute Pas de 40 mm	-	8Y164H180PI	8Y164H180SPCPI
Intercalaires à encombrement optimisé** Pas de 50 mm	8Y164H160P5	8Y164H180P5	8Y164H180SPCP5

Les références comprennent :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires

\*\* pour piluliers Modulo XL, Modulo Classic 600 x 400 et Eurojour

## ETAPE ② - Personnalisation de l'armoire

Sélection des éléments 1 à 3

	Armoire hauteur 160 cm*	Armoire hauteur 180 cm*
--	-------------------------	-------------------------

<b>1</b>	<b>Fermeture à rideau</b>	8Y002_6016F3	8Y002_6018F3
----------	---------------------------	--------------	--------------

L'armoire de stockage peut être commandée sans fermeture.

**ATTENTION !** Pour un modèle avec intercalaires horizontaux sur toute la hauteur sans rideau, il faut ajouter la butée antichute réf. [8Y014](#).

<b>2</b>	<b>Serrure à code</b>	8Y003CODE3	8Y003CODE3
	<b>Serrure à badge</b>	8Y003BADGE3	8Y003BADGE3

L'armoire de stockage peut être commandée sans serrure.

<b>3</b>	<b>Couleur</b>	Rose magenta	8Y004_0016RM	8Y004_0018RM
		Vert pomme	8Y004_0016VP	8Y004_0018VP
		Bleu céleste	8Y004_0016BC	8Y004_0018BC

\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta


Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Rail normalisé, poignée de poussée, tiroirs...

Se référer aux fiches dédiées.

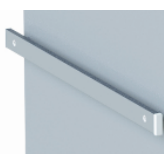


# Données techniques



Pas de 40 mm  
Pas de 50 mm



Pas de 40 mm incliné  
Disponible uniquement H 180 mm  
En partie haute

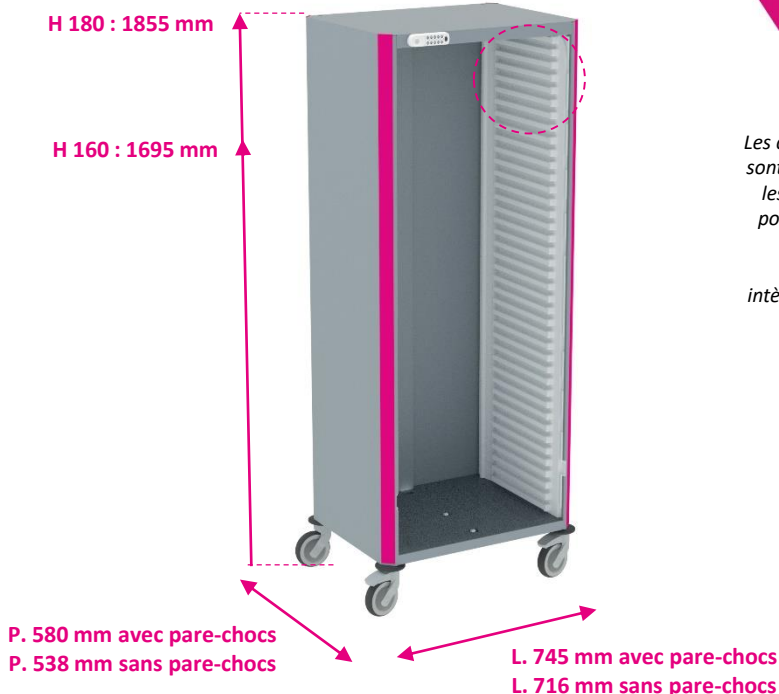

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc Acier électro-zingué soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot	
<b>Poids à vide</b>	H 160 : 48 kg	H 180 : 52 kg
<b>Capacité</b>	<p><b>H 160 avec intercalaires standards :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 35 pas de 40 mm pour armoire avec rideau</li> <li>- 36 pas de 40 mm pour armoire sans rideau</li> </ul> <p><b>H 160 avec intercalaires à encombrement optimisé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27 pas de 50 mm pour armoire avec rideau</li> <li>- 28 pas de 50 mm pour armoire sans rideau</li> </ul>	<p><b>H 180 avec intercalaires standards horizontaux :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 39 pas de 40 mm pour armoire avec rideau</li> <li>- 40 pas de 40 mm pour armoire sans rideau</li> </ul> <p><b>H 180 avec intercalaires standards inclinés :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 pas de 40 mm inclinés + 25 pas de 40 mm droits</li> </ul> <p><b>H 180 avec intercalaires à encombrement optimisé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 pas de 50 mm pour armoire avec rideau</li> <li>- 31 pas de 50 mm pour armoire sans rideau</li> </ul>
<b>Verrouillage</b>	Code / Badge	

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	H 160 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,85 m H 180 : L 0,80 x P 1,20 x H 2,00 m
<b>Poids (armoire + emballage)</b>	H 160 : 60 kg H 180 : 64 kg	<b>Volume</b>	H 160 : 1,75 m <sup>3</sup> H 180 : 1,90 m <sup>3</sup>

# Neop | Armoires mobiles de stockage 600 x 400 double colonne

## Stockage des médicaments et des DM

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en acier
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Armoire double colonne
- 2 hauteurs\* : 160 ou 180
- Fermeture à rideau, ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage
- 2 choix d'intercalaires (glissières) en fonction des aménagements intérieurs souhaités
- Glissières horizontales ou inclinées, en partie haute pour armoire H. 180

### Caisson personnalisable 3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»

## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs.

Pensez à ajouter la référence couleur de l'armoire.


### MÉDICAMENTS – BACS TIROIRS

Armoire double colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 60 bacs tiroirs H70 L.1/6 coloris blanc
- 40 bacs tiroirs H70 L.1/4 coloris blanc
- 24 bacs tiroirs H110 L.1/3 coloris blanc
- 30 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm sécurisé par digicode
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm

Référence	Désignation
8YA264H180MEBT2	Armoire mobile NEOP "Premium" 2 col. 600x400 H180 - Médic.- Bacs à lèvres

Courseurs, kits de compartimentage, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire

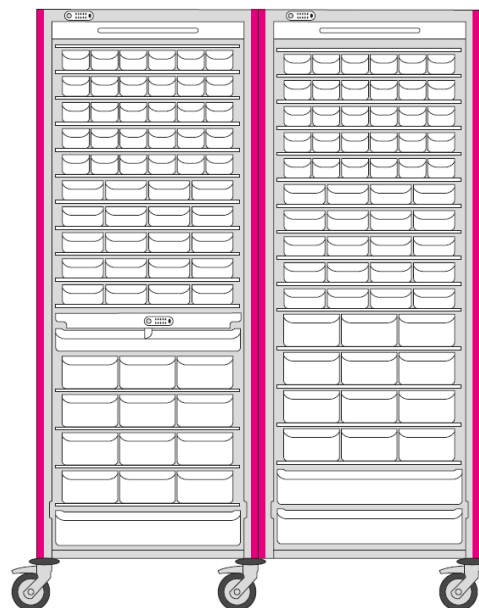


### MÉDICAMENTS – BACS TIROIRS

Armoire double colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 60 bacs tiroirs H70 L.1/6 coloris blanc
- 40 bacs tiroirs H70 L.1/4 coloris blanc
- 24 bacs tiroirs H110 L.1/3 coloris blanc
- 30 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm

Référence	Désignation
8YA264H180MEBT	Armoire mobile NEOP "Premium" 2 col. 600x400 H180 - Médic. - Bacs tiroirs

Courseurs, kits de compartimentage, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire

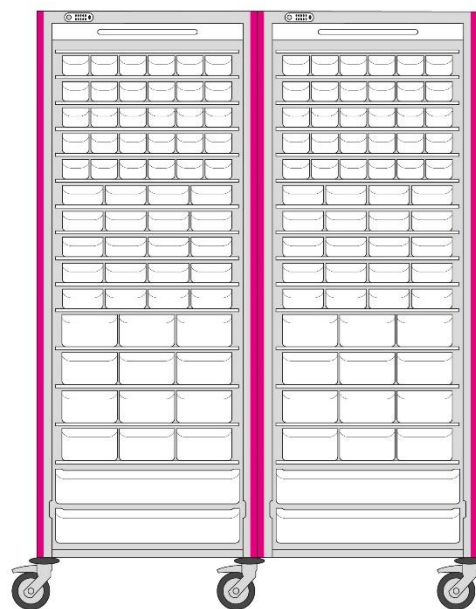


## MÉDICAMENTS – BACS À LÈVRES

Armoire double colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 20 bacs à lèvres pleins gris H50
- 8 bacs à lèvres ajourés gris H100
- 28 paires de butées anti-chute pour bacs à lèvres

Référence	Désignation
8YA264H180MEBL	Armoire mobile NEOP "Premium" 2 col. 600x400 H180 - Médic.- Bacs à lèvres

*Peignes, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire*

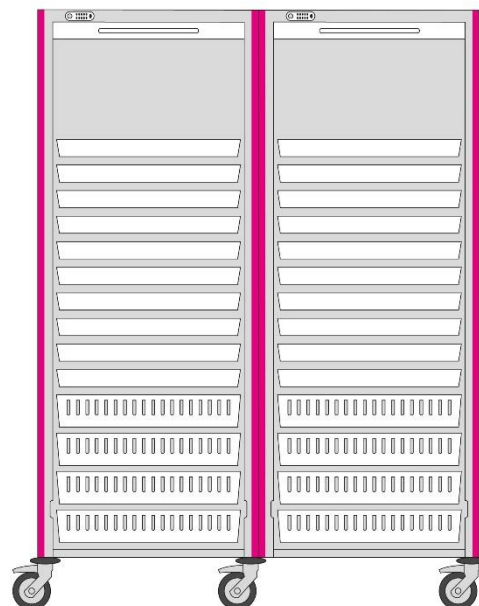


## DM – BACS À LÈVRES

Armoire double colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 12 bacs à lèvres ajourés gris H100
- 6 bacs à lèvres ajourés gris H200
- 18 paires de butées anti-chute pour bacs à lèvres

Référence	Désignation
8YA264H180DMBL	Armoire mobile NEOP "Premium" 2 col. 600x400 H180 - DM - Bacs à lèvres

*Peignes, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire*

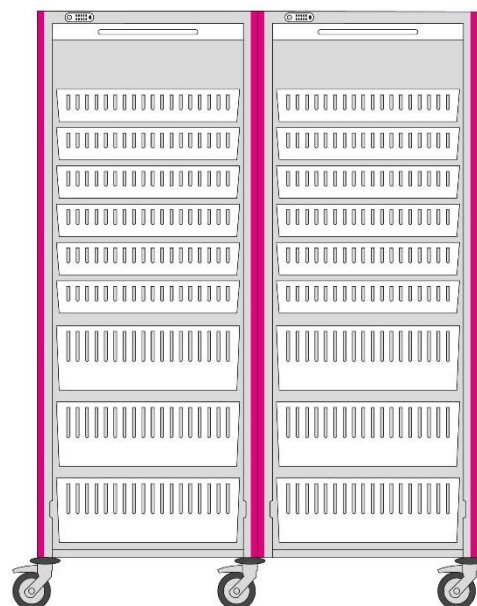


## DM – TIROIRS JOINTIFS

Armoire double colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 75 mm
- 12 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 235 mm

Référence	Désignation
8YA264H180DMTJ	Armoire mobile NEOP "Premium" 2 col. 600x400 H180 - DM - Tiroirs jointifs

*Kits de compartimentage, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire*

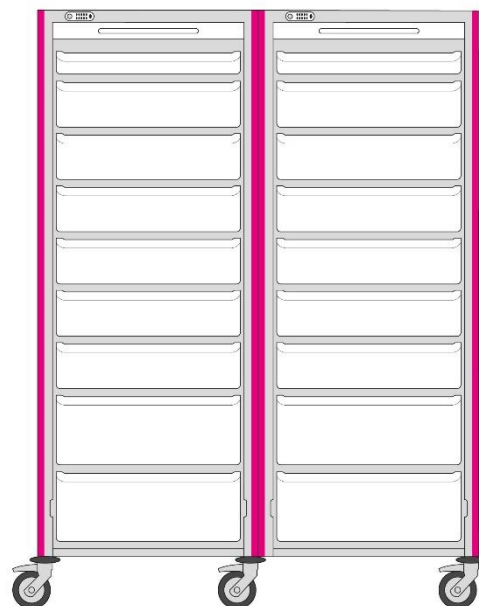

## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur.

*Pensez à ajouter la référence couleur de l'armoire.*

### ARMOIRES HAUTEUR 160 CM

Référence	Désignation
8YAH264H160FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 2 col. 600x400 H160 P40 + rideau + code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur

### ARMOIRES HAUTEUR 180 CM

Référence	Désignation
8YAH264H180	Armoire mobile NEOP "Basic" 2 col. 600x400 H180 P40 sans fermeture + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH264H180FR	Armoire mobile NEOP "Basic" 2 col. 600x400 H180 P40 + rideau + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH264H180FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 2 col. 600x400 H180 P40 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH264XH180FR	Armoire mobile NEOP "Basic" 2 col. 600x400 H180 P40 + rideau + intercalaires inclinés en partie haute
8YAH264XH180FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 2 col. 600x400 H180 P50 + rideau + serrure code + intercalaires inclinés en partie haute

# Composition sur mesure

## ETAPE ① - Structure de l'armoire

Choix de la structure de l'armoire en fonction du type d'intercalaires

	Armoire hauteur 160 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* sans pare-chocs
Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur de l'armoire Pas de 40 mm	8Y264H160P4	8Y264H180P4	8Y264H180SPCP4
Intercalaires standards inclinés en partie haute Pas de 40 mm	-	8Y264H180PI	8Y264H180SPCPI
Intercalaires à encombrement optimisé** Pas de 50 mm	8Y264H160P5	8Y264H180P5	8Y264H180SPCP5

Les références comprennent :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires

\*\* pour piluliers Modulo XL, Modulo Classic 600 x 400 et Eurojour

## ETAPE ② - Personnalisation de l'armoire

Sélection des éléments 1 à 4

*Fermeture, serrure et bande de couleur à commander en double pour une armoire double colonne*

	Armoire hauteur 160 cm*	Armoire hauteur 180 cm*
<b>1</b> Fermeture à rideau	8Y002_6016F3	8Y002_6018F3

L'armoire de stockage peut être commandée sans fermeture.

**ATTENTION !** Pour un modèle avec intercalaires horizontaux sur toute la hauteur sans rideau, il faut ajouter deux butées antichute réf. [8Y014](#).

<b>2</b>	Serrure à code	8Y003CODE3	8Y003CODE3
	Serrure à badge	8Y003BADGE3	8Y003BADGE3

L'armoire de stockage peut être commandée sans serrure.

<b>3</b>	Couleur	Rose magenta	8Y004_0016RM	8Y004_0018RM
		Vert pomme	8Y004_0016VP	8Y004_0018VP
		Bleu céleste	8Y004_0016BC	8Y004_0018BC

\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Rail normalisé, poignée de poussée, tiroirs...

Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques



## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc Acier électro-zingué soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	6 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot	
<b>Poids à vide</b>	H 160 : 94 kg	H 180 : 102 kg
<b>Capacité</b>	<b>H 160 avec intercalaires standards :</b> - 70 pas de 40 mm pour armoire avec rideau - 72 pas de 40 mm pour armoire sans rideau  <b>H 160 avec intercalaires à encombrement optimisé :</b> - 54 pas de 50 mm pour armoire avec rideau - 56 pas de 50 mm pour armoire sans rideau	<b>H 180 avec intercalaires standards horizontaux :</b> - 78 pas de 40 mm pour armoire avec rideau - 80 pas de 40 mm pour armoire sans rideau  <b>H 180 avec intercalaires standards inclinés :</b> 16 pas de 40 mm inclinés + 50 pas de 40 mm droits  <b>H 180 avec intercalaires à encombrement optimisé :</b> - 60 pas de 50 mm pour armoire avec rideau - 62 pas de 50 mm pour armoire sans rideau
<b>Verrouillage</b>	Code / Badge	

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	H 160 : L 0,80 x P 1,50 x H 1,85 m H 180 : L 0,80 x P 1,50 x H 2,00 m
<b>Poids (armoire + emballage)</b>	H 160 : 106 kg H 180 : 114 kg	<b>Volume</b>	H 160 : 2,20 m <sup>3</sup> H 180 : 2,40 m <sup>3</sup>



# Neop | Armoires mobiles de stockage 400 x 600 simple colonne

## Stockage des médicaments et des DM

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en acier
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Armoire simple colonne
- 2 hauteurs : 160 ou 180\*
- Fermeture à rideau, ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage
- Hauteur 180 : glissières horizontales ou inclinées, en partie haute

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»

## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs.


### DM – BACS À LÈVRES

Armoire simple colonne 400 x 600 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 6 bacs à lèbres ajourés gris H100
- 3 bacs à lèbres ajourés gris H200
- 9 paires de butées anti-chute pour bacs à lèbres

Référence	Désignation
8YA146H180DMBAL	Armoire mobile NEOP "Premium" 1 col. 400x600 H180 - DM - Bacs à lèbres

*Peignes, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire*

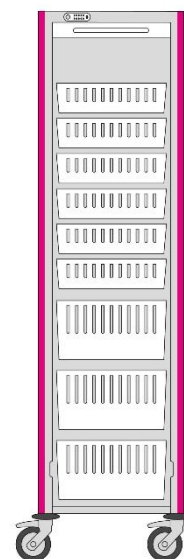

## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur.


### Armoires avec intercalaires standards inclinés en partie haute

#### ARMOIRE AVEC RIDEAU SANS SERRURE

Armoire simple colonne 400 x 600 H180 équipée de :

- Intercalaires standards inclinés en partie haute
- Fermeture à rideau

Référence	Désignation
8YAH146XH180FR	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 400x600 H180 incliné rideau sans serrure

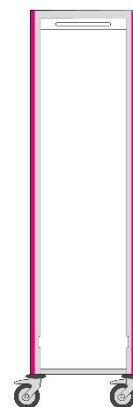


#### ARMOIRE AVEC RIDEAU ET SERRURE À CODE

Armoire simple colonne 400 x 600 H180 équipée de :

- Intercalaires standards inclinés en partie haute
- Fermeture à rideau
- Serrure à code

Référence	Désignation
8YAH146XH180FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 400x600 H180 incliné rideau + serrure code

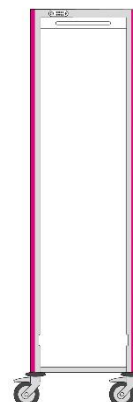


## Armoires avec intercalaires standards horizontaux

### ARMOIRE SANS RIDEAU

Armoire simple colonne 400 x 600 H180 équipée d'intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur

Référence	Désignation
8YAH146H180	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 400x600 H180 sans rideau

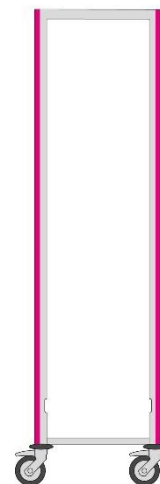


### ARMOIRE AVEC RIDEAU SANS SERRURE

Armoire simple colonne 400 x 600 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture à rideau

Référence	Désignation
8YAH146H180FR	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 400x600 H180 rideau sans serrure

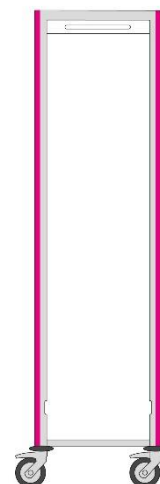


### ARMOIRE AVEC RIDEAU ET SERRURE À CODE




Armoire simple colonne 400 x 600 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture à rideau
- Serrure à code

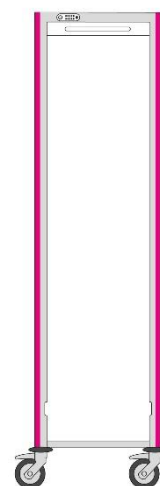Référence	Désignation
8YAH146H180FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 400x600 H180 rideau + serrure code



## Couleur de l'armoire

Référence	Désignation
8Y004_0018RM	Rose magenta 
8Y004_0018VP	Vert pomme 
8Y004_0018BC	Bleu céleste 

## Composition sur mesure

### ETAPE ① - Structure de l'armoire

Choix de la structure de l'armoire en fonction du type d'intercalaires

	Armoire hauteur 160 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* sans pare-chocs
Intercalaires horizontaux sur toute la hauteur Pas de 40 mm	8Y146H160P4	8Y146H180P4	8Y146H180SPCP4
Intercalaires inclinés en partie haute Pas de 40 mm	-	8Y146H180PI	8Y146H180SPCPI

Ces références comprennent :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires

### ETAPE ② - Personnalisation de l'armoire

Sélection des éléments 1 à 3

	Armoire hauteur 160 cm*	Armoire hauteur 180 cm*
<b>1</b> Fermeture à rideau	8Y002_4616F3	8Y002_4618F3

L'armoire de stockage peut être commandée sans fermeture.

**ATTENTION !** Pour un modèle avec intercalaires horizontaux sur toute la hauteur sans rideau, il faut ajouter la butée antichute réf. [8Y014](#).

<b>2</b>	Serrure à code	8Y003CODE3	8Y003CODE3
	Serrure à badge	8Y003BADGE3	8Y003BADGE3

L'armoire de stockage peut être commandée sans serrure.

<b>3</b>	Couleur	Rose magenta : 8Y004_0016RM	Rose magenta : 8Y004_0018RM
		Vert pomme : 8Y004_0016VP	Vert pomme : 8Y004_0018VP
		Bleu céleste : 8Y004_0016BC	Bleu céleste : 8Y004_0018BC

\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Rail normalisé, poignée de poussée, bacs à lèvrés...

Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques



Pas de 40 mm



Pas de 40 mm incliné  
Disponible uniquement H 180 mm  
En partie haute

H 180 : 1855 mm

H 160 : 1695 mm

P. 780 mm avec pare-chocs  
P. 738 mm sans pare-chocs

L. 545 mm avec pare-chocs  
L. 513 mm sans pare-chocs

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc Acier électro-zingué soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene)
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot	
<b>Poids à vide</b>	H 160 : 54 kg	H 180 : 58 kg
<b>Capacité</b>	<b>H 160 :</b> - 35 pas de 40 mm pour armoire avec rideau - 36 pas de 40 mm pour armoire sans rideau	<b>H 180 avec intercalaires horizontaux :</b> - 39 pas de 40 mm pour armoire avec rideau - 40 pas de 40 mm pour armoire sans rideau  <b>H 180 avec intercalaires inclinés :</b> 7 pas de 40 mm inclinés + 25 pas de 40 mm droits
<b>Verrouillage</b>	Code / Badge	

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	H 160 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,85 m H 180 : L 0,80 x P 1,20 x H 2,00 m
<b>Poids (armoire + emballage)</b>	H 160 : 66 kg H 180 : 70 kg	<b>Volume</b>	1,90 m <sup>3</sup>



# Neop | Armoires mobiles de stockage 400 x 600 double colonne

## Stockage des médicaments et des DM

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en acier
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Armoire double colonne
- 2 hauteurs : 160 ou 180\*
- Fermeture à rideau, ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage
- Hauteur 180 : glissières horizontales ou inclinées, en partie haute

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»

## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs.


### DM – BACS À LÈVRES

Armoire double colonne 400 x 600 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 12 bacs à lèvres ajourés gris H100
- 6 bacs à lèvres ajourés gris H200
- 18 paires de butées anti-chute pour bacs à lèvres

Référence	Désignation
8YA246H180DMBAL	Armoire mobile NEOP "Premium" 2 col. 400x600 H180 - DM - Bacs à lèvres

*Peignes, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire*

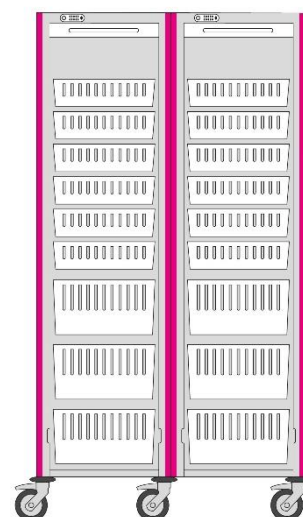


## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur.

### ARMOIRE SANS RIDEAU

Armoire double colonne 400 x 600 H180 équipée d'intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur

Référence	Désignation
8YAH246H180	Armoire mobile NEOP "Basic" 2 col. 400x600 H180 sans rideau

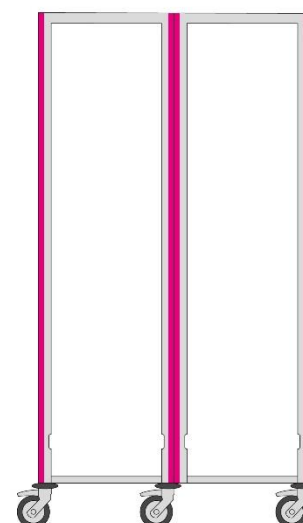


### ARMOIRE AVEC RIDEAU ET SERRURE À CODE




Armoire double colonne 400 x 600 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur
- Fermeture à rideau
- Serrure à code

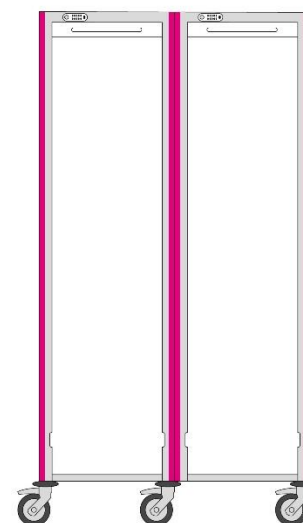Référence	Désignation
8YAH246H180FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 2 col. 400x600 H180 rideau + serrure code



## Couleur de l'armoire

Référence	Désignation
8Y004_0018RM	Rose magenta 
8Y004_0018VP	Vert pomme 
8Y004_0018BC	Bleu céleste 



# Composition sur mesure

## ETAPE 1 - Structure de l'armoire

Choix de la structure de l'armoire en fonction du type d'intercalaires

	Armoire hauteur 160 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* sans pare-chocs
Intercalaires horizontaux sur toute la hauteur Pas de 40 mm	8Y246H160P4	8Y246H180P4	8Y246H180SPC4
Intercalaires inclinés en partie haute Pas de 40 mm	-	8Y246H180PI	8Y246H180SPCPI

Ces références comprennent :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires

## ETAPE 2 - Personnalisation de l'armoire

Sélection des éléments 1 à 4

Fermeture, serrure et bande de couleur à commander en double pour une armoire double colonne

	Armoire hauteur 160 cm*	Armoire hauteur 180 cm*
<b>1</b> Fermeture à rideau	8Y002_4616F3	8Y002_4618F3

L'armoire de stockage peut être commandée sans fermeture.

**ATTENTION !** Pour un modèle avec intercalaires horizontaux sur toute la hauteur sans rideau, il faut ajouter deux butées antichute réf. [8Y014](#).

<b>2</b>	Serrure à code	8Y003CODE3	8Y003CODE3
	Serrure à badge	8Y003BADGE3	8Y003BADGE3

L'armoire de stockage peut être commandée sans serrure.

<b>3</b>	Couleur	Rose magenta : 8Y004_0016RM	Rose magenta : 8Y004_0018RM
		Vert pomme : 8Y004_0016VP	Vert pomme : 8Y004_0018VP
		Bleu céleste : 8Y004_0016BC	Bleu céleste : 8Y004_0018BC

\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Rail normalisé, poignée de poussée, bacs à lèvres...

Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques



Pas de 40 mm



Pas de 40 mm incliné  
Disponibilité uniquement H 180 mm  
En partie haute



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc Acier électro-zingué soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene)
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	6 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot	
<b>Poids à vide</b>	H 160 : 100 kg	H 180 : 110 kg
<b>Capacité</b>	<b>H 160 :</b> - 70 pas de 40 mm pour armoire avec rideau - 72 pas de 40 mm pour armoire sans rideau	<b>H 180 avec intercalaires horizontaux :</b> - 78 pas de 40 mm pour armoire avec rideau - 80 pas de 40 mm pour armoire sans rideau  <b>H 180 avec intercalaires inclinés :</b> 14 pas de 40 mm inclinés + 50 pas 40 mm droits
<b>Verrouillage</b>	Code / Badge	

## Emballage


<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	H 160 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,85 m H 180 : L 0,80 x P 1,20 x H 2,00 m
<b>Poids (armoire + emballage)</b>	H 160 : 112 kg H 180 : 122 kg	<b>Volume</b>	1,90 m <sup>3</sup>

## Stockage du médicament

# Armoires et colonnes de stockage Modulo® classic

Les armoires et colonnes Modulo® sont conçues pour le **stockage des piluliers Modulo® et Pili® en EHPAD ou en centres de long séjour**. Adaptées aux différentes tailles d'établissements et aux différentes organisations, les capacités varient de **26 à 90 plateaux de piluliers**.

Photos non contractuelles

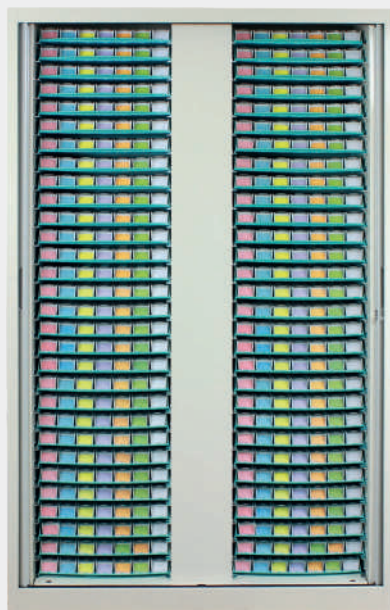

Modulable



Hygènique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Différentes capacités de stockage (30 à 90 plateaux)
- ▶ Armoires fixes ou colonnes de stockage ouvertes
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

## Stockage du médicament

# Armoires et colonnes de stockage Modulo® classic

### Armoires fixes fermées

- ▶ Corps en tôle revêtue époxy
- ▶ Fermeture par rideau coulissant
- ▶ Verrouillage par serrure à clé
- ▶ Pieds de réglage
- ▶ Capacité : 30 à 90 plateaux de piluliers Modulo® ou Pili®



Désignation	Dimensions (en mm)	Capacité	Référence
<b>Armoire fixe à rideau 30 niveaux</b>	L. 600 x P. 440 x H. 1980	30 plateaux	86730
<b>Armoire fixe à rideau 60 niveaux</b>	L. 1200 x P. 440 x H. 1980	60 plateaux	86760
<b>Armoire fixe à rideau 90 niveaux</b>	L. 1550 x P. 535 x H. 2000	90 plateaux	7A151

### Colonnes mobiles ouvertes

- ▶ Structure en acier traitée époxy
- ▶ Glissières en aluminium
- ▶ 4 roulettes ø 100 mm, dont 2 à frein et 2 pivotantes
- ▶ Capacité : 26 à 52 plateaux de piluliers Modulo® ou Pili®



Désignation	Dimensions (en mm)	Capacité	Référence
<b>Colonne de stockage 26 niveaux</b>	L. 536 x P. 420 x H. 1831	26 plateaux	86526
<b>Colonne de stockage 52 niveaux</b>	L. 982 x P. 420 x H. 1831	52 plateaux	86552

# Neop | Embase de transfert 600 x 400

## Approvisionnement des médicaments ou des dispositifs médicaux

- Robustesse : excellente résistance, armature de transfert anti-torsion en acier traité poudre apprêt + polyester
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant



Robuste




Hygiénique



Ergonomique

- Compatible avec les structures 600 x 400 Neop simple colonne hauteur\* 100, 120, 160 ou 180
- 4 roues pivotantes à frein diamètre 125 ou 160 mm
- Bandage en caoutchouc semi élastique  
Chape acier embouti

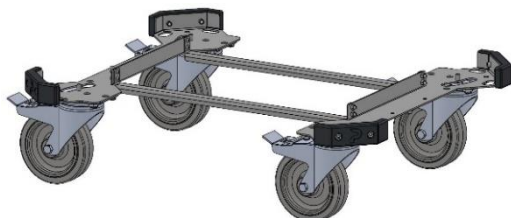

\*Pour la hauteur précise, voir la partie « Données techniques »

## Configurations types - BASIC

### Chariots H100 avec embase de transfert

Référence	Désignation
8Y164H100P4_RCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette thermoformée + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H100P4C_RCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H100P4_BCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette thermoformée + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H100P4C_BCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette compact + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H100P6_RCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette thermoformée + rideau + serrure code + rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)
8Y164H100P6C_RCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

### Chariots H120 avec embase de transfert

Référence	Désignation
8Y164H120P4_RCER	Chariot NEOP 600x400 H120 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette thermoformée + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H120P4C_RCER	Chariot NEOP 600x400 H120 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H120P6_RCER	Chariot NEOP 600x400 H120 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette thermoformée + rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)
8Y164H120P6C_RCER	Chariot NEOP 600x400 H120 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)




### Armoires H160 avec embase de transfert

Référence	Désignation
8YAB164H160_RCER	Armoire NEOP 600x400 H160 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YAB164H160P5_RCER	Armoire NEOP 600x400 H160 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 50 mm)
8YAB164H160P6_RCER	Armoire NEOP 600x400 H160 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

## Armoires H180 avec embase de transfert

Référence	Désignation
8YAH164H180_RCER	Armoire NEOP 600x400 H180 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YAH164H180P5_RCER	Armoire NEOP 600x400 H180 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 50 mm)
8YAH164H180P6_RCER	Armoire NEOP 600x400 H180 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

## Couleur de la structure

Couleur	Réf. chariot H100	Réf. chariot H120	Réf. armoire H160	Réf. armoire H180
Rose magenta 	8Y004_0010RM	8Y004_0012RM	8Y004_0016RM	8Y004_0018RM
Vert pomme 	8Y004_0010VP	8Y004_0012VP	8Y004_0016VP	8Y004_0018VP
Bleu céleste 	8Y004_0010BC	8Y004_0012BC	8Y004_0016BC	8Y004_0018BC

## Composition sur mesure

### ETAPE ① - Embase de transfert

	Référence
Embase de transfert Neop – 4 roues pivotantes à frein ø 125 mm	8Y039_125
Embase de transfert Neop – 4 roues pivotantes à frein ø 160 mm	8Y039_160

### ETAPE ② - Structure

Compatible avec les structures 600 x 400 Neop simple colonne hauteur\* 100, 120, 160 ou 180.

*Se référer aux fiches dédiées.*

### ETAPE ③ - Options

	Référence
Timon attelage rabattable sans crochet	8Y041
Crochet d'attelage timon	8Y042
Option 4 roues pivotantes dont 2 directionnelles	8Y043
Poignée ergonomique	8Y005



## Accessoires et aménagements intérieurs

*Se référer aux fiches dédiées.*



# Données techniques

Dimensions hors tout pour embase  
avec roues diamètre 160 mm

H180 : 1885 mm


H160 : 1725 mm

H120 : 1387 mm

Hauteur du plan de travail : 1329 mm

H100 : 1147 mm

Hauteur du plan de travail : 1089 mm

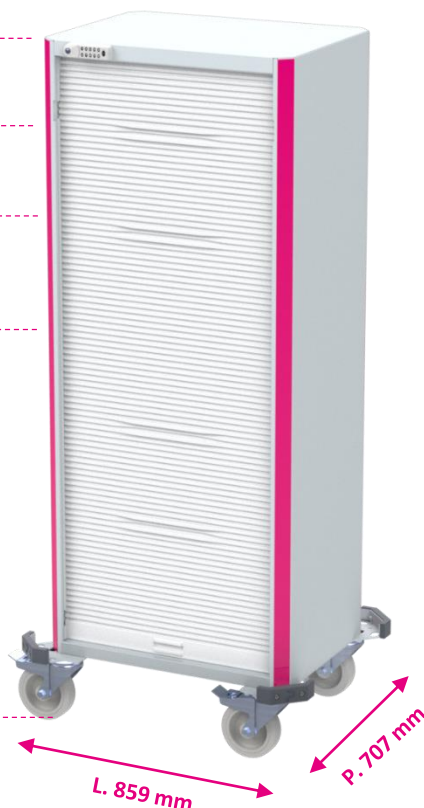

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

Dimensions hors tout pour embase  
avec roues diamètre 125 mm

H180 : 1845 mm

H160 : 1685 mm

H120 : 1348 mm

Hauteur du plan de travail : 1290 mm

H100 : 1108 mm

Hauteur du plan de travail : 1050 mm



## Matières

Armature	Acier mécano-soudé traité poudre apprêt + polyester
Roues	Bandage en caoutchouc semi élastique - Chape acier embouti
Pare-chocs	4 coins en caoutchouc NBR 80 shore

## Informations diverses

Roues	Diamètre 125 ou 160 mm – 4 roues pivotantes à frein	
Poids à vide	Chariot renforcé H100 roues Ø 125 : 39 kg Chariot renforcé H120 roues Ø 125 : 41 kg Armoire renforcée H160 roues Ø 125 : 64 kg Armoire renforcée H180 roues Ø 125 : 68 kg	Chariot renforcé H100 roues Ø 160 : 39,5 kg Chariot renforcé H120 roues Ø 160 : 41,5 kg Armoire renforcée H160 roues Ø 160 : 64,5 kg Armoire renforcée H180 roues Ø 160 : 68,5 kg
Compatibilité	Caisson 600 x 400 Neop simple colonne hauteur 100, 120, 160 ou 180	

## Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	
Poids (structure + emballage)	Chariot renforcé H100 roues Ø 125 : 52 kg Chariot renforcé H120 roues Ø 125 : 53 kg Armoire renforcée H160 roues Ø 125 : 76 kg Armoire renforcée H180 roues Ø 125 : 80 kg	Chariot renforcé H100 roues Ø 160 : 52,5 kg Chariot renforcé H120 roues Ø 160 : 53,5 kg Armoire renforcée H160 roues Ø 160 : 76,5 kg Armoire renforcée H180 roues Ø 160 : 80,5 kg
Dimensions	H 120 : L. 0,88 x P. 0,80 x H. 1,6 m / H 160 : L. 0,88 x P. 0,80 x H. 2 m H 180 : L. 0,88 x P. 0,80 x H. 2,15 m	
Volume	H 120 : 1,13 m <sup>3</sup> / H 160 : 1,4 m <sup>3</sup> / H 180 : 1,5 m <sup>3</sup>	



## Gamme transfert

# Armoires de transfert à portes

Les armoires de transfert sont indispensables pour permettre l'**approvisionnement** des services en médicaments et dispositifs médicaux depuis la pharmacie.

Leur conception robuste autorise aussi bien le **transport intérieur** que le **transport extérieur** ou **véhiculé**.

Photos non contractuelles



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Structure robuste
- ▶ Important volume de transport
- ▶ Adaptées pour le tunnel de lavage
- ▶ Nombreuses options disponibles

## Gamme transfert

# Armoires de transfert à portes

### Structure

- ▶ Structure en aluminium anodisé
- ▶ Châssis de base solide anti-torsion en acier verni par poudre époxy
- ▶ Portes à battants sur charnières ouvrables à 270°, avec aimants de fixation en position ouverte (voir les options de verrouillage)
- ▶ Fermeture par serrure à clé à cylindre
- ▶ 2 poignées de guidage ergonomiques à double prise horizontale de chaque côté de l'armoire (pas de poignée sur l'armoire basse)
- ▶ Pare-chocs haut et bas en caoutchouc
- ▶ 4 roues anti-trace dont 2 roues pivotantes à frein et 2 roues fixes
- ▶ Porte-fiche A4



### Armoires de transfert avec intercalaires standard - pas de 40 mm

Désignation	Dimensions (en mm)	Capacité	Référence
Armoire de transfert 1 colonne façade 600	L. 760 x P. 755 x H. 1745	34 pas de 40	8I140_1F600
Armoire de transfert 2 colonnes façade 600	L. 1400 x P. 755 x H. 1785	2 x 34 pas de 40	8I140_2F600
Armoire de transfert 2 colonnes façade 400	L. 977 x P. 710 x H. 1785	2 x 34 pas de 40	8I140_2F400

### Armoires de transfert avec intercalaires à encombrement optimisé - pas de 50 mm

Désignation	Dimensions (en mm)	Capacité	Référence
Armoire de transfert 1 colonne façade 600	L. 760 x P. 755 x H. 1745	27 pas de 50	8I5028_1F600
Armoire de transfert 2 colonnes façade 600	L. 1400 x P. 755 x H. 1545	2 x 22 pas de 50	8I5023_2F600
Armoire de transfert 2 colonnes façade 600	L. 1400 x P. 755 x H. 1785	2 x 27 pas de 50	8I5028_2F600

### Armoires de transfert avec intercalaires à encombrement optimisé - pas de 62 mm

Désignation	Dimensions (en mm)	Capacité	Référence
Armoire de transfert 1 colonne façade 600	L. 760 x P. 755 x H. 1745	21 pas de 62	8I140_1F600_62
Armoire de transfert 2 colonnes façade 600	L. 1400 x P. 755 x H. 1160	2 x 17 pas de 62	8I116_2F600_62
Armoire de transfert 2 colonnes façade 600	L. 1400 x P. 755 x H. 1785	2 x 21 pas de 62	8I140_2F600_62

### Options

Les options marquées par un \* ne sont pas compatibles avec les armoires « façade 400 ».

Désignation	Référence
Serrure à scellé	8I002
<b>1</b> Barre d'attelage*	8I003
Blocage directionnel*	8I004
<b>2</b> Frein central*	8I005
Roue Ø 200 mm sur chariot bas	8I008
Roue en superelastic	8I009
4 roues pivotantes Ø 160 mm dont 1 à frein	8I010
<b>3</b> Porte-fiche A5	8I012



# Neop | Chariots de transfert 600 x 400

## Approvisionnement des médicaments ou des dispositifs médicaux

- Robustesse : excellente résistance, armature de transfert anti-torsion en acier traité poudre apprêt + polyester
- Sanglage camion au niveau des 4 angles sur les emplacements dédiés, ou à tous niveaux à l'extérieur de l'armature de transfert
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- Chariot de transfert simple colonne
- Hauteur\* 120
- Fermeture à rideau
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»

## Configurations types - BASIC

Référence	Désignation
8YCT120FRC_RM_ED2	Chariot de transfert NEOP Basic 1 col. 600x400 H120 P62 - rideau + code - rose magenta
8YCT120FRC_BC_ED2	Chariot de transfert NEOP Basic 1 col. 600x400 H120 P62 - rideau + code - bleu céleste
8YCT120FRC_VP_ED2	Chariot de transfert NEOP Basic 1 col. 600x400 H120 P62 - rideau + code - vert pomme

## Composition sur mesure

### ETAPE ① - Structure du chariot

<b>Chariot</b> <b>hauteur 120 cm*</b> Pas de 40 mm
8Y164H120P4.TR_V2

Cette référence comprend :

- le caisson
- l'armature de transfert
- les roues
- les intercalaires

### ETAPE ② - Personnalisation du chariot

Sélection obligatoire des éléments 1 à 3

<b>Chariot</b> <b>hauteur 120 cm*</b>
--

1	Fermeture à rideau	8Y002_6012F3
---	--------------------	--------------

2	Serrure à code	8Y003CODE3
	Serrure à badge	8Y003BADGE3

3	Couleur	Rose magenta	8Y004_0012RM
		Vert pomme	8Y004_0012VP
		Bleu céleste	8Y004_0012BC

\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie « Données techniques »



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

### ETAPE ③ - Options

Option 4 roues pivotantes dont 1 directionnelle et 2 freins	8Y043
---	-------

## Accessoires et aménagements intérieurs

Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.  
La profondeur intègre par défaut une serrure.



## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Armature</b>	Acier mécano-soudé traité poudre apprêt + polyester
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
<b>Roues</b>	Bandage en caoutchouc semi élastique - Chape acier embouti
<b>Pare-chocs</b>	4 coins en caoutchouc

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 160 mm - 2 fixes + 2 pivotantes à frein
<b>Poids à vide (armature + caisson)</b>	52 kg
<b>Capacité</b>	24 pas de 40 mm pour une armoire avec un rideau 15 pas de 62 mm pour une armoire avec un rideau
<b>Verrouillage</b>	Code / Badge
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions</b>	L. 0,88 x P. 0,80 x H. 1,6 m
<b>Poids (structure + emballage)</b>	64 kg	<b>Volume</b>	1,13 m <sup>3</sup>



# Neop | Armoires de transport 600 x 400

## Approvisionnement des médicaments ou des dispositifs médicaux

- Robustesse : excellente résistance, armature de transport anti-torsion en acier traité poudre apprêt + polyester
- Sanglage camion au niveau des 4 angles sur les emplacements dédiés, ou à tous niveaux à l'extérieur de l'armature de transport
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- 2 hauteurs\* : 160 ou 180
- Fermeture à rideau
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge
- 3 choix d'intercalaires (glissières) en fonction des aménagements intérieurs souhaités

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»

## Configurations types - BASIC




### Armoires de transport H160

Référence	Désignation
8YATR164H160_V2	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H160 avec rideau sans serrure + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H160P4.TR_RC	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H160 avec rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H160P5.TR_RC	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H160 avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 50 mm)
8YATH160FRC_ED2	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H160 avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

### Armoires de transport H180

Référence	Désignation
8Y164H180P4.TR_RC	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H180 avec rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H180P5.TR_RC	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H180 avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 50 mm)
8YATH180FRC_ED2	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H180 avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

## Couleur de l'armoire

Réf. armoire H160	Réf. armoire H180	Désignation
8Y004_0016RM	8Y004_0018RM	Rose magenta 
8Y004_0016VP	8Y004_0018VP	Vert pomme 
8Y004_0016BC	8Y004_0018BC	Bleu céleste 



## Composition sur mesure

### ETAPE ① - Structure de l'armoire

Choix de la structure de l'armoire en fonction du type d'intercalaires

	Armoire hauteur 160 cm*	Armoire hauteur 180 cm*
Intercalaires standards Pas de 40 mm	8Y164H160P4.TR_V2	8Y164H180P4.TR_V2
Intercalaires à encombrement optimisé** Pas de 50 mm	8Y164H160P5.TR_V2	8Y164H180P5.TR_V2

\*\* pour piluliers Modulo XL, Modulo Classic 600 x 400 et Eurojour

Cette référence comprend :

- le caisson
- L'armature de transfert
- les roues
- les intercalaires

### ETAPE ② - Personnalisation de l'armoire

Sélection obligatoire des éléments 1 à 3

		Armoire hauteur 160 cm*	Armoire hauteur 180 cm*	
1	Fermeture à rideau	8Y002_6016F3	8Y002_6018F3	
2	Serrure à code	8Y003CODE3	8Y003CODE3	
	Serrure à badge	8Y003BADGE3	8Y003BADGE3	
3	Couleur	Rose magenta	8Y004_0016RM	8Y004_0018RM
		Vert pomme	8Y004_0016VP	8Y004_0018VP
		Bleu céleste	8Y004_0016BC	8Y004_0018BC

\*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie « Données techniques »



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.



## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc acier électro-zingué soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy
<b>Armature</b>	Acier mécano-soudé traité poudre apprêt + polyester
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
<b>Roues</b>	Bandage en caoutchouc semi élastique - Chape acier embouti
<b>Pare-chocs</b>	4 coins en caoutchouc

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 160 mm – 4 roues pivotantes (2 à frein et 2 directionnelles)	
<b>Poids à vide (armature + caisson)</b>	H 160 : 29 + 48 = 77 kg	H 180 : 30 + 52 = 82 kg
<b>Capacité</b>	Pour armoire H 160 avec rideau : - 35 pas de 40 mm - 27 pas de 50 mm - 22 pas de 62 mm	Pour armoire H 180 avec rideau : - 39 pas de 40 mm - 30 pas de 50 mm - 24 pas de 62 mm
<b>Verrouillage</b>	Code / Badge	
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique	

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions</b>	H 160 : L. 0,88 x P. 0,80 x H. 2 m H 180 : L. 0,88 x P. 0,80 x H. 2,15 m
<b>Poids (armoire + emballage)</b>	H 160 : 89 kg H 180 : 94 kg	<b>Volume</b>	H 160 : 1,4 m <sup>3</sup> H 180 : 1,5 m <sup>3</sup>

## Gamme transfert

# Armoires de transfert Modulo® classic

Les armoires de transfert Modulo® classic sont destinées au transport des **piluliers Modulo® classic ou Pili®** de la pharmacie à l'unité de soins.

Le châssis est étudié pour le **passage à l'extérieur** et le **transport véhicule**.

Photos non contractuelles



### Points forts

- ▶ Différentes capacités de stockage
- ▶ Châssis renforcé adapté au transport extérieur et véhicule
- ▶ Attelage possible
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers



Hygiénique



Ergonomique

## Gamme transfert

## Armoires de transfert Modulo® classic

## Caractéristiques techniques

- ▶ Corps en tôle et châssis revêtus époxy
- ▶ Fermeture par rideau coulissant avec clé à tête rabattable
- ▶ Roues ø 200 mm avec bandages et pare-chocs périphériques non tâchant :
  - Modèle avec 2 roues pivotantes : 2 roues pivotantes à frein + 2 roues fixes
  - Modèle avec 4 roues pivotantes : 4 roues pivotantes à frein
- ▶ Capacité : 28, 40 ou 50 plateaux de piluliers Modulo® classic ou Pili®

Désignation	Dimensions (en mm)	Modèle avec 2 roues pivotantes	Modèle avec 4 roues pivotantes
<b>Armoire de transfert 28 plateaux</b>	L. 1340 x P. 550 x H. 1270	76728	76728_SPE_GR
<b>Armoire de transfert 40 plateaux</b>	L. 1340 x P. 550 x H. 1610	76740	76740_SPE_GR
<b>Armoire de transfert 50 plateaux</b>	L. 1340 x P. 550 x H. 1920	76750	76750_SPE_GR

## Équipement optionnel

Désignation	Référence
<b>Attelage pour armoire de transfert</b>	76700_B



Armoire  
28 plateaux



Armoire  
40 plateaux



Armoire  
50 plateaux

## Gamme transfert

# Chariot et boîte de transport

Pour simplifier vos déplacements au sein de votre établissement, nous vous proposons un **chariot de transfert pliant**. Ce chariot peut être utilisé pour transporter des boîtes de transport, utiles pour **transférer les médicaments et autres matériels** en milieu hospitalier ou en pharmacie d'officine.

Nos boîtes sont ultralégères et gerbables. Elles possèdent des poignées permettant un maniement optimal.



Hygène



Ergonomie

### Points forts

- ▶ Chariot pliant polyvalent
- ▶ Boîte de transport ultralégère
- ▶ Sécurisation du contenu de la boîte grâce à un couvercle scellable

## Gamme transfert

# Chariot et boîte de transport

### Chariot de transfert pliant

- ▶ Charge maximale : 150 kg
- ▶ Dimensions chariot déplié : L. 740 x P. 450 x H. 880 mm
- ▶ Dimensions chariot plié : L. 540 x P. 450 x H. 250 mm
- ▶ Équipé de 4 roues Ø 100 mm dont 2 fixes
- ▶ Livré roues non montées

Désignation

Référence

**Chariot de transfert pliant**

BI12001



### Boîte de transport Pili box

- ▶ Cassette en Polypropylène alvéolaire gris
- ▶ Poignées en ABS blanc
- ▶ Fermeture par scratch
- ▶ Scellable au moyen d'un lien de sécurité
- ▶ Munie d'un porte étiquette adhésif pour document A5
- ▶ Dimensions extérieures : L. 475 x P. 352 x H. 315 mm
- ▶ Dimensions intérieures : L. 419 x P. 341 x H. 293 mm
- ▶ Poids : 0,89 kg
- ▶ Capacité : 7 piluliers Pili ou 5 plateaux de 7 piluliers Modulo Classic
- ▶ Livrée à plat (à monter par vos soins)

Désignation

Référence

**Lot de 10 boîtes Pili box**

5E004

**Lot de 100 liens de sécurité numérotés**

SCELLES\_4



## Gamme transfert

# Cassettes de transport de médicaments

Les cassettes de transport de médicaments sont amovibles permettant d'approvisionner les services de soins sans perdre de temps.

Les médicaments peuvent être transportés de manière sécurisée grâce à la fermeture centralisée des cassettes condamnant l'ensemble des bacs-tiroirs.

Nos cassettes sont totalement modulables et s'intègrent aisément dans n'importe quel chariot, armoire ou rayonnage des gammes **Neop®** et **Optistock®**.



### Points forts

- ▶ Structure résistante
- ▶ Fermeture centralisée à clé
- ▶ Deux modèles disponibles
- ▶ Différentes configurations possibles

Gamme transfert

## Cassettes de transport de médicaments



CASSETTE 2 NIVEAUX avec :  
12 bacs-tiroirs H. 60 mm 1/6



CASSETTE 3 NIVEAUX avec :  
7 bacs-tiroirs H. 60 mm 1/6  
10 bacs-tiroirs H. 60 mm 1/7

### Caractéristiques techniques

- ▶ Structure :
  - Cassette 2 niveaux : aluminium anodisé
  - Cassette 3 niveaux : ABS PC
- ▶ Étagère en dilite
- ▶ Porte en ABS avec porte-étiquette intégré
- ▶ Fermeture à clé
- ▶ Compatible avec les structures Neop® et Optistock®

Désignation	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Référence
<b>Cassette de transport 2 niveaux</b>	L. 602 x P. 398 x H. 153	6,3	8YY002
<b>Cassette de transport 3 niveaux</b>	L. 600 x P. 405 x H. 241	4,75	8Y023

### Capacité en fonction du type de bac

Type de bac	Nb de bacs possibles pour une cassette 2 niveaux	Nb de bacs possibles pour une cassette 3 niveaux
<b>Bac-tiroir H. 60 mm 1/7</b>	14	21
<b>Bac-tiroir H. 60 mm 1/6</b>	12	18
<b>Bac-tiroir H. 60 mm 1/4</b>	8	12



# Neop | Chariots de distribution 600 x 400

## Dispensation journalière des médicaments avec des piluliers et bacs nominatifs

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier (hauteur 80) et en aluminium (hauteur 100 et 120)
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Léger
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Modulaire : large gamme de tiroirs et accessoires
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- 3 hauteurs\* : 80, 100 ou 120
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code ou à badge
- Plusieurs choix d'intercalaires (glissières, parois) en fonction des aménagements intérieurs souhaités

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie «Données techniques »

## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### Chariots hauteur 100 cm

#### DIN – 18 lits bacs H. 70

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 18 bacs tiroirs H70 L.1/3 – coloris blanc
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



#### Référence

8YM64H100DIN18

#### DIN – 24 lits bacs H. 110

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 24 bacs tiroirs H110 L.1/6 – coloris blanc
- 5 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm
- 1 rail (bas droit)
- 1 poubelle simple



#### Référence

8YM64H100DI24E1

#### DIN – 24 lits bacs H. 70

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 24 bacs tiroirs H70 L.1/4 – coloris blanc
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle




#### Référence

8YM64H100DIN24

### DIN – 24 lits bacs H. 150

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm pour 60 gobelets
- 50 gobelets transparents avec couvercle
- 50 gobelets bleus avec couvercle
- 24 bacs tiroirs L. 1/6 H. 150 mm
- 5 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 rail (bas droit)
- 1 poubelle simple

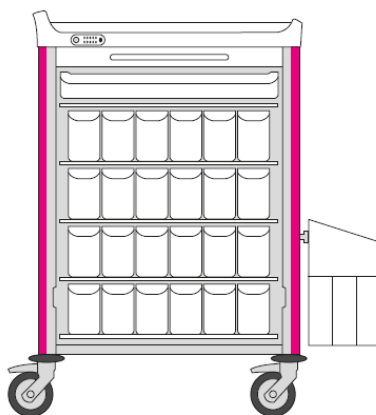

#### Référence

8YM64H100DI24E2

### DIN – 28 lits bacs H. 70

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 28 bacs tiroirs H70 L.1/4 –coloris blanc
- 8 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle




#### Référence

8YM64H100DIN28

### PDA PILI – 70 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 lots de 10 calages PILI
- 7 plateaux 600 x 400 nu pour piluliers Pili
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle

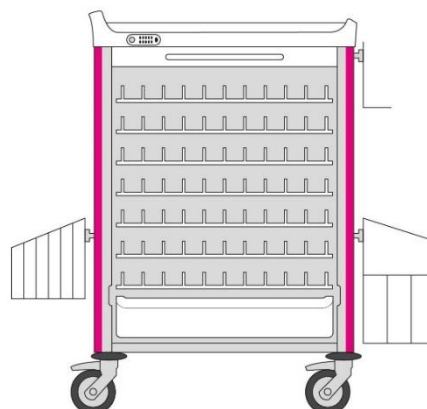


#### Référence

8YM64H100PIL70

### PDA MODULO CLASSIC – 70 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 7 plateaux 600 x 400 de 10 piluliers Modulo Classic
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle

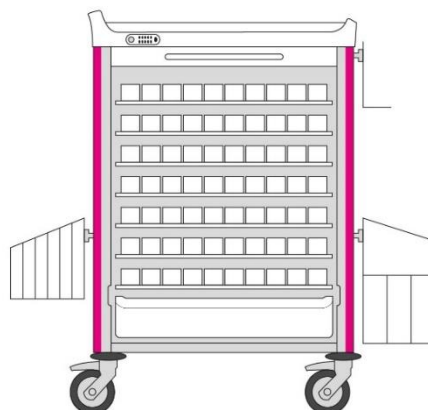

#### Référence

8YM64H100MC70

### PDA DÉVIDOIR – 24 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 24 bacs tiroirs H110 L.1/6 + dévidoir + curseur
- 5 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



#### Référence

8YM64H100DEV24

### PDA DÉVIDOIR – 30 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 30 bacs tiroirs H110 L.1/6 + dévidoir + curseur
- 6 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



#### Référence

8YM64H100DEV30

## PDA DÉVIDOIR – 42 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 42 bacs tiroirs H70 L.1/6 + dévidoir + curseur
- 8 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



### Référence


8YM64H100DEV42

## Chariots hauteur 120 cm

### DIN – 36 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm pour 60 gobelets
- 50 gobelets transparents avec couvercle
- 50 gobelets bleus avec couvercle
- 36 bacs tiroirs L. 1/6 H. 110 mm
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 155 mm avec séparateurs
- 1 rail (en bas à droite)
- 1 poubelle simple

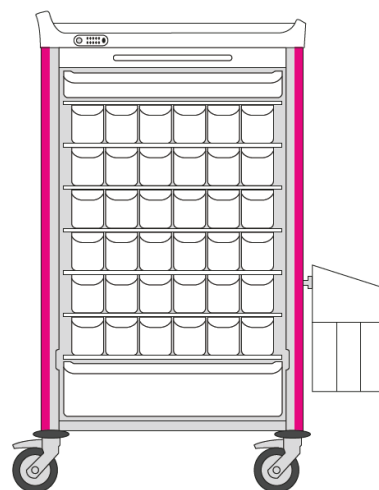


### Référence

8YM64H100DI36E1

### PDA DÉVIDOIR – 36 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 36 bacs tiroirs H110 L.1/6 + dévidoir + curseur
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle

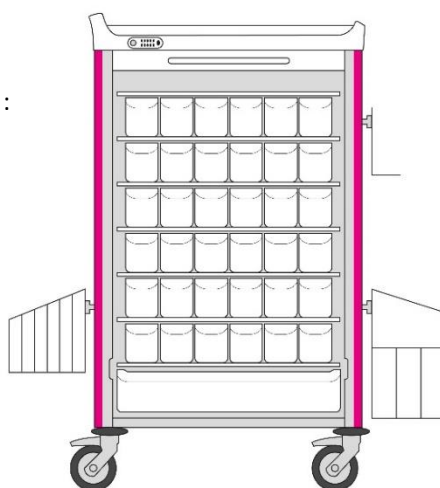


### Référence

8YM64H120DEV36

## PDA DÉVIDOIR – 42 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 42 bacs tiroirs L. 1/6 H. 110 mm + dévidoir + curseur
- 8 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle

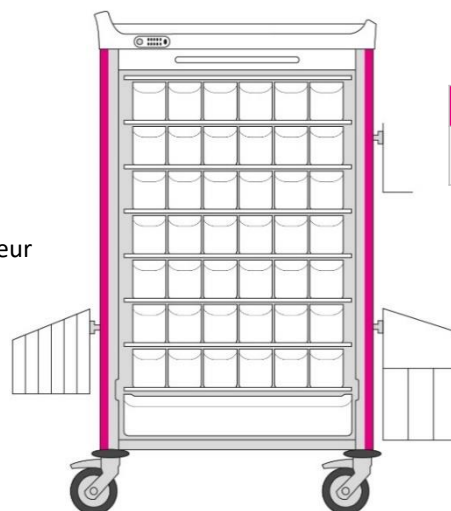

Référence

8YM64H120DEV42

## PDA DÉVIDOIR – 54 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 54 bacs tiroirs H70 L.1/6 + dévidoir + curseur
- 10 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YM64H120DEV54

## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.

Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### Chariots hauteur 80 cm

Référence	Désignation
8YCHM164H80FR	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette thermoplastique + rideau + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80CFR	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette compact + rideau + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80FRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette thermoplastique + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80CFRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)


## Chariots hauteur 100 cm

Référence	Désignation
8YCHM164H100FRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 avec tablette thermoplastique + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H100CFRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 avec tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)

### CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

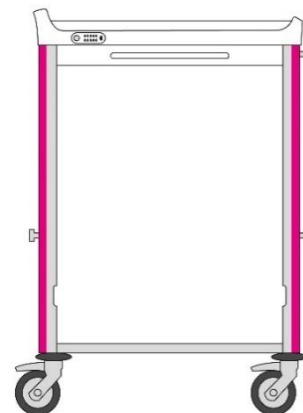

Référence	Désignation
8YCHMH100FRC_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 P62 rideau + code avec intercalaires à encombrement optimisé* (pas de 62 mm)

### CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable




Référence	Désignation
8YCHM164H100RCT	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 rideau + serrure code + tabl. rab. avec intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCMH100FRCT_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 P62 rideau + code + tabl. rab. avec intercalaires à encombrement optimisé* (pas de 62 mm)

\* Optimisé pour piluliers Modulo XL, Modulo Classic 600 x 400 et Eurojour

## CHARIOT AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 poignée ergonomique
- 3 rails (haut intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)

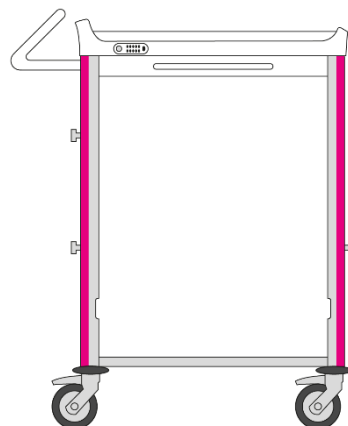


Référence	Désignation
8YCHM164H100_RCP	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 rideau + code + 3 rails + poignée ergo + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H100P6_RCP	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 rideau + code + 3 rails + poignée ergo + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

## CHARIOT MOTORISÉ

Chariot à médicaments 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 3 rails (haut intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)
- Système de motorisation

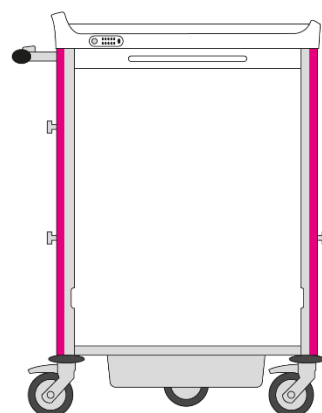

Référence	Désignation
8YCHM164H100_RCM	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 motorisé rideau + code + 3 rails + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H100P6_RCM	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 motorisé rideau + code + 3 rails + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)




## Chariots hauteur 120 cm

### CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot à médicaments 600 x 400 H120 équipé de :

- Tablette supérieure en stratifié compact
- Fermeture à rideau
- Serrure à code

Référence	Désignation
8Y164H120P6C_RC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P62 + rideau + serrure code + tabl. compact

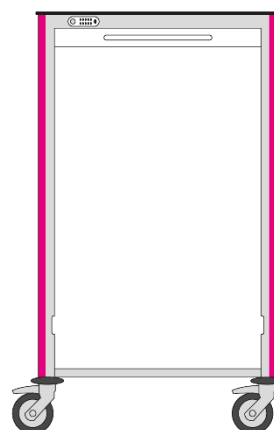

### CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot à médicaments 600 x 400 H120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

Référence	Désignation
8YCHM164H120FRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P40 + rideau + serrure code + 3 rails
8YCHMH120FRC_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P62 + rideau + serrure code + 3 rails




### CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot à médicaments 600 x 400 H120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable

Référence	Désignation
8YCHM164H120RCT	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P40 + rideau + serrure code + tabl. rab. + 2 rails
8YCMH120FRCT_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P62 + rideau + serrure code + tabl. rab. + 2 rails

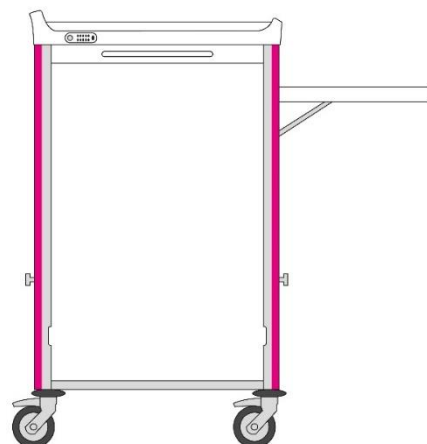

# Composition sur mesure

## ÉTAPE 1 - Structure du chariot

Choix de la structure du chariot en fonction du type d'intercalaires / parois

	Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*
Intercalaires standards pour tiroirs standards (pas de 40 mm)	8Y164H80P4	8Y164H100P4	8Y164H120P4
Parois pour tiroirs télescopiques	-	8Y164H100T	8Y164H120T
Intercalaires standards pour piluliers Adhésia Equipements (pas de 40 mm)	-	8Y164H100W	8Y164H120W

Ces références comprennent le caisson, les roues et les intercalaires ou parois.

## ÉTAPE 2 - Personnalisation du chariot

		Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*	
1	Tablette	en thermoplastique avec découpe	8Y001_6400TH		
		en thermoplastique sans découpe	8Y001_6400THSP		
		en stratifié compact	8Y001_6400CP1		
2	Fermeture	rideau pour intercalaires standards	8Y002_6008F3	8Y002_6010F3	8Y002_6012F3
		battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2	8Y002_0010F2
		battant pour intercalaires standards	8Y002_0008F1	8Y002_0010F1	-
3	Serrure à code	pour fermeture rideau	8Y003CODE3		
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	8Y003CODE2		
		pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003CODE1		
	Serrure à badge	pour fermeture rideau	8Y003BADGE3		
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	8Y003BADGE2		
		pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003BADGE1		
4	Couleur	Rose magenta	8Y004_0008RM	8Y004_0010RM	8Y004_0012RM
		Vert pomme	8Y004_0008VP	8Y004_0010VP	8Y004_0012VP
		Bleu céleste	8Y004_0008BC	8Y004_0010BC	8Y004_0012BC
5	Marquage	Marquage spécifique		8Y132	



Tablette supérieure en thermoplastique avec zone de préhension ergonomique



Tablette supérieure en stratifié compact



Fermeture à rideau



Fermeture à battant



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroir, motorisation...



\* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

# Données techniques

## Chariot avec tablette supérieure en plastique thermoformé

### Dimensions hors tout du chariot



### Dimensions utiles du plan de travail



### Hauteur du plan de travail


H 120 : 1297 mm  
 H 100 : 1057 mm  
 H 80 : 897 mm

## Chariot avec tablette supérieure en stratifié compact

### Dimensions hors tout du chariot



### Dimensions utiles du plan de travail

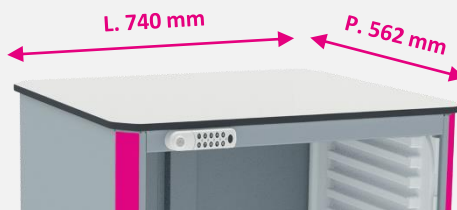

### Hauteur du plan de travail

H 120 : 1304 mm  
 H 100 : 1064 mm  
 H 80 : 904 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.  
 La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy H 80 : Acier (électro-zingué) / H 100 : Aluminium / H 120 : Aluminium
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA OU stratifié compact ép. 10 mm
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture époxy
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot		
<b>Poids à vide</b>	H 80 : 27 kg	H 100 : 24 kg	H 120 : 26 kg
<b>Capacité</b>	<b>H 80 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 15 pas pour chariot avec rideau - 16 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant	<b>H 100 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 19 pas pour chariot avec rideau - 20 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant  <b>H 100 avec intercalaires à encombrement optimisé (62 mm) :</b> - 11 pas pour chariot avec rideau - 12 pas pour chariot sans rideau  <b>H 100 avec parois pour tiroirs télescopiques : 10 tiroirs H 80 mm</b>	<b>H 120 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 25 pas pour chariot avec rideau - 26 pas pour chariot sans rideau  <b>H 120 avec parois pour tiroirs télescopiques : 13 tiroirs H 80 mm</b>
<b>Verrouillage</b>	Serrure à code (avec clé de secours) ou serrure à badge		

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	H 80 : 39 kg H 100 : 36 kg H 120 : 38 kg
<b>Dimensions</b>	H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m H 100 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m H 120 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,60 m
<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>

# Neop | Chariots de distribution 400 x 400

## Dispensation journalière des médicaments avec des piluliers et des bacs nominatifs

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Personnalisable : identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Léger



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- Chariot simple colonne
- Hauteur\* : 100
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code ou à badge
- 2 choix d'intercalaires (glissières) / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie «Données techniques»


## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### DIN – 16 lits

Chariot à médicaments 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 16 bacs tiroirs L. 1/6 H. 110 mm
- 5 tablettes 400 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 bac 400 x 400 H. 75 mm pour 36 gobelets
- 50 gobelets bleus avec couvercle
- 1 bac 400 x 400 H. 115 mm
- 1 rail (bas droit)
- 1 poubelle simple

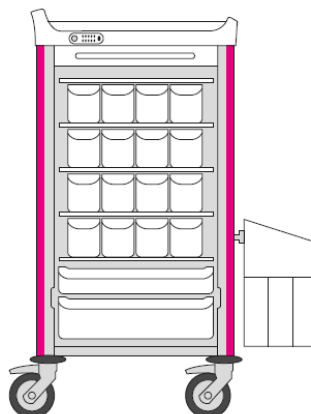


#### Référence

8YM44H100DI16E1

### DIN – 20 lits

Chariot à médicaments 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 20 bacs tiroirs L. 1/6 H. 110 mm
- 6 tablettes 400 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 bac 400 x 400 H. 115 mm
- 1 rail (bas droit)
- 1 poubelle simple

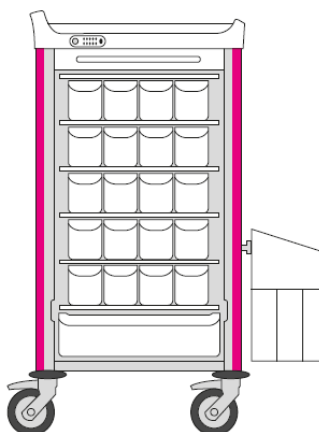


#### Référence

8YM44H100DI20E1

### DIN – 28 lits

Chariot à médicaments 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 28 bacs tiroirs L. 1/6 H. 70 mm
- 8 tablettes 400 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 bac 400 x 400 H. 115 mm
- 1 rail (bas droit)
- 1 poubelle simple

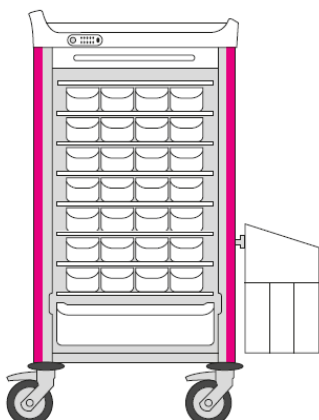


#### Référence

8YM44H100DI28E1

### PDA DÉVIDOIR – 16 lits

Chariot à médicaments 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 16 bacs tiroirs H110 L.1/6 + dévidoir + curseur
- 5 tablettes 400 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 bac 400 x 400 hauteur 75 mm
- 1 bac 400 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle

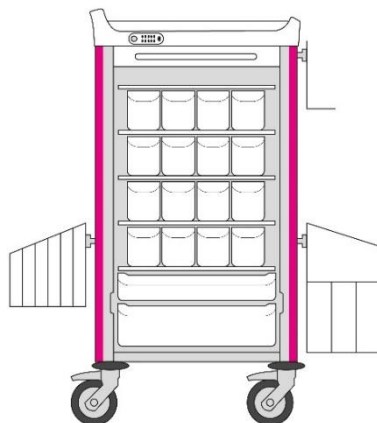

Référence

8YM44H100DEV16

### PDA DÉVIDOIR – 20 lits

Chariot à médicaments 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 20 bacs tiroirs H110 L.1/6 + dévidoir + curseur
- 6 tablettes 400 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 bac 400 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle




Référence

8YM44H100DEV20

### PDA DÉVIDOIR – 28 lits

Chariot à médicaments 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 28 bacs tiroirs H70 L.1/6 + dévidoir + curseur
- 8 tablettes 400 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 bac 400 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle

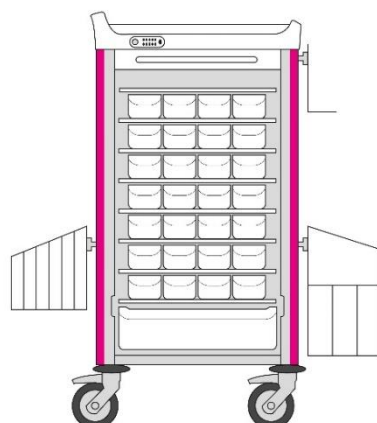

Référence

8YM44H100DEV28

## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.


### CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot à médicaments 400 x 400 H100 équipé de :

- Intercalaires standards
- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

#### Référence

8YCHM144H100FRC

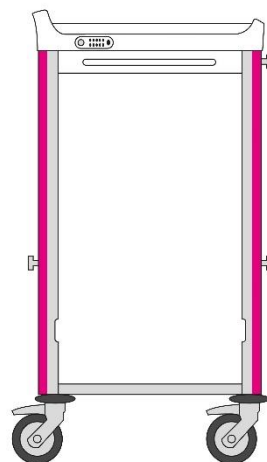

### CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot à médicaments 400 x 400 H100 équipé de :

- Intercalaires standards
- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable

#### Référence

8YCHM144H100RCT





# Composition sur mesure

## ETAPE ① - Structure du chariot

Choix de la structure du chariot en fonction du type d'intercalaires / parois.

Chariot hauteur 100 cm*	
Intercalaires standards pas de 40 mm	Parois pour tiroirs télescopiques
8Y144H100P4	8Y144H100T

Cette référence comprend :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires ou parois

## ETAPE ② - Personnalisation du chariot

Sélection obligatoire des éléments 1 à 4

Chariot avec intercalaires  
standards  
réf. 8Y144H100P4

Chariot avec parois pour  
tiroirs télescopiques  
réf. 8Y144H100T

1	Tablette supérieure	en thermoplastique	8Y001_4400TH	8Y001_4400TH
2	Fermeture	rideau	8Y002_4010F3	-
		battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2
3	Serrure à code	pour fermeture rideau	8Y003CODE3	-
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y003CODE2
	Serrure à badge	pour fermeture rideau	8Y003BADGE3	-
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y003BADGE2
4	Couleur	Rose magenta	8Y004_0010RM	8Y004_0010RM
		Vert pomme	8Y004_0010VP	8Y004_0010VP
		Bleu céleste	8Y004_0010BC	8Y004_0010BC

\*Pour la hauteur précise du plan de travail, voir page suivante



Tablette supérieure en thermoplastique avec zone de préhension ergonomique



Fermeture à rideau



Fermeture à battant



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, rail normalisé, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroir...  
Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques

## Dimensions hors tout du chariot



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Dimensions utiles du plan de travail



Tablette supérieure en plastique thermoformé avec zone de préhension ergonomique

## Hauteur du plan de travail

H. 1057 mm

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture EPOXY
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes. Double blocage de la roue et du pivot
<b>Poids à vide</b>	20 kg
<b>Capacité</b>	- 19 pas de 40 mm pour chariot avec rideau - 20 pas de 40 mm pour chariot sans rideau - 10 tiroirs télescopiques HT 80 mm
<b>Verrouillage</b>	Serrure à code (avec clé de secours) ou serrure à badge

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	32 kg	<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>

# Neop | Chariots de distribution 400 x 400 double colonne

## Dispensation journalière des médicaments avec des piluliers et des bacs nominatifs

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Chariot double colonne
- Hauteur : 100\*
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge
- 2 choix d'intercalaires (glissières) / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

# Configuration du chariot

## ETAPE ① - Structure du chariot

Choix de la structure du chariot en fonction du type d'intercalaires / parois

Chariot hauteur 100 cm*	
Intercalaires standards Pas de 40 mm	Parois pour tiroirs télescopiques
8Y244H100P4	8Y244H100T

Cette référence comprend :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires ou parois

## ETAPE ② - Personnalisation du chariot

Sélection obligatoire des éléments 1 à 4

Fermeture, serrure et bande de couleurs à commander en double pour un chariot double colonne

			Chariot avec intercalaires standards réf. 8Y244H100P4	Chariot avec parois pour tiroirs télescopiques réf. 8Y244H100T
1	Tablette supérieure	en stratifié compact	8Y001_4400CP2	8Y001_4400CP2
2	Fermeture	rideau	8Y002_4010F3	-
		battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2
3	Serrure à code	pour fermeture rideau	8Y003CODE3	-
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y003CODE2
	Serrure à badge	pour fermeture rideau	8Y003BADGE3	-
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y003BADGE2
4	Couleur	Rose magenta	8Y004_0010RM	8Y004_0010RM
		Vert pomme	8Y004_0010VP	8Y004_0010VP
		Bleu céleste	8Y004_0010BC	8Y004_0010BC

\*Pour la hauteur précise du plan de travail, voir la partie « Données techniques »



Tablette supérieure  
en stratifié compact



Fermeture à rideau



Serrure à code

Rose magenta

Vert pomme



Fermeture à battant



Serrure à badge

Bleu céleste

## ETAPE ③ - Accessoires et aménagements intérieurs


Tablette d'extension, rail normalisé, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroir...

Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques

## Dimensions hors tout du chariot

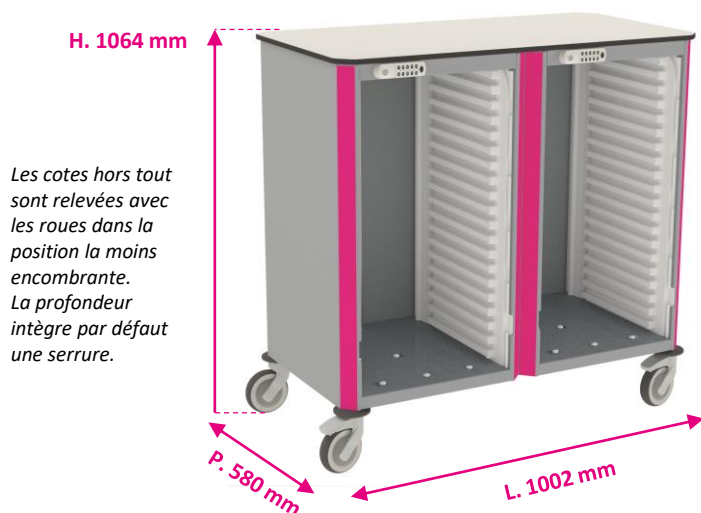

## Dimensions utiles du plan de travail



## Hauteur du plan de travail

H. 1064 mm

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Plan de travail</b>	Stratifié compact ép. 10 mm
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture EPOXY
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - double blocage de la roue et du pivot
<b>Poids à vide</b>	40 kg
<b>Capacité</b>	- 38 pas de 40 mm pour chariot avec rideau - 40 pas de 40 mm pour chariot sans rideau - 20 tiroirs télescopiques H 80 mm
<b>Verrouillage</b>	Code / Badge

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	52 kg	<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>



## Dispensation journalière des médicaments avec des piluliers tracés et sécurisés

- Robustesse : excellente résistance, structure anodisée naturelle, parois latérales en ABS teinté masse
- Hygiène 100 % : conçue avec des matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

**Coloris**

**Rose magenta**

- Chariot simple ou double colonne
- Hauteur\* : 100 ou 120
- Fermeture à rideau
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours)
- Equipements de série : 1 poignée de manutention et 4 rails normalisés pour les accessoires

	Pili cart Simple colonne	Pili cart Double colonne
H. 100	8Y144.PILI	8Y244.PILI
H. 120	8Y144H120.PILI	8Y244H120.PILI



### Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, bras informatique, piluliers, portique, poubelle...  
Se référer aux fiches dédiées.



\* Pour la hauteur précise, voir la partie « Données techniques »

# Données techniques

## Dimensions hors tout du chariot



## Dimensions utiles du plan de travail



## Matières

<b>Structure</b>	Profil aluminium anodisé
<b>Habillages</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène)
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 100 mm - 1 à frein + 3 pivotantes	
<b>Poids à vide</b>	Simple colonne H.100 : 21 kg Simple colonne H.120 : 23 kg	Double colonne H.100 : 31 kg Double colonne H.120 : 34 kg
<b>Charge admissible</b>	5 kg par plateau	
<b>Capacité</b>	Simple colonne H.100 : 10 plateaux pour piluliers PILI ou Modulo Classic Simple colonne H.120 : 12 plateaux pour piluliers PILI ou Modulo Classic	Double colonne H.100 : 20 plateaux pour piluliers PILI ou Modulo Classic Double colonne H.120 : 24 plateaux pour piluliers PILI ou Modulo Classic
<b>Verrouillage</b>	Code	
<b>Couleur habillage</b>	Rose magenta	
<b>Equipements</b>	Rideau + poignée + 4 rails latéraux	

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	Simple colonne : L 0,80 x P 0,88 x H 1,2 m Double colonne : L 0,80 x P 1,20 x H 1,2 m
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	Simple colonne H.100 : 31 kg Double colonne H.100 : 41 kg Simple colonne H.120 : 33 kg Double colonne H.120 : 44 kg	<b>Volume</b>	1 m <sup>3</sup>



## Distribution du médicament

# Chariot de distribution Hebdo®

Les chariots de médicaments Hebdo® sont idéals pour la distribution en collectivités (foyer logement, EHPAD...).

Nos **piluliers hebdomadaires**, à cases fixes ou réglables, faciliteront le stockage et la distribution des médicaments. Leur ergonomie est un atout dans l'utilisation quotidienne.



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Stockage, transfert et distribution en un seul chariot
- ▶ Sécurisation par serrure à code
- ▶ Différentes capacités de chariots
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

## Distribution du médicament

## Chariot de distribution Hebdo®

## Chariots



- ▶ Structure aluminium anodisé naturel
- ▶ Parois en ABS teinté masse
- ▶ Plan de travail avec rebord arrondis en thermoplastique blanc
- ▶ Fermeture par rideau coulissant extractible sans outil
- ▶ Serrure à code
- ▶ 4 roues pivotantes Ø 100 mm en polyamide dont 1 à frein
- ▶ 1 poignée de manutention
- ▶ 4 rails normalisés



Désignation	Dimensions (en mm)	Piluliers par chariot	Référence
<b>Chariot Hebdo® 30 à rideau</b>	L. 615 x P. 468 x H. 988	30	8D030_CODE
<b>Chariot Hebdo® 60 à rideau</b>	L. 1065 x P. 468 x H. 988	60	8D060_CODE

## Piluliers et accessoires compatibles

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>1 Pilulier Hebdo® à cases fixes</b>	L. 319 x P. 199 x H. 42	505001BL
<b>2 Pilulier Hebdo® à cases modulables</b>	L. 319 x P. 199 x H. 42	50610
<b>Lot de 10 planches d'étiquettes</b> (10 étiquettes par planche)		50288
<b>3 Bac blanc</b>	L. 320 x P. 200 x H. 150	42016

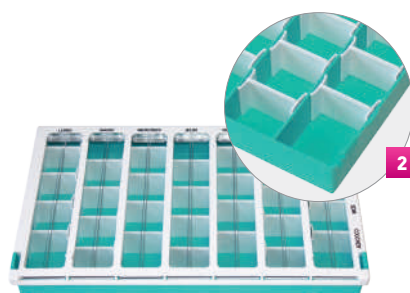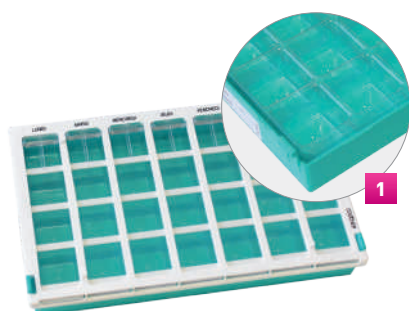


## Distribution du médicament

# Chariot de distribution Pil 7<sup>®</sup>

Le chariot de médicaments Pil 7<sup>®</sup> est idéal pour la distribution en collectivités (foyer logement, EHPAD...).

Notre **pilulier hebdomadaire à cases réglables** est totalement adapté pour une prise de médicaments par des personnes autonomes. Leur ergonomie est un atout dans l'utilisation quotidienne.

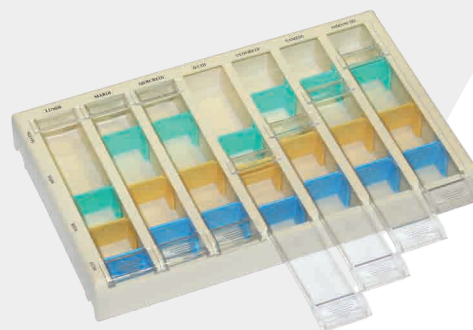

Hygène



Ergonomie

## Points forts

- ▶ Stockage, transfert et distribution en un seul chariot
- ▶ Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

## Distribution du médicament

# Chariot de distribution Pil 7®

### Chariot de distribution Pil 7®

- ▶ Dimensions : L. 615 x P. 468 x H. 1128 mm
- ▶ Capacité : 30 piluliers
- ▶ Structure aluminium anodisé naturel
- ▶ Parois en ABS teinté masse
- ▶ Plan de travail avec rebord arrondis en thermoplastique blanc
- ▶ Fermeture par rideau coulissant extractible sans outil
- ▶ Serrure à code
- ▶ 4 roues pivotantes Ø 100 mm en polyamide dont 1 à frein
- ▶ 1 poignée de manutention
- ▶ 4 rails normalisés



Désignation

Référence

**Chariot de distribution Pil 7®**

8D030\_PIL7\_CODE

### Pilulier Pil 7® Évolution

- ▶ Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
- ▶ Curseurs amovibles adaptables suivant prescription
- ▶ 3 coloris de curseurs pour un meilleur repérage
- ▶ Marquage des 7 jours de la semaine sur le distributeur
- ▶ Marquage « Matin - Midi - Soir - Nuit » sur les curseurs
- ▶ Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation
- ▶ Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- ▶ Accès facile au contenu de chaque alvéole
- ▶ Dimensions : L. 320 x P. 200 x H. 40 mm



Désignation

Conditionnement

Référence

**Pilulier Pil 7® Évolution sans butées**

L'unité

CD23605

**Pilulier Pil 7® Évolution sans butées**

Le lot de 10

CD23606

# Préparation du médicament

## Broyeur de comprimés Severo®

Afin de faciliter la prise de médicaments, le personnel soignant doit régulièrement broyer les comprimés des patients ayant des troubles de la déglutition.

Le broyeur électrique Severo® permet de **réduire en une fine poudre les comprimés** les plus durs, en moins de 8 secondes. Cet appareil a été développé en collaboration avec des professionnels de santé pour **éviter les troubles musculo-squelettiques** dûs au broyage manuel. Il évite également les contaminations croisées et peut être utilisé en temps masqué.

Le Severo® est déjà approuvé par de nombreux instituts.



Hygiénique



Ergonomique

### Points forts

- ▶ Simple, efficace et robuste
- ▶ Quasi silencieux
- ▶ Broyage sans effort ni risque de TMS
- ▶ Facilement nettoyable
- ▶ Léger et portable

Visionnez-moi



## Préparation du médicament

# Broyeur de comprimés Severo®

### Broyeur Severo®

- ▶ Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm
- ▶ Autonomie : 500 cycles de broyage (≈ 3 jours d'utilisation en continu)
- ▶ Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)
- ▶ Poids : ≈ 1,5 kg
- ▶ Niveau sonore : 52 db
- ▶ Temps de chargement : 2 heures
- ▶ Garantie : 2 ans pour l'appareil et 1 an pour la batterie

Désignation	Référence
<b>Broyeur de comprimés Severo®</b>	NA00030.01

### Accessoires

Désignation	Référence
<b>2100 gobelets à usage unique</b>	NA00014.01
<b>2000 couvercles à usage unique</b>	NA00015.01
<b>2100 rondelles à usage unique</b>	NA00016
<b>Stabilisateur Severo®</b>	NA00040

### Utilisation



1 Placez les médicaments dans le gobelet sans dépasser la première ligne.



2 Placez une rondelle puis la tête de broyage sur le gobelet. La rondelle est conseillée mais pas obligatoire.



3 Ouvrez le couvercle du Severo® en appuyant sur le bouton métallique.



4 Placez le gobelet avec la tête de broyage sur le plateau.



5 Fermez le couvercle du Severo® en exerçant une légère pression.



6 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour que le processus de broyage commence. La LED du bouton passe au vert une fois le broyage terminé.



7 Ouvrez le couvercle du Severo®. Soulevez la rondelle et la tête de broyage. Les médicaments sont réduits en fine poudre et peuvent être mélangés aux repas des patients ou au gel à avaler.



### Gel à avaler

Le gel à avaler permet de masquer le goût amer des médicaments et n'affecte pas son action. Il ne contient ni sucre, ni alcool, ni substances allergènes courantes. Il convient à tous les patients.

Désignation	Référence
<b>Gel saveur banane - 8 mL</b>	NA00046
<b>Gel saveur banane - 150 mL</b>	NA00044
<b>Gel saveur banane - 1L</b>	NA00045
<b>Gel saveur tutti frutti - 8 mL</b>	NA00043
<b>Gel saveur tutti frutti - 150 mL</b>	NA00041
<b>Gel saveur tutti frutti - 1L</b>	NA00042

## Préparation du médicament

# Écrase-comprimés Tookan®

L'écrase-comprimés Tookan® permet de réduire les comprimés en une fine poudre, **sans risque de troubles musculo-squelettiques**. Le broyage s'effectue du bout des doigts, sans effort ni à-coups.

Grâce à ses sachets, le Tookan® permet d'**éviter les contaminations croisées ainsi que l'inhalation de particules médicamenteuses**.

L'hygiène est donc totalement respectée !



Hygène



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Broyage sans effort
- ▶ Facile d'utilisation
- ▶ Stockage des sachets dans l'appareil
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

## Préparation du médicament

## Écrase-comprimés Tookan®

## Caractéristiques techniques

## Écrase-comprimés Tookan®

- ▶ Base en tôle acier peinte époxy
- ▶ Poignée en polyamide
- ▶ Mâchoire en aluminium anodisé
- ▶ Axes en inox
- ▶ Poids : 1,4 kg

## Sachets pour écrase-comprimés

- ▶ Polyéthylène basse densité transparent
- ▶ Épaisseur : 180/200 µm
- ▶ Respectueux de l'environnement



Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Écrase-comprimés manuel Tookan®</b>	L. 265 x P. 75 x H. 90	NA00017_V02
<b>1000 sachets universels pour écrase-comprimés</b>	L. 50 x H. 100	NA00011.01


## Utilisation



1 Prenez un sachet rangé dans le bac de stockage.



2 Placez les médicaments dans le sachet puis repliez-le.

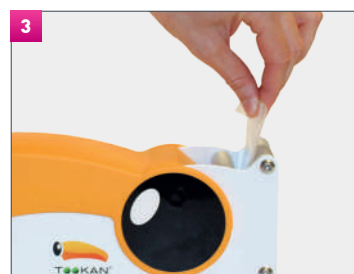

3 Insérez le sachet dans la mâchoire du broyeur.



4 Donnez quelques pressions sur la poignée, du bout des doigts, sans lâcher le sachet.



5 Récupérez les médicaments réduits en fine poudre.



## Préparation du médicament

# Reconditionnement unitaire

# Pili® solo

Notre système de reconditionnement unitaire facilite la dispensation nominative et unitaire au sein des établissements. Il permet de reconditionner les médicaments nus entiers, en  $\frac{1}{2}$  et en  $\frac{1}{4}$ .

Les étiquettes, imprimables à partir de notre logiciel de traçabilité Pili® soft, identifient complètement le produit reconditionné (nom, numéro de lot, date de péremption).

Étudié pour faciliter la pose manuelle des étiquettes sur les blisters, le plateau de préparation permet un ajustage précis et simplifie les manipulations.



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Respect du contrat de bon usage du médicament
- ▶ Facilité de marquage des étiquettes
- ▶ Conditionnement unitaire des formes sèches
- ▶ Blister scellé par une étiquette

## Préparation du médicament

# Reconditionnement unitaire Pili® solo

### Blisters


- ▶ Matière : APET grade alimentaire (fabriqué avec 50 à 80 % de matière recyclée)
- ▶ Planche de 45 alvéoles détachables à l'unité ou en bande, H. 12 mm
- ▶ Traitement anti-UV : protection contre la lumière

Désignation	Référence
<b>100 planches de blisters avec 45 alvéoles</b>	5G001

### Étiquettes

- ▶ Compatible imprimante jet d'encre et laser
- ▶ Matière : papier spécial impression + adhésif renforcé + kraft
- ▶ Format : planche A4 de 45 étiquettes de 30x30 mm

Désignation	Référence
<b>100 planches d'étiquettes BLANCHES imprimables</b>	5G002
<b>100 planches d'étiquettes ROUGES imprimables</b>	5G003
<b>100 planches d'étiquettes VERTES imprimables</b>	5G004

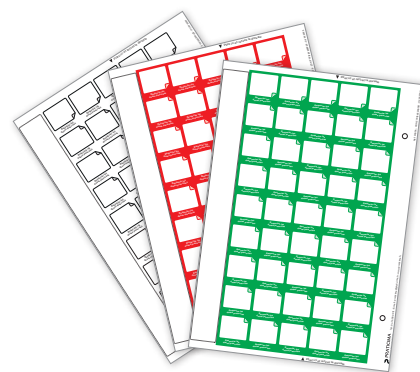

### Accessoires

Désignation	Référence
<b>Pack reconditionnement unitaire</b> - Logiciel de reconditionnement unitaire Pili® soft - Plateau de préparation - Douchette Honeywell	5G006
<b>Logiciel de reconditionnement unitaire Pili® soft - full web</b> (permet l'impression des étiquettes)	5G007
<b>Plateau de préparation</b> (permet un collage précis des étiquettes sur les blisters)	5G000
<b>Douchette Honeywell</b> (permet le scan du DataMatrix des boîtes de médicaments)	8E760



## Préparation du médicament

# Pili® Blade

### Pili® Blade, l'outil de travail indispensable à la préparation des piluliers !

La découpe des plaquettes de médicaments avec une paire de ciseaux est révolue.

Avec Pili® Blade, **réduisez la pénibilité et gagnez en productivité.**

Photos non contractuelles



### Réduction de la pénibilité


- ▶ Mouvement naturel sans effort
- ▶ Limite les TMS

### Gain de productivité

- ▶ Nombre réduit d'opérations
- ▶ Rapide et efficace
- ▶ Découpe tous types de plaquettes et de sachets

### Sécurité accrue

- ▶ Lame sécurisée non accessible
- ▶ Évite les coupures accidentelles avec la paire de ciseaux

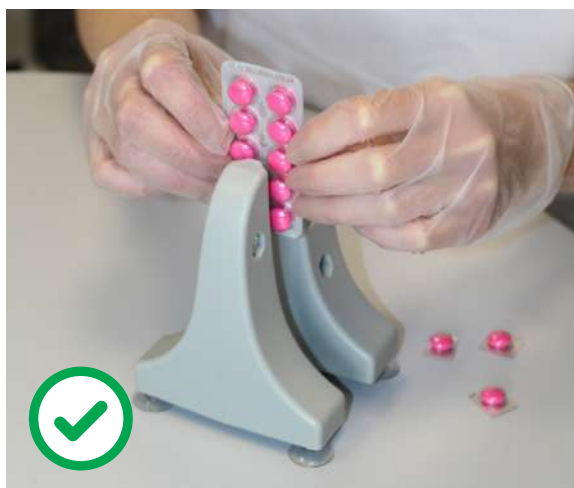

## Préparation du médicament

# Pili® Blade

### Caractéristiques techniques

- ▶ Dimensions : L. 90 x P. 100 x H. 124
- ▶ Lame en acier inoxydable pour une découpe efficace et sans effort
- ▶ Découpe tous types de plaquettes et de sachets

Désignation	Référence
<b>Outil de découpe Pili® Blade</b>	5H001
<b>2 lames pour Pili® Blade</b>	5H002



## Offre PDA Pili®

**Pili® Blade s'inscrit dans la solution PDA Pili® 100% sécurisée et tracée**



### Logiciel de traçabilité Pili® Soft

Communication avec les logiciels de soins tiers  
(interopérabilité et bidirectionnalité)




### Piluliers sécurisés


80 % du traitement mis en pilulier en  
surconditionnement (formes sèches et sachets)

# ► Solution PILI

La PDA\* 100 % sécurisée et tracée

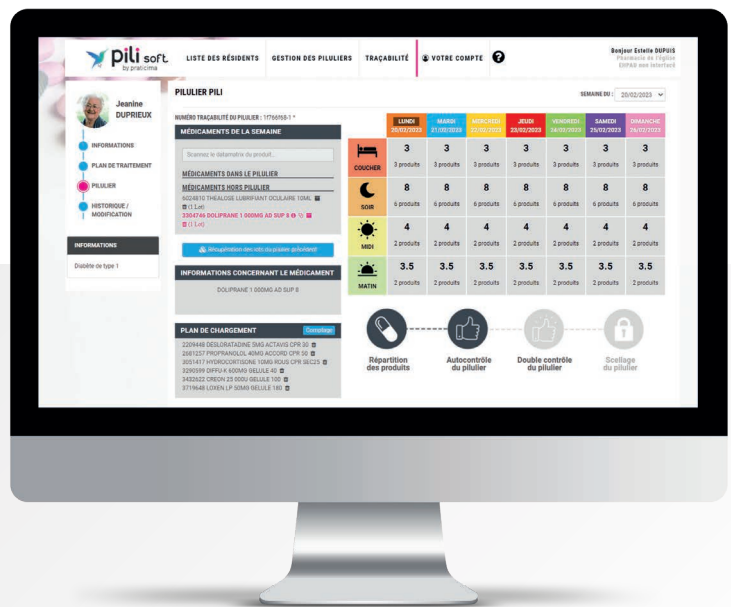

\* PDA : Préparation des Doses à Administrer

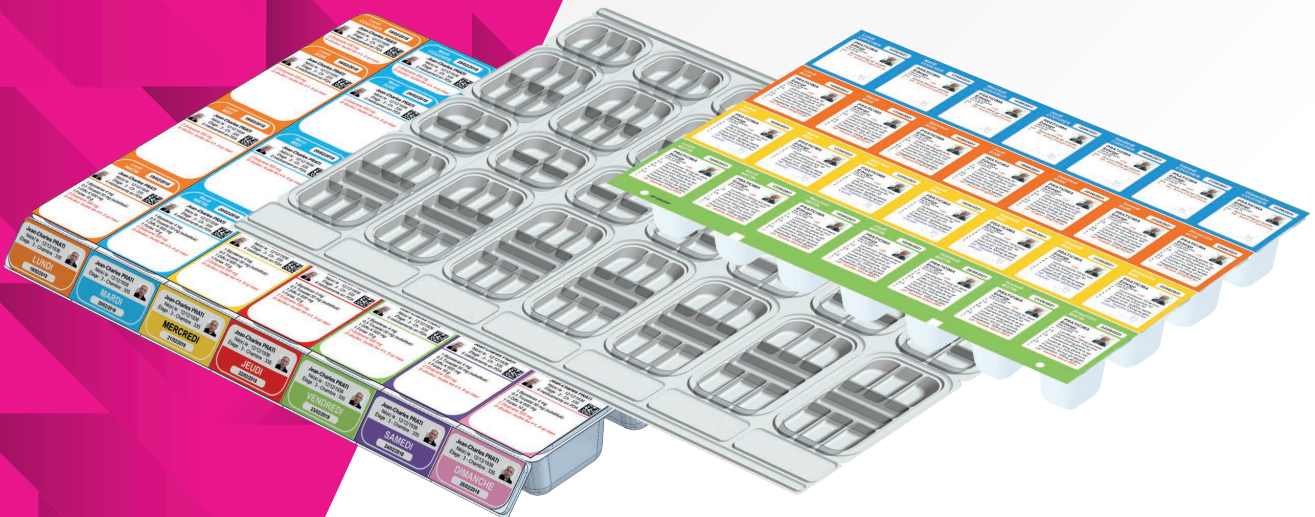

**PRATICIMA**  
healthcare solutions


# ► Sécurisation du circuit du médicament

## La PDA, un enjeu essentiel pour optimiser le parcours de soins



### Sécurisation et traçabilité

- Respect des exigences réglementaires des ARS
- **Mise en sécurité des résidents**
- Administration du médicament en conformité avec la prescription initiale
- Adaptation à tout changement de traitement en cours de mois
- Moins de hors piluliers à gérer : moins de risques d'erreurs

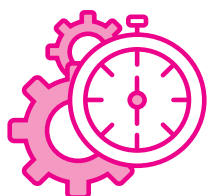


### Efficacité

- **Optimisation de l'observance médicamenteuse**
- Amélioration de la **prise en charge du patient**
- **Gain de temps** : meilleure gestion du circuit du médicament

## Le pharmacien, acteur du suivi de l'observance

En exerçant la PDA, le pharmacien se positionne au centre du parcours de soins du patient, en tant que correspondant.

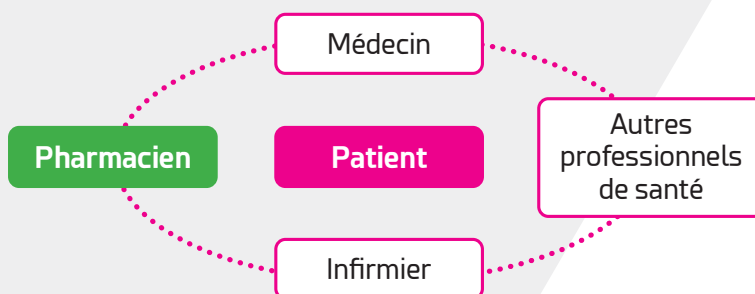

## La PDA, un nouveau service pour toute la patientèle

- Un **service contractuelisable**, conformément au Décret n°2018-841 du 3 octobre 2018
- Personnalise la relation patient/pharmacien
- Fidélise la patientèle

**12 millions**

de patients chroniques en France

**45 %**

des patients chroniques sont **inobservants**


**En moyenne 550 patients éligibles à la PDA par officine**

## Une solution PDA 100 % sécurisée et tracée

Pili® est la combinaison de tous les outils nécessaires à la mise en place d'une solution PDA :

- Logiciel de préparation et de traçabilité **Pili® Soft**
- Piluliers sécurisés **Pili®**, **Pili® 4.21** et **Pili® Home**
- Reconditionnement unitaire
- Outil de découpe **Pili® Blade**
- Boîtes de transport **Pili® Box**
- Armoires de stockage
- Chariots de distribution **Pili® Cart** et **Neop®**

## Une solution pour les patients en établissement et en ambulatoire

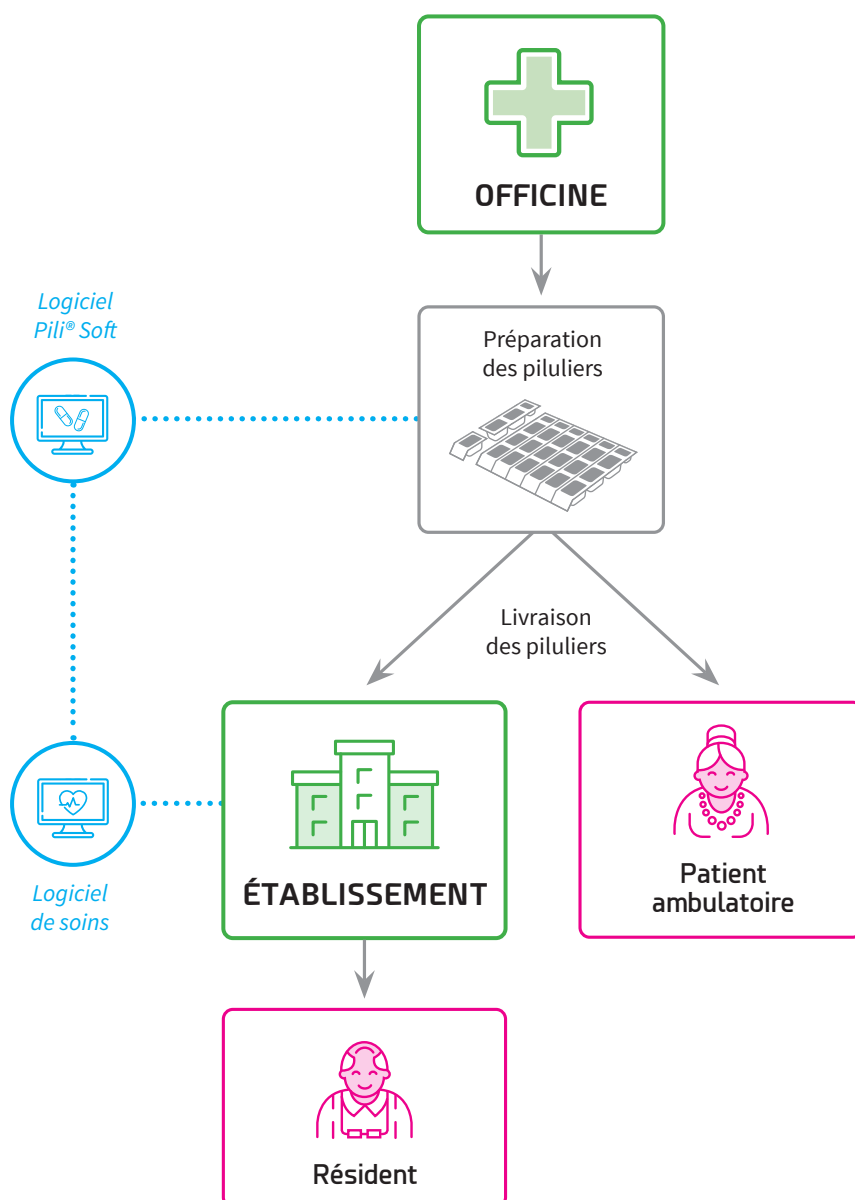

# ► Pili® Soft, logiciel de traçabilité totale



## Un logiciel PDA qui trace 100 % du traitement

- Logiciel en **mode SAAS** (web) hébergé sur un serveur de données de santé sécurisé agréé (CNIL)
- **Communication avec les logiciels de soins tiers** (interopérabilité et bidirectionnalité)
- **Récupération instantanée des données** résidents / patients
- Communication des informations liées au traitement vers les médecins et les IDE
- **Modification possible à tout moment d'un pilulier en cours de distribution**
- **Traçabilité de la modification de traitement**
- **Traçabilité du contrôle pharmaceutique**



## Un logiciel permettant le reconditionnement unitaire

- Reconditionnement unitaire des **médicaments nus entiers, en ½ et en ¼**
- **Blisters scellés à l'aide d'une étiquette adhésive** imprimée à partir du logiciel Pili® soft
- **Identification complète** du médicament reconditionné
- Traitement anti-UV : **protection contre la lumière**

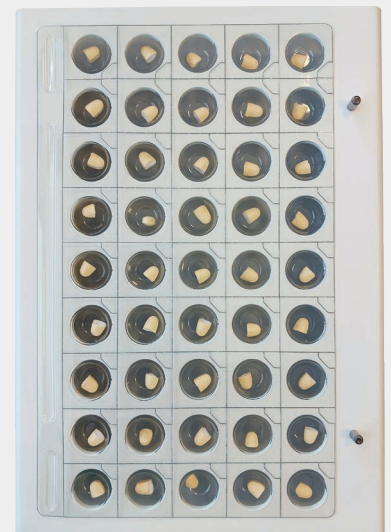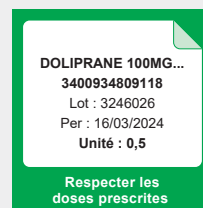

## Un logiciel facilitant le bilan partagé de médication

Pili® soft est capable de **préremplir les formulaires nécessaires au bilan partagé de médication** grâce aux données résidents (identité et traitements) enregistrées dans le logiciel.

Grâce à cette fonctionnalité, le pharmacien gagnera un temps précieux dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques.






# Un logiciel intuitif et simple d'utilisation

1

Récupération des résidents et des prescriptions dans Pili® Soft (si interface avec un logiciel de soins tiers)

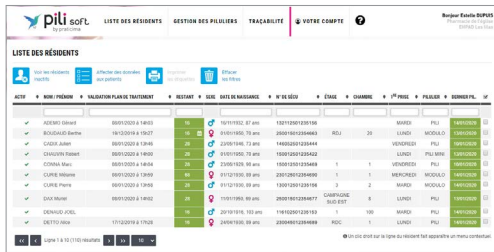

4

Double contrôle du pilulier et validation du pharmacien



2

Remplissage guidé du pilulier à l'aide du logiciel



5

Impression et collage de l'étiquette de scellage du pilulier



6

Renvoi des données dans le logiciel de soins (si interfaçage en bidirectionnel)

3

Scan du datamatrix de la boîte de médicaments pour récupérer le numéro de lot, le CIP et la date de péremption



7

Impression du plan de traitement du patient et du bon de délivrance

**Plan d'administration**  
Numéro de traçabilité du pilulier : 79b604fd-1

- N° de Sécu : 235015002503466
- Pharmacie : Pharmacie de l'église
- Résident : Jeanine DUPRIEUX
- Sexe : Féminin
- Age : 83 ans
- Préparé par : Estelle Quirin
- Adresse : EHPAD NABET
- Etage : 2
- Chambre : 22

Informations résident : Diabète de type 1

	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	Observations
<b>MATIN</b>								
TRIVASTAL LP 50MG CPR 30 Lots: 23503	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
FORLAX 10G SACHET 20 Lots: 5252	1	1	1	1	1	1	1	-
EPHRETEXAL 10MG/2,5MG CPR 30 Lots: 59893	1	1	1	1	1	1	1	-
DIFFU K 600MG Lots: 23503	1	1	1	1	1	1	1	-
<b>SOIR</b>								
TRIVASTAL LP 50MG CPR 30 Lots: 23503	1	1	1	1	1	1	1	-
	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	


# ► Une gamme de piluliers sécurisés

## Des piluliers sécurisés et tracés

- Scellés à l'aide d'une étiquette adhésive imprimée à partir du logiciel Pili® soft
- Respect des exigences réglementaires des ARS
- Adaptation du traitement sans gaspillage
- **Identification complète du patient**
- Lecture immédiate du traitement par prise
- **Détachables à la journée et au moment de prise**
- Légers et faciles d'utilisation : ouverture par prédécoupe


## Des piluliers écoresponsables 100 % recyclables

- Blisters fabriqués avec 50 à 80 % de matière recyclée (APET – grade alimentaire)
- Réutilisation en matériaux ou valorisation énergétique

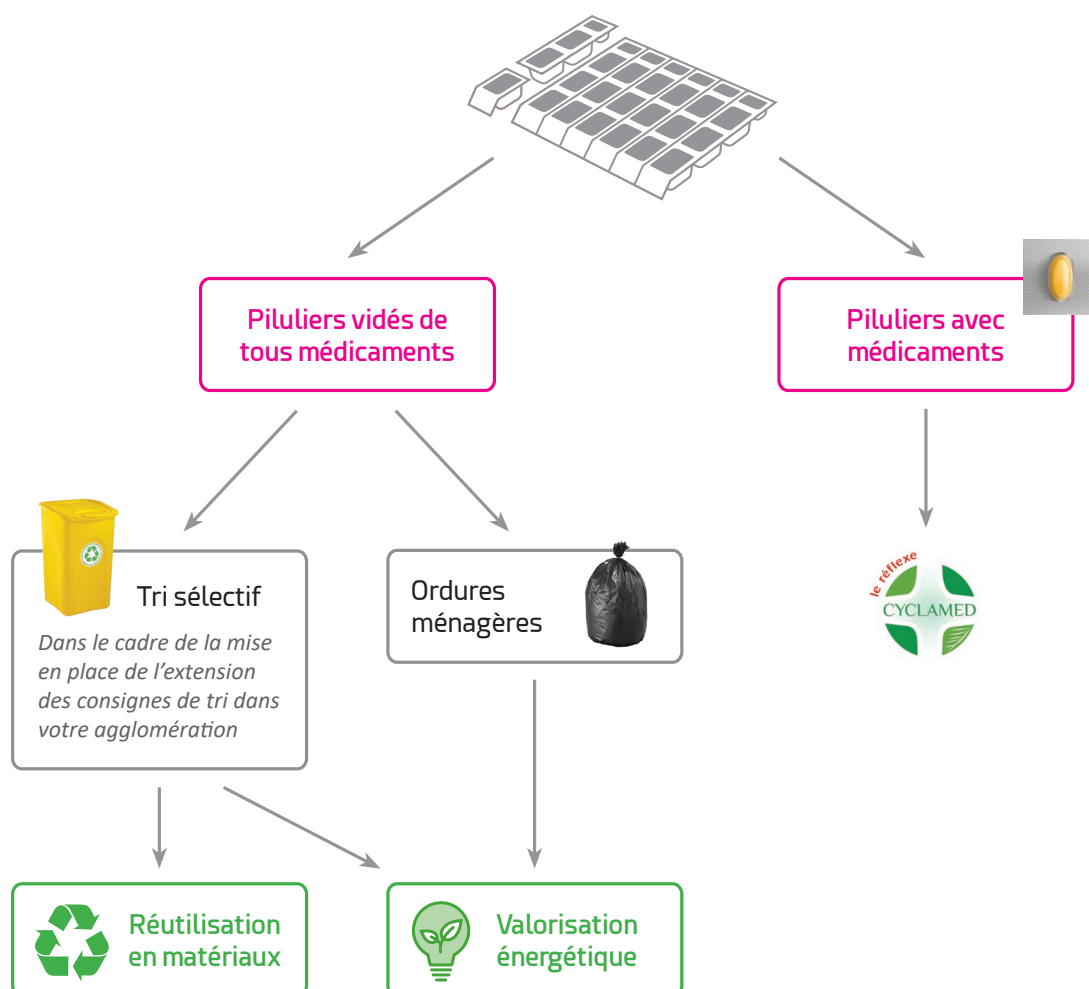

# Pilulier Pili®

Idéal pour les établissements : EHPAD, MAS, FAM...

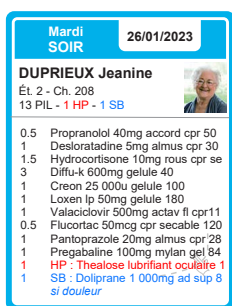

**Visualisation du traitement en un coup d'oeil**

**Pilulier au format A3**

**Adapté aux médicaments en conditionnement primaire**

formes sèches en blister et sachets

**Jours de prise identifiés par couleur**

Remplissage et scellage du pilulier à l'aide d'un **préparatoire lumineux** ou d'un plateau de préparation

## Remplissage guidé du pilulier Pili®

à l'aide d'un préparatoire lumineux relié au logiciel Pili® Soft



**Sécurisation complète du remplissage**



**Gain de temps à la préparation**




**Sur le préparatoire lumineux :**  
affichage des cases à remplir par LED

	LUNDI 22/03/2021	MARDI 23/03/2021	MERCREDI 24/03/2021	JEUDI 25/03/2021	VENDREDI 26/03/2021	SAMEDI 27/03/2021	DIMANCHE 28/03/2021
COUCHER	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits
SOIR	4 3 produits	4 3 produits	4 3 produits	4 3 produits	4 3 produits	4 3 produits	4 3 produits
MIDI	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits
MATIN	5 5 produits	5 5 produits	5 5 produits	5 5 produits	5 5 produits	5 5 produits	5 5 produits

**Sur le logiciel Pili® Soft :**  
indication du nombre de médicaments à positionner dans chaque case du pilulier

# Pilulier Pili® 4.21

Idéal pour les établissements : EHPAD, MAS, FAM...

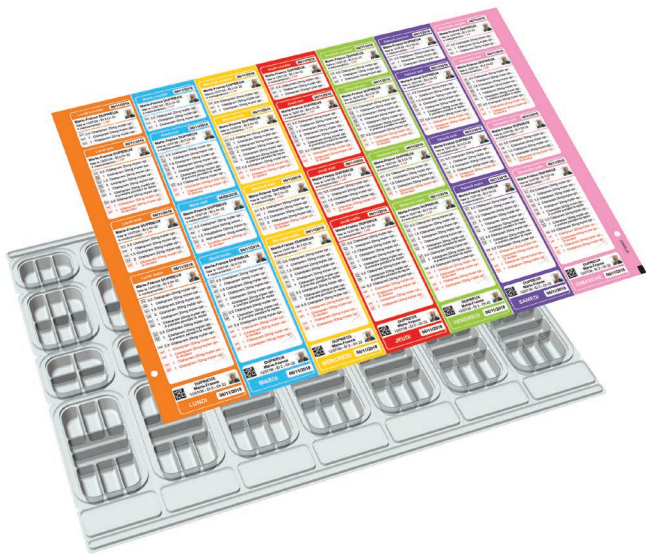

Pilulier  
au format  
**A3**

**Pilulier mixte**  
adapté :  
- aux formes sèches  
déconditionnées  
- aux médicaments  
en blister  
- aux petits sachets

**Jours  
de prise**  
identifiés  
par couleur

Remplissage et  
scellage du pilulier  
à l'aide d'un  
**préparatoire  
lumineux**

Mardi midi		06/01/2023
<b>DUPRIEUX Jeanine</b> Née le 12/07/36 - Ét 2 Ch 22 6 PIL - 1 HP		
C1	0,5 Citalopram 20mg mylan cpr...	
C2	1 Valaciclovir 500mg actavi...	
C3	1,5 Pregabaline 100mg mylan g...	
C4	2 Atorvastatine 10mg accord...	
HP	1 Seretide diskus 250mg cpr...	Si douleur

Visualisation du traitement  
en un coup d'oeil et  
identification des produits  
dans chaque compartiment

**4**  
moments  
de prise  
par jour


**21**  
compartiments  
individuels  
numérotés  
par jour

Coucher  
3 cases

Soir  
6 cases

Midi  
4 cases

Matin  
8 cases +  
1 petit sachet

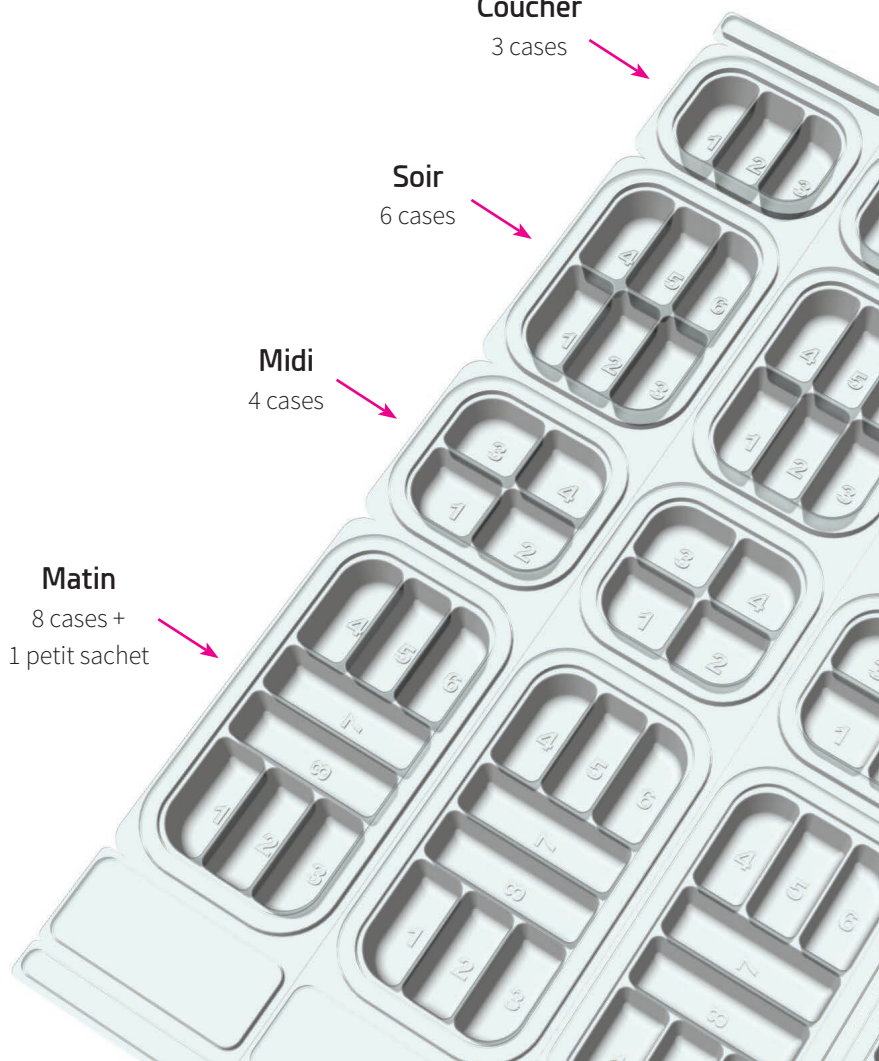

# Remplissage guidé du pilulier Pili® 4.21


à l'aide d'un préparatoire lumineux relié au logiciel Pili® Soft



Sécurisation complète  
du remplissage



Gain de temps  
à la préparation

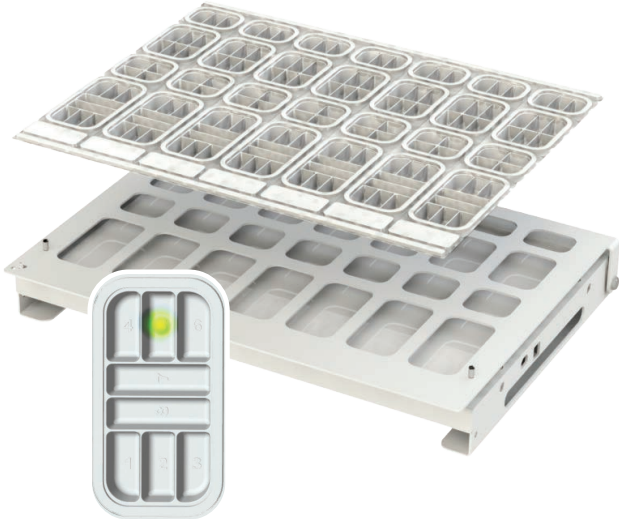

Sur le préparatoire lumineux :  
affichage des cases à remplir par LED

	LUNDI 17/08/2020	MARDI 18/08/2020	MERCREDI 19/08/2020	JEUDI 20/08/2020	VENDREDI 21/08/2020	SAMEDI 22/08/2020	DIMANCHE 23/08/2020
COUCHER							
SOIR	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits
MIDI	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits
MATIN	4 4 produits	3 3 produits	4 4 produits	3 3 produits	4 4 produits	3 3 produits	4 4 produits

Sur le logiciel Pili® Soft :  
indication des cases à remplir, avec une représentation  
du pilulier muni de toutes ses cases numérotées

## Pilulier Pili® Home

Idéal pour l'ambulatoire : à la maison, en foyer ou en résidence seniors,  
en autonomie ou accompagné par une infirmière libérale



Adapté aux  
médicaments en  
conditionnement  
primaire  
formes sèches  
en blister et sachets

Pilulier  
au format  
**A4**

Moments  
de prise  
identifiés  
par couleur

Remplissage et  
scellage du pilulier  
à l'aide d'un  
**plateau de  
préparation**

Mardi  
MATIN  
17/01/2023

**DUPRIEUX  
Jeanine**  
Née le 03/02/40  
11 PIL - 1 HP

1 Levothyrox 75mcg cpr seca  
1.5 Hydrocortisone 10mg rous  
3 Diffu-k 600mg gelule 40  
0.5 Propranolol 40mg teva cpr  
1 Loxen Ip 50mg gelule 180  
1 Valaciclovir 500mg actavis  
0.5 Flucortac 50mcg cpr sécabl  
1 Pregabaline 100mg eg gelu  
1 HP - Seretide diskus 500/5

Visualisation  
du traitement  
en un coup d'oeil



# ▶ Pili<sup>®</sup> Blade, outil de découpe des doses unitaires

La découpe des plaquettes de médicaments avec une paire de ciseaux est révolue.

**Avec Pili<sup>®</sup> Blade, réduisez la pénibilité et gagnez en productivité !**



## Réduction de la pénibilité

- Mouvement naturel sans effort
- Limite les TMS

## Gain de productivité

- Nombre réduit d'opérations
- Rapide et efficace
- Découpe tous types de plaquettes et de sachets

## Sécurité accrue

- Lame sécurisée non accessible
- Évite les coupures accidentelles avec la paire de ciseaux

## Hygiène

- Matériaux résistants aux produits de désinfection des établissements médico-sociaux et hospitaliers
- Démontage aisé pour faciliter le nettoyage

# ► Pili® et le circuit du médicament

Les piluliers Pili® sont compatibles avec la gamme PRATICIMA dédiée au circuit du médicament. Nous proposons le matériel nécessaire au transport, au stockage des piluliers et à la distribution des médicaments jusqu'au résident.

PRATICIMA est **spécialiste de la distribution nominative dans le secteur médico-social depuis plus de 30 ans** et équipe environ la moitié des EHPAD en France.



## Boîte de transport Pili® Box

- **Caisse de transport et de stockage**
- Capacité :
  - 7 piluliers Pili®
  - 18 piluliers Pili® 4.21
  - 16 piluliers Pili® Home
- **100 % sécurisé** avec un scellé
- **Poids réduit** : inférieur à 3 kg rempli
- Prise en main **ergonomique**



## Colonne et armoire de stockage

- **Armoire fixe avec fermeture à rideau et serrure à clé**
- **Colonne de stockage ouverte mobile**
- Capacité :
  - Armoire fixe : 30 à 90 piluliers Pili® ou Pili® 4.21
  - Colonne ouverte : 26 à 52 piluliers Pili® ou Pili® 4.21



## Chariots de distribution

- **Chariot Pili® Cart simple ou double colonne, 2 hauteurs au choix**  
Capacité : 56 à 140 patients
- **Chariot Neop® 600 x 400 simple colonne**  
Capacité : 70 patients
- Verrouillage par **serrure à code**
- Nombreux accessoires compatibles
- **Ergonomique et maniable**

# ► Mise en oeuvre de la solution Pili®



La solution Pili® est déployée avec une **équipe structurée**.



Accompagnement lors de la mise en place par nos **responsables commerciaux régionaux**



Formation des équipes (officine et EHPAD) et suivi par nos **animateurs PDA**



Dans le cadre de la PDA en établissement, un partenariat entre l'établissement et l'officine est **contractualisé par une convention**.



Un **pack visibilité** est proposé à l'officine pour développer la PDA ambulatoire (vitrophanie, flyers et vidéo).



**PRATICIMA**  
healthcare solutions

Rue du Pou du Ciel  
ZI de Reyrieux – CS20129 Reyrieux  
01600 TRÉVOUX – FRANCE

Tél : 04 74 00 98 11

Fax : 04 74 00 98 36

E-mail : [praticima@praticima.fr](mailto:praticima@praticima.fr)

[www.praticima.fr](http://www.praticima.fr)





# PARTIE 2

---

## Mobilier de soins et équipements de services





## Mobilier de soins et équipements de service

# Aménagement de salles de soins

**Forts d'une expertise de plusieurs années**, nous sommes en mesure de réaliser des salles de soins adaptées à votre environnement et répondant parfaitement à vos attentes.

**Inscrit dans un système global de stockage et de distribution du médicament, le concept modulaire permet à chacun de personnaliser sa salle de soins.**

Les matériaux et techniques de fabrication ont été choisis et développés en fonction des impératifs d'hygiène des établissements.

Photos non contractuelles



Modulaire



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Optimisation de l'espace
- ▶ Une salle de soins 100% personnalisée
- ▶ Mobilier compatible avec l'ensemble de la gamme PRATICIMA
- ▶ Installation par nos équipes


# Aménagement de salles de soins

La salle de soins est un point central de la préparation et de l'organisation des soins. Le savoir-faire de PRATICIMA dans l'aménagement de la salle de soins modulaire permet de proposer aux personnels de santé un aménagement personnalisé, fonctionnel, optimisé et adapté aux impératifs d'hygiène.

## ÉTAPE 1

### Analyse des besoins

Définition des contraintes et évaluation des besoins client

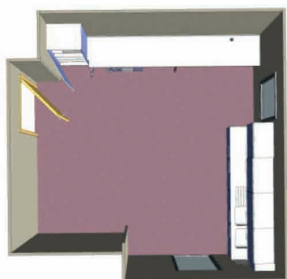

## ÉTAPE 4


### Installation

Installation de la salle de soins entièrement réalisée par nos équipes dans les délais convenus




## ÉTAPE 2 Conception sur mesure

Réalisation d'un schéma d'implantation et d'un plan 3D par notre bureau d'études

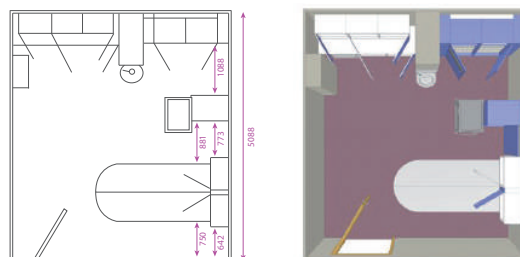

## ÉTAPE 3 Évolution du projet si besoin

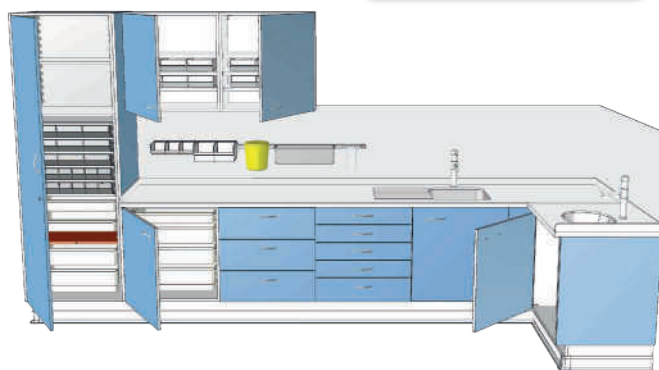

### Caractéristiques techniques

- ▶ Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminés
- ▶ Épaisseur des panneaux : 19 mm pour la structure, 8 mm pour le fond des meubles
- ▶ Classement au feu M3
- ▶ Meubles reposant sur vernis réglables avec support d'accroche pour plinthes
- ▶ Charnières avec système d'amortissement invisible
- ▶ Coloris au choix :

Pomme verte	Bleu horizon	Rouge	Camel	Gris perle	Blanc
-------------	--------------	-------	-------	------------	-------

Mobilier de soins et équipements de service

## Aménagement de salles de soins

### Mobilier compatible avec l'ensemble de la gamme PRATICIMA

Le mobilier proposé dans cette gamme est conçu pour accueillir les équipements (bacs, tiroirs, piluliers...) également utilisés dans l'ensemble des gammes de stockage et de distribution (chariots, armoires...) à la norme **600 x 400, 400 x 600 ou 400 x 400.**



### Une conception sur mesure

**Le respect de l'hygiène** est optimisé par une étanchéité parfaite des paillasse et l'utilisation de matériaux de qualité (résine PRATICIMA), résistants et garantis. Notre proposition 3D, réalisée par notre propre bureau d'études, vous permettra de visualiser aisément ce que sera votre future installation. Ce faisant, vous pourrez apporter toutes les améliorations souhaitables et réaliser **VOTRE** salle de soins dans un dialogue permanent et direct avec notre équipe technique.

# Neop | Plans de travail mobiles 600 x 400

## Préparation des soins dans les services d'hospitalisation ou dans les services du plateau technique

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- Plan mobile double ou triple colonne
- Hauteur\* 100
- Fermeture à rideau, à battant ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage
- Stockage sous plan de travail optimal avec un accès direct aux produits grâce aux tiroirs jointifs sans rideau
- Plan mobile sur roues : nettoyage facilité

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise du plan de travail, voir la partie « Données techniques »

## Configurations types - PREMIUM

Pensez à ajouter la référence couleur du plan de travail.


### Plan mobile double Premium

Plan mobile double 600 x 400 équipé de :

- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 75 mm
- 6 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 235 mm



#### Référence

8YPTM264H100TJ

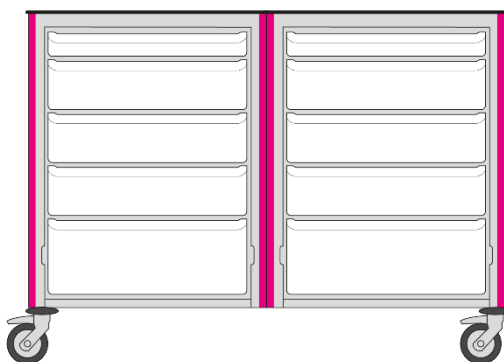

## Configurations types - BASIC

Pensez à ajouter la référence couleur du plan de travail.

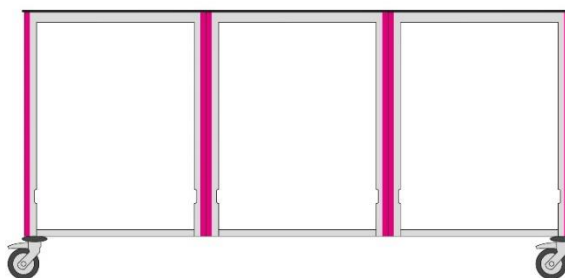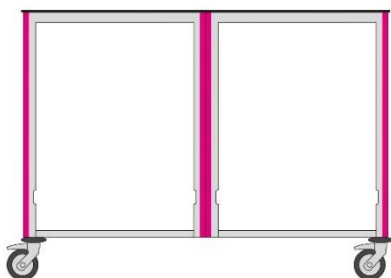

### Plans mobiles 2 colonnes

Référence	Désignation
8YPTM264H100	Plan mobile NEOP Basic 2 col. 600x400 H100 sans fermeture + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YPTM264H100T	Plan mobile NEOP Basic 2 col. 600x400 H100 sans fermeture + parois pour tiroirs télescopiques
8YPTM264H100FBC	Plan mobile NEOP Basic 2 col. 600x400 H100 avec battant et serrure à code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YPTM264H100TFBC	Plan mobile NEOP Basic 2 col. 600x400 H100 avec battant et serrure à code + parois pour tiroirs télescopiques
8YPTM264H100FRC	Plan mobile NEOP Basic 2 col. 600x400 H100 avec rideau et serrure à code + intercalaires standards (pas de 40 mm)

### Plan mobile 3 colonnes

Référence	Désignation
8YPTM364H100	Plan mobile NEOP Basic 3 col. 600x400 H100 sans Rideau avec intercalaires standard – pas de 40 mm



# Composition sur mesure

## ETAPE 1 - Structure du plan de travail mobile

Choix de la structure du plan de travail mobile en fonction de sa dimension

Plan de travail double colonne Pas de 40 mm	Plan de travail triple colonne Pas de 40 mm
8Y264H100P4.PM	8Y364H100P4.PM

Ces références comprennent :

- les caissons
- les roues
- les intercalaires

## ETAPE 2 - Personnalisation du plan de travail mobile

Sélection des éléments 1 à 4

Fermeture, serrure et bande de couleur à commander en double pour un plan de travail mobile double colonne ou en triple pour un plan de travail mobile triple colonne

		Plan de travail double colonne	Plan de travail triple colonne
1	Tablette supérieure	8Y001_6400CP2	8Y001_6400CP3
2	Fermeture à rideau	8Y002_6010F3 (x2)	8Y002_6010F3 (x3)
	Fermeture à battant	8Y002_0010F1 (x2)	8Y002_0010F1 (x3)

Le plan de travail mobile peut être commandée sans fermeture.

**ATTENTION !** Pour un modèle double colonne sans rideau ou à battant, il faut ajouter deux butées antichute réf. [8Y014](#). Pour un modèle triple colonne sans rideau ou à battant, il faut ajouter trois butées antichute réf. [8Y014](#).

3	Serrure à code	8Y003CODE3 (x2)	8Y003CODE3 (x3)
	Serrure à badge	8Y003BADGE3 (x2)	8Y003BADGE3 (x3)

Le plan de travail mobile peut être commandée sans serrure.

4	Couleur	Rose magenta	8Y004_0010RM (x2)	8Y004_0010RM (x3)
		Vert pomme	8Y004_0010VP (x2)	8Y004_0010VP (x3)
		Bleu céleste	8Y004_0010BC (x2)	8Y004_0010BC (x3)

\*Pour la hauteur précise, voir la partie « Données techniques »



Tablette supérieure en stratifié compact



Fermeture à rideau



Fermeture à battant



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs


Rail normalisé, poignée de poussée, tiroirs...

Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques

## Dimensions hors tout du plan mobile

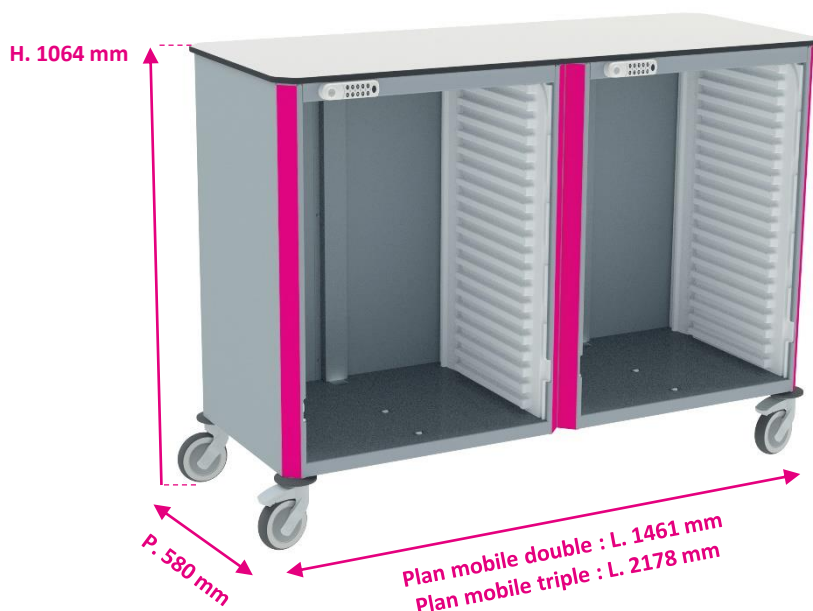

## Dimensions utiles du plan de travail

Plan mobile double :  
L. 1457 mm  
P. 562 mm

Plan mobile triple :  
L. 2174 mm  
P. 562 mm

## Hauteur du plan de travail

H. 1064 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Matières

Structure	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
Plan de travail	Stratifié compact ép. 10 mm
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture EPOXY
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - double blocage de la roue et du pivot	
Poids à vide	Double : 56 kg	Triple : 80 kg
Capacité	Double (pas de 40 mm) : - 38 pas pour plan mobile avec rideau - 40 pas pour plan mobile sans rideau ou avec fermeture à battant	Triple (pas de 40 mm) : - 57 pas pour plan mobile avec rideau - 60 pas pour plan mobile sans rideau ou avec fermeture à battant
Verrouillage	Code / Badge	

## Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions L X P x H	Double : L 0,80 x P 1,50 x H 1,20 m Triple : L 0,80 x P 2,20 x H 1,20 m
Poids (plan de travail + emballage)	Double : 68 kg Triple : 92 Kg	Volume	Double : 1,5 m <sup>3</sup> Triple : 2,2 m <sup>3</sup>

### Plan de préparation de soins ou plan de travail administratif

- Élément indispensable pour l'agencement d'une salle de soins
- Excellente résistante aux taches : liquides, fluides et produits chimiques
- Cuve en résine thermoformée : entretien facile
- Egouttoir usiné dans la masse
- Dossieret à congé arrondi pour faciliter le nettoyage
- Chant labo pour retenir l'eau



Robuste



Hygiénique



Ergonomique

- Paillasse sèche ou humide
- Cuve à droite ou à gauche
- Version fixe ou mobile à roulette
- Plateau en résine ou en stratifié compact
- Version avec ou sans dossieret
- Suspension de 2 ou 3 caissons Neop, hauteur 60 ou 80 de profondeur 400 (voir la fiche dédiée)



## Configurations types - PREMIUM

### Plan de travail tubulaire Premium

- Plan de travail en résine avec dossier + cuve à droite
- Robinetterie
- Piètement avec vérins

L. 1630 x P. 616 x H. 990-1060 mm

#### Référence

8YPTR2MCD\_V





## Composition sur mesure

Sélectionnez le piètement, le plan de travail et le kit roues pour une version mobile ou le kit vérin pour une version fixe (1 module = 1 caisson = 1 cuve)

### Piètement


Piètement pour 2 modules	Piètement pour 3 modules
8Y406	8Y407

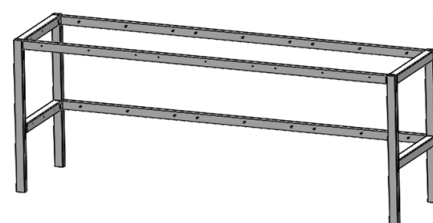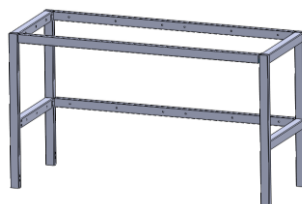

### Plan de travail


#### > En stratifié compact

	Plan de travail pour 2 modules	Plan de travail pour 3 modules
Avec dossier	8Y403	8Y405
Sans dossier	8Y402	8Y404

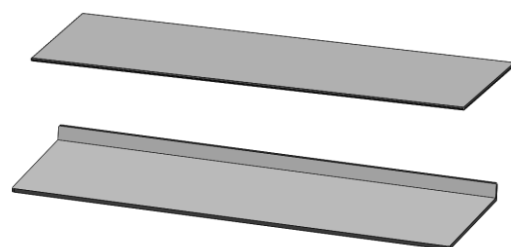


#### > En résine

	Plan de travail pour 2 modules	Plan de travail pour 3 modules
	Capacité 2 caissons	Capacité 3 caissons
Avec dossier	8Y400	8Y401
	Capacité 1 caisson + 1 cuve	Capacité 2 caissons + 1 cuve
Avec dossier + cuve à droite	8Y400CD	8Y401CD
Avec dossier + cuve à gauche	8Y400CG	8Y401CG

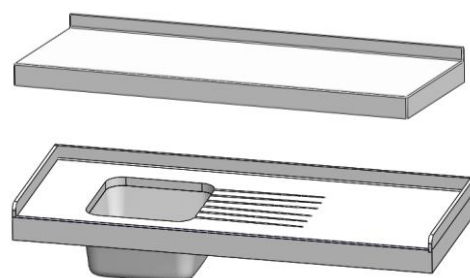


### Kit roues ou vérins

	Plan de travail pour 2 modules	Plan de travail pour 3 modules
Kit roues compatible avec les plans de travail en stratifié	8Y400_R	8Y400_R
Kit vérin compatible avec les plans de travail en résine et stratifié	8Y400_V	8Y400_V

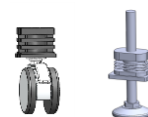

# Données techniques Paillasse sèche

Plan de travail 2 modules F600  
avec dossier et roulettes  
en stratifié compact

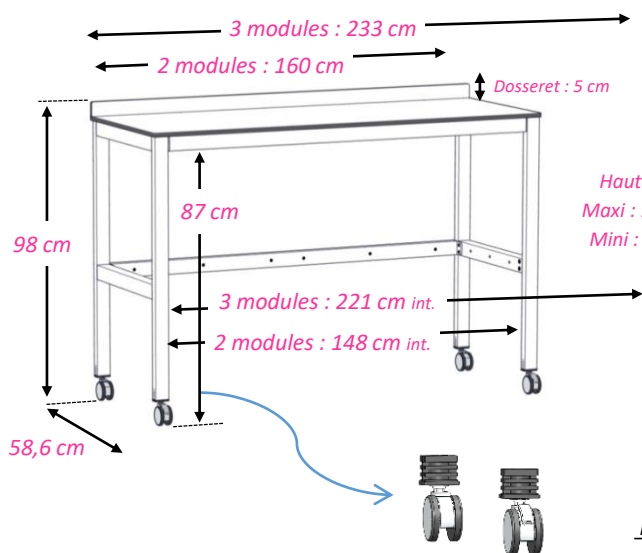


Avec un (des) caisson(s) suspendu(s),  
le déplacement du plan de travail mobile doit être limité.

Les caissons ne sont pas inclus :

Voir la fiche technique "Caissons suspendus Neop Ht 60 et Ht 80" et son "kit d'accrochage ref. 8Y546"  
et/ou Voir la fiche technique "Caissons mobiles Neop"

Plan de travail 3 modules F600  
avec dossier et pieds-vérin  
en résine acrylique

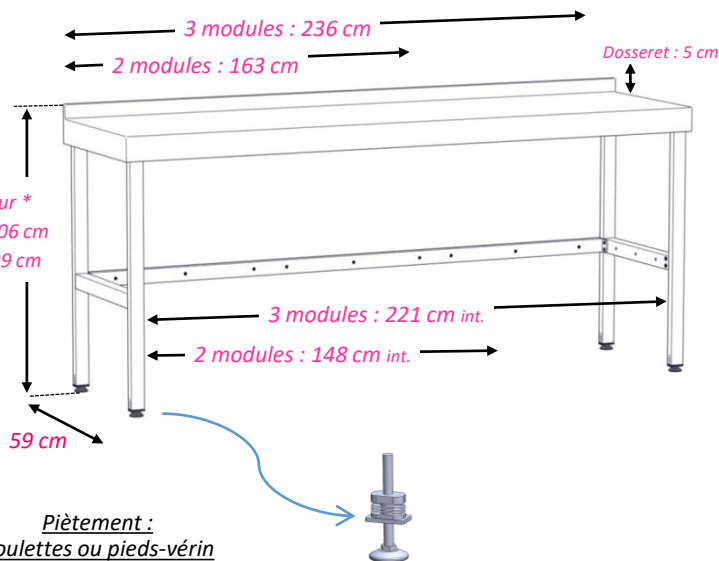

Piètement :  
roulettes ou pieds-vérin

\* Hauteur utile sur plan de travail

Hauteur \*  
Maxi : 106 cm  
Mini : 99 cm

## Matières

<b>Structure</b>	Structure en tube rectangulaire 50*30 mm en acier traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Plan de travail</b>	Stratifié compact ép. 10 mm ou résine acrylique ép. 13 mm, avec ou sans dossier
<b>Roues</b>	Double bandage en PolyAmide (PA) - Bande souple en PolyURéthane (PUR) Roulement à bille en acier
<b>Pieds-vérin</b>	PolyPropylène (PP) + acier zingué

## Informations diverses

<b>Roues et pieds</b>	Roues : diamètre 65 mm - double galets – 4 pivotantes dont 2 à frein Pied-vérin : M10x120 mm, réglage possible 7 cm maxi
<b>Poids nu</b>	Avec plan en stratifié compact : 43 kg (2 modules) et 51 kg (3 modules) Avec plan en résine acrylique : 65 kg (2 modules) et 85 kg (3 modules)
<b>Charge admissible</b>	300 kg au total, pour tous modèles


## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions</b>	2 modules : L. 2,20 x P. 0,9 x H. 1,10 m 3 modules : L. 2,50 x P. 0,9 x H. 1,10 m
<b>Poids (plan de travail + emballage)</b>	<u>Plan en stratifié compact:</u> 2 modules : 53 kg 3 modules : 61 kg <u>Plan en résine acrylique :</u> 2 modules : 75 kg 3 modules : 95 kg	<b>Volume</b>	2 modules : 2,2 m <sup>3</sup> 3 modules : 2,4 m <sup>3</sup>

# Données techniques Paillasses humides


*Plan de travail en résine acrylique  
1 module, cuve à gauche*

*Plan de travail en résine acrylique  
2 modules, cuve à droite*

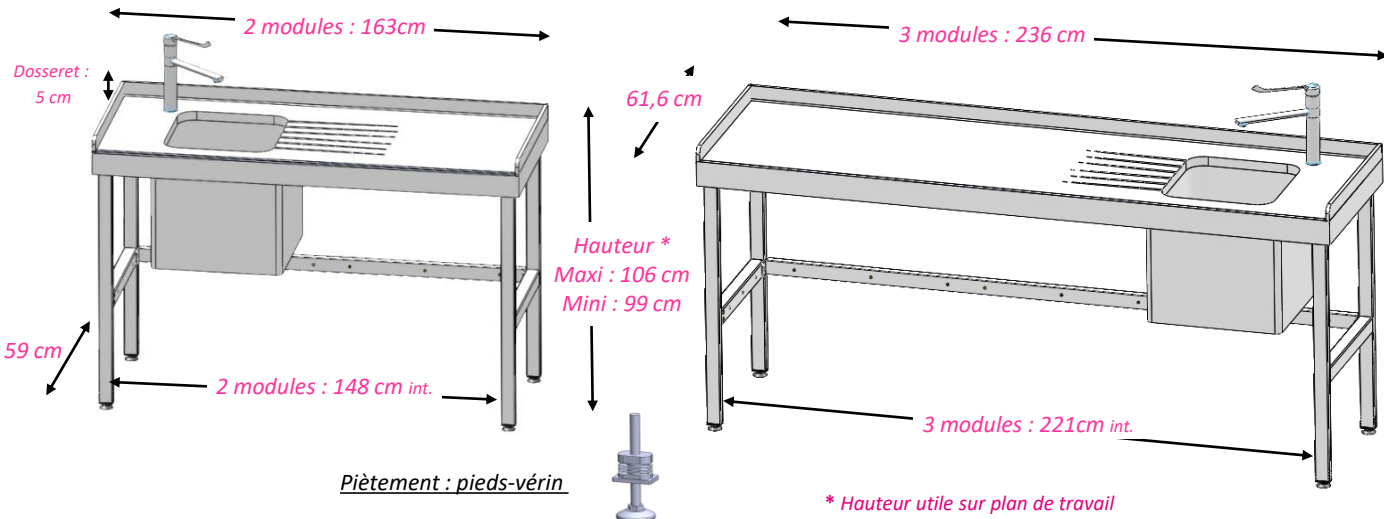

## Au choix : cuve à droite ou à gauche

Les caissons ne sont pas inclus : voir la fiche technique "Caissons suspendus Neop" et "Caissons mobiles Neop"

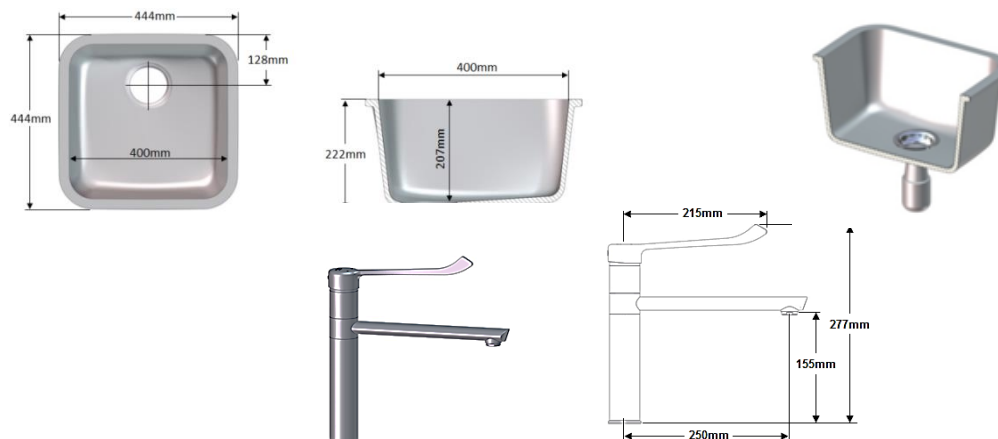

## Matières

<b>Structure</b>	Structure en tube rectangulaire 50*30 mm en acier traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Plan de travail et cuve</b>	Résine acrylique ép. 13 mm, doublé d'un panneau d'aggloméré ép. 19 mm
<b>Pieds-vérin</b>	Polypropylène (PP) + acier zingué

## Informations diverses

<b>Plan de travail</b>	Dossieret 3 cotés, égouttoir. Chant labo, sur l'avant pour la retenue d'eau Ht 8 mm Ht totale : 32 mm - Cache-cuve, bonde et siphon réglable inclus
<b>Pieds</b>	Pied-vérin : M10x120 mm, réglage possible 7 cm maxi
<b>Poids nu</b>	Avec plan en résine acrylique : 68 kg (2 modules) et 87 kg (3 modules)
<b>Mitigeur</b>	Type hospitalier bec orientable - Lg : 250 mm
<b>Charge admissible</b>	300 kg au total, pour tous modèles

## Emballage : voir idem fiche paillasse sèche

<b>Poids</b>	2 modules : 73 kg 3 modules : 92 kg
--------------	--

### Plan de préparation de soins ou plan de travail administratif

- Élément indispensable pour l'agencement d'une salle de soins
- Excellente résistance aux taches : liquides, fluides et produits chimiques
- Cuve en résine thermoformée : entretien facile
- Egouttoir usiné dans la masse
- Dossieret à congé arrondi pour faciliter le nettoyage
- Chant labo pour retenir l'eau



Robuste



Hygiénique



Ergonomique

- Paillasse sèche ou humide
- Cuve à droite ou à gauche
- Version fixe ou mobile à roulettes
- Plateau en résine ou en stratifié compact
- Version avec ou sans dossieret
- Suspension de 2 ou 3 caissons Neop, hauteur 80 de profondeur 600 (voir la fiche dédiée)




# Sélection du plan de travail tubulaire

Sélection du piétement, du plan de travail, et du kit roues pour une version mobile ou kit vérin pour une version fixe

## Piétement


Piétement pour 2 modules	Piétement pour 3 modules
8Y606	8Y607

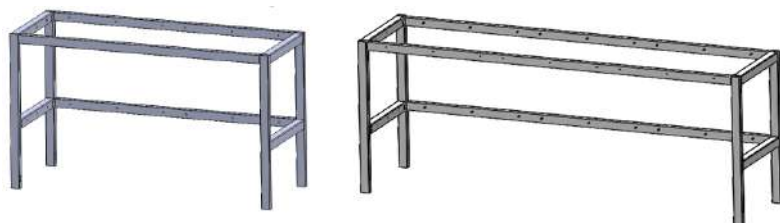

## Plan de travail


### > En stratifié compact

	Plan de travail pour 2 modules	Plan de travail pour 3 modules
Avec dossieret	8Y603	8Y605
Sans dossieret	8Y602	8Y604

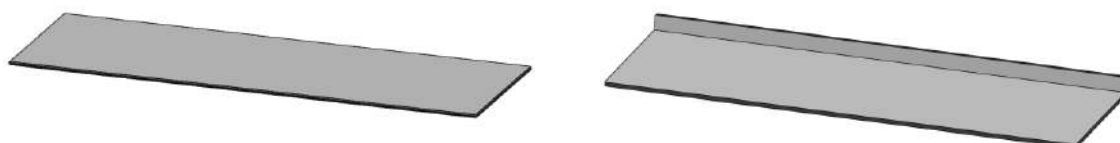

### > En résine

	Plan de travail pour 2 modules	Plan de travail pour 3 modules
	Capacité 2 caissons	Capacité 3 caissons
Avec dossieret	8Y600	8Y601
	Capacité 1 caisson + 1 cuve	Capacité 2 caissons + 1 cuve
Avec dossieret + cuve à droite	8Y600CD	8Y601CD
Avec dossieret + cuve à gauche	8Y600CG	8Y601CG

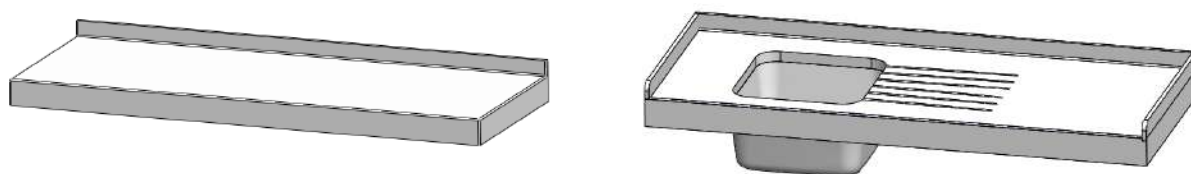

## Kit roues ou vérins


	Plan de travail pour 2 modules	Plan de travail pour 3 modules
kit roues compatible avec les plans de travail en stratifié	8Y400_R	8Y400_R
kit vérin compatible avec les plans de travail en résine et stratifié	8Y400_V	8Y400_V





# Données techniques Paillasses sèches


Plan de travail 2 modules F400, avec dossieret et pieds-vérins en résine acrylique

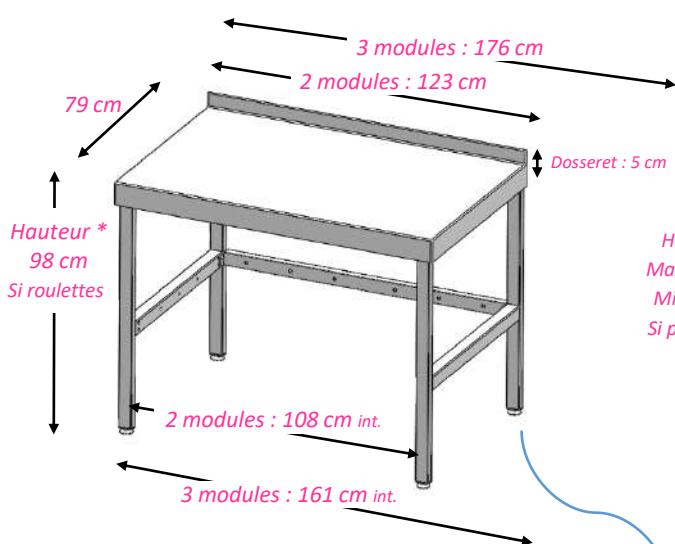

\* Hauteur utile sur plan de travail

Avec un (des) caisson(s) suspendu(s), le déplacement du plan de travail mobile doit être limité.

Plan de travail 3 modules F400 avec dossieret et pieds-vérin en stratifié compact

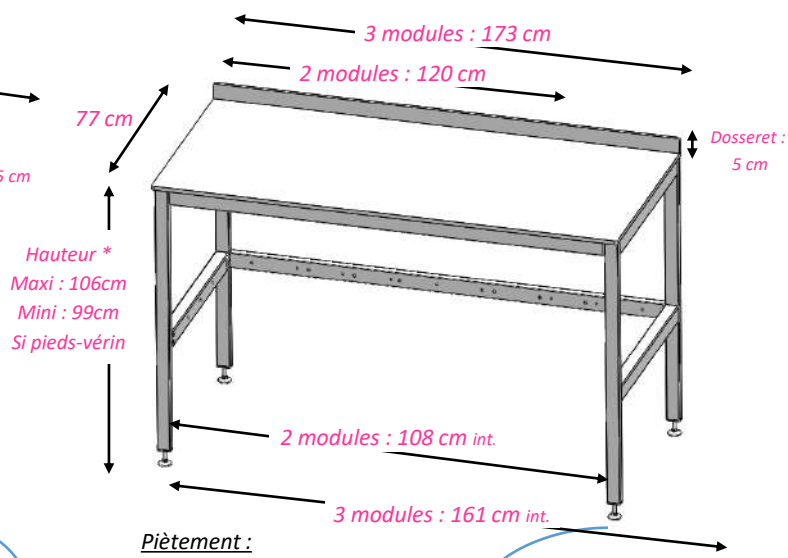

Piètement :  
roulettes ou pieds-vérin



Les caissons ne sont pas inclus : Voir la fiche technique "Caissons suspendus Neop Ht 60 et Ht 80" et son "kit d'accrochage réf. 8Y547" et/ou voir la fiche technique "Caissons mobiles Neop"

## Matières

Structure	Structure en tube rectangulaire 50*30 mm en acier traité anticorrosion à l'EPOXY
Plan de travail	Stratifié compact ép. 10 mm ou résine acrylique ép. 13 mm, avec ou sans dossieret
Roues	Double bandage en PolyAmide (PA) - Bande souple en PolyURéthane (PUR) Roulement à bille en acier
Pieds-Vérin	PolyPropylène (PP) + acier zingué


## Informations diverses

Roues et pieds	Roues : diamètre 65 mm, double galets – 4 pivotantes dont 2 à frein Pied-vérin : M10 x 120 mm, réglage possible 7 cm maxi
Poids à vide	Avec plan en stratifié compact: 43 kg (2 modules) et 51 kg (3 modules) Avec plan en résine acrylique : 65 kg (2 modules) et 85 kg (3 modules)
Charge admissible	300 kg au total, pour tous modèles

## Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions L X P x H	2 modules : L 1,60 x P 0,9 x H 1,10 m 3 modules : L 2,20 x P 0,9 x H 1,10 m
Poids (plan de travail + emballage)	<u>Plan en stratifié compact :</u> 54 kg (2 modules) 60 kg (3 modules) <u>Plan en résine acrylique :</u> 76 kg (2 modules) 94 kg (3 modules)	Volume	2 modules : 1,6 m <sup>3</sup> 3 modules : 2,2 m <sup>3</sup>

# Données techniques Paillasses humides

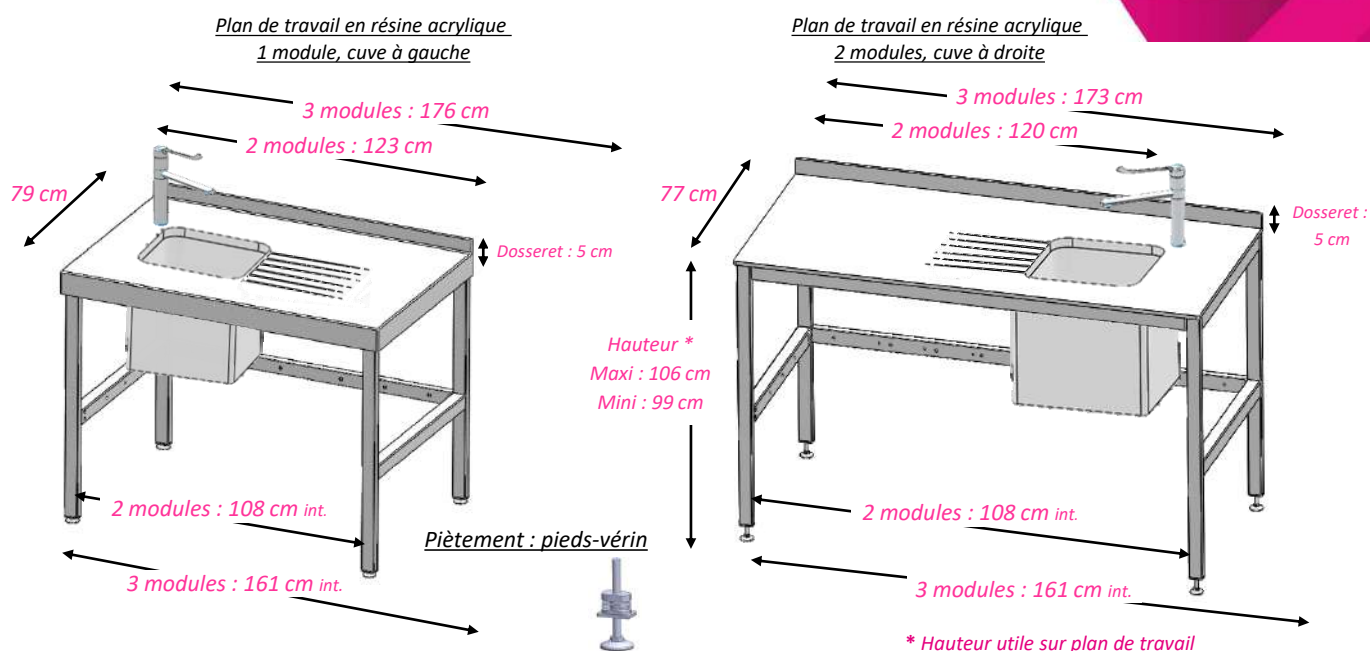

**Au choix : cuve à droite ou à gauche**

Les caissons ne sont pas inclus : voir la fiche technique "Caissons suspendus Neop" et "Caissons mobiles Neop"



## Matières

<b>Structure</b>	Structure en tube rectangulaire 50*30 mm en acier traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Plan de travail et cuve</b>	Résine acrylique ép. 13 mm, doublé d'un panneau d'aggloméré ép. 19 mm
<b>Pieds-vérin</b>	Polypropylène (PP) + acier zingué

## Informations diverses

<b>Plan de travail</b>	Dossieret 3 cotés, égouttoir - Chant labo, sur l'avant pour la retenue d'eau Ht 8mm Ht totale : 32 mm - Cache-cuve, bonde et siphon réglable inclus
<b>Pieds</b>	Pied-vérin : M10 x 120 mm - Réglage possible 7 cm maxi
<b>Poids à vide</b>	Avec plan en résine acrylique : 68 kg (2 modules) et 87 kg (3 modules)
<b>Mitigeur</b>	Type hospitalier bec orientable – Lg : 250 mm
<b>Charge admissible</b>	300 kg au total, pour tous modèles

## Emballage : idem fiche paillasse sèche

<b>Poids</b>	76 kg (2 modules) 94 kg (3 modules)
--------------	--

## Alternative aux plans de travail fixes ou mobiles

- Élément indispensable pour l'agencement d'une salle de soins
- Excellente résistante aux taches : liquides, fluides et produits chimiques
- Sans piètement au sol, conçu pour un nettoyage fréquent



Robuste



Hygiénique



Ergonomique




- 3 longueurs : 100, 150 ou 220 cm
- Pour caissons suspendus ou mobiles, hauteur 60 ou 80 (voir la fiche dédiée)

	Longueur 100	Longueur 150	Longueur 220
Plan suspendu	8Y530_100	8Y530_150	8Y530_220
Rail technique pour cloison standard	8A510_100	8A510_150	8A510_220
Rail technique pour cloison faible	8A520_100	8A520_150	8A520_220

Equerre droite	8A540_D
Equerre gauche	8A540_G

## Données techniques

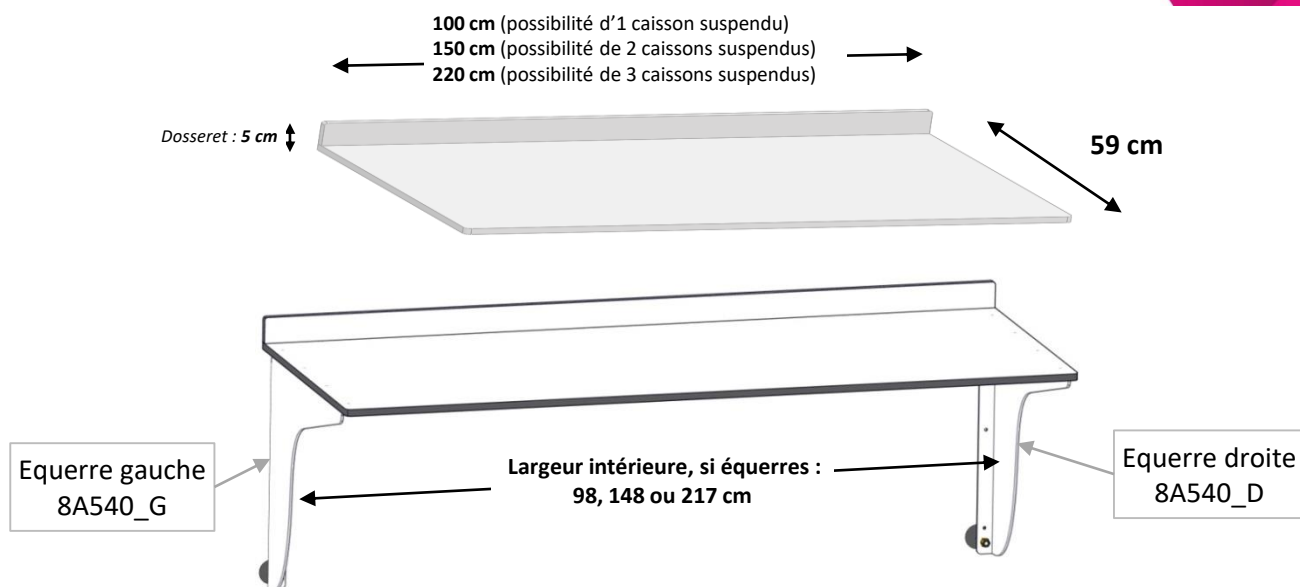

### Matières

<b>Plan de travail</b>	Stratifié compact blanc ép. 10 mm
<b>Dossieret</b>	Stratifié compact blanc ép. 10 mm ht. 50 mm
<b>Equerre de fixation</b>	Acier 40/10° traité EPOXY blanc

### Informations diverses


<b>Poids</b>	7,7 kg (Lg : 100) / 11 kg (Lg : 150) / 16 kg (Lg : 220)
<b>Charge admissible</b>	La charge maximum dépend de la nature du mur porteur

### Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée
------------------------	--

**EXEMPLES d'UTILISATION:** (Les caissons et équerres ne sont pas inclus)

Voir la fiche technique "Caissons suspendus Neop Ht 60 et Ht 80" et son "kit d'accrochage réf. 8Y545"  
et/ou voir la fiche technique "Caissons mobiles Neop"

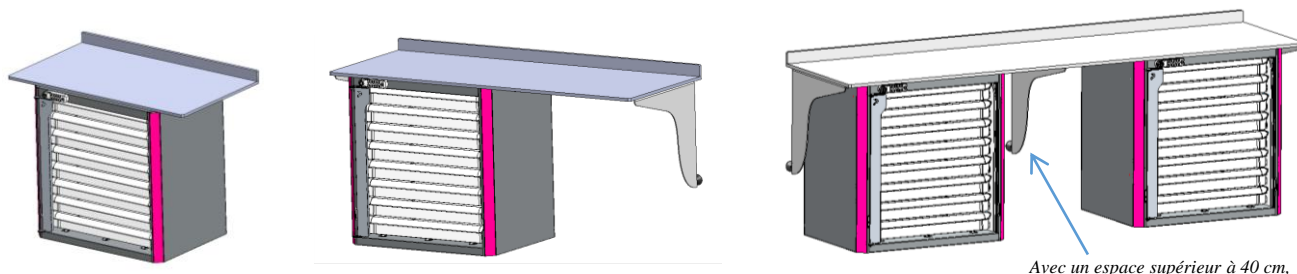

Charge max.: 60 kg / caisson

Avec un espace supérieur à 40 cm,  
une équerre est nécessaire

### Le complément idéal du plan de travail

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en acier
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Un look unique et une harmonie de couleurs
- Espace de stockage supplémentaire, sans perte d'espace, ni encombrement au sol
- Nettoyage complet de la salle de soins
- Adaptation des caissons sur tous nos plans de travail tubulaires fixes et mobiles, ainsi que sur nos plans suspendus



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- Hauteur\* : 60 ou 80
- Profondeur 400
- Fermeture à rideau ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage

#### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise du caisson, voir la partie « Données techniques »

# Configurations types - BASIC

Pour la hauteur précise, voir les données techniques

## ETAPE ① - Sélection du caisson suspendu

### Caissons hauteur 60 cm

Référence	Désignation
8YCAS164H60	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H60 sans rideau

### Caissons hauteur 80 cm

Référence	Désignation
8YCAS164H80	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H80 sans rideau
8YCAS164H80FRC	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H80 rideau + serrure code

## ETAPE ② - Sélection de la couleur

Réf. caisson hauteur 60 cm	Réf. caisson hauteur 80 cm	Désignation
8Y004_0006RM	8Y004_0008RM	Rose magenta 
8Y004_0006VP	8Y004_0008VP	Vert pomme 
8Y004_0006BC	8Y004_0008BC	Bleu céleste 

## ETAPE ③ - Sélection du kit de suspension

Kit de suspension pour plan tubulaire	Kit de suspension pour plan suspendu
8Y546	8Y545

## Composition sur mesure

### ETAPE ① - Structure du caisson suspendu + kit de suspension

Sélection du caisson et du kit de suspension

Caisson suspendu hauteur 60 cm*	Caisson suspendu hauteur 80 cm*
8Y164H60P4.S1	8Y164H80P4.S1

Ces références comprennent :

- le caisson
- les intercalaires

Kit de suspension pour plan tubulaire	Kit de suspension pour plan suspendu
8Y546	8Y545

### ETAPE ② - Personnalisation du caisson suspendu

Sélection des éléments 1 à 3

	Caisson suspendu hauteur 60 cm*	Caisson suspendu hauteur 80 cm*
<b>1</b> Fermeture à rideau	8Y002_6006F3	8Y002_6008F3

Le caisson suspendu peut être commandé sans fermeture.

**ATTENTION !** Dans ce cas, il faut ajouter la butée antichute réf. [8Y014](#).

<b>2</b>	Serrure à code	8Y003CODE3	8Y003CODE3
	Serrure à badge	8Y003BADGE3	8Y003BADGE3

Le caisson suspendu peut être commandé sans serrure.

<b>3</b>	Couleur	Rose magenta	8Y004_0006RM	8Y004_0008RM
		Vert pomme	8Y004_0006VP	8Y004_0008VP
		Bleu céleste	8Y004_0006BC	8Y004_0008BC



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques




8Y546 : Kit de suspension plan tubulaire



8Y545 : Kit de suspension plan suspendu

H 80 : 722 mm

H 60 : 562 mm

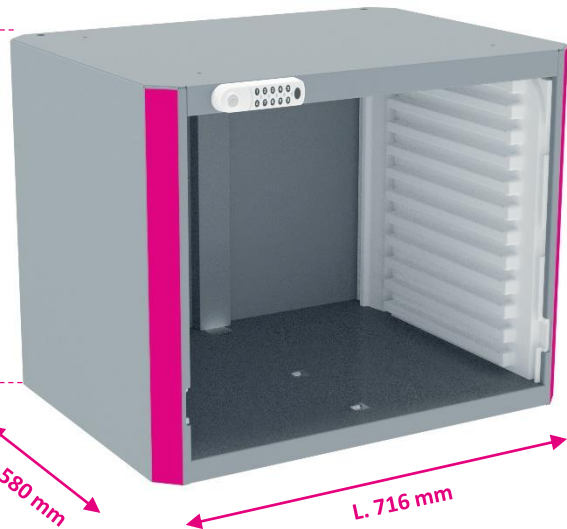

P. 580 mm

L. 716 mm

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson acier électro-zingué monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
<b>Suspensions</b>	Kit de suspension sur un plan suspendu : réf. 8Y545 Kit de suspension sur un plan tubulaire : réf. 8Y546
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Poids à vide</b>	H 60 : 25 kg / H 80 : 27 kg	
<b>Capacité</b>	H 60 (pas de 40 mm) : - 11 pas pour caisson avec rideau - 12 pas pour caisson sans rideau	H 80 (pas de 40 mm) : - 15 pas pour caisson avec rideau - 16 pas pour caisson sans rideau
<b>Verrouillage</b>	Code / Badge	

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	H 60 : L 0,80 x P 1,20 x H 1 m H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m
<b>Poids (caisson + emballage)</b>	H 60 : 37 kg H 80 : 39 kg	<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>



### Le complément idéal du plan de travail

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en acier
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Un look unique et une harmonie de couleurs
- Espace de stockage supplémentaire, sans perte d'espace, ni encombrement au sol
- Nettoyage complet de la salle de soins
- Adaptation des caissons sur tous nos plans de travail tubulaires fixes et mobiles, ainsi que sur nos plans suspendus



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- Hauteur\* 80
- Profondeur 600
- Fermeture à rideau ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage



#### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

\*Pour la hauteur précise du caisson, voir la partie « Données techniques »

# Composition sur mesure

## ETAPE 1 - Structure du caisson suspendu + kit de suspension

Sélection du caisson et du kit de suspension

<b>Caisson suspendu hauteur 80 cm*</b> Pas de 40 mm
8Y146H80P4.S1

Cette référence comprend :

- le caisson
- les intercalaires

<b>Kit de suspension pour plan tubulaire</b>
8Y547

## ETAPE 2 - Personnalisation du caisson suspendu

Sélection obligatoire des éléments 1 à 3

	<b>Caisson suspendu hauteur 80 cm*</b>
<b>1</b>	<b>Fermeture à rideau</b> 8Y002_4608F3

Le caisson suspendu peut également être commandé sans fermeture.

**ATTENTION !** Dans ce cas, il faut ajouter la butée antichute réf. [8Y014](#).

<b>2</b>	<b>Serrure à code</b>	8Y003CODE3
	<b>Serrure à badge</b>	8Y003BADGE3

Le caisson suspendu peut également être commandé sans serrure.

<b>3</b>	<b>Couleur</b>	Rose magenta : 8Y004_0008RM Vert pomme : 8Y004_0008VP Bleu céleste : 8Y004_0008BC
----------	----------------	---

\*Pour la hauteur précise, voir la partie « Données techniques »



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## ETAPE 3 - Accessoires et aménagements intérieurs


Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques



8Y547: Kit de suspension plan suspendu

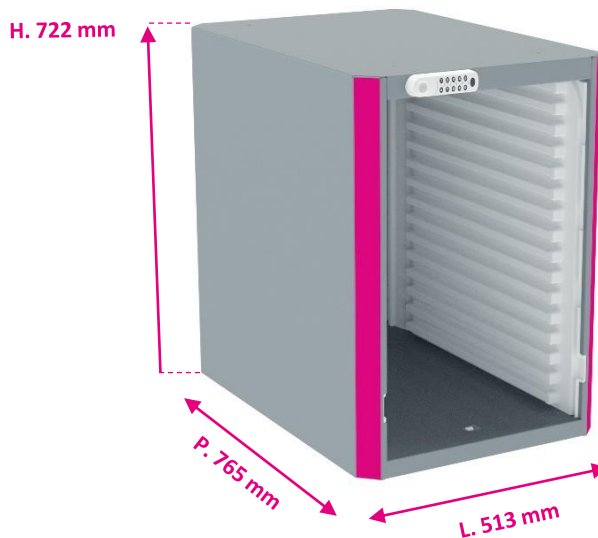

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc acier électro-zingué soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
<b>Suspensions</b>	Kit de suspension sur un plan tubulaire : réf. 8Y547
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Poids à vide</b>	27 kg
<b>Capacité</b>	15 pas de 40 mm pour caisson avec rideau 16 pas de 40 mm pour caisson sans rideau
<b>Verrouillage</b>	Code / Badge

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée	<b>Dimensions L X P x H</b>	L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m
<b>Poids (caisson + emballage)</b>	39 kg	<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>



# Neop | Caissons mobiles 600 x 400

## Optimisation du stockage en salles de soins et dans les plateaux techniques

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier (hauteur 60 et 80)
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Léger et maniable
- Ergonomique : conçu pour le confort du personnel soignant
- Personnalisable : identification des services sur demande



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- Caisson simple colonne
- 2 hauteurs\* : 60 ou 80
- Fermeture à rideau ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code ou à badge, ou sans verrouillage

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise du caisson, voir la partie « Données techniques »

## Configurations types - PREMIUM

Pensez à ajouter la référence couleur du caisson.


### Caisson mobile Premium

Caisson 600 x 400 H. 80 équipé de :

- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm

#### Référence

8YCAM164H80TJ

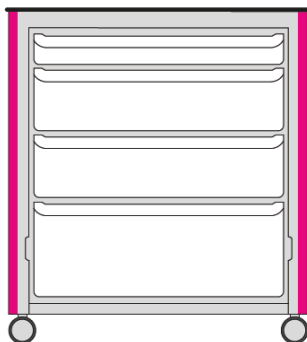

## Configurations types - BASIC

Pensez à ajouter la référence couleur du caisson.

### Caissons hauteur 60 cm

Référence	Désignation
8YCAM164H60	Caisson mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H60 sans rideau

### Caissons hauteur 80 cm

Référence	Désignation
8YCAM164H80	Caisson mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H80 sans rideau
8YCAM164H80FRC	Caisson mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H80 rideau + serrure code

## Composition sur mesure

### ETAPE 1 - Structure du caisson

Choix de la structure du caisson en fonction de la hauteur

Caisson mobile hauteur 60 cm* Pas de 40 mm	Caisson mobile hauteur 80 cm* Pas de 40 mm
8Y164H60P4.CM	8Y164H80P4.CM

Ces références comprennent :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires

### ETAPE 2 - Personnalisation du caisson

Sélection des éléments 1 à 4

		Caisson mobile hauteur 60 cm*	Caisson mobile hauteur 80 cm*
1	Tablette supérieure en stratifié compact	8Y001_6400CP1	8Y001_6400CP1

2	Fermeture à rideau	8Y002_6006F3	8Y002_6008F3
---	--------------------	--------------	--------------

Le caisson mobile peut être commandé sans fermeture.

**ATTENTION !** Dans ce cas, il faut ajouter la butée antichute réf. 8Y014.

3	Serrure à code	8Y003CODE3	8Y003CODE3
	Serrure à badge	8Y003BADGE3	8Y003BADGE3

Le caisson mobile peut être commandé sans fermeture.

4	Couleur	Rose magenta	8Y004_0006RM	8Y004_0008RM
		Vert pomme	8Y004_0006VP	8Y004_0008VP
		Bleu céleste	8Y004_0006BC	8Y004_0008BC

\*Pour la hauteur précise du plan de travail, voir la partie « Données techniques »



Tablette supérieure  
en stratifié compact



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, rail normalisé, bras informatique, poubelle, tiroir...

Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques

## Dimensions hors tout du caisson

H 80 : 805 mm

H 60 : 645 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.



## Dimensions utiles du plan de travail

L. 738 mm

P. 562 mm



## Hauteur du plan de travail

H 80 : 805 mm

H 60 : 645 mm

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson acier monobloc électro-zingué soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY	
<b>Plan de travail</b>	Stratifié compact ép. 10 mm	
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene)	
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm	
<b>Roues</b>	Bandage double en caoutchouc non tachant, chape polyamide (PA)	
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant	
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique	

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 65 mm - 2 à frein + 2 pivotantes	
<b>Poids à vide</b>	H 60 : 25 kg	H 80 : 27 kg
<b>Capacité</b>	H 60 (pas de 40 mm) : - 11 pas pour caisson avec rideau - 12 pas pour caisson sans rideau	H 80 (pas de 40 mm) : - 15 pas pour caisson avec rideau - 16 pas pour caisson sans rideau
<b>Verrouillage</b>	Serrure à code (avec clé de secours) / Serrure à badge	

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	H 60 : L 0,80 x P 1,20 x H 1 m H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m
<b>Poids (caisson + emballage)</b>	H 60 : 37 kg H 80 : 39 Kg	<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>



## Le complément idéal du plan de travail fixe ou mobile

- Robustesse : excellente résistance, structure en acier soudé monobloc peint époxy
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Hauteur ergonomique



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Porte escamotable à l'intérieur du placard : pas de gêne pour l'accès aux produits
- Serrure en option : stockage possible de médicaments, produits à risques, dossiers confidentiels
- Nettoyage aisé : le placard, la porte et les intercalaires sont démontables sans outil



# Composition sur mesure

## ETAPE 1 - Structure du placard

<b>Placard mural</b> Pas de 40 mm
8Y164.MU

Cette référence comprend :

- le caisson
- les intercalaires
- 1 étagère

## ETAPE 2 - Accessoires et aménagements intérieurs


Equipements optionnels	
Option serrure à clé pour placard mural suspendu	8A026_04
Etagère supplémentaire pour placard mural suspendu	8A225

Tiroirs :

*Se référer aux fiches dédiées.*



## Données techniques

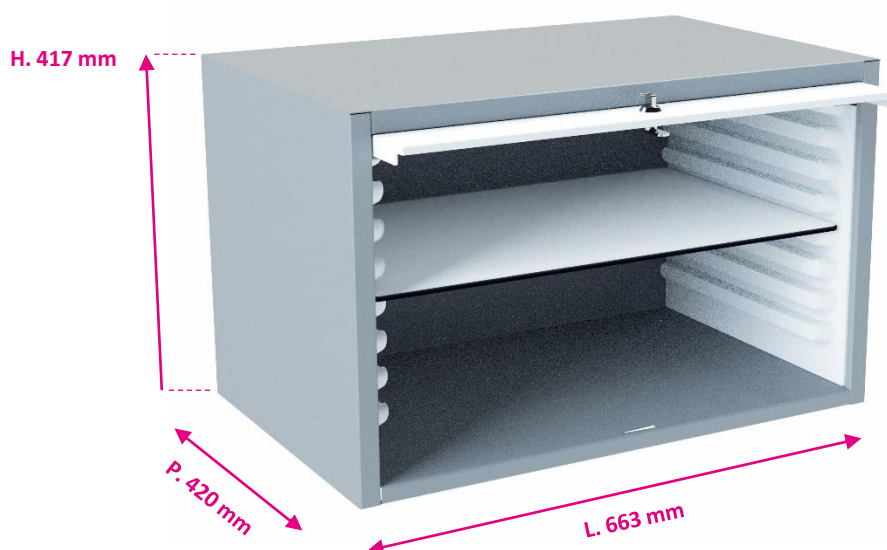

### Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc acier soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Porte : ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)

### Informations diverses

<b>Poids à vide</b>	18 kg
<b>Charge admissible</b>	40 kg
<b>Verrouillage (en option)</b>	Clé
<b>Equipements</b>	1 étagère 2 équerres de fixation murales

### Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée
<b>Poids (placard + emballage)</b>	25 kg
<b>Volume</b>	0,2 m <sup>3</sup>
<b>Dimensions</b>	L. 0,45 x P. 0,75 x H. 0,53 m



# Neop | Chariots de soins 600 x 400

## Circuit des soins

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier (hauteur 80) et en aluminium (hauteur 100)
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Léger et maniable
- Ergonomique : conçu pour le confort du personnel soignant
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Chariot simple colonne
- Hauteur\* : 80, 100 ou 120
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge
- 2 choix d'intercalaires (glissières) / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités



### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

\* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple




Référence

8YS64H100TJ5SF

### TIROIRS JOINTIFS 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple

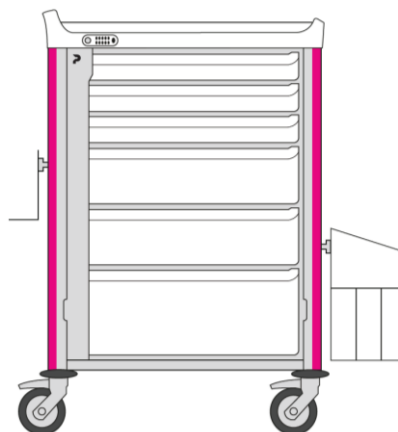

Référence

8YS64H100TJ5

### TIROIRS JOINTIFS 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence


8YS64H100TJ2

## TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE

### 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit, bas gauche)

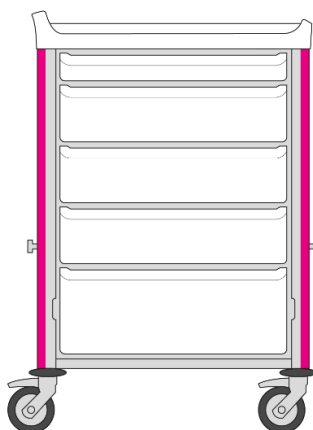

Référence


8YS64H100TJ7

## TIROIRS JOINTIFS

### 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle

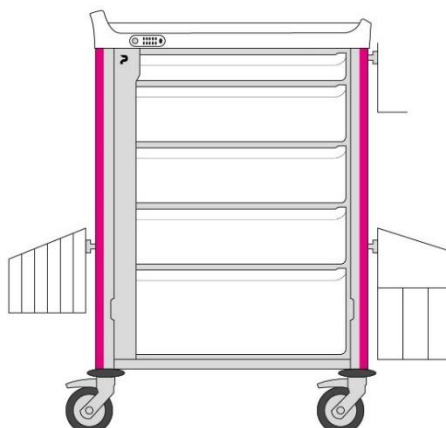

Référence

8YS64H100TJ1

## TIROIRS JOINTIFS

### 4 moyens / 2 grands

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ3

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm



Référence

8YS64H100TT7

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple




Référence

8YS64H100TT4SF

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (en bas à droite et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple

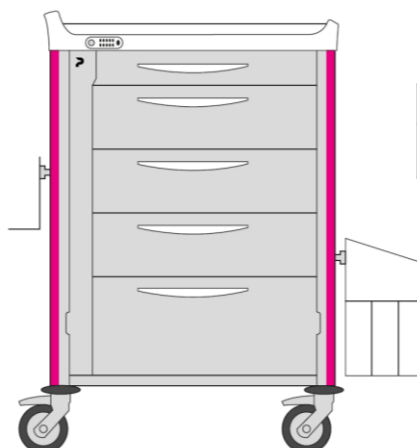

Référence

8YS64H100TT4



## TIROIRS TÉLESCOPIQUES

### 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



#### Référence

8YS64H100TT2

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES

### 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



#### Référence

8YS64H100TT1

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES

### 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



#### Référence

8YS64H100TT3

## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### Chariots hauteur 80 cm


Référence	Désignation
8YCHM164H80FBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette thermoplastique + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80CFBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette compact + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)

### Chariots hauteur 100 cm

#### CHARIOT AVEC PLAN DE TRAVAIL EN COMPACT

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en compact
- Fermeture à battant
- Serrure à code

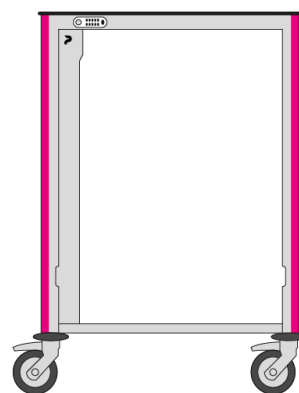


Référence	Désignation
8YCHM164H100CFBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H100 avec tablette compact + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)

#### CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

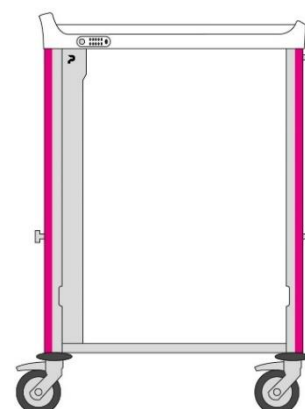

Référence	Désignation
8YCHS164H100	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code avec intercalaires standards – pas de 40 mm
8YCHST164H100	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code avec parois pour tiroirs télescopiques

## CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable




Référence	Désignation
8YCHS164H100T	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code- tabl. rab. avec intercalaires standards – pas de 40 mm
8YCHST164H100T	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code- tabl. rab. avec parois pour tiroirs télescopiques

## CHARIOT AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Intercalaires standards (pas de 40 mm)
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 poignée ergonomique
- 3 rails (intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)

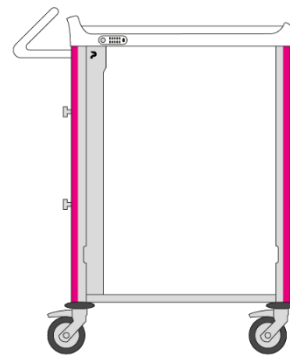


Référence	Désignation
8YCHM164H100_BCP	Chariot de soins NEOP 1 col. 600x400 H100 battant + code + 3 rails + poignée ergo + intercalaires standards (pas de 40 mm)

## CHARIOT MOTORISÉ

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Intercalaires standards (pas de 40 mm)
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)
- Système de motorisation

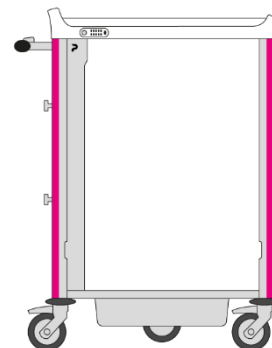

Référence	Désignation
8YCHM164H100_BCM	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 motorisé battant + code + 3 rails + intercalaires standards (pas de 40 mm)

# Composition sur mesure

## ÉTAPE 1 - Structure du chariot

Choix de la structure du chariot en fonction du type d'intercalaires / parois

	Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*
Intercalaires standards pour tiroirs standards (pas de 40 mm)	8Y164H80P4	8Y164H100P4	8Y164H120P4
Parois pour tiroirs télescopiques	-	8Y164H100T	8Y164H120T

Ces références comprennent le caisson, les roues et les intercalaires ou parois.

## ÉTAPE 2 - Personnalisation du chariot

		Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*	
1	Tablette	en thermoplastique avec découpe	8Y001_6400TH		
		en thermoplastique sans découpe	8Y001_6400THSP		
		en stratifié compact	8Y001_6400CP1		
2	Fermeture	rideau pour intercalaires standards	8Y002_6008F3	8Y002_6010F3	8Y002_6012F3
		battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2	8Y002_0010F2
		battant pour intercalaires standards	8Y002_0008F1	8Y002_0010F1	-
3	Serrure à code	pour fermeture rideau	8Y003CODE3		
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	8Y003CODE2		
		pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003CODE1		
	Serrure à badge	pour fermeture rideau	8Y003BADGE3		
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	8Y003BADGE2		
		pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003BADGE1		
4	Couleur	Rose magenta	8Y004_0008RM	8Y004_0010RM	8Y004_0012RM
		Vert pomme	8Y004_0008VP	8Y004_0010VP	8Y004_0012VP
		Bleu céleste	8Y004_0008BC	8Y004_0010BC	8Y004_0012BC
5	Marquage	Marquage spécifique		8Y132	



Tablette supérieure en thermoplastique avec zone de préhension ergonomique



Tablette supérieure en stratifié compact



Fermeture à rideau



Fermeture à battant



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroir, motorisation...



\* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

# Données techniques

## Chariot avec tablette supérieure en plastique thermoformé

### Dimensions hors tout du chariot



### Dimensions utiles du plan de travail



### Hauteur du plan de travail


H 120 : 1297 mm  
 H 100 : 1057 mm  
 H 80 : 897 mm

## Chariot avec tablette supérieure en stratifié compact

### Dimensions hors tout du chariot



### Dimensions utiles du plan de travail

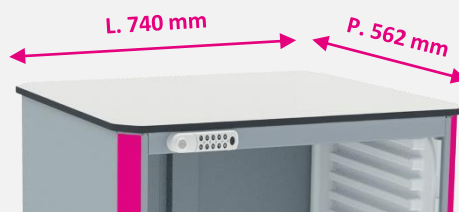

### Hauteur du plan de travail

H 120 : 1304 mm  
 H 100 : 1064 mm  
 H 80 : 904 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.  
 La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy H 80 : Acier (électro-zingué) / H 100 : Aluminium / H 120 : Aluminium
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA OU stratifié compact ép. 10 mm
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture époxy
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot		
<b>Poids à vide</b>	H 80 : 27 kg	H 100 : 24 kg	H 120 : 26 kg
<b>Capacité</b>	<b>H 80 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 15 pas pour chariot avec rideau - 16 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant	<b>H 100 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 19 pas pour chariot avec rideau - 20 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant  <b>H 100 avec intercalaires à encombrement optimisé (62 mm) :</b> - 11 pas pour chariot avec rideau - 12 pas pour chariot sans rideau  <b>H 100 avec parois pour tiroirs télescopiques : 10 tiroirs H 80 mm</b>	<b>H 120 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 25 pas pour chariot avec rideau - 26 pas pour chariot sans rideau  <b>H 120 avec parois pour tiroirs télescopiques : 13 tiroirs H 80 mm</b>
<b>Verrouillage</b>	Serrure à code (avec clé de secours) ou serrure à badge		

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	H 80 : 39 kg H 100 : 36 kg H 120 : 38 kg
<b>Dimensions</b>	H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m H 100 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m H 120 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,60 m
<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>

# Neop | Chariots de soins 400 x 400 simple colonne

## Circuit des soins

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique : conçu pour le confort du personnel soignant
- Léger et maniable
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Chariot simple colonne
- Hauteur\* : 100
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code ou à badge
- 2 choix d'intercalaires (glissières) / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités
- Zone de préhension ergonomique

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE


#### 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm pour bacs à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm

#### Référence

8YS44H100TT4

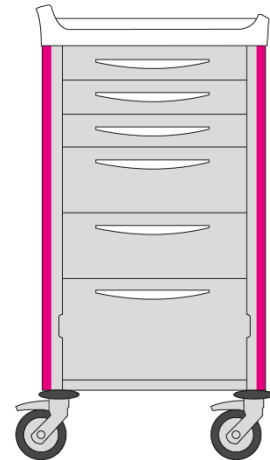

### TIROIRS TÉLESCOPIQUES

#### 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm pour bacs à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle

#### Référence

8YS44H100TT3



### TIROIRS TÉLESCOPIQUES

#### 5 moyens

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bacs à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double L
- 1 panier de côté grand modèle

#### Référence

8YS44H100TT1





## TIROIRS TÉLESCOPIQUES

### 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle

#### Référence

8YS44H100TT2



## TIROIRS JOINTIFS


### 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 bac 400 x 400 H. 75 mm
- 3 bacs 400 x 400 H. 115 mm
- 1 bac 400 x 400 H. 195 mm
- 3 rails (haut gauche, bas gauche et bas droit)
- 1 tablette d'extension rabattable

#### Référence

8YS44H100TJ1

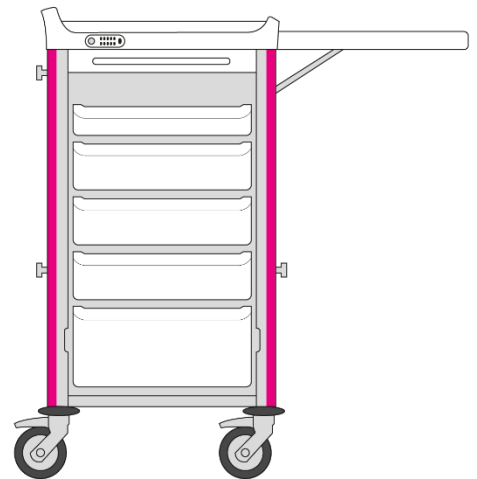

## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.

Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.


### CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins simple colonne 400 x 400 H100 équipé de :

- Parois pour tiroirs télescopiques
- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

#### Référence

8YCHST144H100

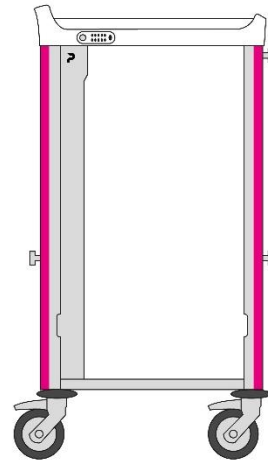


### CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins simple colonne 400 x 400 H100 équipé de :

- Parois pour tiroirs télescopiques
- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple

#### Référence

8YCHST2144H100

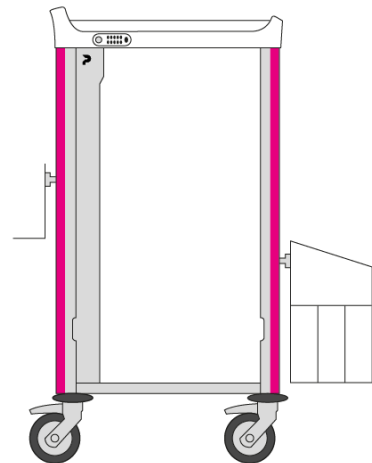

### CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins simple colonne 400 x 400 H100 équipé de :

- Parois pour tiroirs télescopiques
- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable

#### Référence

8YCHST144H100T



# Composition sur mesure

## ETAPE 1 - Structure du chariot

Choix de la structure du chariot en fonction du type d'intercalaires / parois

Chariot hauteur 100 cm*	
Intercalaires standards Pas de 40 mm	Parois pour tiroirs télescopiques
8Y144H100P4	8Y144H100T

Cette référence comprend :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires ou parois

## ETAPE 2 - Personnalisation du chariot

Sélection obligatoire des éléments 1 à 4

Chariot avec intercalaires standards  
réf. 8Y144H100P4

Chariot avec parois pour tiroirs télescopiques  
réf. 8Y144H100T

1	Tablette supérieure	Tablette supérieure en thermoplastique	8Y001_4400TH	8Y001_4400TH
2	Fermeture	rideau	8Y002_4010F3	-
		battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2
3	Serrure à code	pour fermeture rideau	8Y003CODE3	-
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y003CODE2
	Serrure à badge	pour fermeture rideau	8Y003BADGE3	-
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y003BADGE2
4	Couleur	Rose magenta	8Y004_0010RM	8Y004_0010RM
		Vert pomme	8Y004_0010VP	8Y004_0010VP
		Bleu céleste	8Y004_0010BC	8Y004_0010BC

\*Pour la hauteur précise du plan de travail, voir la partie « Données techniques »



Tablette supérieure en thermoplastique avec zone de préhension ergonomique



Fermeture à rideau



Fermeture à battant



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, rail normalisé, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroir...  
Se référer aux fiches dédiées.



## Données techniques

### Dimensions hors tout du chariot



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

### Dimensions utiles du plan de travail



Tablette supérieure en plastique thermoformé avec zone de préhension ergonomique

### Hauteur du plan de travail

H. 1057 mm

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture EPOXY
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot
<b>Poids à vide</b>	20 kg
<b>Capacité</b>	- 19 pas de 40 mm pour chariot avec rideau - 20 pas de 40 mm pour chariot sans rideau - 10 tiroirs télescopiques HT 80 mm
<b>Verrouillage</b>	Serrure à code (avec clé de secours) / Serrure à badge

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	32 kg	<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>

# Neop | Chariot d'anesthésie 600 x 400

## Une configuration optimale

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium (hauteur 100)
- Hygiène 100 % : nombre minimum d'interstices et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Chariot simple colonne 600x400
- Hauteur\* 100
- Zone de préhension ergonomique

### 3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste




\* Pour la hauteur précise du plan de travail, voir « Données techniques »

## Configuration type - PREMIUM

### Chariot d'anesthésie 600 x 400 H. 100 mm




Chariot 600 x 400 H100 équipé de :

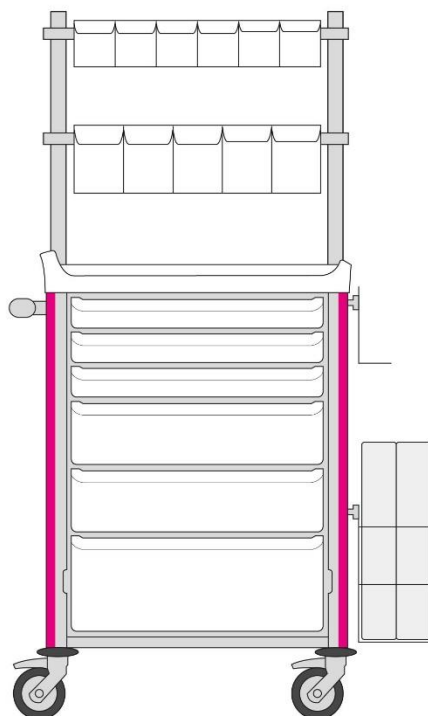- Tablette supérieure en thermoplastique
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 75 mm avec kit de compartimentage 3x2= 6 cases
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm avec kit de compartimentage 2x2=4 cases
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 1 poignée horizontale
- 2 rails normalisés latéraux (en haut à droite et en bas à droite)
- 1 support collecteur à aiguilles
- 1 support à sondes 2 cases
- 1 portique équipé de :
  - 2 rails normalisés
  - 6 bacs basculants L. 601 x P. 93 x H. 114 mm
  - 5 bacs basculants L. 601 x P. 133 x H. 166 mm



Référence	Désignation
8YCHANS164H100	Chariot d'anesthésie Neop 600x400 H100

## Couleur du chariot

Référence	Désignation
8Y004_0010RM	Rose magenta 
8Y004_0010VP	Vert pomme 
8Y004_0010BC	Bleu céleste 

## Accessoires

Tablette d'extension, rail normalisé, bras informatique, poubelle...

*Se référer aux fiches dédiées.*



# Données techniques

## Dimensions hors tout du chariot



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Dimensions utiles du plan de travail



## Hauteur du plan de travail

1057 mm

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc en aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene)
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot
<b>Poids à vide</b>	24 kg
<b>Capacité</b>	20 pas de 40 mm

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roulettes, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	36 kg	<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>





# Neop | Chariot d'intubation 600 x 400

## Une configuration optimale

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium (hauteur 100)
- Hygiène 100 % : nombre minimum d'interstices et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Ergonomique : conçu pour le confort du personnel soignant
- Léger et maniable
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Hauteur\* 100
- Verrouillage par serrure à scellé
- Zone de préhension ergonomique

### 3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\* Pour la hauteur précise du plan de travail, voir « Données techniques »

## Configuration type - PREMIUM


### Chariot d'intubation 600 x 400 H. 100 mm

Chariot 600 x 400 H100 équipé de :




- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à scellé
- 20 scellés numérotés
- 5 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 rail normalisé (bas gauche)
- 1 poubelle simple

#### Référence

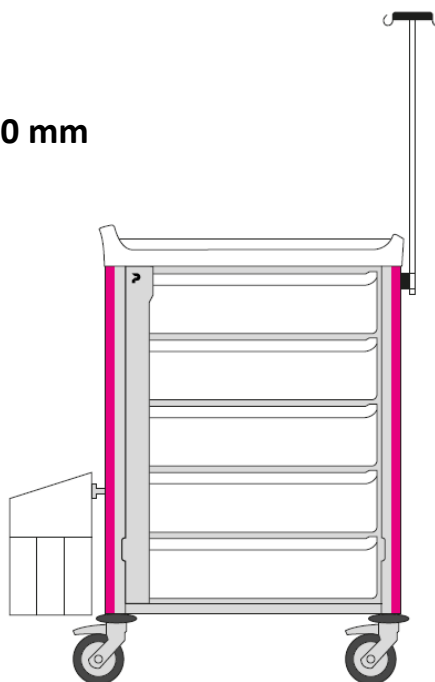8YCHINT164H100

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

### Couleur du chariot

Référence	Désignation
8Y004_0010RM	Rose magenta 
8Y004_0010VP	Vert pomme 
8Y004_0010BC	Bleu céleste 

## Accessoires

Tablette d'extension, rail normalisé, bras informatique, poubelle...

*Se référer aux fiches dédiées.*



# Données techniques

## Dimensions hors tout du chariot



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Dimensions utiles du plan de travail



## Hauteur du plan de travail

1057 mm

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc en aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Battant : Aluminium recouvert peinture époxy
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot
<b>Poids à vide</b>	24 kg
<b>Capacité</b>	20 pas de 40 mm
<b>Verrouillage</b>	Serrure à scellé

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roulettes, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	36 kg	<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>



# Neop | Chariot des traitements 600 x 400

## Une configuration optimale

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium (hauteur 100)
- Hygiène 100 % : nombre minimum d'interstices et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Ergonomique : conçu pour le confort du personnel soignant
- Léger et maniable
- Modulaire : large gamme de tiroirs et accessoires
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Hauteur\* 100
- Verrouillage par serrure à code
- Zone de préhension ergonomique

### 3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\* Pour la hauteur précise du plan de travail, voir « Données techniques »

## Configuration type - PREMIUM


### Chariot des traitements 600 x 400 H. 100 mm

Chariot 600 x 400 H100 équipé de :




- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 20 scellés numérotés
- 5 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 rail normalisé (bas gauche)
- 1 poubelle simple

#### Référence

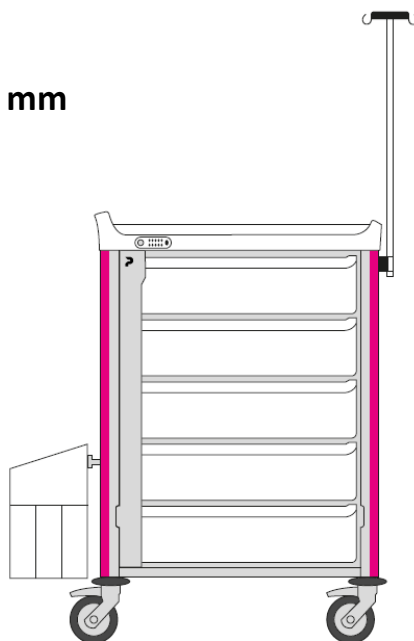8YCHTRT164H100

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

### Couleur du chariot

Référence	Désignation
8Y004_0010RM	Rose magenta 
8Y004_0010VP	Vert pomme 
8Y004_0010BC	Bleu céleste 

## Accessoires

Tablette d'extension, rail normalisé, bras informatique, poubelle...

*Se référer aux fiches dédiées.*



# Données techniques

## Dimensions hors tout du chariot



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Dimensions utiles du plan de travail



## Hauteur du plan de travail

1057 mm

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc en aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene)
<b>Fermeture</b>	Battant : Aluminium recouvert peinture époxy
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot
<b>Poids à vide</b>	24 kg
<b>Capacité</b>	20 pas de 40 mm
<b>Verrouillage</b>	Serrure à code (avec clé de secours)

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roulettes, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	36 kg	<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>





# Neop | Chariots à plâtre 600 x 400

## Rangement de tous les instruments et du matériel nécessaire à la confection d'un plâtre

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- Hauteur : 100
- Zone de préhension ergonomique
- Equipé de cinq tiroirs à sortie totale et d'un support latéral avec bac de trempage
- De nombreux autres équipements sont disponibles, notamment le portique avec distributeur de jersey tubulaire

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



# Composition sur mesure

## ETAPE 1 - Structure du chariot

<b>Chariot</b> hauteur 100 cm*
8Y164H100T.PL

Cette référence comprend :

- 5 tiroirs télescopiques à sortie totale (1 grand, 3 moyens et 1 petit)
- 1 support latéral avec bac de trempage, amovible, de 19 litres

## ETAPE 2 - Choix de la couleur

<b>Couleur</b>
Rose magenta : 8Y004_0010RM Vert pomme : 8Y004_0010VP Bleu céleste : 8Y004_0010BC

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## ETAPE 3 - Sélection des accessoires

Désignation	Référence
<b>Plan de travail rabattable</b>	8Y008_0400
<b>Portique avec distributeur de jersey tubulaire</b> En tôle d'acier, laquée, coloris blanc Porte coulissante en matière plastique transparente Equipé de 3 séparations montées sur glissières autocollantes Dimensions : L. 606 x P. 310 x H. 320 mm	8Y012

Rail normalisé, poubelle simple, poubelle double, poignée ergonomique...

*Se référer aux fiches dédiées.*



# Données techniques

## Dimensions hors tout du chariot

H. max : 1830 mm  
H. min : 1380 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.



## Dimensions utiles du plan de travail



Tablette supérieure en plastique thermoformé avec zone de préhension ergonomique

## Hauteur du plan de travail

H. 1057 mm

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
<b>Glissières</b>	Coulisse bille acier zingué avec amortisseur
<b>Tiroirs</b>	Façade en stratifié compact ép. 8 mm / cadre en aluminium traité époxy / bacs à lèvres en ABS
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes. Double blocage de la roue et du pivot
<b>Poids à vide</b>	27 kg
<b>Capacité</b>	5 tiroirs compact : 1 grand, 3 moyens et 1 petit
<b>Verrouillage</b>	Aucun
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique
<b>Equipements</b>	Support bassine + bassine

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	L 0,80 x P 1,20 x H 1,74 m
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	39 kg	<b>Volume</b>	1,67 m <sup>3</sup>



## Mobilier de soins et équipements de service

# Chariot de soins multisensoriel Satellite®

Dédié aux secteurs de la gérontologie et du handicap, Satellite® offre une **thérapie non médicamenteuse** en complément du parcours de soins.

Ce chariot, conçu en collaboration avec des médecins, des ergothérapeutes et des psychomotriciens, permet de délivrer des soins multisensoriels basés sur l'ouïe, la vue, l'odorat et le toucher.



### Points forts

- ▶ Mobile et autonome ne nécessitant pas de salle dédiée
- ▶ Utilisable dans tout l'établissement y compris en milieu humide
- ▶ Adapté aux personnes alitées ou en fauteuil
- ▶ Combine tous les éléments multisensoriels

Mobilier de soins et équipements de service

## Chariot de soins multisensoriel Satellite®

### Un chariot ergonomique et simple d'utilisation

Le chariot Satellite® est une solution mobile et autonome, utilisable dans tout l'établissement. Les soins sont délivrés au chevet du patient, qu'il soit alité ou en fauteuil. Sa conception permet une utilisation en salle de bain ou de balnéothérapie.

Désignation

Référence

**Chariot de soins multisensoriel Satellite® - avec kit d'accessoires**

9T000\_1

**Chariot de soins multisensoriel Satellite® - sans kit d'accessoires**

9T000\_2

**Enceintes musicales**  
haute définition


**Projecteur orientable**  
pour une diffusion de vidéos  
au mur ou au plafond

**Diffuseurs d'huiles  
essentielles :**  
6 senteurs différentes

**Fibres optiques,**  
qui changent de couleur,  
placées à hauteur optimale  
pour personne  
alitée ou en fauteuil

**Tiroirs dédiés au stockage  
du petit matériel :**  
balles lumineuses, balles hérisson,  
coussin chauffant...

**Mur de bulles d'eau**  
grande dimension :  
circulation harmonieuse  
et pompe silencieuse

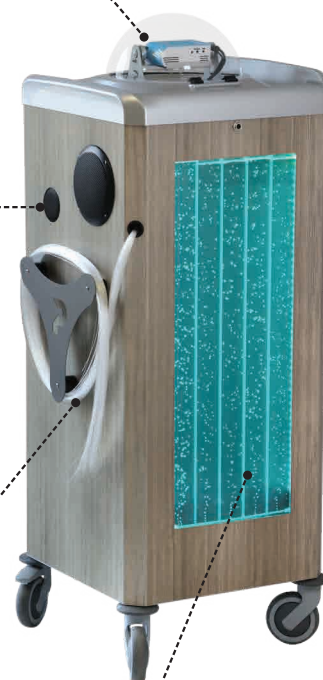

## Mobilier de soins et équipements de service

# Chariot de soins multisensoriel Satellite®

### Programmes de soins


Le chariot Satellite® propose six programmes prédéfinis et un programme libre. Le programme est sélectionné en fonction du protocole de soins non médicamenteux de la personne.

Les programmes de soins se lancent en une seule action : à partir du pupitre de commande ou à distance, à partir de la tablette tactile. Tous les éléments multisensoriels s'activent simultanément : vidéo, musique, senteur, mur bulles d'eau et fibres optiques.



### Programmes de soins prédéfinis

- ▶ Stimulant
- ▶ Balnéo
- ▶ Avant-repas
- ▶ Apaisant
- ▶ Reposant
- ▶ Nuit

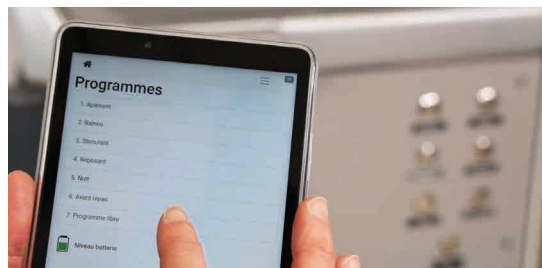

### Programme libre

Le programme libre est un programme sur mesure, dont les paramètres sont définis en utilisant la tablette. Il est possible de copier un programme existant, puis de le modifier par une donnée d'un autre programme. Chaque paramètre multisensoriel est activable ou désactivable.

### Vidéoprojecteur

Le vidéoprojecteur est sécurisé par un dôme fermant à clé. Ce dôme le protège notamment des projections d'eau lors d'utilisation en balnéothérapie. Le vidéoprojecteur est facilement orientable et inclinable pour une projection au mur ou au plafond.



### Huiles essentielles

Six senteurs d'huiles essentielles BIO sont stockées dans un tiroir du chariot et se diffusent par ventilation. Les huiles essentielles ont été choisies en fonction de leurs propriétés, sans contre-indications chez les personnes âgées.

#### Désignation

#### Référence

<b>Huile essentielle Petit grain bigarade</b>	9T200
<b>Huile essentielle Synergie (Lavande / Camomille romaine / Fleur oranger)</b>	9T201
<b>Huile essentielle Orange douce</b>	9T202
<b>Huile essentielle Marjolaine à coquille</b>	9T203
<b>Huile essentielle Citron</b>	9T204
<b>Huile essentielle Lavande vraie</b>	9T205

Mobilier de soins et équipements de service

## Chariot de soins multisensoriel Satellite®

### Composition du kit accessoires

Désignation

Référence

Kit d'accessoires pour chariot Satellite®

9T100

#### Balle hérisson



Leurs petits picots procurent bien-être et détente. Au creux de la main on s'amuse à les faire rouler entre les paumes. Essayez-les aussi en massage sur tout le corps pour stimuler les sens tactiles et proprioceptifs.

Diamètre : 6 cm.

En PVC - Coloris selon stock.

#### Oeufs lumineux



Lot de 3 œufs lumineux aux subtils changements de couleur et à la luminosité reposante. Très bel objet, lisse et léger, qui invite à l'exploration tactile et visuelle dans le cadre d'un environnement multisensoriel.

Fonctionne avec 3 piles boutons incluses.

Ampoule LED. Dimensions : 9 cm.

#### Balle tactile



Cette balle colorée éveille les sens grâce à ses picots ! Idéale en massage sur le corps afin de procurer un moment de détente et faire prendre conscience de son corps. Recouverte de renflements souples, elle est aussi utilisée dans le cadre d'activités sportives.

Diamètre : 12 cm. En PVC. Sans latex.

Coloris selon stock.

#### Kalimba 9 lames



Kalimba accordée La4-Do5-Do4-La4-La3-Fa4-Mi4-Mi5-Si4. Elle se tient au creux des deux mains et se joue avec l'extrémité des deux pouces. Elle est parfaitement accordée et sa peau synthétique procure un son brillant et permet de jouer l'instrument entre les mains ou posé pour plus de volume et de variations.

Dimensions : L. 19,8 cm x l. 15,8 cm x H. 4,4 cm.



Mobilier de soins et équipements de service

## Chariot de soins multisensoriel Satellite®

### Coussin vibrant



Ce coussin vibrant est très doux au toucher grâce à son tissu blanc effet fourrure. Les vibrations douces encouragent la relaxation et fonctionnent bien pour calmer les personnes surstimulées. L'interrupteur permet de choisir entre 2 intensités de vibration ou une utilisation sans vibration.

Housse amovible lavable en machine.  
Fonctionne avec 2 piles LR06 incluses.  
Dimensions : 30 x 30 cm.

### Couverture sensorielle



Cette couverture est adaptée aux troubles de la perception sensorielle. D'un côté, une surface très douce au toucher parsemée de petits renflements invite à l'exploration et au cocooning. Le recto est composé de matières différentes pour éveiller l'intérêt et la curiosité de l'utilisateur.

Dimensions : 80 x 80 cm.

### Tapis lestés graines de lin



Un petit tapis lesté rempli de graines naturelles de lin que l'on peut faire chauffer au four micro-ondes et refroidir au frigo.

Housse amovible pour un entretien facile.  
Coloris bleu marine.  
Dimensions : 50 x 34 cm - Poids : 1,255 kg.

## Mobilier de soins et équipements de service

# Chariot de soins multisensoriel Satellite®

### Caractéristiques techniques

#### Matières

<b>Tablette</b>	ABS / PMMA traité chimiquement gris
<b>Bulle vidéo</b>	PMMA translucide
<b>Caisson / battant</b>	Aluminium traité à l'époxy
<b>Façades tiroirs et pupitre</b>	Stratifié compact gris épaisseur 8 mm
<b>Enrouleur fibre / support tablette</b>	Acier traité à l'époxy
<b>Covering</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

#### Verrouillage

<b>Tiroirs</b>	Serrure à code
<b>Tiroir technique (batteries)</b>	Serrure à clé numéro différent
<b>Bulle vidéoprojecteur</b>	Serrure à clé numéro différent

#### Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes Double blocage de la roue et du pivot
<b>Capacité</b>	3 tiroirs dédiés au rangement des accessoires
<b>Charge maxi admissible</b>	6 kg par tiroir
<b>Poids à vide du chariot</b>	76 kg
<b>Charge maxi admissible</b>	20 kg
<b>Pente maxi</b>	10°

#### Dimensions



#### Caractéristiques électriques

<b>Alimentation</b>	Batteries : 12 V - DC / 3A - 36 W (sectionneur permettant de mettre le circuit en sécurité) Chargeur : Input 220-240 VAC - 50-60 Hz - Max 2,1 A (protégé par fusible)
<b>Courant</b>	3 A
<b>Tension</b>	12 V
<b>Technologie des batteries</b>	Plomb
<b>Nombre de batteries</b>	2
<b>Type de montage</b>	Parallèle
<b>Tension pour 1 batterie</b>	12 V
<b>Capacité pour 1 batterie</b>	14 Ah
<b>Temps de charge</b>	6-7 heures
<b>Indice de protection</b>	IP 44
<b>Antenne</b>	WiFi - 2,4 GHz
<b>Carte électronique</b>	Raspberry
<b>Normes applicables</b>	Directive 2014/53/UE EN 300 328 EN 301 893

## Mobilier de soins et équipements de service

# Guéridons Agily® 600 x 400

Les guéridons de la gamme Agily® sont **aménageables** et **évolutifs** afin de répondre aux différentes utilisations. PRATICIMA vous accompagne dans la configuration de votre outil de travail.

Leur design innovant, leur ergonomie et leurs composants ultra légers en font des outils de travail très appréciés.

Photos non contractuelles



### Points forts

- ▶ Maniable et léger grâce à une structure en aluminium anodisé
- ▶ 2 types de tablettes : thermoplastique et compact
- ▶ Capacité : 8 tiroirs H. 75 mm
- ▶ Facile d'entretien : surface lisse
- ▶ Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers



Hygiénique




Ergonomique

Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 600 x 400


### Guéridons avec tablettes en compact

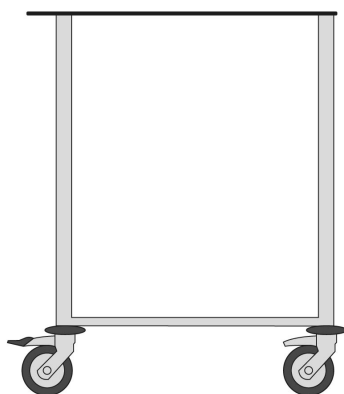

#### Configuration n°11

Guéridon de soins 600 x 400 équipé d'une tablette supérieure en compact avec poignée intégrée

> Réf. AGIL6\_11

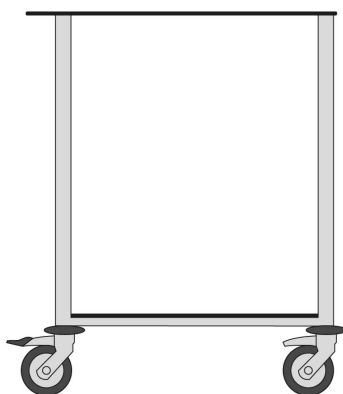


#### Configuration n°12

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en compact avec poignée intégrée
- ▶ 1 tablette inférieure en compact

> Réf. AGIL6\_12

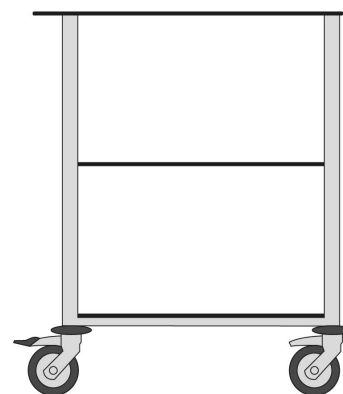


#### Configuration n°13

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en compact avec poignée intégrée
- ▶ 1 tablette intermédiaire en compact
- ▶ 1 tablette inférieure en compact

> Réf. AGIL6\_13


### Guéridons avec tablettes en thermoplastique

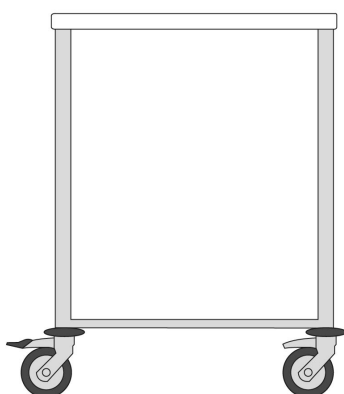

#### Configuration n°03

Guéridon de soins 600 x 400 équipé d'une tablette supérieure en thermoplastique

> Réf. AGIL6\_03

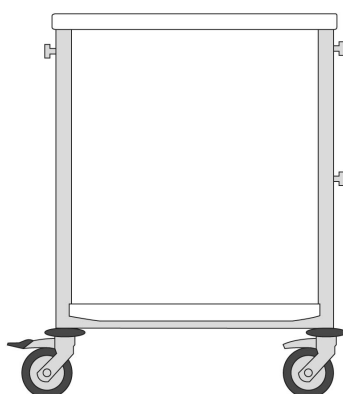


#### Configuration n°05

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 3 rails normalisés (en haut à droite, en bas à droite et en haut à gauche)

> Réf. AGIL6\_05

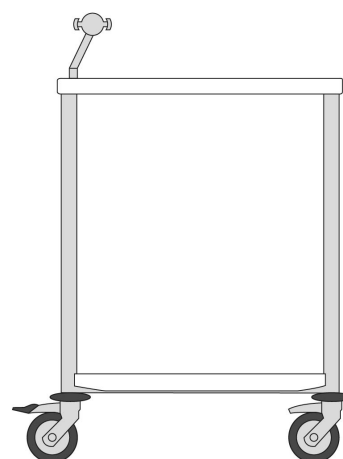

#### Configuration n°14


Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 support pour tablette tactile numérique

> Réf. AGIL6\_14

Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 600 x 400

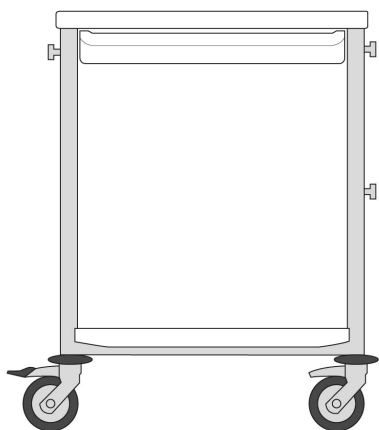


### Configuration n°24

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 tiroir H. 75 mm avec glissières
- ▶ 3 rails normalisés (en haut à droite, en bas à droite et en haut à gauche)

> Réf. AGIL6\_24

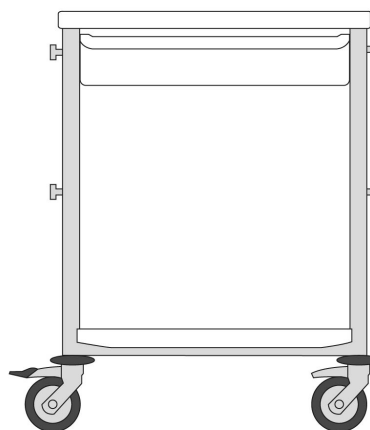


### Configuration n°25

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 tiroir H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés

> Réf. AGIL6\_25

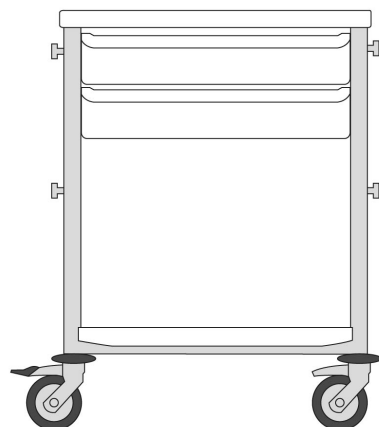


### Configuration n°28

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 2 tiroirs H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés

> Réf. AGIL6\_28

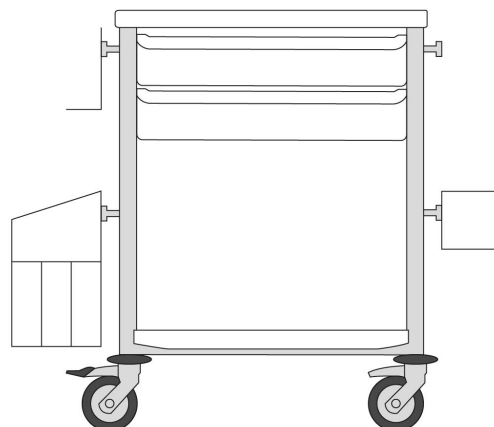

### Configuration n°30


Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 2 tiroirs H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés
- ▶ 1 casier de rangement
- ▶ 1 support récupérateur d'aiguilles
- ▶ 1 poubelle mobile double

> Réf. AGIL6\_30

Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 600 x 400

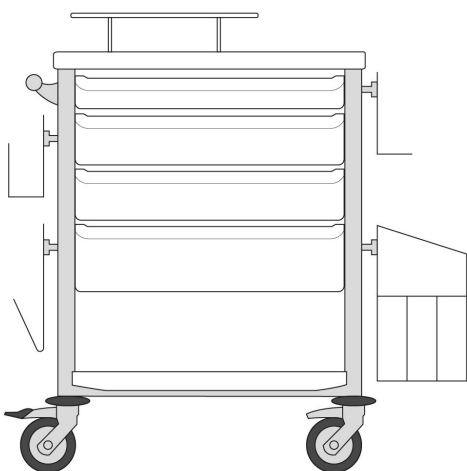


### Configuration n°35

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 cale flacons 5 cases - petit modèle
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 poignée de poussée
- ▶ 1 tiroir H. 75 mm avec glissières
- ▶ 2 tiroirs H. 115 mm avec glissières
- ▶ 1 tiroir H. 155 mm avec glissières
- ▶ 1 kit de compartimentage 6 cases pour tiroir H. 75 mm
- ▶ 1 kit de compartimentage 6 cases pour tiroir H. 115 mm
- ▶ 4 rails normalisés
- ▶ 1 support normalisé pour boîte à gants
- ▶ 1 support dossier
- ▶ 1 support récupérateur d'aiguilles
- ▶ 1 poubelle mobile double

> Réf. AGIL6\_35

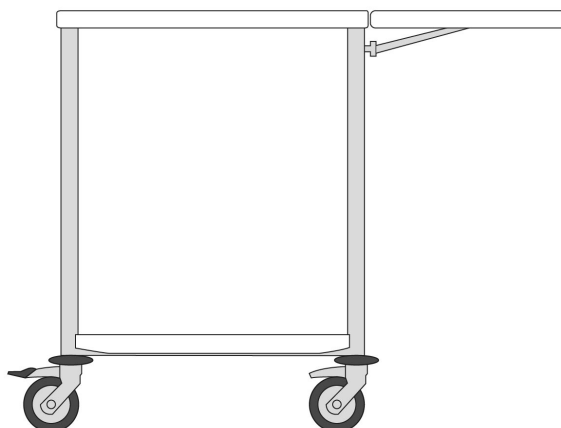


### Configuration n°07

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 rail normalisé (en haut à droite)
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable

> Réf. AGIL6\_07

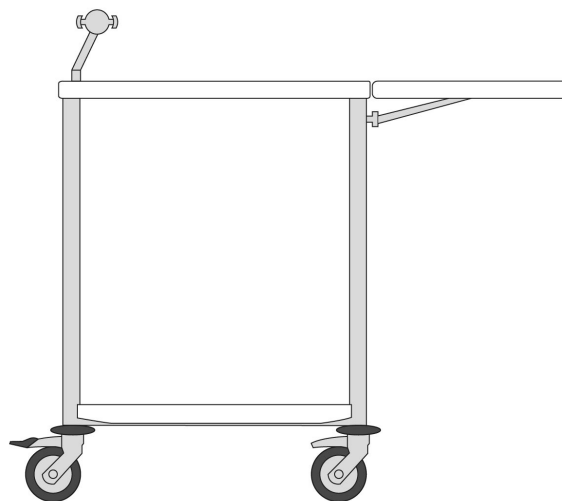

### Configuration n°17


Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 support pour tablette tactile numérique
- ▶ 1 rail normalisé (en haut à droite)
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable

> Réf. AGIL6\_17

Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 600 x 400

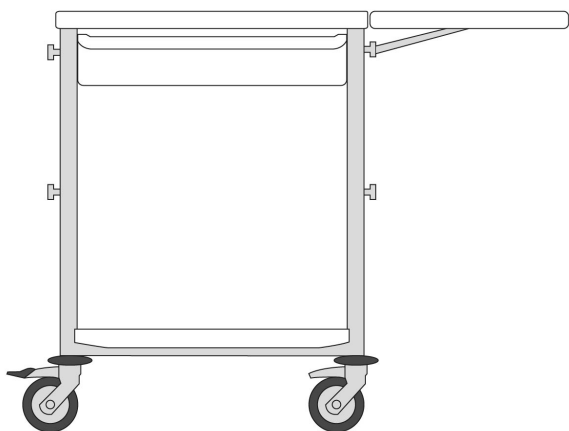


### Configuration n°26

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 4 rails normalisés
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable
- ▶ 1 tiroir H. 115 mm avec glissières

> Réf. AGIL6\_26

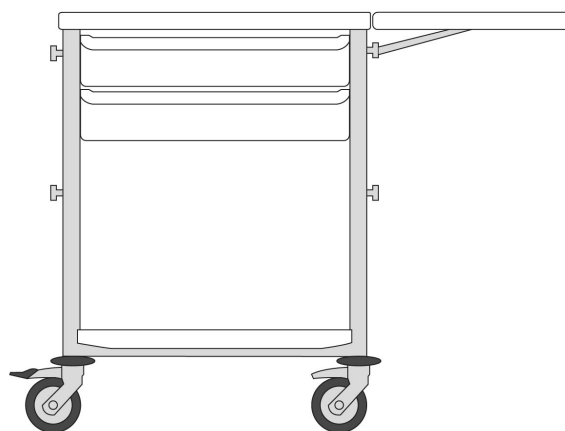


### Configuration n°29

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 2 tiroirs H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable

> Réf. AGIL6\_29

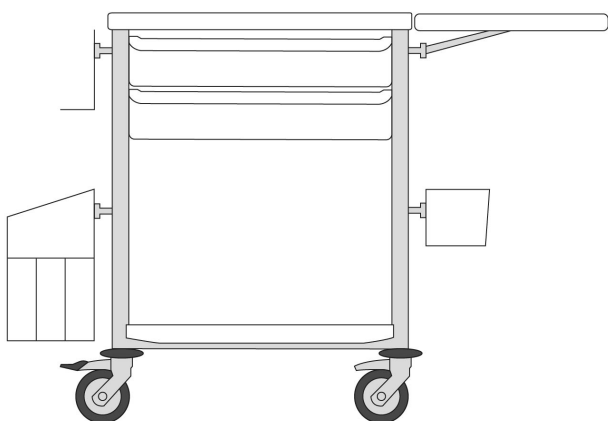


### Configuration n°31

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 2 tiroirs H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable
- ▶ 1 casier de rangement
- ▶ 1 support récupérateur d'aiguilles
- ▶ 1 poubelle mobile double

> Réf. AGIL6\_31

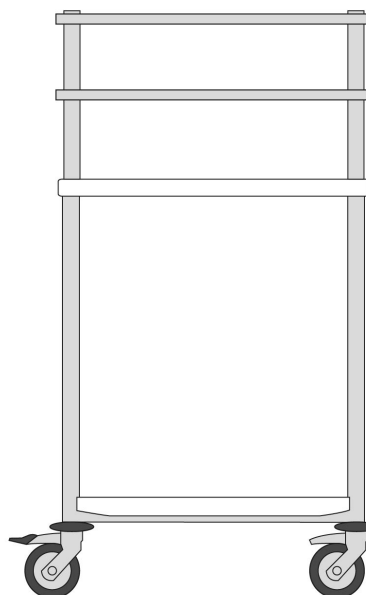

### Configuration n°23

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 portique avec 2 rails normalisés

> Réf. AGIL6\_23

Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 600 x 400




### Configuration n°10

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 rail normalisé (en haut à droite)
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable
- ▶ 1 portique avec 2 rails normalisés

> Réf. AGIL6\_10

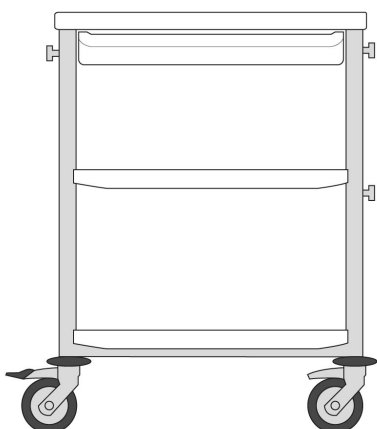


### Configuration n°37

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette intermédiaire en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 tiroir H. 75 mm avec glissières
- ▶ 3 rails normalisés (en haut à droite, en bas à droite et en haut à gauche)

> Réf. AGIL6\_37

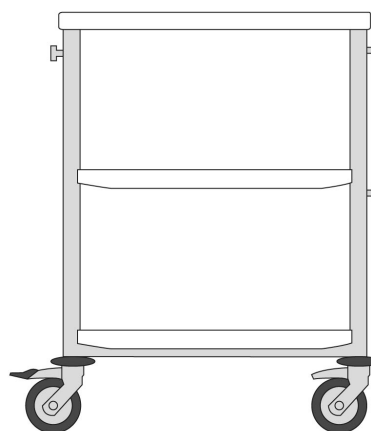


### Configuration n°36

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette intermédiaire en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 3 rails normalisés (en haut à droite, en bas à droite et en haut à gauche)

> Réf. AGIL6\_36

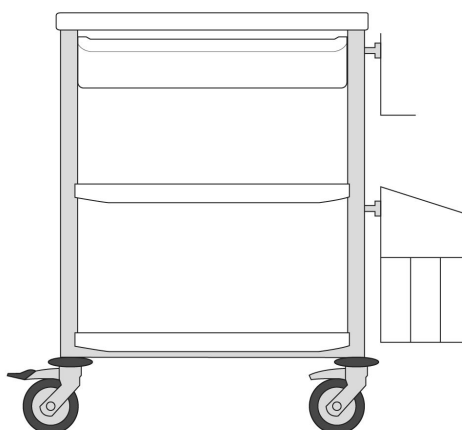

### Configuration n°38

Guéridon de soins 600 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette intermédiaire en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 tiroir H. 115 mm avec glissières
- ▶ 2 rails normalisés (en haut à droite et en bas à droite)
- ▶ 1 support récupérateur d'aiguilles
- ▶ 1 poubelle mobile simple

> Réf. AGIL6\_38





Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 600 x 400

### Données techniques


Dimensions des guéridons avec tablettes en thermoplastique

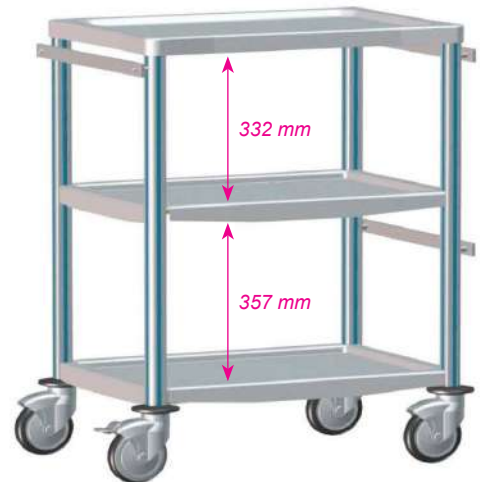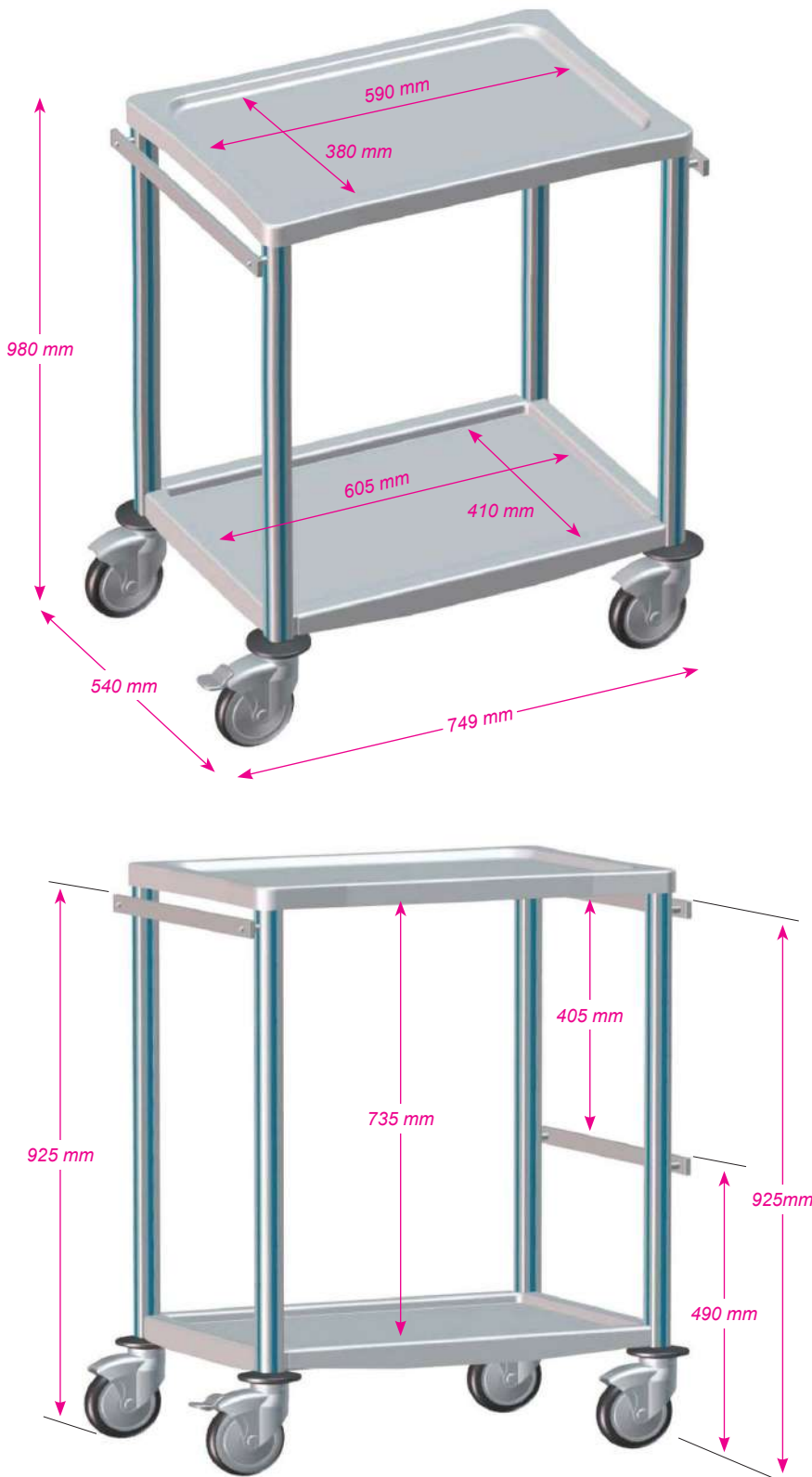

## Mobilier de soins et équipements de service

# Guéridons Agily® 600 x 400

### Dimensions des guéridons avec tablettes en compact

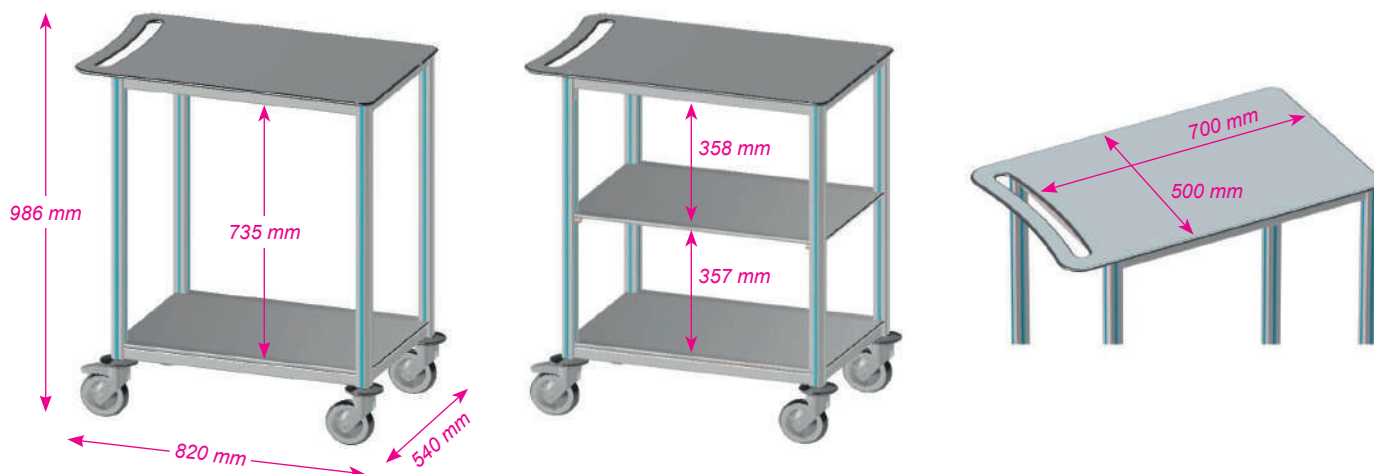

### Matières

<b>Structure</b>	Profil aluminium anodisé
<b>Roulettes</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape PolyAmide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA OU stratifié compact ép. 10 mm
<b>Rail normalisé</b>	Profil aluminium creux anodisé 30 x 10 mm
<b>Glissières pour tiroir</b>	Acier 20/10° traité époxy blanc texturé
<b>Tiroir</b>	ABS PC

### Informations diverses

<b>Roulettes</b>	4 roulettes Ø 125 mm - 1 à frein et 3 pivotantes		
<b>Charge admissible</b>	80 kg		
<b>Poids à vide</b>	AGIL6_05 : 13,2 kg AGIL6_12 : 20,60 kg	AGIL6_13 : 25 kg AGIL6_24 : 15,4 kg	AGIL6_36 : 14,4 kg AGIL6_37 : 16,6 kg
<b>Capacité</b>	8 tiroirs de H. 75 mm		

### Emballage

<b>Conditionnement</b>	À l'unité sur palette, cerclée et filmée		
<b>Poids net</b>	AGIL6_05 : 23 kg AGIL6_12 : 27,4 kg	AGIL6_13 : 31,8 kg AGIL6_24 : 25 kg	AGIL6_36 : 24 kg AGIL6_37 : 26 kg
<b>Dimensions</b>	L. 0,88 x P. 0,80 x H. 1,10 m		
<b>Volume</b>	0,78 m <sup>3</sup>		












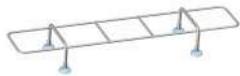
### Coloris au choix

<i>Bleu pop</i>	<i>Vert pomme</i>	<i>Orange</i>	<i>Fuchsia</i>	<i>Gris perle</i>
AGILY_BP	AGILY_VP	AGILY_OR	AGILY_FU	AGILY_GR

## Mobilier de soins et équipements de service

# Guéridons Agily® 600 x 400

### Équipements optionnels

Désignation	Photo	Référence	Désignation	Photo	Référence
<b>Tablette intermédiaire en thermoplastique</b>		87194	<b>Poignée de manutention pour Agily® thermoplastique</b>		87125
Tablette inférieure en thermoplastique		87195	<b>Tablette d'extension rabattable pour Agily® thermoplastique</b>		87301
<b>Tablette intermédiaire en compact</b>		87184	<b>Galerie fil tablette supérieure (à ventouses)</b>		87061
Tablette inférieure en compact		87185	<b>Galerie intermédiaire en fil 3 côtés</b>		87068
<b>Tiroirs 600 x 400 avec glissières</b>		TIROIR_S	<b>Portique 2 rails normalisés en aluminium</b>		87143
<b>Crochet quadruple pour rail normalisé</b>		28007N	<b>Kit cale flacons 5 cases</b>		28038



## Mobilier de soins et équipements de service

# Guéridons Agily® 400 x 400

Les guéridons de la gamme Agily® sont **aménageables** et **évolutifs** afin de répondre aux différentes utilisations. PRATICIMA vous accompagne dans la configuration de votre outil de travail. Leur design innovant, leur ergonomie et leurs composants ultra légers en font des outils de travail très appréciés.



### Points forts

- ▶ Maniable et léger grâce à une structure en aluminium anodisé
- ▶ 2 types de tablettes : thermoplastique et compact
- ▶ Capacité : 8 tiroirs H. 75 mm
- ▶ Facile d'entretien : surface lisse
- ▶ Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers



Hygène




Ergonomie

Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 400 x 400


### Guéridons avec tablettes en compact

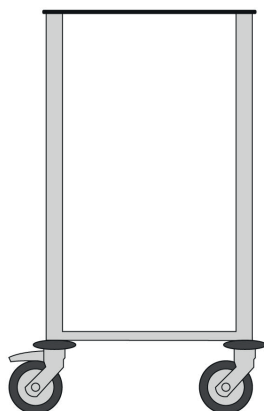

#### Configuration n°05

Guéridon de soins 400 x 400 équipé d'une tablette supérieure en compact

> Réf. AGIL4\_05

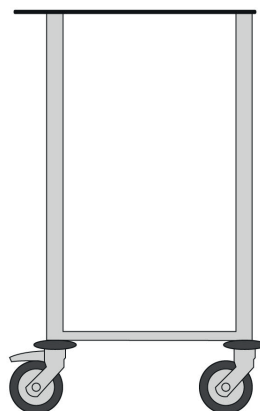


#### Configuration n°6

Guéridon de soins 400 x 400 équipé d'une tablette supérieure en compact avec poignée intégrée

> Réf. AGIL4\_06


### Guéridons avec tablettes en thermoplastique

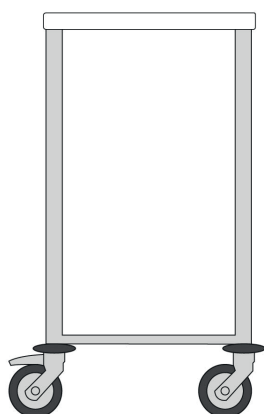

#### Configuration n°03

Guéridon de soins 400 x 400 équipé d'une tablette supérieure en thermoplastique

> Réf. AGIL4\_03

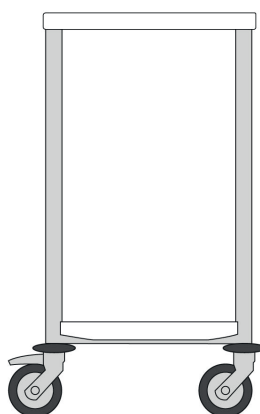

#### Configuration n°01


Guéridon de soins Agily 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique

> Réf. AGIL4\_01

Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 400 x 400

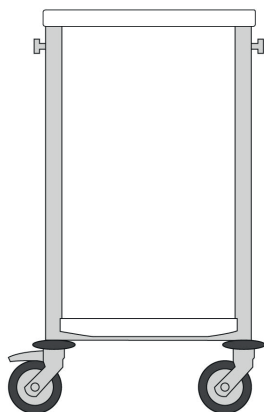


### Configuration n°04

Guéridon de soins Agily 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 2 rails normalisés (en haut à droite et en haut à gauche)

> Réf. AGIL4\_04

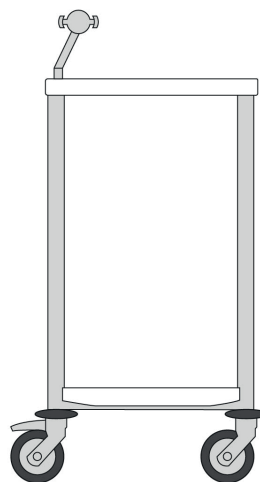


### Configuration n°14

Guéridon de soins Agily 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 support pour tablette tactile numérique

> Réf. AGIL4\_14

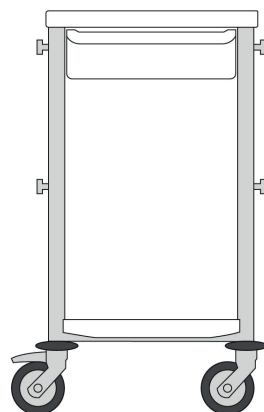


### Configuration n°22

Guéridon de soins Agily 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 bac H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés

> Réf. AGIL4\_22

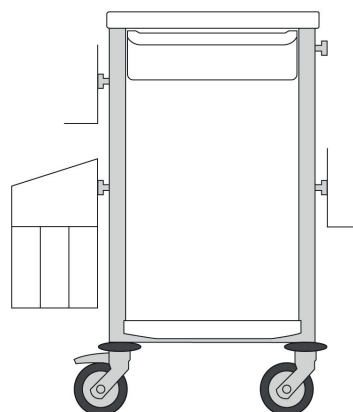

### Configuration n°25


Guéridon de soins 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 bac H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés
- ▶ 1 support normalisé pour boîte à gants
- ▶ 1 support récupérateur d'aiguilles
- ▶ 1 poubelle mobile double

> Réf. AGIL4\_25

Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 400 x 400

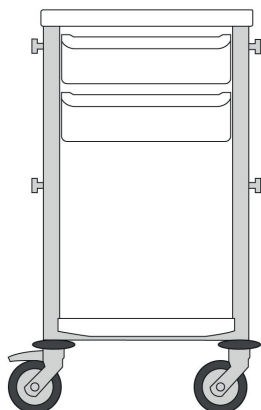


### Configuration n°28

Guéridon de soins 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 2 bacs H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés

> Réf. AGIL4\_28

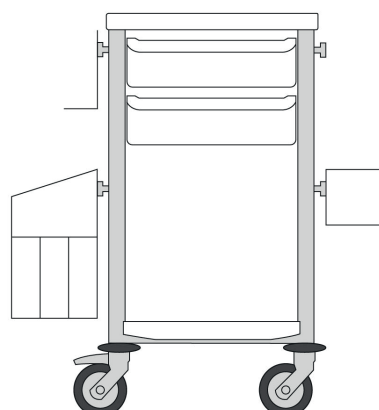


### Configuration n°31

Guéridon de soins 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 2 bacs H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés
- ▶ 1 casier de rangement
- ▶ 1 support récupérateur d'aiguilles
- ▶ 1 poubelle mobile double

> Réf. AGIL4\_31

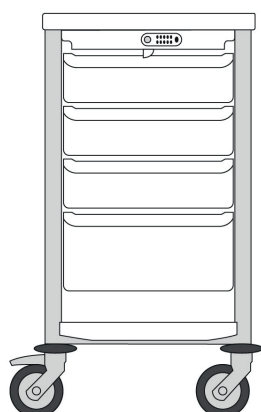


### Configuration n°33

Guéridon de soins Agily 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 capot sécurisé à code pour bac H. 115 mm
- ▶ 3 bacs H. 115 mm avec glissières
- ▶ 1 bac H. 195 mm avec glissières

> Réf. AGIL4\_33

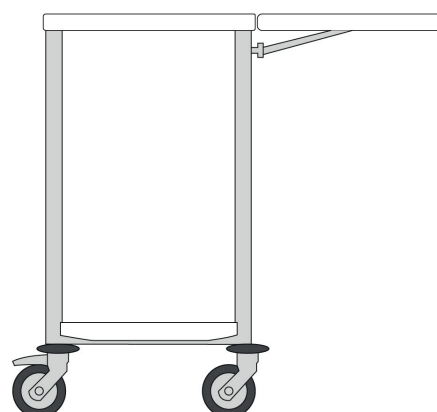

### Configuration n°07

Guéridon de soins Agily 400 x 400 équipé de :


- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 rail normalisé (en haut à droite)
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable

> Réf. AGIL4\_07



Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 400 x 400

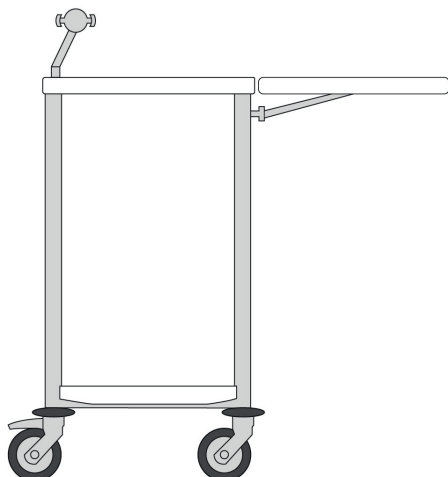


### Configuration n°17

Guéridon de soins Agily 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 support pour tablette tactile numérique
- ▶ 1 rail normalisé (en haut à droite)
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable

> Réf. AGIL4\_17

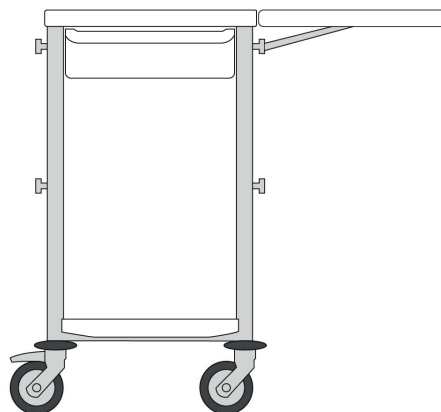


### Configuration n°23

Guéridon de soins 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 bac H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable

> Réf. AGIL4\_23

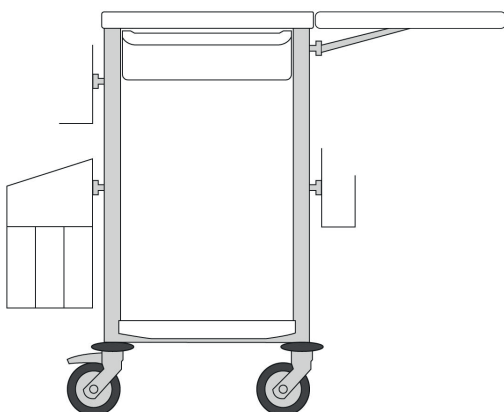


### Configuration n°26

Guéridon de soins Agily 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 bac H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable
- ▶ 1 support normalisé pour boîte à gants
- ▶ 1 support récupérateur d'aiguilles
- ▶ 1 poubelle mobile double

> Réf. AGIL4\_26

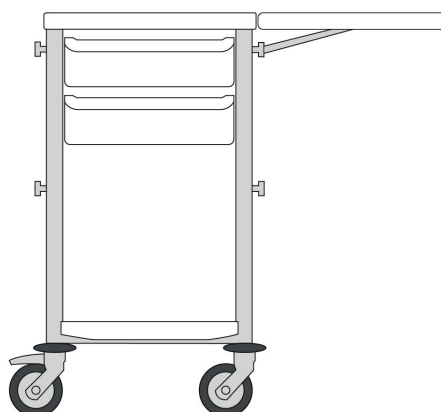

### Configuration n°29


Guéridon de soins 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 2 bacs H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable

> Réf. AGIL4\_29

Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 400 x 400

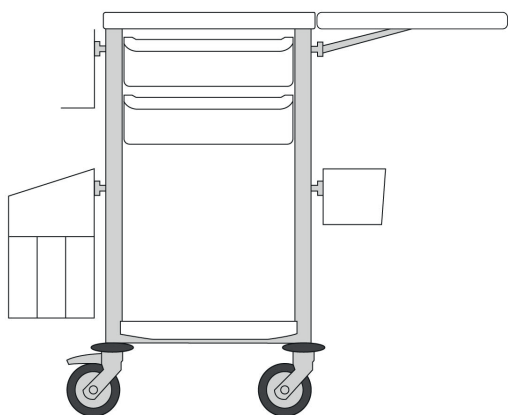


### Configuration n°32

Guéridon de soins Agily 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 2 bacs H. 115 mm avec glissières
- ▶ 4 rails normalisés
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable
- ▶ 1 casier de rangement
- ▶ 1 support récupérateur d'aiguilles
- ▶ 1 poubelle mobile double

> Réf. AGIL4\_32

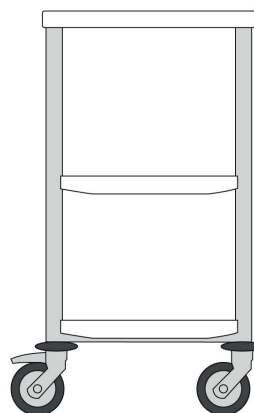


### Configuration n°02

Guéridon de soins 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette intermédiaire en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique

> Réf. AGIL4\_02

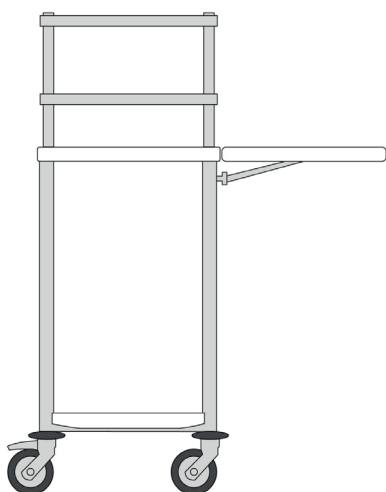


### Configuration n°10

Guéridon de soins Agily 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 rail normalisé (en haut à droite)
- ▶ 1 tablette d'extension rabattable
- ▶ 1 portique avec 2 rails normalisés

> Réf. AGIL4\_10

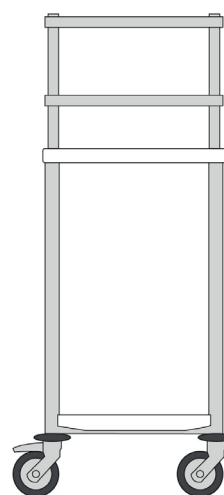

### Configuration n°20

Guéridon de soins Agily 400 x 400 équipé de :

- ▶ 1 tablette supérieure en thermoplastique
- ▶ 1 tablette inférieure en thermoplastique
- ▶ 1 portique avec 2 rails normalisés





> Réf. AGIL4\_20

Mobilier de soins et équipements de service

## Guéridons Agily® 400 x 400

### Données techniques



Dimensions des guéridons avec tablettes en compact

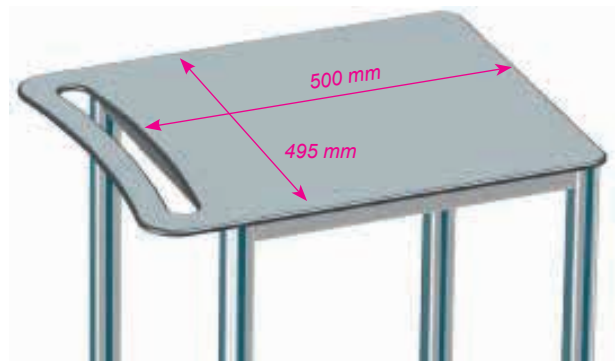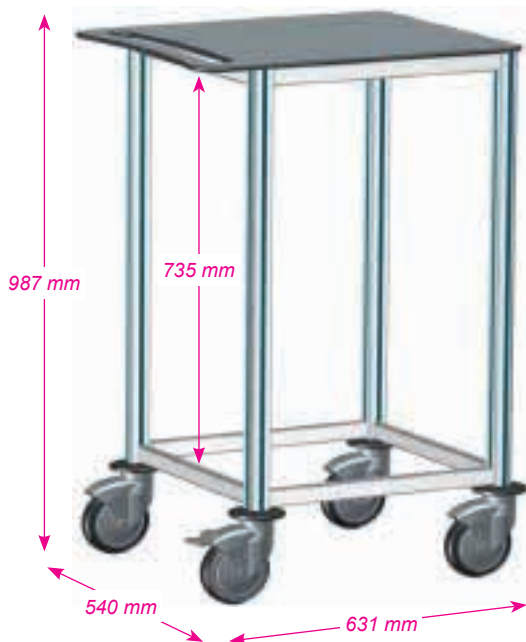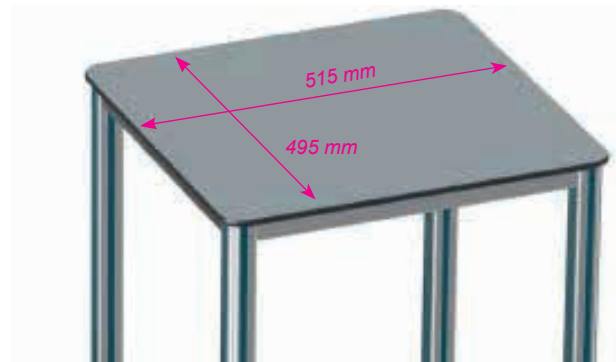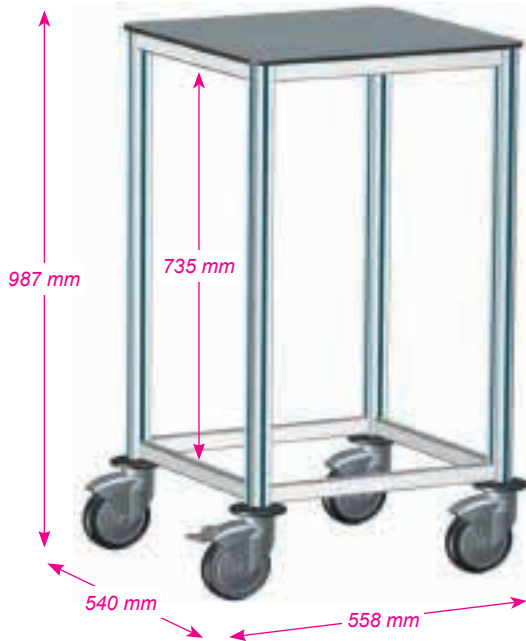

## Mobilier de soins et équipements de service

# Guéridons Agily® 400 x 400

### Dimensions des guéridons avec tablettes en thermoplastique

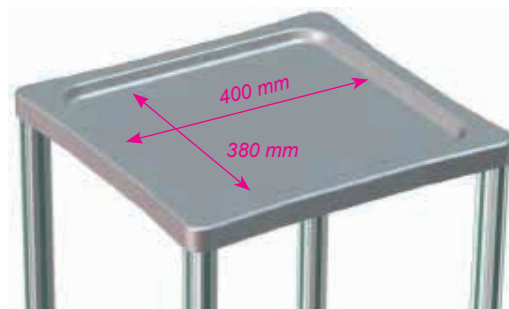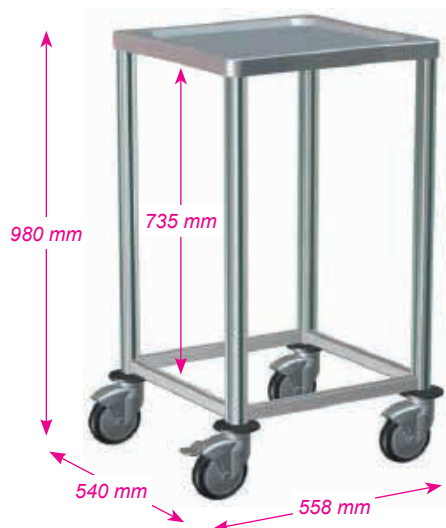

### Matières

<b>Structure</b> (montant, traverse)	Profil aluminium anodisé
<b>Roulettes</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape PolyAmide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant
<b>Plan de travail</b>	Stratifié compact (résine Phénolique) ép. 10 mm ou ABS / PMMA
<b>Rail normalisé</b>	Profil aluminium creux anodisé 30 x 10 mm
<b>Glissières pour tiroir</b>	Acier 20/10° traité époxy blanc texturé
<b>Tiroir</b>	ABS PC

### Informations diverses

<b>Roulettes</b>	4 roulettes Ø 125 mm - 1 à frein et 3 pivotantes		
<b>Charge admissible</b>	80 kg		
<b>Poids à vide</b>	AGIL4_03 : 10,2 kg	AGIL4_05 : 13,2 kg	AGIL4_06 : 13,8 kg
<b>Pré-équipement</b>	De série, à l'arrière		
<b>Capacité</b>	8 tiroirs de H. 75 mm / 5 tiroirs de H. 115 mm / 3 tiroirs de H. 195 mm		

### Emballage

<b>Conditionnement</b>	À l'unité sur palette, cerclée et filmée		
<b>Poids net</b>	AGIL4_03 : 20 kg	AGIL4_05 : 24 kg	AGIL4_06 : 24 kg
<b>Dimensions</b>	L. 0,88 x P. 0,80 x H. 1,10 m		
<b>Volume</b>	0,78 m³		










### Coloris au choix

<i>Bleu pop</i>	<i>Vert pomme</i>	<i>Orange</i>	<i>Fuchsia</i>	<i>Gris perle</i>
AGILY_BP	AGILY_VP	AGILY_OR	AGILY_FU	AGILY_GR
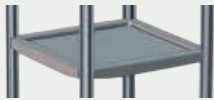
# Mobilier de soins et équipements de service
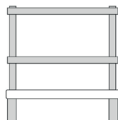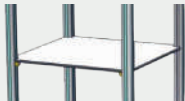
## Guéridons Agily® 400 x 400

### Équipements optionnels

Désignation	Photo	Référence	Désignation	Photo	Référence
Tablette intermédiaire en thermoplastique		87303	Tablette télescopique		87305
Tablette inférieure en thermoplastique		87304	Portique 2 rails normalisés en aluminium		87302
Tablette intermédiaire en compact		87309	Tablette d'extension rabattable		87301
Crochet quadruple pour rail normalisé		28007N	Poignée de manutention		87125
Bac L. 400 x P. 400 x H. 75 (glissières incluses) Bac L. 400 x P. 400 x H. 115 (glissières incluses) Bac L. 400 x P. 400 x H. 195 (glissières incluses)					87309



## Mobilier de soins et équipements de service

# Guéridons Résine® 600 x 400

Nos guéridons Résine® ont été conçus pour répondre aux exigences spécifiques des établissements de santé. Complètement modulaires grâce à une **vaste gamme d'accessoires**, nos chariots sont esthétiques par leur design et leurs couleurs. **Facilement désinfectables et décontaminables**, nos guéridons respectent parfaitement les critères de sécurité et d'hygiène les plus sévères.

Photos non contractuelles



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

### Points forts

- ▶ Ergonomique, maniable et léger
- ▶ Aménageable selon les besoins
- ▶ Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- ▶ Excellente tenue à la tâche
- ▶ Totalement recyclable

Mobilier de soins et équipements de service

## Gamme Résine® 600 x 400

### Caractéristiques techniques

- ▶ Structure en aluminium anodisé
- ▶ Plateaux et façades en PVC
- ▶ 4 roues Ø 100 mm dont 1 à frein (bandage non tachant)
- ▶ Hauteur utile des tiroirs : 100 mm
- ▶ Dimensions : L. 700 x P. 500 x H. 985 mm
- ▶ Coloris au choix pour les poignées des tiroirs :

Bleu pop

12

Vert pomme

23

Fuschia

45



### Guéridons 2 plateaux

Désignation	Référence
Guéridon Résine® 2 plateaux + 1 tiroir à clé	FA64201.XX
Guéridon Résine® 2 plateaux + 2 tiroirs dont 1 à clé	FA64202.XX
Guéridon Résine® 2 plateaux + 3 tiroirs dont 1 à clé	FA64203.XX

### Guéridons 3 plateaux

Désignation	Référence
Guéridon Résine® 3 plateaux	FA64300.71
Guéridon Résine® 3 plateaux + 1 tiroir à clé	FA64301.XX



## Mobilier de soins et équipements de service

# Guéridons Résine® 400 x 400

Nos guéridons Résine® ont été conçus pour répondre aux exigences spécifiques des établissements de santé. Complètement modulaires grâce à une **vaste gamme d'accessoires**, nos chariots sont esthétiques par leur design et leurs couleurs. **Facilement désinfectables et décontaminables**, nos guéridons respectent parfaitement les critères de sécurité et d'hygiène les plus sévères.



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

### Points forts

- ▶ Ergonomique, maniable et léger
- ▶ Aménageable selon les besoins
- ▶ Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- ▶ Excellente tenue à la tâche
- ▶ Totalement recyclable

Mobilier de soins et équipements de service

## Gamme Résine® 400 x 400

### Caractéristiques techniques

- ▶ Structure en aluminium anodisé
- ▶ Plateaux et façades en PVC
- ▶ 4 roues Ø 100 mm dont 1 à frein (bandage non tachant)
- ▶ Hauteur utile des tiroirs : 100 mm
- ▶ Dimensions : L. 500 x P. 500 x H. 985 mm
- ▶ Coloris au choix pour les poignées des tiroirs :

Bleu pop

12

Vert pomme

23

Fuschia

45



### Guéridons 2 plateaux

Désignation	Référence
Guéridon Résine® 2 plateaux + 1 tiroir à clé	FA44201.XX
Guéridon Résine® 2 plateaux + 2 tiroirs dont 1 à clé	FA44202.XX
Guéridon Résine® 2 plateaux + 3 tiroirs dont 1 à clé	FA44203.XX

### Guéridons 3 plateaux

Désignation	Référence
Guéridon Résine® 3 plateaux	FA44300.71
Guéridon Résine® 3 plateaux + 1 tiroir à clé	FA44301.XX

# Neop | Chariots d'urgence 600 x 400 à tiroirs télescopiques

## Disponibilité immédiate du matériel et des produits nécessaires aux interventions de première urgence

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs

### Coloris

Rouge garance



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Hauteur\* 100
- Zone de préhension ergonomique
- Fermeture à battant avec jeu de 20 scellés. Accès au contenu du chariot en rompant le scellé par simple torsion. Après chaque utilisation, le chariot est rééquipé, puis condamné par un scellé à usage unique numéroté.
- Tiroirs télescopiques à sortie totale, sur coulisses à billes avec amortisseur et butée de fin de course, avec bacs à lèbres
- Version 5 tiroirs ou 6 tiroirs
- Berceau pour bacs à lèbres adapté à la majeure partie des bacs à lèbres disponibles
- Bac à lèbres extractible pour faciliter le nettoyage
- Planche à massage cardiaque sur support



\*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »


## Configurations types - PREMIUM

### CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ

#### 5 tiroirs télescopiques avec compartimentage

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 1 tiroir télescopique F600 H80 avec bac à lèvres plein H50 équipé d'un kit de compartimentage 16 cases
- 3 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres ajouré H100 équipé d'un kit de compartimentage 9 cases
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres ajouré H200
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 rail en bas à droite
- 1 support bouteille à oxygène

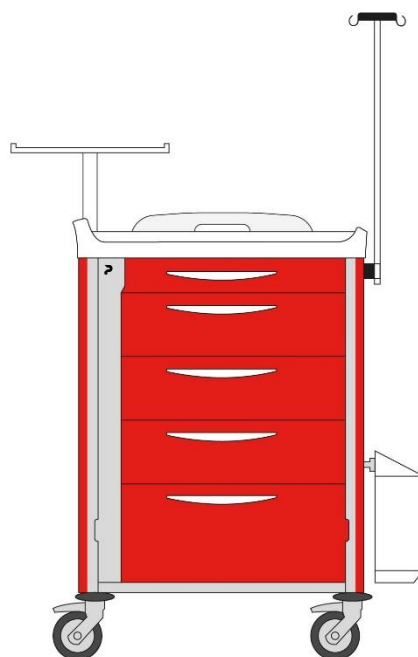


Référence	Désignation
8Y164H100T.U2P	Chariot d'urgences NEOP équipé 600x400 H100 - 5 tiroirs télescopiques avec compartimentage

### CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ

#### 5 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 1 tiroir télescopique F600 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 3 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres ajouré H200
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 support bouteille à oxygène
- 1 rail en bas à droite

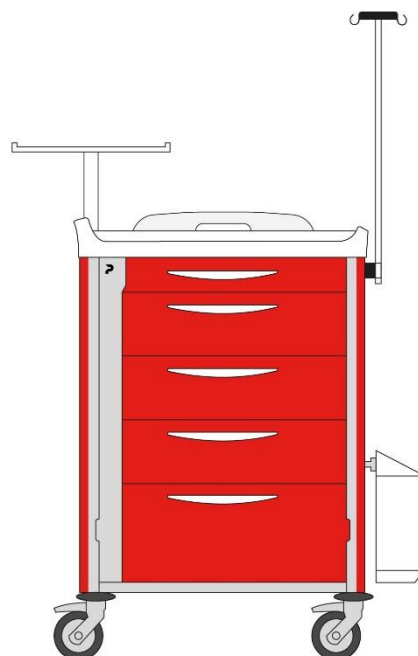


Référence	Désignation
8Y164H100T.U2	Chariot d'urgences NEOP équipé 600x400 H100 - 5 tiroirs télescopiques

*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*

## CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ 6 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 3 tiroirs télescopiques F600 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 2 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres ajouré H200
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 support bouteille à oxygène
- 1 rail en bas à droite

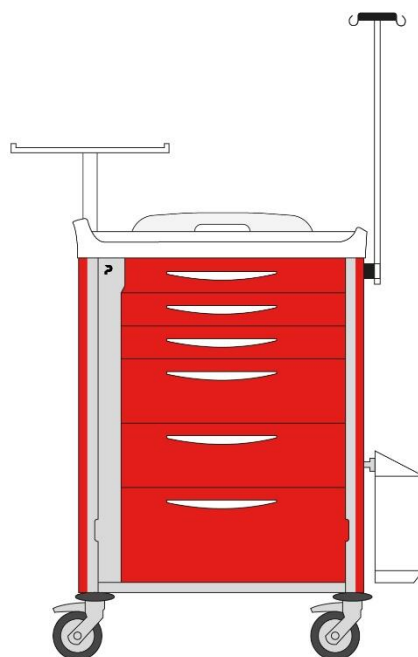


Référence	Désignation
8Y164H100T.U4	Chariot d'urgences NEOP équipé 600x400 H100 - 6 tiroirs télescopiques

*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*

## CHARIOT D'URGENCE DE BASE 5 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 1 tiroir télescopique F600 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 3 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres ajouré H200
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque

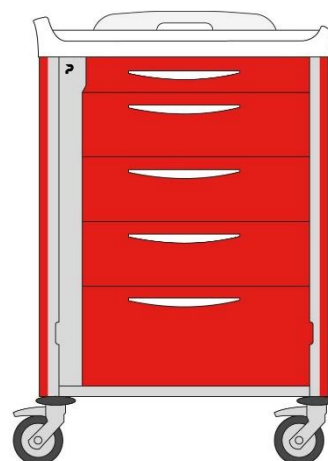

Référence	Désignation
8Y164H100T.U1	Chariot d'urgences NEOP de base 600x400 H100 - 5 tiroirs télescopiques


*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*

## CHARIOT D'URGENCE DE BASE

### 6 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 3 tiroirs télescopiques F600 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 2 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres ajouré H200
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque

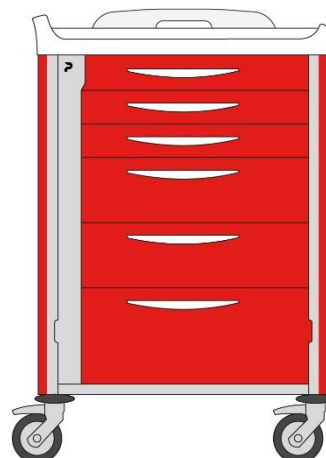


Référence	Désignation
8Y164H100T.U3	Chariot d'urgences NEOP de base 600x400 H100 - 6 tiroirs télescopiques

*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*

# Données techniques

Dimensions hors tout du chariot

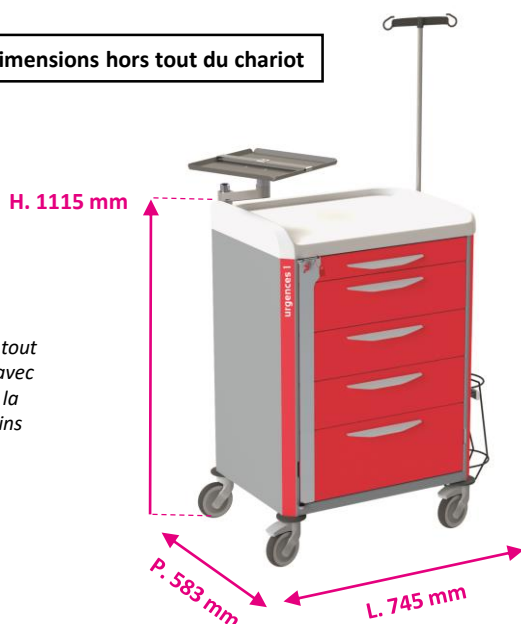

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.

Dimensions utiles du plan de travail



Hauteur du plan de travail

H. 1057 mm

## Matières

Structure	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
Glissières	Coulisse bille acier zingué avec amortisseur
Tiroirs	Façade en stratifié compact ép. 8 mm / Cadre en aluminium traité EPOXY, bacs à lèvres en ABS
Fermeture	Battant : Aluminium recouvert peinture EPOXY
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant

## Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot	
Poids à vide	38 kg	
Capacité	U1 / U2 : - 1 tiroir HT 80 mm - 3 tiroirs HT 160 mm - 1 tiroir HT 240 mm en compact	U3 / U4 : - 3 tiroirs HT 80 mm - 2 tiroirs HT 160 mm - 1 tiroir HT 240 mm en compact
Verrouillage	Scellés	
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique	
Equipements	Modèle de base (U1/U3) : Planche de massage cardiaque	Modèle équipé (U2/U4) : Planche de massage cardiaque / Support bouteille à oxygène / Tige porte sérum / Support monitoring

## Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions L X P x H	L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m
Poids (chariot + emballage)	50 kg	Volume	1,15 m <sup>3</sup>





# Neop | Chariots d'urgence 600 x 400 à tiroirs jointifs

## Disponibilité immédiate du matériel et des produits nécessaires aux interventions de première urgence

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- Hauteur\* 100
- Zone de préhension ergonomique
- Fermeture à battant avec jeu de 20 scellés. Accès au contenu du chariot en rompant le scellé par simple torsion. Après chaque utilisation, le chariot est rééquipé, puis condamné par un scellé à usage unique numéroté.
- 5 ou 6 tiroirs jointifs
- Planche à massage cardiaque sur support

### Coloris

**Rouge garance**



\*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

## Configuration type - PREMIUM

### CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ - 5 tiroirs jointifs


#### Accessoires périphériques

- 1 jeu de 20 scellés
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche de massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte-sérum 2 crochets
- 1 rail en bas à droite
- 1 support bouteille à oxygène

#### Aménagement intérieur

- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm

Référence	Désignation
8Y164H100P4.U2	Chariot d'urgences NEOP équipé 600x400 - 5 tiroirs jointifs

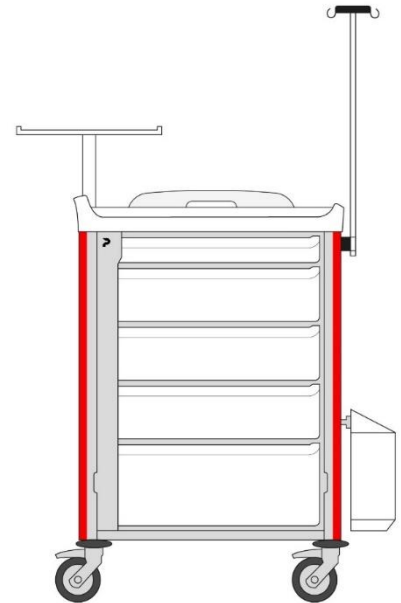

### CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ - 6 tiroirs jointifs


#### Accessoires périphériques

- 1 jeu de 20 scellés
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche de massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte-sérum 2 crochets
- 1 rail en bas à droite
- 1 support bouteille à oxygène

#### Aménagement intérieur

- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm

Référence	Désignation
8Y164H100P4.U3	Chariot d'urgences NEOP équipé 600x400 - 6 tiroirs jointifs

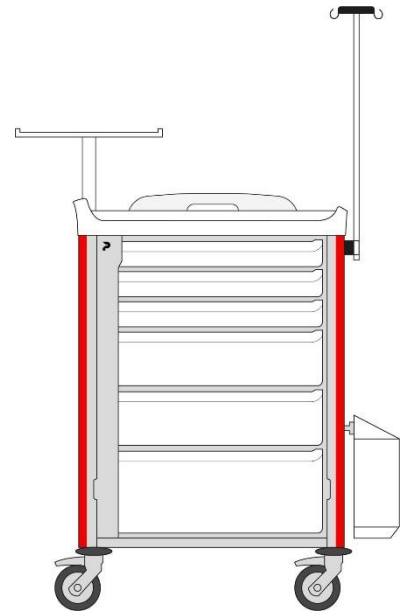

## Accessoires et aménagements intérieurs



Poignée ergonomique, portique, rail normalisé, poubelle...  
Se référer aux fiches dédiées.

# Données techniques

## Dimensions hors tout du chariot



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.

## Dimensions utiles du plan de travail



## Hauteur du plan de travail

H. 1057 mm

## Matières

Structure	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
Fermeture	Battant : Aluminium recouvert peinture EPOXY
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot
Poids à vide	24 kg
Capacité	20 pas de 40 mm
Verrouillage	Scellés

## Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions L X P x H	L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m
Poids (chariot + emballage)	36 kg	Volume	1,15 m <sup>3</sup>



# Neop | Chariots d'urgence 400 x 400 à tiroirs télescopiques

## Disponibilité immédiate du matériel et des produits nécessaires aux interventions de première urgence

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

**Coloris**

**Rouge garance**

- Hauteur\* 100
- Zone de préhension ergonomique
- Fermeture à battant avec jeu de 20 scellés. Accès au contenu du chariot en rompant le scellé par simple torsion. Après chaque utilisation, le chariot est rééquipé, puis condamné par un scellé à usage unique numéroté.
- Tiroirs télescopiques à sortie totale, sur coulisses à billes avec amortisseur et butée de fin de course, avec bacs à lèvres
- Version 5 tiroirs ou 6 tiroirs
- Berceau pour bacs à lèvres adapté à la majeure partie des bacs à lèvres disponibles
- Bac à lèvre extractible pour faciliter le nettoyage
- Planche à massage cardiaque sur support




\*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

## Configurations types - PREMIUM

### CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ 5 tiroirs télescopiques avec compartimentage

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 1 tiroir télescopique F400 H80 avec bac à lèvres plein H50 équipé d'un kit de compartimentage 16 cases
- 3 tiroirs télescopiques F400 H160 avec bac à lèvres ajouré H100 équipé d'un kit de compartimentage 9 cases
- 1 tiroir télescopique F400 H240 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 rail en bas à droite
- 1 support bouteille à oxygène

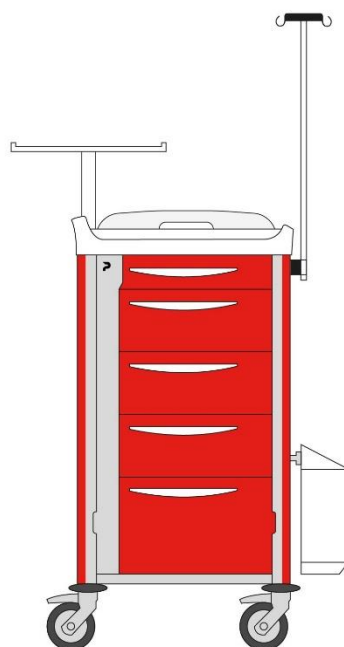


Référence	Désignation
8Y144H100T.U2P	Chariot d'urgences NEOP équipé 400x400 H100 - 5 tiroirs télescopiques avec compartimentage

### CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ 5 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 1 tiroir télescopique F400 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 3 tiroirs télescopiques F400 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F400 H240 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 support bouteille à oxygène
- 1 rail en bas à droite

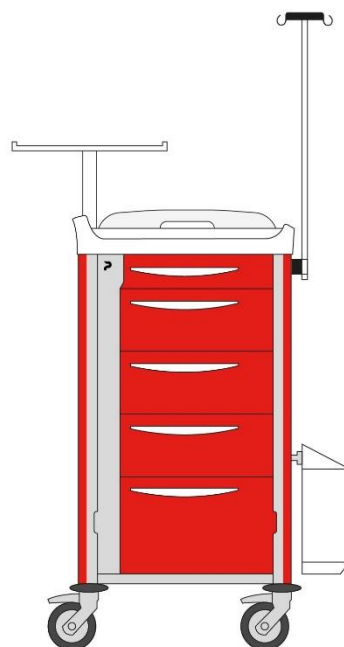


Référence	Désignation
8Y144H100T.U2	Chariot d'urgences NEOP équipé 400x400 H100 - 5 tiroirs télescopiques

*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*

## CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ 6 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 3 tiroirs télescopiques F400 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 2 tiroirs télescopiques F400 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F400 H240 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 support bouteille à oxygène
- 1 rail en bas à droite

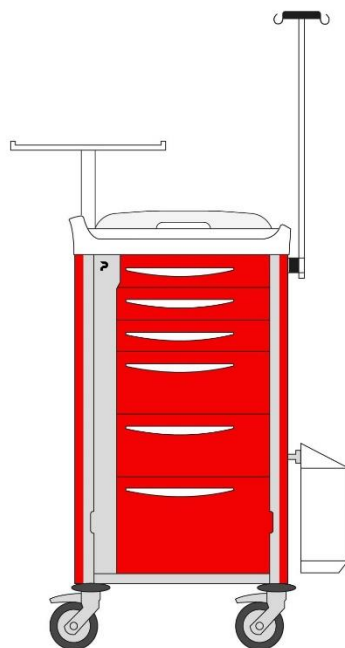


Référence	Désignation
8Y144H100T.U4	Chariot d'urgences NEOP équipé 400x400 H100 - 6 tiroirs télescopiques

*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*

## CHARIOT D'URGENCE DE BASE 5 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 1 tiroir télescopique F400 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 3 tiroirs télescopiques F400 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F400 H240 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque

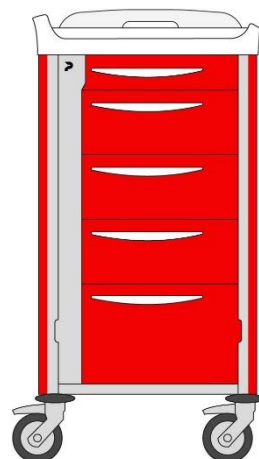

Référence	Désignation
8Y144H100T.U1	Chariot d'urgences NEOP de base 400x400 H100 - 5 tiroirs télescopiques


*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*

## CHARIOT D'URGENCE DE BASE

### 6 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 3 tiroirs télescopiques F400 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 2 tiroirs télescopiques F400 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F400 H240 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque

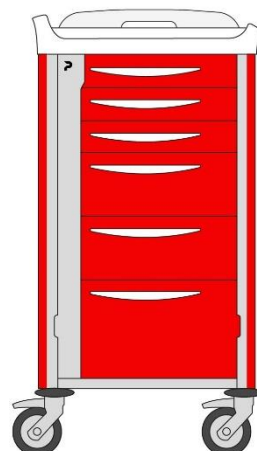

Référence	Désignation
8Y144H100T.U3	Chariot d'urgences NEOP de base 400x400 H100 - 6 tiroirs télescopiques

*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*



# Données techniques

## Dimensions hors tout du chariot

H. 1115 mm



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.

## Dimensions utiles du plan de travail

L. 443 mm

P. 495 mm



Tablette supérieure en plastique thermoformé avec zone de préhension ergonomique

## Hauteur du plan de travail

H. 1057 mm

## Matières

Structure	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
Glissières	Coulisse bille acier zingué avec amortisseur
Tiroirs	Façade en stratifié compact ép. 8 mm, cadre en aluminium traité EPOXY, bacs à lèvres en ABS
Fermeture	Battant : Aluminium recouvert peinture EPOXY
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant, chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant

## Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot	
Poids à vide	33 kg	
Capacité	U1 / U2 : - 1 tiroir H 80 mm - 3 tiroirs H 160 mm - 1 tiroir H 240 mm en compact	U3 / U4 : - 3 tiroirs H 80 mm - 2 tiroirs H 160 mm - 1 tiroir H 240 mm en compact
Verrouillage	Scellés	
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique	
Equipements	Modèle de base (U1/U3) : Planche de massage cardiaque	Modèle équipé (U2/U4) : Planche de massage cardiaque / Support bouteille à oxygène / Tige porte sérum / Support monitoring

## Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions L X P x H	L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m
Poids (chariot + emballage)	50 kg	Volume	1,15 m <sup>3</sup>



## Hygiène bucco-dentaire

# Système de nettoyage pour prothèses dentaires C2S PRO®

Le système C2S PRO® vise à l'amélioration des soins bucco-dentaires au sein des établissements de santé. Il permet une **baisse significative des bactéries ainsi que des champignons** (candidoses), limitant ainsi certaines pathologies systémiques (pathologie des voies aériennes supérieures). C2S PRO® est conçu pour le **nettoyage quotidien et curatif de tous types de prothèses dentaires amovibles et transvissées**. Par brossage dynamique avec des aiguillettes d'alliage spécial, il contribue à la pérennisation des prothèses dentaires en prévenant la formation de plaque dentaire et de tartre.



Hygène



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Simple et efficace
- ▶ Contribue à la pérennisation des prothèses dentaires
- ▶ Préviens la formation de plaque dentaire et de tartre
- ▶ Limite le recours à des spécialistes (dentistes, prothésistes dentaires...)

## Hygiène bucco-dentaire

### Système de nettoyage pour prothèses dentaires C2S Pro®

#### Système de nettoyage pour prothèses dentaires

- ▶ Dim : L. 20 x l. 17,5 x H. 19,5 cm
- ▶ Lavage : mise en rotation d'aimants à 1800 rpm
- ▶ Timing : 2 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min
- ▶ Arrêt automatique du système en cas d'inactivité prolongée
- ▶ Homologation : CE
- ▶ Alimentation : transformateur séparé norme CE, input : 100-240 V / output : 12 V
- ▶ Garantie : 2 ans



Désignation

Référence

**Système de nettoyage C2S PRO®**

2CPRO

#### Batterie amovible

- ▶ Type : Lithium Polymère
- ▶ Dimensions : 19,4 x 12 x 2,1 cm
- ▶ Couleur : gris argent
- ▶ Signalisation : LED bleues
- ▶ Autonomie : 7 h
- ▶ Alimentation INPUT : 19 V / 1,2 A
- ▶ Alimentation OUTPUT :
  - DC 12 V / 2,5 A (pour système C2S)
  - DC 16 V / 4 A
  - DC 19 V / 4 A
  - USB 5 V / 1,2 A
- ▶ Capacité : 30000 mAh



Désignation

Référence

**Batterie amovible C2S BAT®**

2CPROBAT

#### Bols de nettoyage

- ▶ Dim : Ø 11 x H. 9,5 cm
- ▶ Homologation : CE
- ▶ Chaque bol est livré avec une étiquette nominative, un protège étiquette et blister d'aiguillettes



Désignation

Référence

**2 bols avec couvercle rose**

2CBOLRM

#### Comprimés de bicarbonate

- ▶ Comprimés effervescents à usage quotidien
- ▶ Composition :
  - Bicarbonate de sodium
  - Vinaigre de cidre
  - Arôme menthe thym
  - Stéarate de magnésium
  - Cellulose microcristalline
  - Colorant bleu (E133)



Désignation

Référence

**Boîte de 200 comprimés C2S TAB®**

2CTAB


#### Aiguillettes

Désignation

Référence

**Boîte de 20 blisters d'aiguillettes**

2CPINS

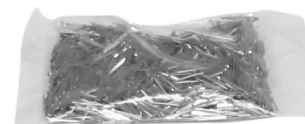



## Optimiser l'efficacité et la qualité des soins bucco-dentaires dans les établissements de santé

- Robustesse : excellente résistance, structure anodisée naturelle, parois latérales en ABS teinté masse
- Hygiène 100 % : conçue avec des matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- Chariot simple colonne
- Hauteur\* : 100
- Fermeture à rideau
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours)
- 1 poignée de manutention
- 3 rails normalisés pour accessoires
- Livré nu sans équipement

**Chariot dental care**

8Y144.DT

Ce chariot peut être équipé de cinq bacs de rangement pour bols de nettoyage de prothèses dentaires.

\*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

### Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, rail normalisé, bras informatique, portique, poubelle, bacs...

*Se référer aux fiches dédiées (utiliser les accessoires compatibles avec le chariot dentaire)*



**Coloris**

**Blanc**



# Données techniques

## Dimensions hors tout du chariot

H. 988 mm



## Dimensions utiles du plan de travail

L. 420 mm

P. 350 mm



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.  
La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Matières

Structure	Profil aluminium anodisé
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
Habillage	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styène) blanc
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styène)
Fermeture	Rideau : PP (PolyPropylène) gris
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant

## Informations diverses

Roues	Diamètre 100 mm - 4 pivotantes dont 1 à frein - double blocage de la roue et du pivot
Poids à vide	21 kg
Charge admissible	5 kg – pas de 70 mm
Capacité	10 pas de 70 mm
Verrouillage	Code (avec clé de secours)
Equipements	2 rails normalisés sur le côté droit 1 rail normalisé à l'arrière 1 poignée

## Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions L X P x H	L 0,80 x P 1,20 x H 1,2 m
Poids (chariot + emballage)	31 kg	Volume	1 m <sup>3</sup>

# PARTIE 3

---

## Accessoires de parapharmacie








## Accessoires de parapharmacie

# Coupeurs et broyeurs de comprimés

Photos non contractuelles

Les personnes âgées ou les enfants peuvent avoir des difficultés pour avaler les médicaments. Certains remèdes se prennent également dilués dans de l'eau. C'est pourquoi, nous proposons toute une gamme de coupeurs et de broyeurs de comprimés manuels.

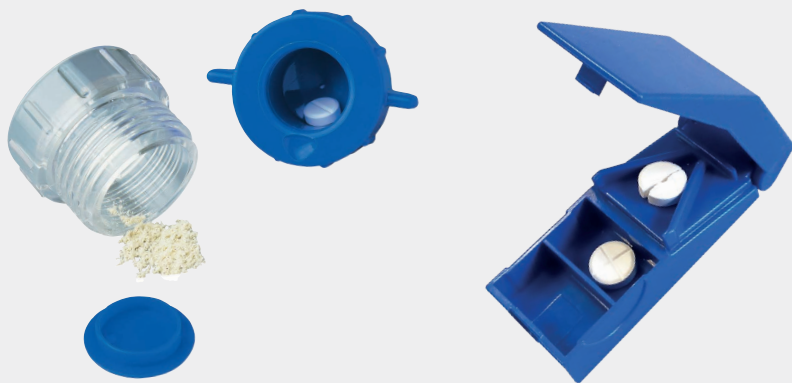

Hygène



Ergonomique

### Points forts

- ▶ Facilite la prise des comprimés
- ▶ Simple d'utilisation
- ▶ Rapide et sans effort
- ▶ Faible encombrement

## Accessoires de parapharmacie

# Coupeurs et broyeurs de comprimés

### Coupeur de comprimés

- ▶ Permet de couper, en 2 parties égales, les comprimés de toute forme
- ▶ Rapide, sans effort
- ▶ Avec compartiment de réserve
- ▶ Lame en acier inoxydable
- ▶ Dimensions : L. 85 x l. 33 x H. 26 mm

Désignation	Conditionnement	Référence
<b>Coupe-comprimés</b>	5 pièces	NA03319



Visionnez-moi

### Broyeur de comprimés

- ▶ Permet de réduire en poudre fine les comprimés de toute forme
- ▶ Rapide, sans effort
- ▶ Avec compartiment de réserve
- ▶ Dimensions : L. 50 x l. 50 x H. 45 mm

Désignation	Conditionnement	Référence
<b>Écrase-comprimés</b>	5 pièces	NA03318



Visionnez-moi

## Accessoires de parapharmacie

# Piluliers de poche

Pour suivre plus facilement son traitement, PRATICIMA a conçu une gamme de piluliers de poche, baptisée Dolcimo® Pocket.

Cette gamme se compose de **piluliers journaliers et hebdomadaires** déclinés en plusieurs tailles. Ces piluliers sont proposés en présentoir, accompagnés de broyeurs et de coupeurs de comprimés, ou bien en lot.

Photos non contractuelles



## Points forts

- ▶ Format discret et pratique
- ▶ Planification du traitement au jour ou à la semaine
- ▶ Présentoir avec réassortiments disponibles

## Accessoires de parapharmacie

# Piluliers de poche

### Présentoir Dolcimo® Pocket

Le présentoir Dolcimo® Pocket comporte 60 pièces :

- ▶ 12 piluliers hebdomadaires grand modèle
- ▶ 6 piluliers hebdomadaires moyen modèle
- ▶ 12 piluliers hebdomadaires petit modèle
- ▶ 12 piluliers journaliers grand modèle
- ▶ 12 piluliers journaliers petit modèle
- ▶ 4 coupeurs de comprimés
- ▶ 2 broyeurs de comprimés

Désignation

Référence

<b>1</b>	<b>Présentoir Dolcimo® Pocket</b>	NA03103
----------	-----------------------------------	---------



### Piluliers Dolcimo® Pocket

Désignation

Dimensions (en mm)

Référence

<b>2</b>	<b>Pilulier journalier Dolcimo® Pocket - Petit modèle</b> 50 piluliers de différentes couleurs (17 bleus + 17 blancs + 16 jaunes)	L. 85 x P. 30 x H. 12	NA03104
<b>3</b>	<b>Pilulier journalier Dolcimo® Pocket - Grand modèle</b> 50 piluliers de différentes couleurs (16 bleus + 17 blancs + 17 jaunes)	L. 85 x P. 30 x H. 24	NA03106
<b>4</b>	<b>Pilulier hebdomadaire Dolcimo® Pocket - Petit modèle</b> 60 piluliers de différentes couleurs (20 bleus + 20 blancs + 20 jaunes)	L. 113 x P. 23 x H. 17	NA03112
<b>5</b>	<b>Pilulier hebdomadaire Dolcimo® Pocket - Moyen modèle</b> 60 piluliers de différentes couleurs (20 bleus + 20 blancs + 20 jaunes)	L. 128 x P. 30 x H. 30	NA03110
<b>6</b>	<b>Pilulier hebdomadaire Dolcimo® Pocket - Grand modèle</b> 60 piluliers de différentes couleurs (20 bleus + 20 blancs + 20 jaunes)	L. 150 x P. 30 x H. 24	NA03109

### Broyeurs et coupeurs de comprimés

Désignation

Référence

<b>7</b>	<b>5 broyeurs de comprimés</b>	NA03318
<b>8</b>	<b>5 coupeurs de comprimés</b>	NA03319

## Accessoires de parapharmacie

# Piluliers compacts

PRATICIMA propose toute une gamme de **piluliers journaliers** et **hebdomadaires**.  
Faciles d'utilisation, ils permettent aux patients de mieux suivre leur traitement.  
Très compacts, vous pourrez facilement les transporter dans une poche ou dans un sac.



Hygène



Ergonomie

## Points forts

- ▶ 3 solutions ergonomiques
- ▶ Simple et facile d'utilisation
- ▶ Évite l'oubli et la double prise

## Accessoires de parapharmacie

# Piluliers compacts

### Dolcimo® 24 h

- ▶ Pilulier journalier de 4 cases
- ▶ Ouverture du pilulier par simple pression
- ▶ Petit et ergonomique, transportable dans une poche
- ▶ Dimensions du présentoir : L. 105 x P. 110 x H. 257 mm
- ▶ Dimensions du pilulier : L. 29 x P. 134 x H. 26 mm
- ▶ Coloris : vert pomme



Désignation	Référence
<b>Présentoir de 12 piluliers « Dolcimo® 24 h » - version française</b>	538001VP

### Dolcimo® Classic

- ▶ Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
- ▶ Facilement transportable dans un sac
- ▶ Marquage des 7 jours de la semaine
- ▶ Marquage des moments de prise « Matin - Midi - Soir - Coucher »
- ▶ Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- ▶ Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation
- ▶ Dimensions du présentoir : L. 105 x P. 110 x H. 257 mm
- ▶ Dimensions du pilulier : L. 150 x P. 100 x H. 22 mm
- ▶ Coloris : vert pomme, orange, violet et bleu turquoise



Désignation	Référence
<b>Présentoir de 4 piluliers « Dolcimo® classic » - version française</b>	507601P01



### Dolcimo® 7



- ▶ Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
- ▶ Prise journalière détachable
- ▶ Ouverture du pilulier par simple pression
- ▶ Fourni avec une planche d'étiquettes des 7 jours de la semaine en 10 langues
- ▶ Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation
- ▶ Dimensions du plateau : L. 226 x P. 140 x H. 45 mm
- ▶ Dimensions du pilulier : L. 29 x P. 134 x H. 26 mm
- ▶ Coloris : vert pomme


Désignation	Référence
<b>Plateau « Dolcimo® 7 » composé de 7 piluliers - version multilingue</b>	539000VP

## Accessoires de parapharmacie

# Piluliers pour patients polymédiqués

Pour faciliter la prise de médicaments des patients polymédiqués, PRATICIMA propose trois piluliers hebdomadaires. Ces piluliers grands modèles, dotés de 28 cases fixes ou réglables, sont faciles d'utilisation. Ils évitent l'oubli et la double prise.

Photos non contractuelles

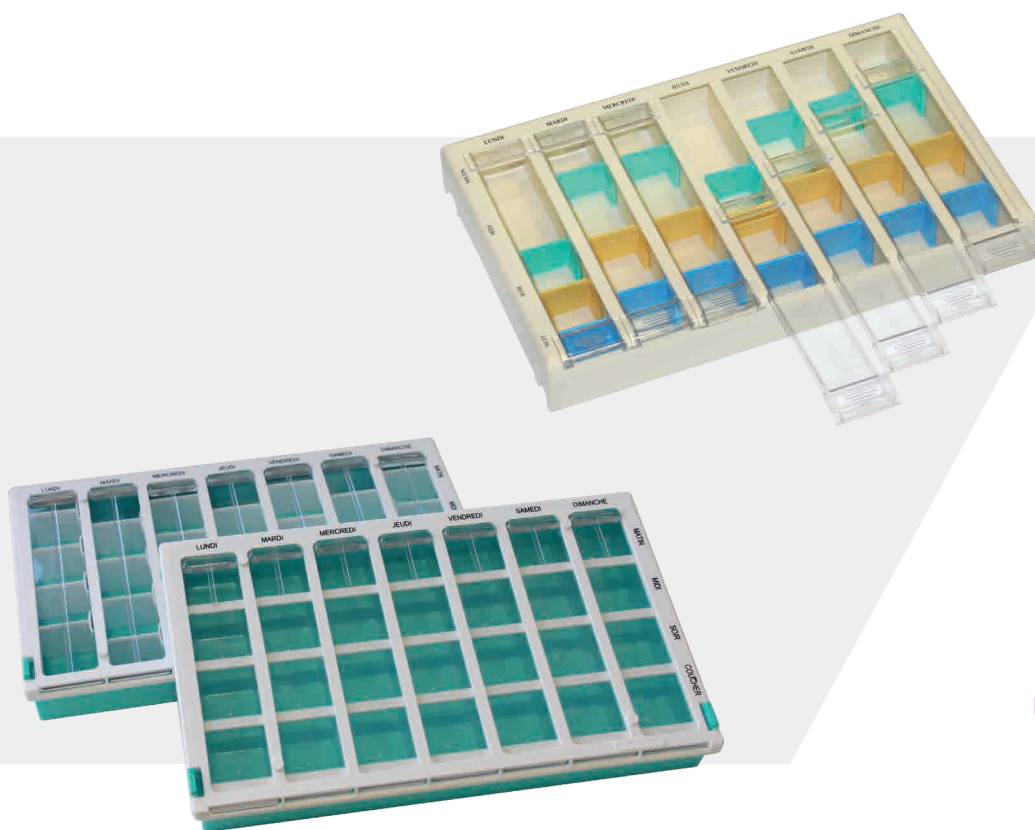

Hygiénique



Ergonomique

### Points forts

- ▶ Ouverture totale du pilulier pour le remplissage
- ▶ Tirettes transparentes pour une bonne visualisation
- ▶ Accès facile au contenu de chaque moment de prise

## Accessoires de parapharmacie


# Piluliers pour patients polymédiqués

### Piluliers Hebdo®

- ▶ Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
- ▶ Marquage des 7 jours de la semaine
- ▶ Marquage « Matin - Midi - Soir - Coucher »
- ▶ Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- ▶ Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation
- ▶ Accès facile au contenu de chaque moment de prise
- ▶ Dimensions : L. 319 x P. 199 x H. 42 mm

Désignation Référence

<b>1</b>	<b>Pilulier Hebdo® à cases fixes</b>	505001BL
<b>2</b>	<b>Pilulier Hebdo® à cases réglables</b>	506101BL
	<b>100 étiquettes patients pour Hebdo®</b>	50288

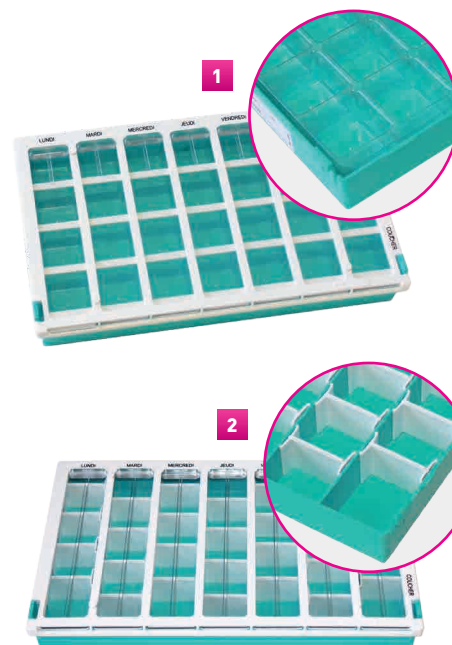

### Pilulier Pil 7® Évolution

- ▶ Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
- ▶ Curseurs amovibles adaptables suivant prescription
- ▶ 3 coloris de curseurs pour un meilleur repérage
- ▶ Marquage des 7 jours de la semaine
- ▶ Marquage « Matin - Midi - Soir - Nuit »
- ▶ Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- ▶ Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation
- ▶ Accès facile au contenu de chaque moment de prise
- ▶ Dimensions : L. 320 x P. 200 x H. 40 mm

Désignation Référence

<b>3</b>	<b>Pilulier Pil 7® Évolution sans butée - 1 unité</b>	CD23605
	<b>Pilulier Pil 7® Évolution sans butée - 10 unités</b>	CD23606





## Accessoires de parapharmacie

# Boîte à dentier

Discrète et pratique, cette boîte à dentier permettra de ranger votre dentier d'une manière hygiénique.



Hygiénique



Ergonomique

- ▶ Matière : Polypropylène
- ▶ Coloris : blanc
- ▶ Couvercle attaché
- ▶ Lavable en machine
- ▶ Autoclavable (stérilisation à froid uniquement)
- ▶ Résistant aux désinfectants pour matériel médical (PH neutre)
- ▶ Dimensions : L. 100 x l. 88 x H. 45 mm
- ▶ Conditionnement : lot de 10

**Réf. NA03220**



# PARTIE 4

---

## Gestion du linge et des déchets





## Gestion du linge et des déchets

# Chariots de change

La gamme de chariots de change rationalise et facilite le travail des aides-soignantes. L'**ergonomie** et la **modularité** des éléments de rangement permet d'adapter le chariot aux besoins de chaque service. Pour limiter les efforts de poussée des utilisateurs et éviter les TMS, nos chariots peuvent être équipés de la **roue motorisée EasyMoove**. La **gestion informatisée** des changes est possible par l'adaptation sur le chariot d'un support PC sécurisé.

Photos non contractuelles



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Modèle ouvert ou fermé avec portes coulissantes
- ▶ 2 capacités : 15 à 20 patients ou 20 à 30 patients
- ▶ Guidon de manoeuvre intégré au châssis
- ▶ Plateau intermédiaire réglable en hauteur avec séparateurs amovibles
- ▶ Nombreux espaces de rangement
- ▶ Matériaux résistants à la corrosion et aux produits désinfectants

## Gestion du linge et des déchets

# Chariots de change

### Chariots de change ouverts

#### Équipements de série

- ▶ 1 tiroir 600 x 400 coulissant sous le plateau supérieur
- ▶ 1 bac encastrable sur le plateau supérieur
- ▶ 2 paniers latéraux grand modèle en fil rilsanisé
- ▶ 1 étagère intermédiaire amovible réglable
- ▶ Séparateurs amovibles pour étagère intermédiaire (3 pour le Classic, 2 pour le Mini)



Chariot Classic ouvert

CHARIOTS DE CHANGE 15 À 20 PATIENTS	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Chariot de change ouvert Mini</b>	L. 1085 x P. 630 x H. 994	8P200XX
<b>Chariot « Mini » ouvert avec motorisation EasyMoove - bleu pop</b>	L. 1085 x P. 630 x H. 994	8P200BP_MOTOR
CHARIOTS DE CHANGE 20 À 30 PATIENTS	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Chariot de change ouvert Classic</b>	L. 1285 x P. 630 x H. 994	8P100XX
<b>Chariot de change ouvert Classic motorisé - bleu pop</b>	L. 1285 x P. 630 x H. 994	8P100BP_MOTOR

### Chariots de change à portes

#### Équipements de série

- ▶ 1 bac encastrable sur le plateau supérieur
- ▶ 2 paniers latéraux grand modèle en fil rilsanisé
- ▶ 1 étagère intermédiaire amovible réglable
- ▶ Séparateurs amovibles pour étagère intermédiaire (3 pour le Classic, 2 pour le Mini)



Chariot Mini à portes

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Chariot de change à portes Mini</b>	L. 1085 x P. 630 x H. 994	8P200XX_P
<b>Chariot de change à portes Classic</b>	L. 1285 x P. 630 x H. 994	8P100XX_P

### Motorisation

Tous nos chariots de change peuvent être équipés de la roue motorisée EasyMoove. Cette innovation permet de **limiter les efforts de poussée des utilisateurs**. Une simple action avec le doigt sur la gâchette permet d'actionner la motorisation. Le personnel bénéficie ainsi d'un **confort de travail optimal**.











Désignation	Référence
<b>Roue motorisée EasyMoove pour chariot de change Mini</b> (à commander en même temps que le chariot)	9R002_L02
<b>Roue motorisée EasyMoove pour chariot de change Classic</b> (à commander en même temps que le chariot)	9R002_L03



# Gestion du linge et des déchets

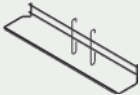
## Chariots de change

### Accessoires latéraux

Désignation	Photo	Référence	Désignation	Photo	Référence
<b>Trieur 3 colonnes avec séparateurs amovibles</b>		8P004	<b>Support vertical pour fiche de dotation</b>		AN09403
<b>Support latéral pour sac à linge ou poubelle</b>		AN01070	<b>Porte-sac amovible avec couvercle et pédale</b>		22001_S
<b>Support pour rouleau</b>		28059N.GR	<b>Support normalisé pour boîte à gants ou essuie-mains</b>		28001N.GR
<b>Panier latéral en fil chromé - Petit modèle</b>		28062N.GR	<b>Panier latéral en fil chromé - Grand modèle</b>		28061N.GR
<b>Support dossier en fil chromé</b>		BF20248	<b>Support pour container à lingettes</b>		AN00008

### Données techniques

#### Chariot de change Mini

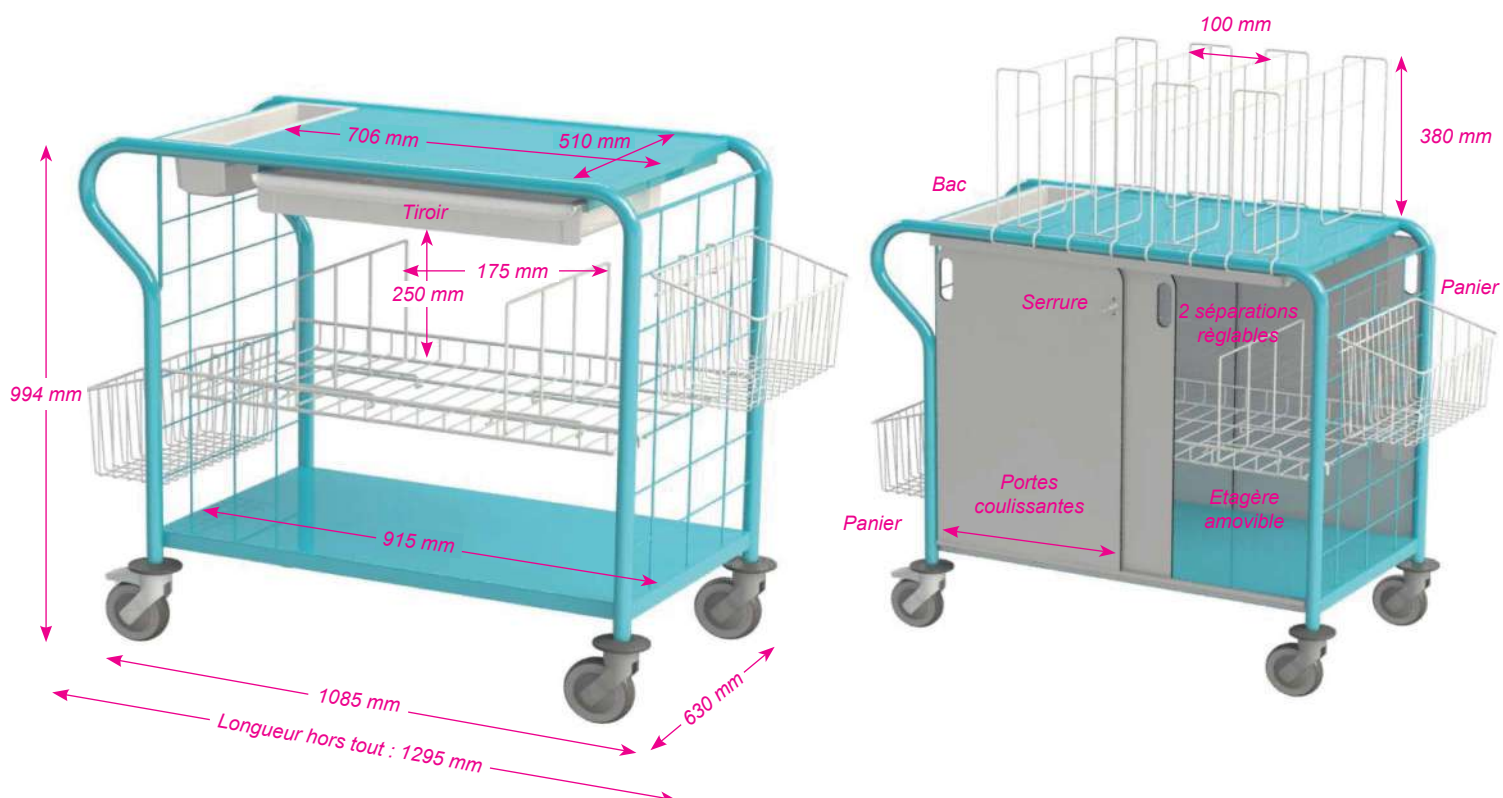

# Gestion du linge et des déchets

## Chariots de change

### Chariot de change Classic



### Matières

<b>Structure</b>	Structure en tube acier Ø 30 mm traité anti corrosion à l'époxy	
<b>Roulettes</b>	Double bandage en PolyAmide (PA) - Bande souple en PolyRéthane (PUR)	
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant	
<b>Portes</b>	Panneau compact gris ép. 6 mm	
<b>Plateau supérieur</b>	Plateau supérieur en tôle acier 15/10° mécano soudé traité anti corrosion à l'époxy	
<b>Plateau intermédiaire</b>	Fil en acier Ø 8 mm et Ø 4 mm traité anti corrosion à l'époxy	
<b>Séparations réglables</b>	Fil en acier Ø 6 mm traité anti corrosion à l'époxy	
<b>Bac encastrable</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)	
<b>Tiroir</b>	ABS PC (Acrylonitrile Butadiène Styrène / PolyCarbonate)	

### Informations diverses

<b>Roulettes</b>	4 roulettes Ø 125 mm - 1 à frein, 1 directionnelle et 2 pivotantes	
<b>Poids net</b>	8P200XX : 30 kg 8P100XX : 34 kg	8P200XX_P : 45 kg 8P100XX_P : 49 kg
<b>Charges admissibles</b>	Plateau supérieur : 60 kg	Plateau intermédiaire : 30 kg

### Emballage

<b>Conditionnement</b>	À l'unité sur palette, cerclée et filmée	
<b>Poids brut</b>	8P200XX : 42 kg 8P100XX : 46 kg	8P200XX_P : 57 kg 8P100XX_P : 61 kg
<b>Dimensions</b>	Chariot Mini : L. 0,80 x P. 1,20 x H. 1,26 m	Chariot Classic : L. 0,80 x P. 1,40 x H. 1,25 m
<b>Volume</b>	Chariot Mini : 1,15 m <sup>3</sup>	Chariot Classic : 1,35 m <sup>3</sup>

### Coloris au choix






## Gestion du linge et des déchets

# Chariots distri-linge

Nos chariots distri-linge en fil d'acier chromé sont dotés de séparateurs permettant une distribution nominative du linge.

Très solides, ils réduisent l'accumulation de poussière et d'humidité. Ils peuvent aussi être équipés d'une poignée de poussée pour faciliter leur déplacement.

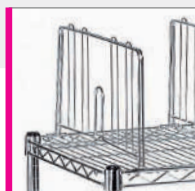

Hygène



Ergonomique



Montage facile



Robuste

## Points forts

- ▶ Résistant aux lourdes charges : de 225 à 337 kg par étagère selon le chariot
- ▶ Nettoyage simple : évite toute accumulation de poussière
- ▶ Installation rapide : sans écrou, sans boulon, ni outil

## Gestion du linge et des déchets

# Chariots distri-linge

### Chariots distri-linge

#### Caractéristiques techniques

- ▶ Montants en tube chromé Ø 25 mm
- ▶ 4 roues pivotantes Ø 125 mm avec butées annulaires, dont 2 à frein
- ▶ 6 étagères compartimentées par des séparateurs chromés
- ▶ Produit livré non monté, avec une notice claire et pratique

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Chariot 10 patients</b>	L. 767 x P. 457 x H. 1725	AH10200
<b>Chariot 15 patients</b>	L. 915 x P. 457 x H. 1725	AH10201
<b>Chariot 20 patients</b>	L. 1220 x P. 457 x H. 1725	AH10202
<b>Chariot 25 patients</b>	L. 1525 x P. 457 x H. 1725	AH10203
<b>Chariot 15 patients avec penderie</b>	L. 1220 x P. 457 x H. 1725	AH10204
<b>Chariot 20 patients avec penderie</b>	L. 1525 x P. 457 x H. 1725	AH10205



Chariot 20 patients avec penderie

#### Équipements optionnels

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Housse pour chariot AH10200</b>	L. 767 x P. 457 x H. 1600	AH09305
<b>Housse pour chariot AH10201</b>	L. 915 x P. 457 x H. 1600	AH09306
<b>Housse pour chariot AH10202 et AH10204</b>	L. 1220 x P. 457 x H. 1600	AH09307
<b>Housse pour chariot AH10203 et AH10205</b>	L. 1525 x P. 457 x H. 1600	AH09308



#### Autres configurations possibles

Composez vous-même votre chariot ou consultez-nous pour une étude personnalisée !



#### 1 Montants

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Montant en tube chromé Ø 25 mm</b>	L. 900	BF20201
<b>Montant en tube chromé Ø 25 mm</b>	L. 1600	BF20202
<b>Montant intermédiaire</b>	L. 1600	BF20241




# Gestion du linge et des déchets

## Chariots distri-linge

### 2 Étagères

Désignation	Dimensions (en mm)	Capacité (en kg)	Référence
Étagère fil	L. 762 x P. 457	337,5	BF20205
Étagère fil	L. 910 x P. 457	315	BF20206
Étagère fil	L. 1220 x P. 457	270	BF20208
Étagère fil	L. 1524 x P. 457	225	BF20209
Étagère fil	L. 1220 x P. 610	180	BF20213
Étagère fil	L. 1524 x P. 610	135	BF20214

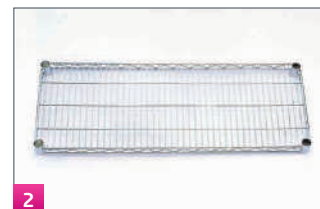

Les charges maximales indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti.


### 3 Séparateurs

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Séparateur	P. 457 x H. 270	BF00215
Séparateur	P. 610 x H. 270	BF00216




### Penderies

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Penderie extérieure	L. 300	BF20220
Penderie intérieure	L. 865	BF20221

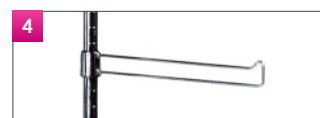



### Paniers et porte-documents

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Porte-document chromé	L. 270 x P. 96 x H. 298	BF20248
Support dossier spécial		BF20250

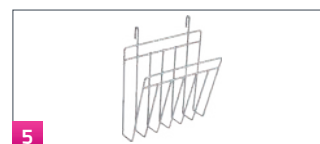

### Autres accessoires

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Poignée chromée	L. 457	BF20217
4 roues pivotantes dont 2 à frein avec butées annulaires	Ø 125	BF20319
12 porte-étiquettes avec étiquettes	L. 76 x P. 36	BF03601

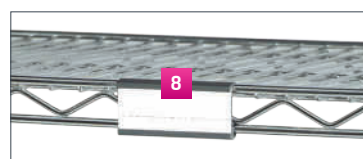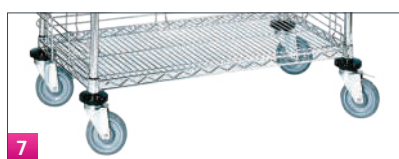



## Gestion du linge et des déchets

# Armoires de transport du linge

Pour distribuer le linge propre au sein de votre établissement, nous vous proposons différentes armoires de transport.

Complètement réalisées en alliage d'aluminium anodisé, nos armoires sont **solides, légères et faciles à guider**. Leurs portes, s'ouvrant à 270°, sont maintenues en position ouverte par un aimant.



### Points forts

- ▶ Châssis anti-torsion très robuste
- ▶ Pare-chocs périphérique en caoutchouc
- ▶ Poignée de poussée pour plus de maniabilité
- ▶ Nombreuses options disponibles



Robuste



Hygène



Ergonomique

## Gestion du linge et des déchets

# Armoires de transport du linge

### Caractéristiques techniques



- ▶ Corps d'armoire en alliage d'aluminium anodisé
- ▶ Pare-chocs périphérique caoutchouc en partie basse
- ▶ Poignée latérale double du côté des roues fixes
- ▶ Étagère amovible en aluminium anodisé
- ▶ 2 portes battantes ouvrant à 270°, maintenues ouvertes par un aimant
- ▶ 4 roues (2 fixes et 2 pivotantes sans frein) - bandage caoutchouc non traçant

Désignation	Dimensions extérieures (en mm)	Dimensions intérieures (en mm)	Ø des roues (en mm)	Capacité (en L)	Référence
<b>Armoire avec 1 étagère</b>	L. 1230 x P. 630 x H. 1200	L. 1130 x P. 550 x H. 920	160	572	AE12000
<b>Armoire avec 2 étagères</b>	L. 1230 x P. 630 x H. 1500	L. 1130 x P. 550 x H. 1175	200	731	AE12001
<b>Armoire avec 2 étagères</b>	L. 1230 x P. 630 x H. 1740	L. 1130 x P. 550 x H. 1420	200	883	AE12002

### Équipements optionnels

Désignation	Référence
<b>1</b> Pare-chocs supérieur (H + 45 mm)	AE03102
<b>2</b> Porte-fiche A4	AE02006
Poignée supplémentaire	AE02009
Frein sur 1 roue pivotante	AE00311
<b>3</b> Frein centralisé sur 2 roues pivotantes	AE00312
Serrure à clé	8I001
Barre d'attelage	8I003



## Gestion du linge et des déchets

# Chariots de distribution du linge

PRATICIMA propose une large gamme de chariots de distribution du linge. Très légers et facilement maniables, ils peuvent être équipés de portes à fermeture magnétique et comporter une ou deux étagères selon leur taille.

Certains modèles sont dotés d'un **porte-sac** pour distribuer le linge propre et récolter le linge sale en un seul passage.



### Points forts

- ▶ Léger et solide
- ▶ Apte au lavage et à la désinfection
- ▶ Plateau supérieur avec rebord sur 3 côtés
- ▶ Nombreux accessoires disponibles



Hygène



Ergonomie

## Gestion du linge et des déchets

## Chariots de distribution du linge

## Caractéristiques techniques

- ▶ Corps d'armoire et étagère en alliage d'aluminium anodisé
- ▶ Dessus thermoformé avec rebords sur 3 côtés (H. 80 mm)
- ▶ 2 portes battantes en stratifié HPL (ouverture 270°)
- ▶ 4 roues Ø 100 mm avec pare-chocs annulaires
- ▶ Porte-sac livré avec couvercle, pédale et système d'accrochage rapide



Désignation	Dimensions (en mm)	Sans porte	À portes
<b>Chariot 2 niveaux</b>	L. 740 x P. 535 x H. 1000	AJ12015	AJ12000
<b>Chariot 2 niveaux avec 1 porte-sac sur le côté</b>	L. 1120 x P. 535 x H. 1000	AJ12030	AJ12013
<b>Chariot 2 niveaux avec 2 porte-sacs au dos</b>	L. 740 x P. 915 x H. 1000	–	AJ12011
<b>Chariot 3 niveaux</b>	L. 740 x P. 535 x H. 1190	AJ12020	AJ12021
<b>Chariot 3 niveaux avec 1 porte-sac sur le côté</b>	L. 1120 x P. 535 x H. 1190	–	AJ12022
<b>Chariot 3 niveaux avec 2 porte-sacs au dos</b>	L. 740 x P. 915 x H. 1190	–	AJ12025
<b>Chariot 3 niveaux avec 2 poignées de poussée</b>	L. 815 x P. 535 x H. 1420	–	AJ12027

## Équipements optionnels

Désignation	Photo	Référence
<b>Supplément 1 roue à frein</b> Incompatible avec AJ12027		AJ20301
<b>Support accessoire</b>		CN00201
<b>Porte documents chromé*</b>		BF20250
<b>Casier de rangement*</b>		28063N.GR
<b>Fermeture à clé</b>		AJ22004
<b>Tablette rabattable</b>		FN02037

Désignation	Photo	Référence
<b>Trieur 3 colonnes adaptable à l'intérieur et à l'extérieur du chariot</b>		AJ02040
<b>Tiroir adaptable sous le plateau supérieur</b> L. 560 x l. 405 x H. 120 mm Incompatible avec AJ12027		AJ20304
<b>Système d'accroche pour porte-sac à 1 sac</b> Incompatible avec AJ12027		AJ22001
<b>Système d'accroche pour porte-sac à 2 sacs</b> Incompatible avec AJ12027		AJ22002

\* Support accessoire indispensable pour l'accroche de ces options



## Gestion du linge et des déchets

# Chariots support sac

PRATICIMA vous propose une gamme complète pour la **collecte** et le **tri du linge sale** dans les unités de soins : chariots collecteurs simple, double, triple ou quadri-sacs **évolutifs, maniables** et **simples d'utilisation**.

Photos non contractuelles



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Mise en place ou sortie du sac facile grâce à l'ouverture frontale
- ▶ Anneau de serrage pour le maintien du sac
- ▶ Roulettes avec bandage anti-bruit
- ▶ Couvercle avec charnière intégrée et coins en caoutchouc pour amortir la fermeture
- ▶ Tablette inférieure supportant le fond du sac

## Gestion du linge et des déchets

# Chariots support sac



### Caractéristiques techniques

- ▶ Structure porte-sac en alliage aluminium anodisé
- ▶ Châssis en acier zingué avec tablette en ABS
- ▶ Blocage du sac par anneau en inox avec cornières en caoutchouc
- ▶ 4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 roue à frein pour les modèles 1, 2 et 3 sacs, bandage en caoutchouc non tachant et anti-bruit
- ▶ Coloris disponibles pour les couvercles : blanc, bleu, vert, jaune et rouge

Désignation	Dimensions (en mm)	Sans couvercle	Avec couvercle à commande manuelle	Avec couvercle à commande au pied
<b>Chariot 1 sac</b>	L. 390 x P. 410 x H. 880	Sur demande	Sur demande	AB12142
<b>Chariot 2 sacs</b>	L. 785 x P. 410 x H. 880	AB12150	AB12151	AB12152
<b>Chariot 3 sacs</b>	L. 1180 x P. 410 x H. 880	Sur demande	AB12161	AB12162
<b>Chariot 4 sacs en ligne</b>	L. 1575 x P. 410 x H. 880	AB12170	Sur demande	AB12172
<b>Chariot 4 sacs dos à dos</b>	L. 785 x P. 855 x H. 880	AB12180	AB12181	AB12182
<b>Porte-sac mural</b>	L. 355 x P. 450 x H. 290	AB12190	AB12191	

### Équipements optionnels

Désignation	Référence
<b>Poignée arrière pour chariot 1 sac</b>	AB22008
<b>Poignée arrière pour chariot 2 sacs</b>	AB22010
<b>Poignée arrière pour chariot 3 sacs</b>	AB22009
<b>Poignée arrière pour chariot 4 sacs</b>	AB22007

Désignation	Référence
<b>Sac textile blanc</b>	22100_S
<b>Sac textile bleu</b>	AB29370.10
<b>Sac textile vert</b>	AB29370.20
<b>Sac textile jaune</b>	AB29370.30
<b>Sac textile rouge</b>	AB29370.40



## Gestion du linge et des déchets

# Sacs à linge

Nos sacs à linge à fond plat, **compatibles avec nos chariots support sac**, permettent le ramassage et le transport du linge sale. Avec leurs poignées, ils offrent une bonne préhension.

Conçus en polyester haute ténacité, ils sont très résistants et permettent ainsi de supporter de grands volumes de linge.

Leur fermeture est assurée par une cordelette coulissante dans l'ourlet avec un système de blocage.



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Très résistant
- ▶ Poids du produit fini réduit
- ▶ Séchage ultra rapide
- ▶ Traçabilité sur l'année de fabrication
- ▶ Lien de maintien pour éviter les nœuds avec les autres sacs

## Gestion du linge et des déchets

# Sacs à linge

### Caractéristiques techniques

- ▶ Dimensions : L. 720 x H. 820 mm
- ▶ Contenance : 90 litres
- ▶ Matière (tissée en France et certifiée Oeko-Tex) : polyester haute ténacité 130 g/m<sup>2</sup> +/- 5 g/m<sup>2</sup>
- ▶ Assemblage par couture rabattue
- ▶ Forme poche plate à coins cousus
- ▶ Système de fermeture par drisse coulissante sous l'ourlet (Ø 4,5 mm)
- ▶ Drisse polyester cousue sur le côté sous la poignée latérale
- ▶ Serre-cordon « fix lock »
- ▶ 2 oeillets dyn 16 inox
- ▶ 2 poignées de fond intérieur/extérieur 100 % polyester cousues sur renfort (L. 25 x l. 40 mm)
- ▶ 1 poignée de côté 100 % polyester cousue sur renfort (L. 25 x l. 40 mm)
- ▶ Étiquette cousue à l'intérieur sous la sangle indiquant la provenance, les codes de lavage et l'année de fabrication

### Instructions de lavage



Désignation	Référence
Sac à linge en textile bleu	AB29370.10
Sac à linge en textile vert	AB29370.20
Sac à linge en textile jaune	AB29370.30
Sac à linge en textile rouge	AB29370.40
Sac à linge en textile blanc	22100_S



## Gestion du linge et des déchets

# Chariots à pince

Avec leur fermeture hermétique, nos chariots à pince contribuent à **diminuer les risques de l'aéro-biocontamination**.

Ces collecteurs peuvent être fixés, de façon permanente ou provisoire, sur nos chariots support sac, nos chariots de distribution du linge et nos chariots de change. Les aides-soignantes peuvent alors collecter le linge en même temps que les déchets.



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Fermeture limitant le risque de prolifération bactérienne et le dégagement de mauvaises odeurs
- ▶ Bon maintien des sacs
- ▶ Construction robuste
- ▶ Deux modèles disponibles
- ▶ Adaptable sur nos chariots linge

## Gestion du linge et des déchets

# Chariots à pince

### Caractéristiques techniques

- ▶ Collecteur à pédale à fermeture hermétique
- ▶ Construction en acier inoxydable 18/10<sup>e</sup>
- ▶ Bec avec pinces antidérapantes pour un bon maintien des sacs
- ▶ Tablette support amovible en ABS avec rebords
- ▶ Support pour drille-liens
- ▶ 4 roues pivotantes Ø 75 mm, chapes zinguées (2 à frein)
- ▶ Bandages caoutchouc non traçants
- ▶ 4 butoirs d'angle annulaires
- ▶ En option : pédale à double effet « ouverture et blocage »



Désignation	Dimensions (en mm)	Capacité	Modèle standard	Modèle avec pédale double effet
<b>Chariot à pince grand modèle</b>	L. 600 x P. 490 x H. 990	Sac de 70 à 120 L	AB11080	AB11081
<b>Chariot à pince petit modèle</b>	L. 600 x P. 490 x H. 830	Sac de 40 à 80 L	AB11082	AB11083

### Adaptation pour chariots linge

#### Adaptation amovible

Désignation	Référence
<b>Adaptation amovible chariots support sacs, chariots de change et chariots de distribution*</b>	AB04004
<b>Fixation pour le chassis des chariots de change</b>	AB04005

Adaptation amovible sur chariot de change



#### Adaptation fixe

Désignation	Référence
<b>Adaptation fixe pour chariots 1, 2, 3 et 4 sacs en ligne</b> Dimensions : L. 340 x P. 80 mm	AB04001
<b>Adaptation fixe pour chariots 4 sacs dos à dos</b> Dimensions : L. 470 x P. 130 mm	AB04002
<b>Adaptation fixe pour chariots de distribution du linge*</b> Dimensions : L. 340 x P. 80 mm	AB04003



Adaptation fixe sur chariot de distribution du linge

\*Les chariots à pince sont incompatibles avec la réf. AJ12030.

## Gestion du linge et des déchets

# Chariots de collecte

Pour collecter le linge au sein de votre établissement, nous proposons des **chariots à fond fixe ou à fond remontant**.

Nos chariots à fond fixe sont munis d'un couvercle ainsi que d'une porte rabattable montée sur charnières. Le couvercle est composé de deux parties : 1/3 fixe, 2/3 ouvrable sur 130°.

Nos chariots à fond remontant disposent, quant à eux, d'un plateau qui descend ou qui monte en fonction de la charge. Ce système, fonctionnant avec un ressort, améliore énormément les conditions de travail du personnel.



### Points forts

- ▶ Structure robuste
- ▶ Maniable
- ▶ Léger
- ▶ Fond fixe ou mobile



Robuste



Hygiénique



Ergonomique

## Gestion du linge et des déchets

# Chariots de collecte

### Chariots à fond fixe

- ▶ Corps de chariot en alliage d'aluminium anodisé
- ▶ Châssis anti-torsion très robuste
- ▶ Pare-chocs périphérique en caoutchouc
- ▶ Couvercle 2/3 ouvrant avec arrêt de sécurité en position ouverte
- ▶ Robinet de vidange
- ▶ Poignée latérale double du côté des roues fixes
- ▶ Jeu de 4 roues Ø 160 mm (2 fixes et 2 pivotantes sans frein)
- ▶ Bandage caoutchouc non traçant

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Chariot de collecte 699 litres</b>	L. 1100 x P. 650 x H. 1425	AF12020
<b>Chariot de collecte 987 litres</b>	L. 1400 x P. 760 x H. 1340	AF12021



### Chariots à fond remontant

- ▶ Chariots en alliage d'aluminium anodisé
- ▶ Châssis anti-torsion très robuste
- ▶ Pare-chocs périphérique en alliage léger
- ▶ Jeu de 4 roues Ø 125 mm, disposées en angle (2 fixes et 2 pivotantes sans frein)
- ▶ Bandage caoutchouc non traçant

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Chariot à fond remontant 223 litres</b>	L. 1080 x P. 450 x H. 770	AF12000
<b>Chariot à fond remontant 336 litres</b>	L. 1080 x P. 630 x H. 800	AF12001
<b>Option 4 roues pivotantes</b>		AF00301





## Gestion du linge et des déchets

# Rolls à linge

Nos rolls sont idéals pour la **collecte du linge sale** et la **distribution du linge lavé et repassé**.

Traités avec du zingage électrolytique argent de haut niveau, ces rolls se distinguent pour être durables et esthétiques. Ils sont également très légers donc facilement maniables.

Avec ses dimensions restreintes, le roll standard peut être utilisé dans les petits établissements et rentrer dans les ascenseurs.



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Structure robuste
- ▶ Léger
- ▶ Peu encombrant
- ▶ Étagères en option

## Gestion du linge et des déchets

# Rolls à linge

### Roll standard

- ▶ Matière : acier zingué électrolytiquement
- ▶ 4 roues Ø 100 mm en PPB (2 fixes + 2 pivotantes)
- ▶ 1 sangle textile par côté
- ▶ Dimensions extérieures hors tout : L. 715 x P. 810 x H. 1800 mm
- ▶ Dimensions intérieures : L. 665 x P. 795 x H. 1650 mm
- ▶ Dimensions d'une maille : 105 x 400 mm
- ▶ Poids : 23 kg
- ▶ Capacité : 500 kg

Désignation	Référence
<b>Roll à 2 côtés</b>	AF12100
<b>Côté arrière pour roll</b>	AF12100_AR
<b>Côté avant pour roll avec 1/2 abattant</b>	AF12100_AV
<b>Étagère pour roll (L. 700 x P. 800 mm)</b>	AF12100_ET
<b>Housse pour roll</b>	AF12100_HO



Roll à 2 côtés

### Roll maxi

- ▶ Matière : acier zingué électrolytiquement
- ▶ 4 roues Ø 100 mm en PPB (2 fixes + 2 pivotantes)
- ▶ Dimensions extérieures hors tout : L. 1200 x P. 800 x H. 1800 mm
- ▶ Dimensions intérieures : L. 1145 x P. 745 x H. 1640 mm
- ▶ Dimensions d'une maille : 100 x 400 mm
- ▶ Poids : 44 kg
- ▶ Capacité : 500 kg

Désignation	Référence
<b>Roll maxi à 3 côtés</b>	AF12101
<b>Roll maxi à 4 côtés</b>	AF12102
<b>Étagère pour roll maxi</b>	AF12101_ET
<b>Housse pour roll maxi</b>	AF12101_HO



Roll maxi à 4 côtés

# PARTIE 5

---

## Gestion du dossier patient





## Gestion du dossier patient

# Chariots de visite

Photos non contractuelles

La gamme de chariots de visite est conçue pour l'accueil des **dossiers médicaux et radios**.

L'ergonomie et la **modularité** permettent d'optimiser le rangement des dossiers selon les besoins de chaque service.

La **confidentialité** des dossiers est assurée par une fermeture par rideau ou tablette. Par l'adaptation sur tous les chariots d'un support PC, vous bénéficiez d'un accès aux **dossiers patients informatisés**.



Hygènie



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Format de dossiers : A4+ ou A3+
- ▶ Confidentialité respectée
- ▶ Informatisation du dossier patient
- ▶ Modulable : rangement dans cases ajustables
- ▶ Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers


## Gestion du dossier patient

# Chariots de visite

### Modèles de chariots


#### Chariots à préhension en face avant

Désignation	Référence
Chariot pour dossiers médicaux (format A4+)	8H150BL
Chariot pour dossiers radios (format A3+)	8H155BL

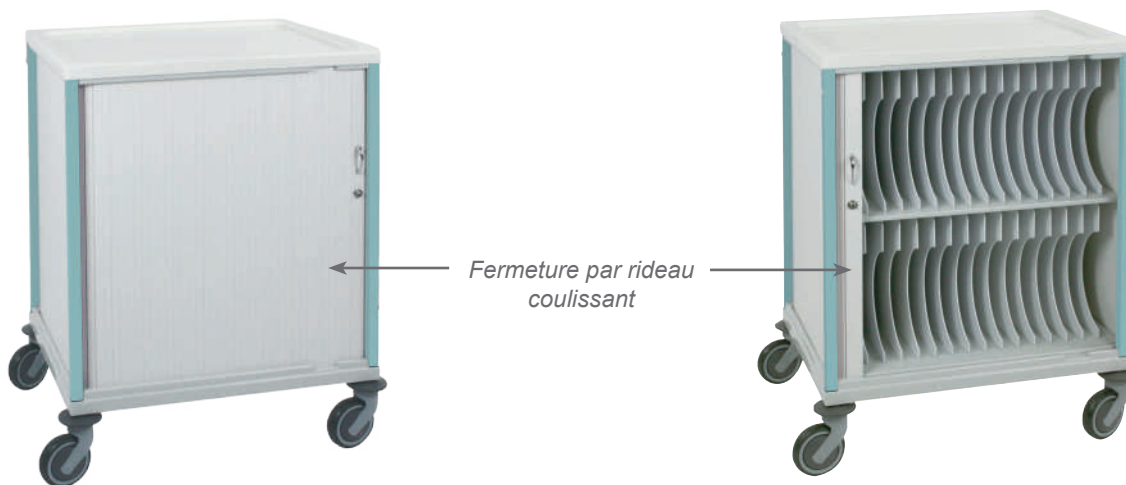

#### Chariots à préhension par le dessus

Désignation	Référence
Chariot pour dossiers médicaux (format A4+)	8H130BL
Chariot pour dossiers radios (format A3+)	8H135BL


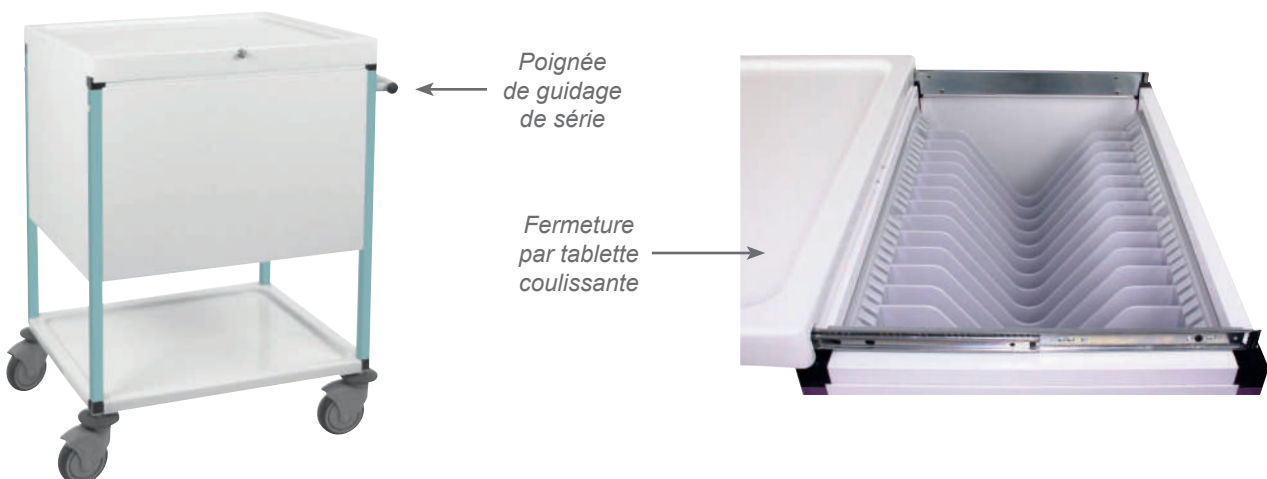


Gestion du dossier patient



## Chariots de visite

### Données techniques

#### Dimensions chariot réf. 8H150BL

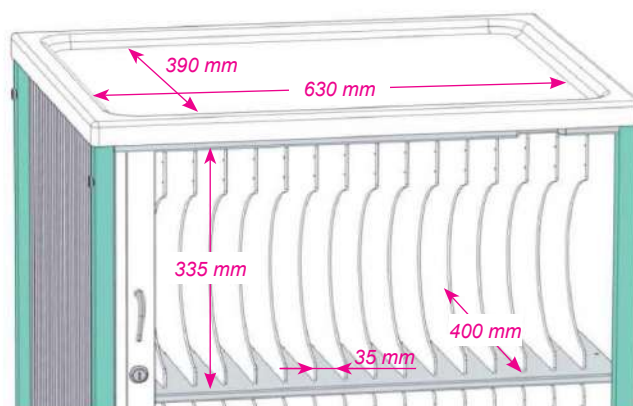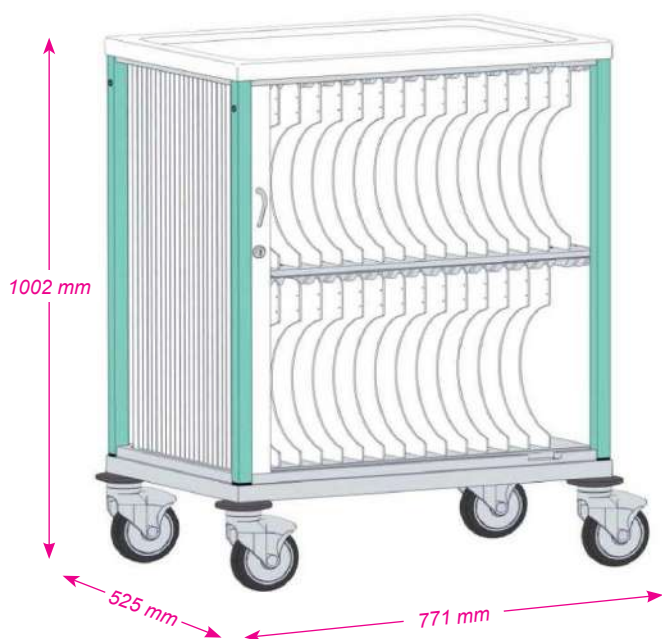


#### Dimensions chariot réf. 8H155BL

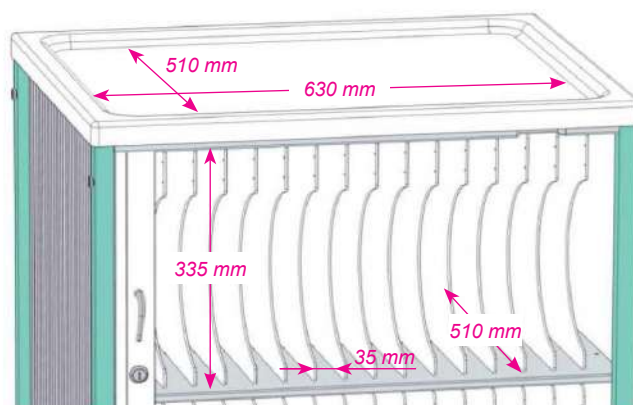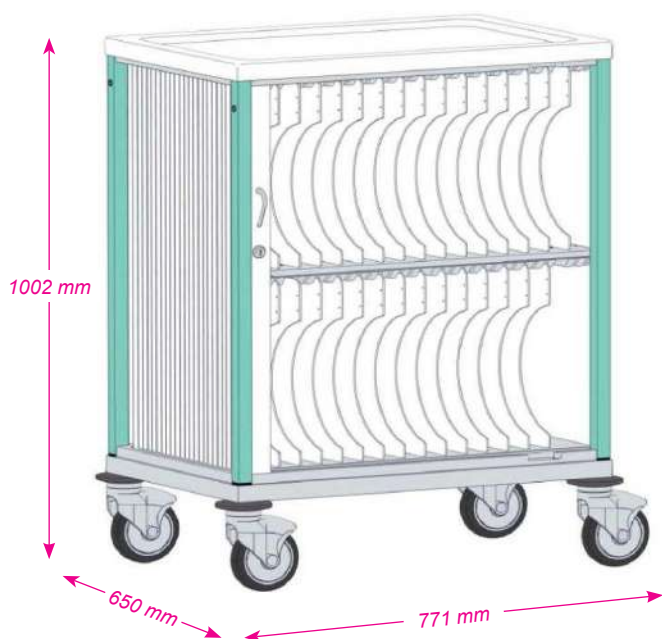


## Gestion du dossier patient

# Chariots de visite

Dimensions chariot réf. 8H130BL

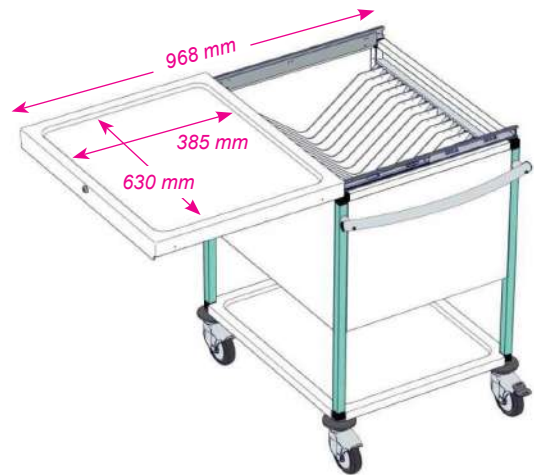

Dimensions chariot réf. 8H135BL

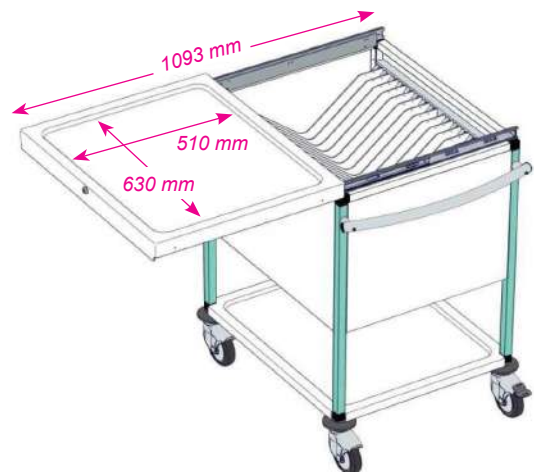



## Gestion du dossier patient

# Chariots de visite

### Matières

<b>Montants</b>	Tube carré acier traité anti-corrosion à l'époxy
<b>Coins</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styène) noir
<b>Habillage</b>	Tôle acier traité anti-corrosion à l'époxy blanc
<b>Roulettes</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape PolyAmide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant
<b>Plan de travail</b>	ABS PMMA
<b>Cloisons</b>	PS (PolyStyrène) régénéré
<b>Rideau</b>	Lame terminale en aluminium - Lame plastique en PVC
<b>Poignée</b>	Tube carré acier traité anti-corrosion à l'époxy (pour 8H130BL - 8H135BL)

### Informations diverses

<b>Roulettes</b>	4 roulettes Ø 125 mm - 1 à frein et 3 pivotantes			
<b>Fermeture</b>	8H150BL - 8H155BL : Fermeture par rideau coulissant latéralement et extractible 8H130BL - 8H135BL : Fermeture par tablette coulissante			
<b>Verrouillage</b>	Serrure à clé			
<b>Poids à vide</b>	8H150BL : 47 kg	8H155BL : 56 kg	8H130BL : 35 kg	8H135BL : 44 kg
<b>Format maximal des dossiers</b>	8H130BL : L. 380 x H. 390 mm 8H135BL : L. 500 x H. 390 mm		8H150BL : L. 400 x H. 335 mm 8H155BL : L. 510 x H. 335 mm	
<b>Capacité maximale</b>	8H130BL - 8H135BL : - 31 dossiers de 15 mm - 16 dossiers de 35 mm (standard) - 11 dossiers de 55 mm - 8 dossiers de 75 mm		8H150BL - 8H155BL : - 2 x 31 dossiers de 15 mm - 2 x 16 dossiers de 35 mm (standard) - 2 x 10 dossiers de 55 mm - 2 x 8 dossiers de 75 mm	
<b>Cloisons</b>	Cloisons amovibles et réglables par pas de 20 mm			
	8H130BL - 8H135BL : - Nombre de cloisons fournies : 16 - Nombre de cloisons maximales : 32		8H150BL - 8H155BL : - Nombre de cloisons fournies : 28 - Nombre de cloisons maximales : 56	

### Emballage

<b>Conditionnement</b>	À l'unité sur palette, cerclée et filmée			
<b>Poids net</b>	8H150BL : 57 kg	8H155BL : 66 kg	8H130BL : 45 kg	8H135BL : 54 kg
<b>Dimensions</b>	L. 0,80 x P. 0,88 x H. 1,20 m			
<b>Volume</b>	1 m <sup>3</sup>			

### Coloris

Bleu lagon

# Gestion du dossier patient

## Chariots de visite

### Équipements optionnels

#### 1 Cloisons amovibles et identification

Désignation	Référence
Cloison amovible pour chariot 8H130BL	ACC8H082
Cloison amovible pour chariot 8H135BL	ACC8H081
Cloison amovible pour chariot 8H150BL	ACC8H041
Cloison amovible pour chariot 8H155BL	ACC8H040
Porte-étiquettes pour cloisons rigides (lot de 25)	8H007
Étiquettes pour porte-étiquettes 8H007 (lot de 250)	8H008

#### 2 Tablettes d'extension

Désignation	Référence
Tablette d'extension amovible pour chariot 8H150BL et 8H130BL	8H005
Tablette d'extension amovible pour chariot 8H155BL et 8H135BL	8H006

### Poignées

Désignation	Référence
Poignée pour chariot 8H150BL	8H009
Poignée pour chariot 8H155BL	8H010

### Rails normalisés et accessoires compatibles

Désignation	Référence
Rail normalisé pour chariot 8H150BL et 8H130BL	8H003
Rail normalisé pour chariot 8H155BL et 8H135BL	8H004
<b>3</b> Casier de rangement	28063N
<b>4</b> Trieur 3 cases	28011N
Panier fil grand modèle	28061N.GR



## Gestion du dossier patient

# Chariots de visite XXL

Photos non contractuelles

Nos chariots de visite XXL sont conçus pour l'accueil des **dossiers médicaux et radios grand format**. L'ergonomie et la modularité permettent d'optimiser le rangement des dossiers selon les besoins de chaque service. La confidentialité des dossiers est assurée par une fermeture par rideau.

Par l'**adaptation d'un support PC** sur tous les chariots, vous bénéficiez d'un accès aux dossiers patients informatisés.



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Adapté aux dossiers médicaux grands formats
- ▶ Modulable
- ▶ Confidentialité respectée
- ▶ Informatisation du dossier patient
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

## Gestion du dossier patient

## Chariots de visite XXL

## Chariot

Désignation	Référence
Chariot de visite XXL à serrure à clé	8C010BP



## Équipements optionnels

Désignation	Référence
Tablette d'extension*	8C008
Rail normalisé*	8C009
Panier fil grand modèle*	28061N.GR
Support pour ordinateur portable en tôle*	2F100
Support pour ordinateur portable sans capot de protection en compact*	2F101
Support pour ordinateur portable avec capot de protection en compact*	2F105
Cloison amovible	ACC8C020
Cloison supplémentaire	ACC8H041




\*Ces options ne peuvent être installées que sur le côté droit du chariot.

Gestion du dossier patient

## Chariots de visite XXL

### Données techniques

#### Dimensions

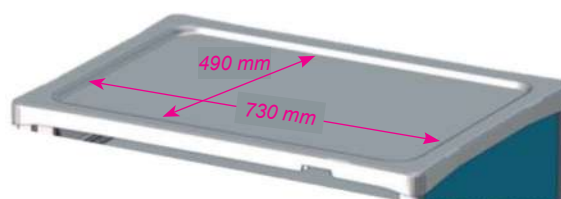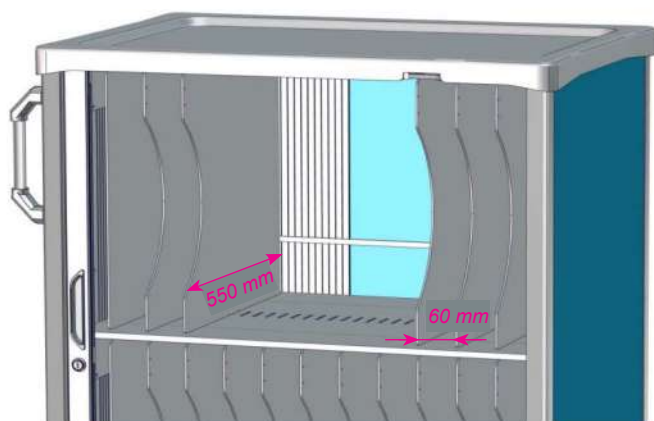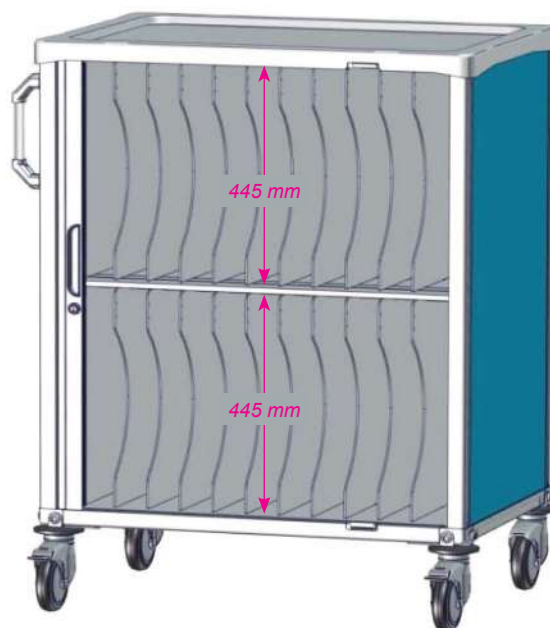

## Gestion du dossier patient

# Chariots de visite XXL

### Matières

<b>Structure</b>	Profil aluminium anodisé
<b>Habillage</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styène)
<b>Plan de travail</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styène)
<b>Rideau</b>	Lame terminale en aluminium - Lame plastique en PP (PolyPropylène)
<b>Poignée</b>	Tube aluminium Ø 20 - Embout Nylon
<b>Roulettes</b>	Bandage simple en Chape PolyAmide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant
<b>Cloisons</b>	PS (PolyStyrène) régénéré

### Informations diverses

<b>Roulettes</b>	4 roulettes Ø 125 mm - 2 à frein et 2 pivotantes
<b>Fermeture</b>	Serrure à clé
<b>Poids à vide</b>	61 kg
<b>Capacité maximale</b>	2 x 33 dossiers de 20 mm 2 x 16 dossiers de 40 mm 2 x 11 dossiers de 60 mm (standard) 2 x 8 dossiers de 80 mm 2 x 7 dossiers de 100 mm
<b>Cloisons</b>	Cloisons amovibles ajustables par pas de 20 mm Nombre de pas par niveau : 33 Nombre de cloisons fournies : 20

### Emballage

<b>Conditionnement</b>	À l'unité sur palette, cerclée et filmée
<b>Poids net</b>	71 kg
<b>Dimensions</b>	L. 0,80 x P. 1,20 x H. 1,40 m
<b>Volume</b>	1,3 m <sup>3</sup>

### Coloris

Bleu pop

## Gestion du dossier patient

# Stations informatiques IP

Dans le cadre de l'informatisation des services de soins, PRATICIMA propose différents modèles de stations informatiques pour ordinateur portable, panel PC ou écran avec unité centrale.

Nos stations sont **ultra légères et maniables** et offrent un réel confort d'utilisation. **Configurables et modulables a posteriori**, elles évoluent en fonction des besoins des professionnels de santé.

Photos non contractuelles



### Points forts

- ▶ Plan de travail ajustable en hauteur par vérin à gaz : saisie assis ou debout
- ▶ Rail normalisé réglable sur toute la hauteur
- ▶ Nombreux accessoires disponibles
- ▶ Surfaces lisses, sans interstice pour un nettoyage facilité
- ▶ Résistant aux produits de désinfection hospitaliers



Ergonomique



Hygènique

Gestion du dossier patient

# Stations informatiques IP

## Modèles



IP100

Ajustement possible  
de la position de  
la batterie en hauteur



IP101



IP200



IP201



IP202

### Désignation

### Référence

#### Station informatique IP100

avec arceau de sécurité pour ordinateur portable

8EIP100

#### Station informatique IP101

avec arceau de sécurité pour ordinateur portable + rail + support batterie + batterie amovible

8EIP101

#### Station informatique IP200

avec support Vesa

8EIP200

#### Station informatique IP201

avec support pour ordinateur portable

8EIP201

#### Station informatique IP202

avec support pour ordinateur portable + tiroir clavier + seconde tablette


8EIP202



## Gestion du dossier patient

# Stations informatiques

### Données techniques

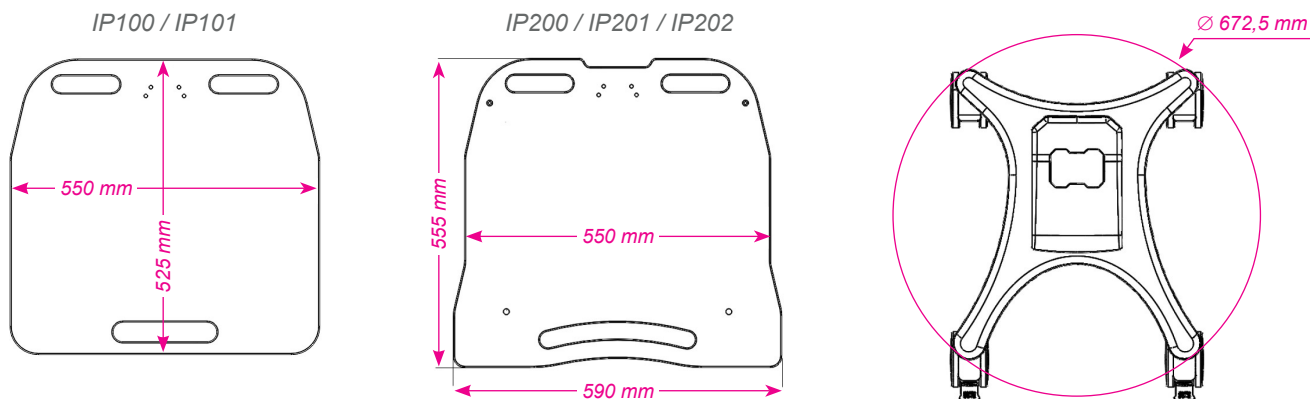

### Matières

<b>Piètement</b>	Structure en aluminium et acier traités à l'époxy
<b>Plan de travail</b>	IP100 / IP101 : Polyéthylène (PE) Starboard ép. 12,7 mm IP200 / IP201 / IP202 : PMMA bleu satiné translucide ép. 8 mm
<b>Roues</b>	Double bandage en caoutchouc non tachant - chape polyamide (PA)
<b>Tiroir clavier</b>	Cadre support : acier RAL7040 / coulisse : acier zingué / support clavier : plastique
<b>Support ordinateur</b>	Acier / plastique
<b>Support Vesa</b>	Acier / aluminium / plastique
<b>Arceau de sécurité</b>	Acier / plastique

### Informations diverses

<b>Piètement</b>	Coloris gris
<b>Roues</b>	Ø 100 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - double blocage de la roue et du pivot
<b>Vérin</b>	Vérin à gaz avec positions de verrouillage, commandé par une poignée ergonomique
<b>Charge admissible</b>	6 à 12 kg selon le réglage du vérin
<b>Poids à vide</b>	IP100 : 14,8 kg IP200 : 21 kg IP201 : 19,5 kg IP202 : 24,25 kg sans seconde tablette
<b>Dimensions hors tout</b>	IP100 / IP101 : L. 550 x P. 525 x H. 865-1265 mm IP200 : L. 590 x P. 555 x H. 1098-1628 mm IP201 / IP202 : L. 590 x P. 555 x H. 1025-1425 mm
<b>Hauteur du plan de travail</b>	Mini : 815 mm / Maxi : 1215 mm
<b>Compatibilité</b>	IP100 / IP101 / IP201 / IP202 : ordinateur portable avec une largeur hors tout max de 430 mm IP200 : écran 27 pouces maximum compatible avec la norme Vesa

### Emballage

<b>Conditionnement</b>	À l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection
<b>Dimensions</b>	L. 620 x P. 600 x H. 920 mm

## Gestion du dossier patient

## Stations informatiques IP

## Équipements optionnels

## Rail normalisé et accessoires compatibles



Rail normalisé fixé sur  
colonne avant ou arrière

Réf. 8E480



Panier latéral grand modèle

Réf. 28061N.GR



Panier latéral petit modèle

Réf. 28062N.GR



Casier de rangement

Réf. 28063N.GR



Bloc 3 prises

Réf. 28403



Support batterie

Réf. 2C000



Trieur 3 cases

Réf. 28011N

## Autres équipements




Support lecteur  
code-barres

Réf. 8E473



Support souris

Réf. 8E472

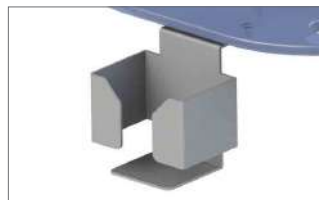

Support SHA

Réf. 8E478



Support UC

Réf. 8E471



Support alimentation  
horizontal sous plan de  
travail

Réf. 8E475



Crochet porte-câble petit  
modèle

Réf. 8E479



Tablette supplémentaire

Réf. 8E482



Tiroir clavier avec support  
souris pré-montée droite /  
gauche (incompatible avec  
la station 8EIP100)

Réf. 8E483



Câble antivol à clé pour  
ordinateur portable

Réf. 8E102



Câble antivol à code pour  
ordinateur portable

Réf. 8E103



Clé passe pour câble  
antivol




Réf. 8E104

## Gestion du dossier patient

# Stations informatiques IP

### Bloc tiroir - Réf. 8E486

- ▶ Matière : acier / alliage d'aluminium / plastique
- ▶ Poids : 3,7 kg
- ▶ Dimensions extérieures : 426 x 108,2 x 415,4 mm
- ▶ Dimensions intérieures : 399 x 70 x 298 mm
- ▶ Sécurisation : verrou à clé
- ▶ Charge admissible : 2 kg

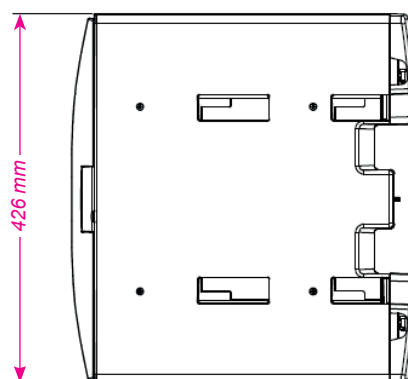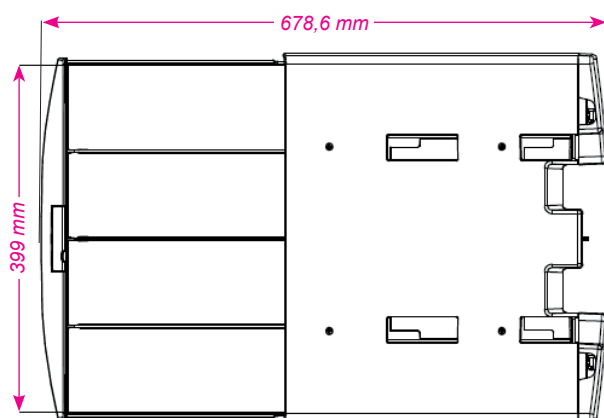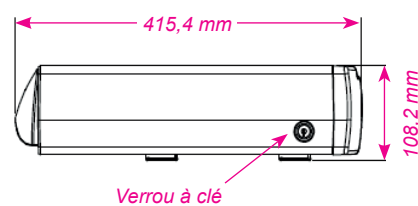

### Batterie amovible - Réf. 8E485

- ▶ Type : Lithium Polymère
- ▶ Dimensions : 194 x 120 x 21 mm
- ▶ Couleur : gris argent
- ▶ Signalisation : LED bleues
- ▶ Autonomie : 7 heures
- ▶ Alimentation INPUT : 19 V / 1,2 A
- ▶ Alimentation OUTPUT :
  - DC 12V / 2,5 A
  - DC 16 V / 4 A
  - DC 19 V / 4 A
- ▶ Capacité : 30 000 mAh





# PARTIE 6

---

## Aides techniques pour le personnel





# ▶ EasyMove

Solution de motorisation  
des chariots



**PRATICIMA**  
healthcare solutions

# ► Un personnel soignant qui souffre de TMS\*

**TMS**

Première cause d'arrêt maladie

**13 %**

Taux d'absentéisme dans les établissements de santé

**3400 €**

Coût moyen annuel d'absentéisme par employé



Le personnel soignant parcourt entre **10 et 15 km par jour**, avec de lourdes charges à manutentionner, comme les chariots de change qui pèsent **jusqu'à 80 kg** en début de tournée.

La progression du personnel avec un chariot est soumise à des **contraintes de déplacements** : virages, seuils d'ascenseurs, arrêts en raison des sollicitations des patients et du personnel médical... Cela demande des efforts physiques supplémentaires pour le personnel et engendre souvent des **mauvaises postures**.

Pousser un chariot implique une inclinaison du poids du corps en avant et peut entraîner l'apparition de pathologies telles que des lombalgies, des douleurs aux épaules... Le personnel soignant est donc largement victime de troubles musculo-squelettiques.

\* TMS : Troubles musculo-squelettiques



Déplacement de charges lourdes induisant de mauvaises postures



Troubles musculo-squelettiques



Arrêts-maladies



Non productivité : coût pour l'établissement



## ► EasyMove

### des chariots 100 % motorisés

Le personnel soignant de votre établissement est **épuisé par la manutention des chariots** de change, de soins ou de distribution de médicaments ?

**STOP** à la manutention manuelle



**LA SOLUTION ?**  
**DES CHARIOTS MOTORISÉS !**

PRATICIMA propose une **solution unique sur le marché** : des chariots équipés d'une roue motorisée. Cette innovation permet de limiter les efforts de poussée pour les utilisateurs. **Une simple action avec le doigt sur la gâchette permet d'actionner la motorisation.** Le personnel bénéficie ainsi d'un **confort de travail optimal**.

- + **Poussée 100 % motorisée :**  
80 kg de charge poussés du bout des doigts
- + **Excellente maniabilité et poignée ergonomique :**  
effort réduit, risque de TMS moindre
- + **L'ergonomie accessible à tous :**  
**solution économique**, retour sur investissement en limitant les coûts liés aux arrêts de travail du personnel soignant
- + **Sélection de la vitesse et accélération progressive**
- + **Système de compensation**  
pour les sols irréguliers
- + **Forte autonomie de la batterie :**  
utilisation en manuel possible dans le cas d'un oubli de charge de la batterie
- + **Simplicité d'utilisation et de charge**



## ► Solution motorisée disponible pour :

- Les chariots de change
- Les chariots de soins
- Les chariots de distribution de médicaments
- Les chariots de distribution de repas



**DÉMONSTRATION** sur demande

## ► Nos solutions complémentaires pour lutter contre les TMS



**Aides mécanisées** pour déplacer les lits ou les armoires



**Trottinette électrique** pour optimiser les grands déplacements du personnel



**Planches pour faciliter le transfert** des patients sans les soulever



**Broyeur de comprimés électrique** pour éviter le broyage manuel



**PRATICIMA**  
healthcare solutions

Rue du Pou du Ciel  
ZI de Reyrieux – CS20129 Reyrieux  
01600 TRÉVOUX – FRANCE

Tél : 04 74 00 98 11

Fax : 04 74 00 98 36

E-mail : [praticima@praticima.fr](mailto:praticima@praticima.fr)

[www.praticima.fr](http://www.praticima.fr)



## Gamme aides mécanisées

# Multi Bed Mover®

Le principe du Bed Mover® est unique et **permet un déplacement de lit plus efficace et sans effort**. Ce produit réduit la fatigue du personnel et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques.

Le Bed Mover® est utilisable avec la plupart des lits et des brancards hospitaliers. Un modèle de pinces permet de connecter plusieurs types de lits dans l'hôpital. La machine n'est qu'une extension minimale du lit.



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Prévention des troubles musculo-squelettiques
- ▶ Confort du patient
- ▶ Adaptabilité au parc de lits existant
- ▶ Bonne préhension et grande maniabilité
- ▶ Fabrication sur mesure

## Gamme aides mécanisées

# Multi Bed Mover®

### Points forts

#### Maniabilité

Une seule personne suffit pour connecter l'appareil au lit, pour entrer et sortir des ascenseurs sans assistance et pour effectuer les transports. Le Bed Mover® permet des déplacements dans tous les sens, même latéralement.

#### Confort du patient

Le patient est déplacé dans le sens de la marche, les roues du lit restent au contact du sol pour un meilleur confort.

#### Bonne préhension

Les commandes centralisées sont simples d'accès et d'utilisation. La télécommande est adaptée aux gauchers et aux droitiers.

#### Facilité d'entretien

Le Bed Mover® est un produit éprouvé et ne nécessite aucun entretien particulier. Nous préconisons une maintenance annuelle ou toutes les 1000 heures.

### Caractéristiques techniques

- ▶ Vitesse maximale : 4,6 km/h
- ▶ Marche avant/arrière par sélecteur
- ▶ Capacité de tractage : 350 à 500 kg maximum
- ▶ Pente : 3 % en version standard
- ▶ Diamètre roue motrice : 150 mm
- ▶ 2 batteries type gel 12 V
- ▶ Chargeur électronique intégré, alimentation : 220 / 230 V / 50 Hz
- ▶ Tension de fonctionnement : 24 V
- ▶ Autonomie : 1 journée de travail (utilisation moyenne ≈ 8 heures)
- ▶ Poids : 130 kg
- ▶ Garde au sol : 30 mm
- ▶ Dimensions : L. 530 x l. 815 x H. 1130 mm
- ▶ Conforme aux directives CE
- ▶ Matériaux : acier inoxydable et acier laqué et peint

Désignation

Référence

1

**Multi Bed Mover®**

97040001

### Équipements optionnels

Désignation	Référence
<b>Système de pinces rotatives</b>	3510.6001
<b>Option puissance supplémentaire</b>	3510.1540
<b>Plate-forme fixe STEP S2</b>	9704.0031
<b>Plate-forme rabattable STEP S2 R</b>	9704.0032
<b>Crochet pour plate-forme</b>	3510.0028
<b>Support bouteille oxygène 12 L repliable</b>	3610.0003



## Gamme aides mécanisées

# Plate-forme Step®

Le Step® est une plate-forme roulante que l'on peut adapter au lit et/ou au Multi Bed Mover® lors de longs trajets.

L'accroche au lit est rapide et ne nécessite pas d'outil.

Le Step® pivote sous le lit ou se rabat, suivant le modèle, afin de prendre un minimum de place dans l'ascenseur.



Hygiénique



Ergonomique

- ▶ 2 modèles disponibles : fixe (STEP S2) ou rabattable (STEP S2R)
- ▶ Dimensions : L. 710 x l. 480 mm
- ▶ Poids : 17 kg
- ▶ Poids supportable : 1 personne (100 kg maxi)
- ▶ Matière : acier inoxydable et résine stratifiée haute pression



## Gamme aides mécanisées

# Functional Mover®

Le Functional Mover® **permet de tracter tous types d'armoires mobiles et de chariots**. Ce produit réduit les efforts et la fatigue du personnel et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques.

La traction se fait par un système de pinces (ou par une barre d'attelage) adapté à l'élément à tracter. Le Functional Mover® permet de combiner plusieurs types d'accrochage avec la même machine.



Ergonomique

### Points forts

- ▶ Réduction des efforts des utilisateurs
- ▶ Adaptabilité au parc de chariots existants
- ▶ Simplicité d'utilisation et grande maniabilité
- ▶ Facilité d'entretien

## Gamme aides mécanisées

# Functional Mover®

### Gamme aides mécanisées

#### Bonne maniabilité

Le faible encombrement de l'appareil et sa direction assistée permettent un déplacement aisé, même dans les espaces restreints et les monte-charges.

#### Simplicité d'utilisation

Les commandes centralisées sont faciles d'accès. Le levier de commande adapté pour les droitiers et les gauchers permet une utilisation facile et intuitive de l'appareil. Le réglage électronique de la vitesse permet des accélérations et des ralentissements progressifs.

#### Solide, sûr, facile d'entretien

De fabrication très robuste spécifiquement adaptée au milieu hospitalier, le Functional Mover® est facile d'entretien. Cependant, nous préconisons une maintenance annuelle.



### Caractéristiques techniques

- ▶ Cadre en acier inoxydable
- ▶ Marche avant/arrière par sélecteur
- ▶ Puissance : 600 W
- ▶ Tension de fonctionnement : 24 V
- ▶ 2 batteries type gel 12 V
- ▶ Chargeur électronique intégré, alimentation : 220 / 230 V / 50 Hz
- ▶ Roue motrice : 250 x 50 mm en caoutchouc
- ▶ Poids : 145 kg (sans option)
- ▶ Garde au sol : 30 mm
- ▶ Vitesse maxi : 4,9 km/h
- ▶ Pente maxi : 5 %
- ▶ Poids tractable : 500 kg conseillé - 1000 kg maximum
- ▶ Autonomie : 1 journée de travail (utilisation moyenne ≈ 8 heures)
- ▶ Dimensions : L. 620 x l. 580 x H. 1210 mm
- ▶ Hauteur du capot : 400 mm
- ▶ Conforme aux directives CE

Désignation	Référence
<b>Functional Mover® avec pinces</b>	97020005
<b>Functional Mover® avec axe d'attelage</b>	97020006

### Équipements optionnels

Désignation	Référence
<b>Axe d'attelage</b>	5158.0382
<b>Option puissance supplémentaire</b>	3510.8400



## Gamme aides mécanisées

# Taureau

Le Taureau est un tracteur électrique autoporté qui permet de **tracter tous types d'armoires mobiles et de chariots** (repas, linge...).

Grâce à ses dimensions réduites et à son court rayon de braquage, le Taureau est facilement dirigeable. Vous n'aurez aucun problème à tourner dans des pièces étroites ou des couloirs. Avec le Taureau, réduisez les efforts et la fatigue du personnel tout en diminuant les risques de troubles musculo-squelettiques !

Photos non contractuelles



Ergonomie

## Points forts

- ▶ Réduit les efforts des utilisateurs
- ▶ Puissant - capacité de tractage : 2000 kg
- ▶ Compact et maniable
- ▶ Simple d'utilisation

## Gamme aides mécanisées

# Taureau






### Caractéristiques techniques

- ▶ Dimensions : 850 x 600 x 1250 mm
- ▶ Équipé d'un axe d'attelage
- ▶ Rayon de braquage : 360°
- ▶ Traction jusqu'à 2000 kg
- ▶ Vitesse maximum : 6 km/h
- ▶ Garde au sol très basse : 5 cm
- ▶ 3 batteries 50 Ah
- ▶ Équipé d'un support téléphone portable et port USB



Désignation	Référence
<b>Taureau - SW3.0</b>	9705.0001

### Équipements optionnels

Désignation	Photo	Référence	Désignation	Photo	Référence
<b>Support lombaire</b>		9705.0010	<b>Couvercle avec serrure pour coffre</b>		9705.0026
<b>Eclairage Blue Beam</b>		9705.0020	<b>Box pour bac DIN 300 x 400 mm (livré sans bac)</b>		9705.0035
<b>Couvercle pour coffre</b>		9705.0025			

Gamme aides mécanisées

# Trottinette électrique

La trottinette électrique est la nouvelle **solution de mobilité** pour les professionnels. Elle permet de se déplacer en extérieur comme en intérieur pour gérer les grands déplacements du personnel logistique, technique et soignant.

Son encombrement réduit permet de circuler dans des endroits exigus et d'emprunter des ascenseurs. Son ergonomie et sa stabilité permettent des déplacements sans effort et en toute sécurité. Elle contribue à la diminution des troubles musculo-squelettiques. Son autonomie de 30 kilomètres assure une mobilité sans faille et réduit très sensiblement le budget énergie de l'utilisateur.

Photos non contractuelles



Ergonomie

## Points forts

- ▶ Autonomie 30 km
- ▶ Confortable
- ▶ Prise en main facile
- ▶ Marche arrière

## Gamme aides mécanisées

# Trottinette électrique

### Points forts

- ▶ Plate-forme antidérapante et totalement dégagée pour mettre les pieds
- ▶ Batterie amovible
- ▶ Selle très confortable
- ▶ Frein de parking
- ▶ Simple d'utilisation
- ▶ 2 motorisations disponibles

### Caractéristiques techniques

- ▶ Moteur : roue avant - 350 ou 800 W brushless
- ▶ Batterie : Lithium-Ion 48 V - 12 AH (amovible)
- ▶ Poids batterie : 4,8 kg
- ▶ Chargeur : 220 V - 3A (livré avec la trottinette)
- ▶ Temps de charge : 4 à 5 heures
- ▶ Vitesse maximum : 6 km/h ou 18 km/h
- ▶ Interrupteur : limitation de vitesse 6 km/h
- ▶ Frein hydraulique : disque diamètre 160 mm de marque Shimano
- ▶ Charge acceptée : 120 kg
- ▶ Dimensions : L. 105 X l. 65 X H. 95 cm
- ▶ Poids : 27,8 kg (batterie incluse)
- ▶ Conforme directive CE
- ▶ Garantie :
  - 2 ans pour le cycle
  - 1 an pour la batterie et l'équipement électrique

Désignation	Référence
<b>Trottinette électrique 350 W</b>	MHS2017350
<b>Trottinette électrique 800 W</b>	MHS2017800

### Équipements optionnels

Désignation	Référence
<b>Panier</b> Dimensions : L. 34 x l. 27 x H. 25 cm	MHS2017PAN <b>1</b>
<b>Plateau avant pour caisson</b> Dimensions : L. 37 x l. 24 cm	MHS2017PLA <b>2</b>
<b>Pneus gris</b>	MHS2017PNG
<b>Batterie</b>	MHS2017BAT
<b>Remorque intégrée</b>	MHS2017REMINT <b>3</b>
<b>Bâche pour remorque intégrée</b>	MHS2017BACHE <b>4</b>
<b>Garde boue avant et arrière</b>	MHS2017GERDEBO <b>5</b>



Gamme transfert

# Planches de transfert Rollbord Hightec®

Les planches Rollbord Hightec® facilitent le transfert des patients sans qu'il soit nécessaire de les soulever. Les **conditions de travail** du personnel soignant s'en trouvent considérablement **améliorées**.

Conformes aux normes d'hygiène, elles sont sans danger pour la peau mais également très confortables pour les patients.

Avec leur housse résistant aux déchirures, les planches Rollbord Hightec® sont conçues pour une **utilisation intensive**.



Hygène



Ergonomie

## Points forts

- ▶ Transfert sécurisé des patients
- ▶ Évite au personnel soignant des lésions du dos
- ▶ Revêtement antibactérien, antifongique et ignifugé
- ▶ Facile à nettoyer et à désinfecter
- ▶ Peut recouvrir des vides atteignant 20 cm

## Gamme transfert

## Planches de transfert Rollbord Hightec®




## Caractéristiques techniques

- ▶ Noyau en mousse polyéthylène
- ▶ Housse de glissement en polyester revêtu de Téflon
- ▶ Poignées en ABS intégrées aux extrémités
- ▶ Dispositif médical - Classe I - MDR 2017/745



Désignation	Utilisation	Dimensions (en mm)	Capacité	Poids	Référence
<b>Planche « Mini-gyn » non pliable</b>	Bloc opératoire d'urologie et de gynécologie, urgences, réanimation...	L. 910 x l. 500	180 kg	1,4 kg	SAA71005
<b>Planche « Standard » pliable</b>	Radiologie, bloc opératoire, soins intensifs...	Dépliée : L. 1780 x l. 500 Pliée : L. 890 x l. 500	240 kg	2,7 kg	SAA71001
<b>Planche « Icu-bariatric » non pliable renforcé</b>	Soins intensifs, transfert de personnes de forte corpulence	L. 1780 x l. 500	310 kg	3,8 kg	SAA71004

## Équipements optionnels

Désignation	Photo	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Support mural pour planche de transfert</b> En fil d'acier inoxydable		L. 410 x l. 70 x H. 600	SAA40250
<b>Dérouleur mural de housses à usage unique</b> En fil d'acier inoxydable		L. 690 x l. 210 x H. 130	SAA40200
<b>Carton de 6 rouleaux de 50 housses à usage unique</b>		L. 2000 x l. 650	SAA40300

Gamme transfert

# Planches de transfert Rollbord Ecolite®

Les planches Rollbord Ecolite® facilitent le transfert des patients sans qu'il soit nécessaire de les soulever. Les **conditions de travail** du personnel soignant s'en trouvent considérablement **améliorées**.

Conformes aux normes d'hygiène, elles sont sans danger pour la peau mais également très confortables pour les patients. Avec leur housse recouverte de Silicone, les planches Ecolite® sont conçues pour une **utilisation normale**.



Hygènique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Transfert sécurisé des patients
- ▶ Évite au personnel soignant des lésions du dos
- ▶ Revêtement antibactérien, antifongique et ignifugé
- ▶ Facile à nettoyer et à désinfecter

Gamme transfert

# Planches de transfert Rollbord Ecolite®

## Caractéristiques techniques

- ▶ Noyau en mousse polyéthylène
- ▶ Housse de glissement en polyester revêtu de Silicone
- ▶ Extrémités en polyéthylène
- ▶ Dispositif médical - Classe I - MDR 2017/745



Désignation	Utilisation	Dimensions (en mm)	Capacité	Poids	Référence
<b>Planche « Ecolite® 90 » non pliable</b>	Bloc opératoire d'urologie et de gynécologie, urgences, réanimation...	L. 900 x 500	150 kg	1,3 kg	SAA71013
<b>Planche « Ecolite® 120 » pliable</b>	Radiologie, bloc opératoire...	Dépliée : 1300 x 400 Pliée : 650 x 400	150 kg	1,4 kg	SAA71014
<b>Planche « Ecolite® 180 » pliable</b>	Radiologie, bloc opératoire, soins intensifs...	Dépliée : 1780 x 500 Pliée : 870 x 500	160 kg	2,8 kg	SAA71012

## Équipements optionnels

Désignation	Photo	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Support mural pour planche de transfert</b> En fil d'acier inoxydable		L. 410 x l. 70 x H. 600	SAA40250
<b>Dérouleur mural de housses à usage unique</b> En fil d'acier inoxydable		L. 690 x l. 210 x H. 130	SAA40200
<b>Carton de 6 rouleaux de 50 housses à usage unique</b>		L. 2000 x l. 650	SAA40300




Gamme transfert

# Systemes de transfert latéral

Photos non contractuelles

Afin de **faciliter le déplacement** latéral des patients, PRATICIMA vous propose les planches Transglide® accompagnées de leur drap de traction.

Ces produits améliorent considérablement les conditions de travail du personnel soignant. Ils sont idéals pour les services de médecine, les maisons de retraite et le maintien à domicile.

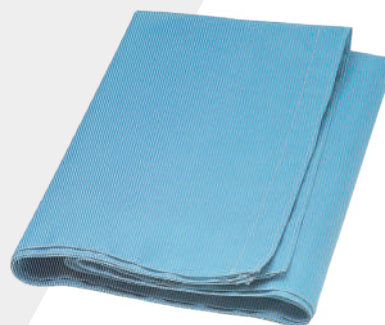

## Points forts

- ▶ Maniement pratique
- ▶ Excellentes propriétés de glissement
- ▶ Léger et peu encombrant
- ▶ Entretien facile



Hygiénique



Ergonomique

## Gamme transfert

# Systèmes de transfert latéral

### Plaques de transfert Transglide®

Accompagnées d'un drap de traction, ses plaques permettent de repositionner facilement les patients. Leur surface supérieure a l'avantage d'être particulièrement glissante, contrairement à leur surface inférieure munie de bandes de sécurité.

- ▶ Poids : 3,5 kg
- ▶ Composition : HDPE (matériau solide, incassable)
- ▶ Neutre au plan écologique et toxicologique
- ▶ Perméable aux rayons X
- ▶ Permet de surmonter des différences de niveau jusqu'à 15 cm
- ▶ Dispositif médical - Classe I - MDR 2017/745

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Plaque Transglide® grand modèle</b>	L. 1700 x P. 650	SAA71401
<b>Plaque Transglide® petit modèle</b>	L. 1400 x P. 480	SAA71402



### Drap de traction Transglide®

Ce drap de traction est le complément indispensable des plaques de transfert Transglide®. Il permet de latéraliser le patient afin de placer la plaque en dessous de lui, facilement et sans effort.

- ▶ Poids : 0,2 kg
- ▶ Composition : nylon résistant
- ▶ Souple, se plie facilement
- ▶ Dispositif médical - Classe I - MDR 2017/745

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Drap de traction Transglide®</b>	L. 1500 x P. 1500	SAA71451




## Gamme transfert

# Planches de transfert courbées

Les planches de transfert courbées sont une aide au transfert, spécialement conçues pour les personnes ayant des difficultés à se soulever. Elles offrent **un soutien permettant de passer d'un plan à un autre sans trop d'effort** : transfert du lit au fauteuil roulant, du fauteuil aux toilettes ou encore du fauteuil à la voiture.

Leur forme « banane », incurvée et arrondie, a été étudiée en collaboration avec des thérapeutes pour faciliter le positionnement de l'utilisateur et assurer un appui stable et sécurisant.

Ces planches, déjà vendues en plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, sont idéales pour les services de médecine, les maisons de retraite et le maintien à domicile.

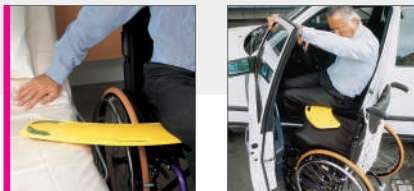

Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Forme courbée (banane)
- ▶ Adhésif antidérapant pour éviter tout glissement
- ▶ Robuste et légère
- ▶ Peut supporter jusqu'à 150 kg
- ▶ Entretien facile

## Gamme transfert

# Planches de transfert courbées

### Planche de transfert « Banane »

- ▶ Dimensions : L. 680 x P. 230 mm
- ▶ Poids : 1,2 kg
- ▶ Capacité (pour une distance de transfert inférieure à 20 cm) : 150 kg
- ▶ Matériau : HDPE résistant aux acides, non toxique
- ▶ Facile à nettoyer et à désinfecter
- ▶ Un adhésif antidérapant (bleu) assure le positionnement sur le lit, le fauteuil roulant...

Désignation

Référence

**Planche de transfert « Banane »**

SAA72003



### Planche de transfert « The biggest »

- ▶ Dimensions : L. 1000 x P. 340 mm
- ▶ Poids : 2,9 kg
- ▶ Capacité (pour une distance de transfert inférieure à 30 cm) : 130 kg
- ▶ Matériau : HDPE résistant aux acides, non toxique
- ▶ Facile à nettoyer et à désinfecter
- ▶ Un adhésif antidérapant (bleu) assure le positionnement sur le lit, le fauteuil roulant...

Désignation

Référence

**Planche de transfert « The biggest »**

SAA72001




Gamme transfert

## Plateaux et coussins tournants

Afin de **faciliter le transfert** de personnes ayant du mal à se soulever, nous vous proposons deux aides techniques : le disque de transfert et le coussin tournant.

Ces produits améliorent les conditions de travail du personnel soignant. Ils sont idéals pour les services de médecine, les maisons de retraite et le maintien à domicile.

Photos non contractuelles

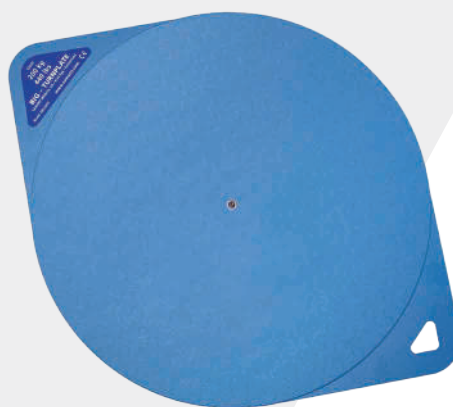

Hygènique



Ergonomique

### Points forts

- ▶ Transfert facilité des patients
- ▶ Évite au personnel soignant des lésions du dos
- ▶ Facile à nettoyer et à désinfecter
- ▶ Léger et peu encombrant

## Gamme transfert

# Plateaux et coussins tournants

### Disque de transfert



Ce disque tournant est idéal pour les transferts de patients assis ou debouts, du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. Il se distingue par son utilisation pratique, sa position tournante contrôlée, sa facilité de nettoyage et sa longévité.

- ▶ Dimensions : Ø 410 mm / 540 mm, 7 mm de haut
- ▶ Poids : 0,8 kg
- ▶ Matériau : ABS / Teflon
- ▶ Revêtement anti-dérapant
- ▶ Charge maximale : 200 kg

*Désignation*

*Référence*

**Disque de transfert**

SAA72412.01

### Coussin tournant



Ce coussin tournant est idéal pour les transferts en position assise du lit au fauteuil. Très facile d'emploi, il convient principalement aux patients en maison de soins ou à domicile.

- ▶ Diamètre : 380 mm
- ▶ Matériau : tissu et mousse ignifugés (lavable à 40°)
- ▶ Revêtement anti-dérapant

*Désignation*

*Référence*

**Coussin tournant**

SAA72411

Gamme transfert

# Sangles de déplacement

Photos non contractuelles

Au quotidien, l'équipe soignante doit prodiguer des soins à des patients généralement très dépendants physiquement. Pour éviter au personnel de graves blessures au dos, les sangles de déplacement sont une solution polyvalente d'un usage extrêmement **simple** et **sûr**.

Munies de poignées latérales très résistantes à la traction, elles offrent de bonnes prises pour modifier la position d'un patient dans son lit ou dans son fauteuil, sans trop d'effort.



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Simple d'utilisation
- ▶ Résistant à la traction
- ▶ Entretien facile
- ▶ Peu encombrant


Gamme transfert

# Sangles de déplacement

## Sangle de redressement Pat-sling®

Cette sangle est idéale pour redresser, allonger ou modifier la position d'un patient dans son lit ou dans son fauteuil. Ses doubles poignées permettent de l'utiliser pour des patients jusqu'à 120 kg.

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Sangle de redressement Pat-sling®</b>	L. 500 x P. 200	SAA72425

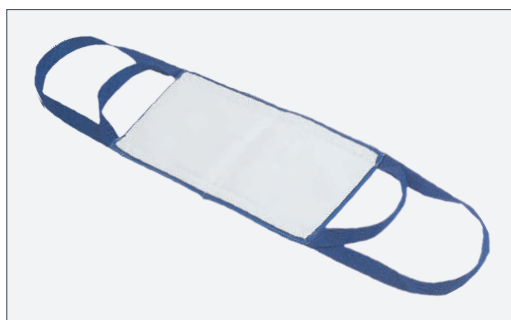

## Ceinture de transfert

Cette ceinture est conçue pour le transfert de patient assis ou debout et l'aide à la marche.

Ses poignées latérales, très résistantes à la traction, offrent de bonnes prises pour relever un patient de son lit. Elles assurent aussi la tenue d'un patient pour l'accompagner dans ses déplacements.

Désignation	Longueur (en mm)	Référence
<b>Ceinture de transfert taille S - M</b>	810 - 1070	SAA72422
<b>Ceinture de transfert taille L - XL</b>	1030 - 1450	SAA72423





## Gamme contention

# Systeme de contention Pinel®

Le concept Pinel® **permet de satisfaire aux besoins de contention de tous niveaux avec un seul système.**

Dans la contention d'urgence, le patient agressif peut être immobilisé en sept points en moins de dix secondes et ramené jusqu'à un seul point, à mesure qu'il se calme. Les patients plus passifs peuvent être maintenus au lit ou au fauteuil tout en conservant une grande mobilité et peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont sous contention.

Ce système s'adapte à tous les types de besoins de contention des institutions, soins prolongés, urgences, psychiatrie, soins intensifs...



## Points forts

- ▶ Confort : Polyester + Kevlar
- ▶ Sécurité : fermeture magnétique protégée
- ▶ Hygiène : antibactérien, antifongique, anti-odeur, lavage aisé et séchage très rapide
- ▶ Liberté de mouvement : grande manœuvre dans la fixation, permettant ainsi une certaine mobilité
- ▶ Rapidité : système universel

## Gamme contention

# Système de contention Pinel®

### Kit complet

Le kit contient :

- ▶ 4 attache-membres
- ▶ 1 ceinture abdominale
- ▶ 2 rallonges
- ▶ 1 extension
- ▶ 1 sangle maintien tronc
- ▶ 1 sangle pelvienne
- ▶ 1 sangle courroie de préparation
- ▶ 3 clés magnétiques
- ▶ 13 axes + verrous avec ficelle
- ▶ 2 axes + verrous
- ▶ 1 cutter d'urgence

La mallette est munie d'un code couleur, qui vous permettra de ranger facilement tous les équipements Pinel®.

Désignation	Référence
<b>Kit complet avec mallette</b>	SAA50100
<b>Kit complet sans mallette</b>	SAA50200
<b>Mallette seule</b>	SAA50900

### Verrous et accessoires

Toutes les fixations Pinel® sont équipées d'un système de verrous efficace, rapide à mettre en place et facile à utiliser.

Le système de fermeture « axe + verrou » permet de bloquer jusqu'à 4 courroies ensemble. Ce dispositif se débloque en positionnant la clé magnétique sur le verrou.

Résistance : 500 kg.

Désignation	Référence
<b>Clé magnétique</b>	SAA50910
<b>Verrou aimanté</b>	SAA50920
<b>Axe en inox</b>	SAA50930
<b>Ensemble axe + verrou</b>	SAA50940
<b>Ensemble axe + verrou + ficelle</b>	SAA50950

### Kit ceinture abdominale



Cette ceinture abdominale permet au patient de se latéraliser et de bouger de haut en bas. La sangle pelvienne évite au patient de glisser dans le lit ou dans le fauteuil.

Ce kit comprend 1 ceinture abdominale, 2 courroies latérales libres, 1 sangle pelvienne, 2 axes + verrous et ficelle, 2 axes + verrous et 3 clés magnétiques.

Désignation	Référence
<b>Kit ceinture abdominale petite taille</b> (38 à 97 cm)	SAA50402
<b>Kit ceinture abdominale taille standard</b> (53 à 112 cm)	SAA50400
<b>Kit ceinture abdominale grande taille</b> (78 à 137 cm)	SAA50401
<b>Extension pour ceinture abdominale</b> (préconisée pour les obèses - L. 30 cm)	SAA50410
<b>Sangle pelvienne</b>	SAA50420

### Kit attaches membres



Le kit contient 2 attaches membres, 1 clé magnétique et 4 axes + verrous et ficelle. Les attaches membres sont munies d'un système de fermeture velcro permettant un contrôle rapide et efficace des poignets et des chevilles en situation d'urgence.

Désignation	Référence
<b>Kit attaches membres petite taille</b>	SAA50301
<b>Kit attaches membres taille standard</b>	SAA50300

# PARTIE 7

---

## Circuit de la restauration





## Circuit de la restauration

# Chariot de distribution de repas motorisé Neop meal®

Le chariot **multifonction** Neop meal® assure les différentes prestations alimentaires de la journée, servies en chambre, en salle à manger ou en UVP.

Ce chariot **compact et motorisé** offre une excellente manœuvrabilité. Sa motorisation permet d'améliorer le confort de travail du personnel tout en réduisant les TMS.

Neop meal® est **garant de la sécurité alimentaire**. Il respecte les températures et conserve les qualités organoleptiques des préparations culinaires grâce à un maintien en température par air pulsé.

**Neop meal**



Ergonomique



Hygiénique

## Points forts

- ▶ Adapté à tout type d'organisation
- ▶ Poussée 100 % motorisée
- ▶ Maintien des températures par air pulsé
- ▶ Respect de la marche en avant

## Circuit de la restauration

# Chariot de distribution de repas motorisé Neop meal®

### Points forts

#### ERGONOMIE

- ▶ **1 roue motrice centrale « EasyMoove » avec commande intégrée à la galerie supérieure**
- ▶ 4 roues directionnelles diamètre 125 mm à roulements à aiguilles
- ▶ Plan de travail à hauteur ergonomique, extensible grâce à deux supports latéraux
- ▶ Ouverture des portes à 270° avec maintien magnétique

#### SÉCURITÉ

- ▶ Isothermie optimale
- ▶ Galerie supérieure 3 côtés anti-chute
- ▶ Pare-chocs inférieur périphérique
- ▶ Freinage frontal centralisé
- ▶ Bouton d'arrêt d'urgence du système de motorisation EasyMoove
- ▶ Fermeture à clé


#### HYGIÈNE

- ▶ Construction tout inox
- ▶ Facile à nettoyer
- ▶ Débarrassage avec le même chariot
- ▶ Respect de la marche en avant
- ▶ Conformité HACCP


### Données techniques

- ▶ 2 compartiments de 8 niveaux GN 1/1 au pas de 80 mm
- ▶ Compartiments réalisés en tôle inox, isolés avec de la laine de roche
- ▶ Dimensions utiles du plan de travail : L. 1139 x P. 641 mm
- ▶ Hauteur plan de travail : 1000 mm
- ▶ Dimensions hors tout : L. 1304 x P. 725 x H. 1107 mm
- ▶ Surface au sol : 0,945 m<sup>2</sup>
- ▶ Poids : 190 kg

### EasyMoove

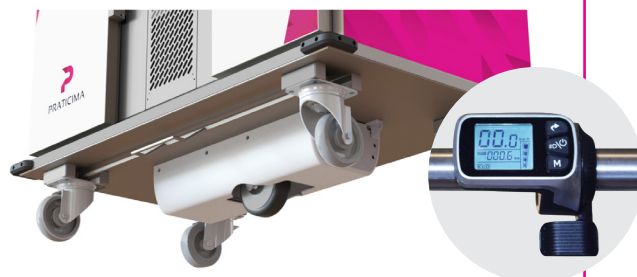

- ▶ **Poussée 100 % motorisée** : utilisation de la gâchette d'accélération
- ▶ **Sélection de la vitesse** (2,5 ou 4 km/h) et accélération progressive
- ▶ **Système de compensation** pour les sols irréguliers
- ▶ **Simplicité d'utilisation et de charge**
- ▶ **L'ergonomie accessible à tous** : solution économique, retour sur investissement en limitant les coûts liés aux arrêts de travail du personnel

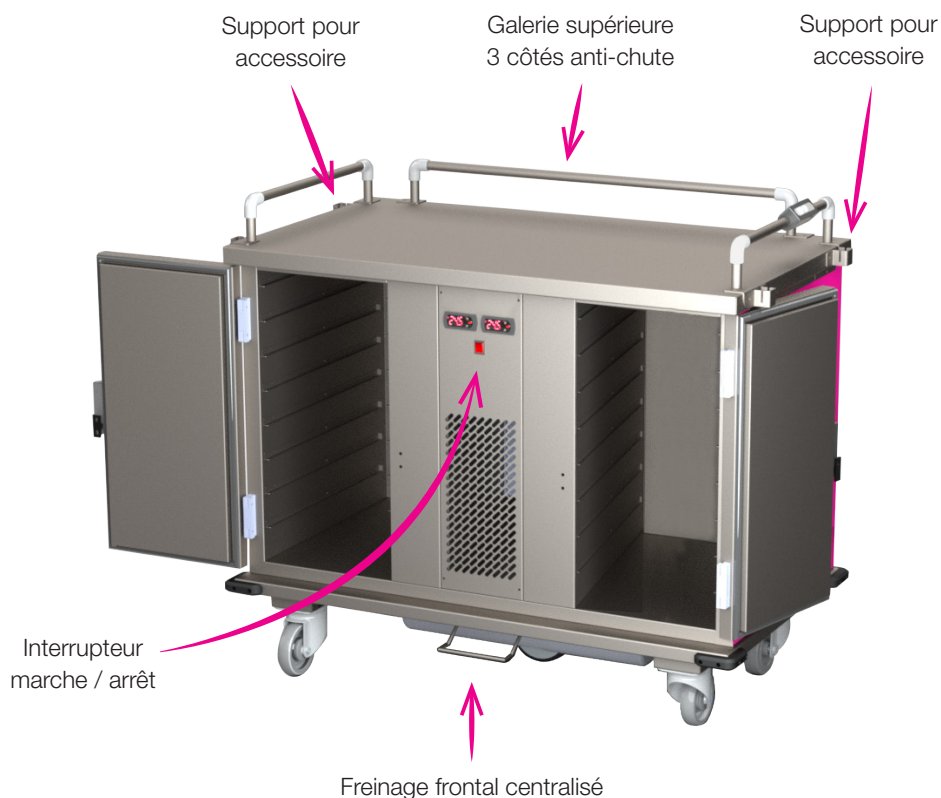


## Circuit de la restauration

# Chariot de distribution de repas motorisé Neop meal®

### Capacité par niveau



1 plateau  
GN 1/1

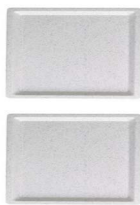

2 plateaux  
GN 1/2



1 bac  
Gastronomie  
GN 1/1



2 bacs  
Gastronomie  
GN 1/2



3 bacs  
Gastronomie  
GN 1/3



1 grille  
GN 1/1

### Modèles proposés

#### CHARIOT NEOP MEAL® VERSION CHAUD FROID

##### Prestations assurées

- ▶ Petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner

##### Service

- ▶ En chambre, en salle à manger ou en UVP
- ▶ Sur plateaux GN 1/1 ou GN 1/2
- ▶ À l'assiette à partir de bacs Gastronomie

##### Capacité

- ▶ 24 repas à l'assiette (positionnée sur une grille)
- ▶ 16 repas sur plateaux GN 1/2
- ▶ 32 petits déjeuners sur plateaux GN 1/2
- ▶ 100 goûters
- ▶ 40 assiettes à partir de bacs Gastronomie

##### Modules chaud froid

- ▶ Maintien en température par air pulsé
- ▶ Réglage et contrôle de la température par affichage digital
- ▶ Protection des modules chaud et froid par disjoncteurs
- ▶ Compartiment froid : Le chariot est conçu pour réguler à une température ambiante de 6°C/ 8°C. Les produits introduits doivent être à une température de 2°C /4°C.
- ▶ Compartiment chaud : Le chariot est conçu pour réguler à une température ambiante de 80°/90°C. Les produits introduits doivent être à une température de 80°C / 85°C.

Désignation

Référence

Chariot de distribution de repas motorisé Neop Meal® - version chaud froid

9E101\_V02

## Circuit de la restauration

# Chariot de distribution de repas motorisé Neop meal®

### CHARIOT NEOP MEAL® VERSION ISOTHERME

#### **Prestations assurées**

- ▶ Petit déjeuner et goûter

#### **Service**

- ▶ En chambre ou en salle à manger
- ▶ Sur plateaux individuels ou à partir de bacs Gastronorme

#### **Capacité**

- ▶ 32 petits déjeuners sur plateaux individuels GN 1/2
- ▶ 100 goûters

#### *Désignation*

#### *Référence*

**Chariot de distribution de repas motorisé Neop Meal® - version isotherme**

9E102\_V02

### CHARIOT NEOP MEAL® VERSION DOUBLE CHAUD

#### **Prestations assurées**

- ▶ Déjeuner et dîner

#### **Service**

- ▶ En salle à manger
- ▶ À l'assiette à partir de bacs Gastronorme :
  - 1 puit pour les viandes / poissons
  - 1 puit pour les légumes

#### **Capacité**

- ▶ 80 repas

#### **Modules chauds**

- ▶ Maintien en température par air pulsé
- ▶ Réglage et contrôle de la température par affichage digital
- ▶ Gestion séparée des températures
- ▶ Protection des modules chauds par disjoncteurs
- ▶ Le chariot est conçu pour réguler à une température ambiante de 80°/90°C.
- ▶ Les produits introduits doivent être à une température de 80°C / 85°C.

#### *Désignation*

#### *Référence*

**Chariot de distribution de repas motorisé Neop Meal® - version double chaud**

9E103\_V02



## Circuit de la restauration

# Chariot de distribution de repas motorisé Neop meal®

### CHARIOT NEOP MEAL® VERSION DOUBLE FROID

#### Prestations assurées

- ▶ Déjeuner et dîner

#### Service

- ▶ En salle à manger
- ▶ À l'assiette à partir de bacs Gastronorme :
  - 1 puit pour les entrées
  - 1 puit pour les desserts

#### Capacité

- ▶ 80 repas

#### Modules froids

- ▶ Maintien en température par air pulsé
- ▶ Réglage et contrôle de la température par affichage digital
- ▶ Gestion séparée des températures
- ▶ Protection des modules froids par disjoncteurs
- ▶ Le chariot est conçu pour réguler à une température ambiante de 6°C/ 8°C.
- ▶ Les produits introduits doivent être à une température de 2°C /4°C.

#### Désignation

#### Référence

**Chariot de distribution de repas motorisé Neop Meal® - version double froid**

9E104\_V02

### Équipements optionnels

#### Désignation

#### Référence

**1 Support latéral pour bacs Gastronorme** - Livré sans bac

9E212

**2 Support poubelle**

9E213





# PARTIE 8

---

## Accessoires et équipements





## Accessoires et équipements communs

# Bacs-tiroirs

Nous proposons une grande diversité de **bacs-tiroirs**. Les différentes hauteurs et largeurs disponibles permettent un aménagement modulable et évolutif.

Un même bac-tiroir peut être utilisé dans un chariot, une armoire ou positionné sur un rail normalisé. Il peut servir comme subcontainer dans nos tiroirs 400 x 400 et 600 x 400 et convient également pour le cloisonnement des cassettes de transport.

Nous proposons aussi des **bacs dévidoirs** spécialement conçus pour la distribution des rouleaux sachets doses.



Hygène



Ergonomie

## Points forts

- ▶ Nettoyage facile
- ▶ Résistant aux produits couramment utilisés en milieu hospitalier
- ▶ Surface lisse sans recoin ni aspérité
- ▶ Grande solidité

## Accessoires et équipements communs

# Bacs-tiroirs

### Bacs-tiroirs en ABS et curseurs compatibles

#### Bacs-tiroirs avec butée


Les bacs-tiroirs avec butée peuvent être utilisés dans un chariot ou une armoire :

- ▶ posés sur une tablette
- ▶ comme subcontainer dans les tiroirs 600 x 400 et les bacs 400 x 400
- ▶ sur un rail normalisé.



Ces bacs-tiroirs sont proposés en blanc ou en transparent, alors que nos curseurs ne sont disponibles qu'en blanc.

**Ajoutez « TR » à la fin de la référence du bac-tiroir si vous souhaitez le commander en transparent.**

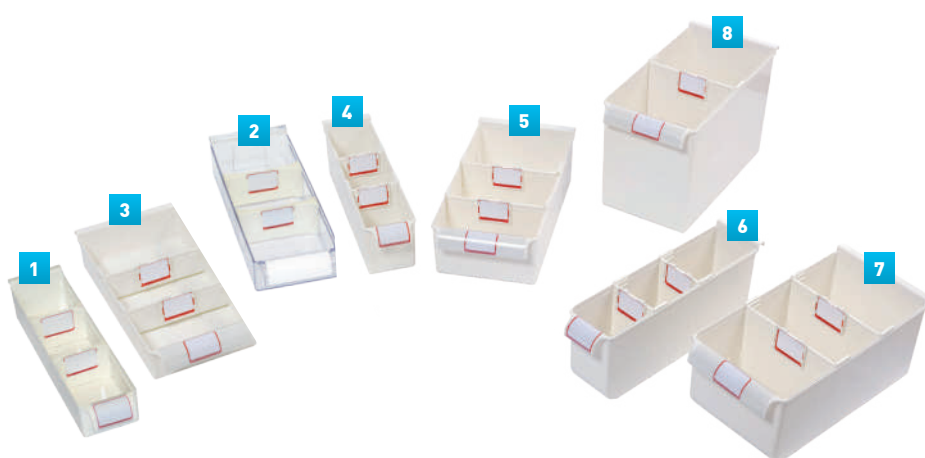

*BACS-TIROIRS H. 70*      *Dimensions du bac-tiroir (en mm)*      *Réf. du bac-tiroir*      *Réf. du curseur compatible*

<b>1</b>	<b>Bac-tiroir H. 70 L. 1/6</b>	L. 90 x P. 370 x H. 71	8AB070_1_6N	8AC060_1_6*
<b>2</b>	<b>Bac-tiroir H. 70 L. 1/4</b>	L. 135 x P. 370 x H. 71	8AB070_1_4	8AC060_1_4*
<b>3</b>	<b>Bac-tiroir H. 70 L. 1/3</b>	L. 185 x P. 370 x H. 72	8AB070_1_3	8AC070_1_3

Les bacs-tiroirs H. 70 mm peuvent être utilisés pour le compartimentage des tiroirs H. 75 mm.

*BACS-TIROIRS H. 110*      *Dimensions du bac-tiroir (en mm)*      *Réf. du bac-tiroir*      *Réf. du curseur compatible*

<b>4</b>	<b>Bac-tiroir H. 110 L. 1/6</b>	L. 90 x P. 370 x H. 112	8AB110_1_6	8AC110_1_6
<b>5</b>	<b>Bac-tiroir H. 110 L. 1/3</b>	L. 185 x P. 370 x H. 112	8AB110_1_3	8AC110_1_3

Les bacs-tiroirs H. 110 mm peuvent être utilisés pour le compartimentage des tiroirs H. 115 mm.

*BACS-TIROIRS H. 150*      *Dimensions du bac-tiroir (en mm)*      *Réf. du bac-tiroir*      *Réf. du curseur compatible*

<b>6</b>	<b>Bac-tiroir H. 150 L. 1/6</b>	L. 90 x P. 370 x H. 150	8AB150_1_6	8AC150_1_6
<b>7</b>	<b>Bac-tiroir H. 150 L. 1/3</b>	L. 185 x P. 370 x H. 152	8AB150_1_3	8AC150_1_3

Les bacs-tiroirs H. 150 mm peuvent être utilisés pour le compartimentage des tiroirs H. 155 mm.

*BACS-TIROIRS H. 230*      *Dimensions du bac-tiroir (en mm)*      *Réf. du bac-tiroir*      *Réf. du curseur compatible*

<b>8</b>	<b>Bac-tiroir H. 230 L. 1/3</b>	L. 185 x P. 370 x H. 233	8AB230_1_3	8AC230_1_3
----------	---------------------------------	--------------------------	------------	------------

Le bac-tiroir H. 230 mm peut être utilisé pour le compartimentage des tiroirs H. 235 mm.

## Accessoires et équipements communs

# Bacs-tiroirs

### Bacs-tiroirs sans butée

Ce type de bacs-tiroirs convient pour le cloisonnement des cassettes de transport.



Désignation	Dimensions du bac-tiroir (en mm)	Réf. du bac-tiroir	Réf. du curseur compatible
<b>Bac-tiroir gris H. 60 L. 1/7</b>	L. 75 x P. 356 x H. 56	8AB060_1_7	8AC060_1_7*
<b>Bac-tiroir blanc H. 60 L. 1/6</b>	L. 90 x P. 355 x H. 60	8AB060_1_6	8AC060_1_6*
<b>Bac-tiroir blanc H. 60 L. 1/4</b>	L. 135 x P. 355 x H. 60	8AB060_1_4	8AC060_1_4*


Les bacs-tiroirs H. 60 mm peuvent être utilisés pour le cloisonnement des cassettes 2 et 3 niveaux.

### Bacs-tiroirs dévidoirs

Ces bacs-tiroirs sont conçus pour la distribution des rouleaux sachets doses. Ils sont tous équipés d'un dévidoir et d'un curseur.



Désignation	Dimensions du bac-tiroir (en mm)	Réf. du bac-tiroir	Réf. du curseur compatible
<b>9 Bac-tiroir blanc H. 70 L. 1/6</b>	L. 90 x P. 370 x H. 71	8AB070_1_6D	8AC060_1_6*
<b>10 Bac-tiroir blanc H. 110 L. 1/6</b>	L. 90 x P. 370 x H. 112	8AB110_1_6D	8AC110_1_6
<b>Bac-tiroir blanc H. 150 L. 1/6</b>	L. 90 x P. 370 x H. 150	8AB150_1_6D	8AC150_1_6

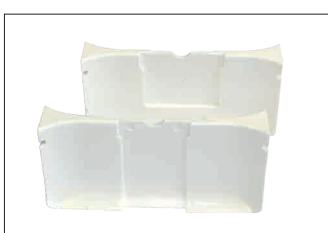

\*Ces curseurs intègrent un porte-étiquette sur chacune de leurs faces (un dans le sens horizontal et un autre dans le sens vertical).  
Pour les autres curseurs, utilisez le porte-étiquette amovible réf. 8A010.

## Accessoires et équipements communs

# Bacs-tiroirs

### Identification

#### Accessoires pour poignée


Désignation	Conditionnement	Référence
Étiquette blanche pour bac-tiroir L. 1/6	Lot de 20	8AB068_1_6
Étiquette blanche pour bac-tiroir L. 1/3	Lot de 20	8AB068_1_3
Protège étiquette pour bac-tiroir L. 1/6	Unité	8AB069_1_6
Protège étiquette pour bac-tiroir L. 1/4	Unité	8AB069_1_4
Protège étiquette pour bac-tiroir L. 1/3	Unité	8AB069_1_3



Les étiquettes n'étant pas adhésives, le protège étiquette est indispensable pour maintenir l'étiquette sur la poignée du bac-tiroir.

#### Accessoires pour curseur

	Désignation	Conditionnement	Référence
11	Porte-étiquette	Lot de 20	8A010
12	Support étiquette PVC	10 planches de 20	8A004
	Étiquette adhésive blanche enlevable	30 planches de 20	8A005
13	Étiquette adhésive rouge enlevable	30 planches de 20	8A006
14	Étiquette adhésive verte enlevable	30 planches de 20	8A007

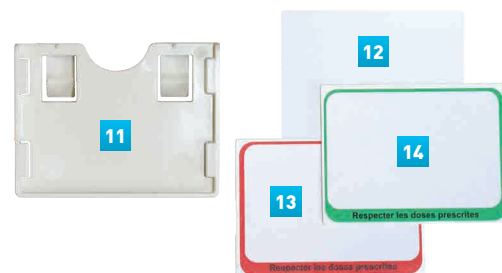

### Tablettes amovibles pour bacs-tiroirs

Désignation	Référence
Tablette en aluminium pour chariots 400 x 400	8Y011_F400
Tablette en aluminium pour chariots 600 x 400	8Y011_F600





## Accessoires et équipements communs

# Bacs pour structures 400 x 400

Nos bacs 400 x 400 sont compatibles avec l'ensemble des chariots et armoires au format 400 x 400. Les différentes hauteurs proposées permettent un aménagement modulable et évolutif.

Pour organiser vos bacs, vous pourrez utiliser des peignes de compartimentage ou des bacs-tiroirs.

Photos non contractuelles



Hygène



Ergonomie

## Points forts

- ▶ Grande solidité
- ▶ Nettoyage facile
- ▶ Surface lisse sans recoin ni aspérité
- ▶ Résistant aux produits couramment utilisés en milieu hospitalier

## Accessoires et équipements communs

## Bacs pour structures 400 x 400


## Bacs en ABS blanc

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Bac H. 75 pour 36 gobelets 30/120 ml</b>	L. 415 x P. 408 x H. 75	8AS060
<b>Bac H. 75</b>	L. 415 x P. 408 x H. 75	8AS075
<b>Bac H. 115</b>	L. 415 x P. 408 x H. 115	8AS115
<b>Bac H. 195</b>	L. 415 x P. 408 x H. 195	8AS195




## Compartimentage des bacs

## Avec des peignes

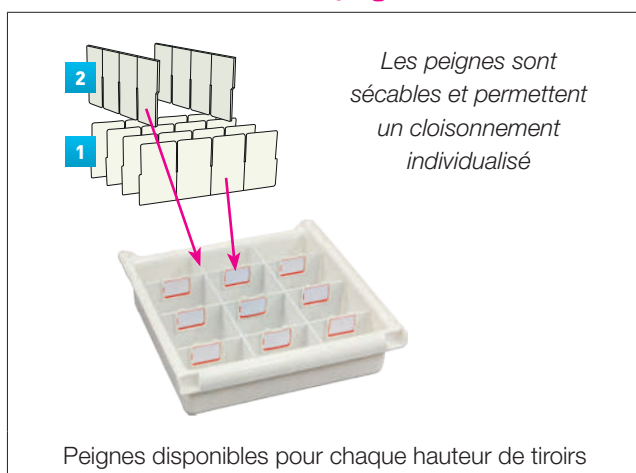

## Avec des bacs-tiroirs

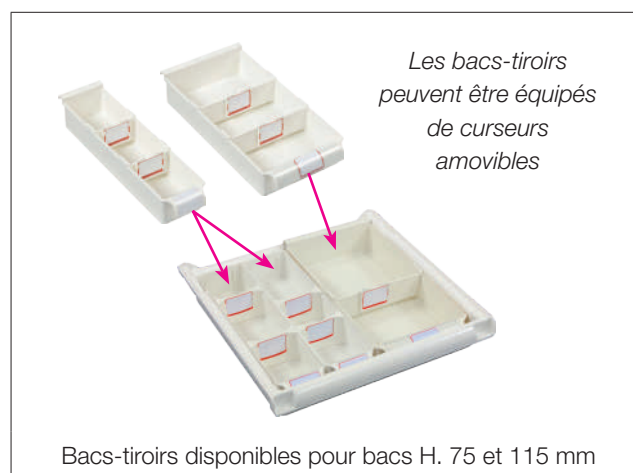


Désignation	Réf. peigne largeur <b>1</b>	Réf. peigne profondeur <b>2</b>
<b>Peigne pour 8AS075</b>	ACC8A203	ACC8A099
<b>Peigne pour 8AS115</b>	ACC8A204	ACC8A101
<b>Peigne pour 8AS195</b>	ACC8A206	ACC8A103

## Identification des bacs

Désignation	Conditionnement	Référence
<b>3</b> <b>Étiquette blanche</b>	Lot de 20	8AB068_1_3
<b>Étiquette de couleur</b>	Lot de 10	8AT070
<b>4</b> <b>Protège étiquette</b>	Unité	8AS074

Les étiquettes n'étant pas adhésives, le protège étiquette est indispensable pour maintenir l'étiquette sur la poignée du bac.

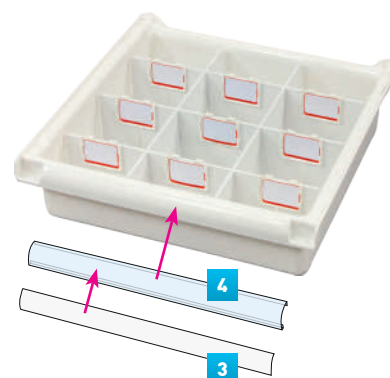


## Accessoires et équipements communs

# Tiroirs pour structures 600 x 400

Nos tiroirs 600 x 400 sont compatibles avec l'ensemble des chariots et armoires au format 600 x 400. Les différentes hauteurs proposées permettent un aménagement modulable et évolutif.

Pour organiser vos tiroirs, vous pourrez utiliser des kits de compartimentage ou des bacs-tiroirs.

Photos non contractuelles

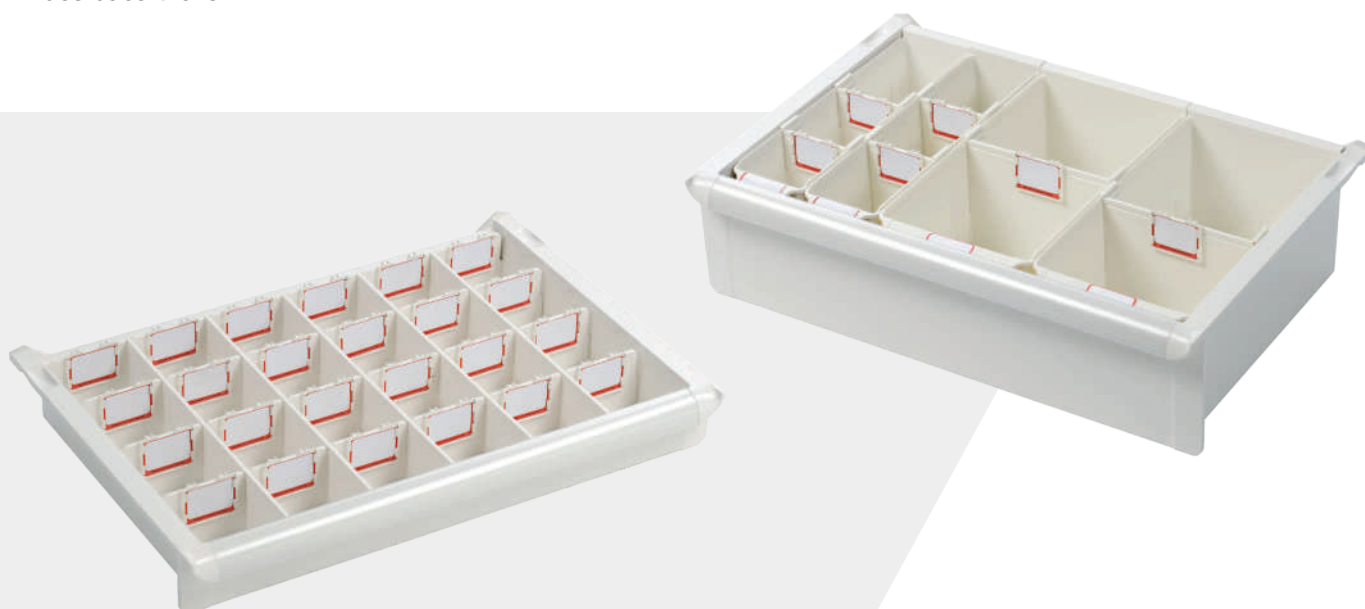

Hygènique



Ergonomique

### Points forts

- ▶ Grande solidité
- ▶ Nettoyage facile
- ▶ Surface lisse sans recoin ni aspèrité
- ▶ Résistant aux produits couramment utilisés en milieu hospitalier

## Accessoires et équipements communs

# Tiroirs pour structures 600 x 400


### Tiroirs en ABS blanc

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Tiroir H. 75 pour 60 gobelets 30/120 ml</b>	L. 605 x P. 404 x H. 75	8AT060
<b>Tiroir H. 75</b>	L. 605 x P. 404 x H. 75	8AT075
<b>Tiroir H. 115</b>	L. 605 x P. 404 x H. 115	8AT115
<b>Tiroir H. 155</b>	L. 605 x P. 404 x H. 155	8AT155
<b>Tiroir H. 235</b>	L. 605 x P. 404 x H. 235	8AT235




### Compartimentage des tiroirs

#### Avec un kit de compartimentage

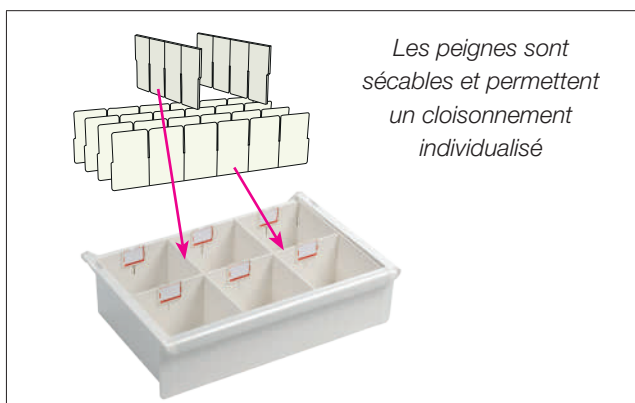

#### Avec des bacs-tiroirs

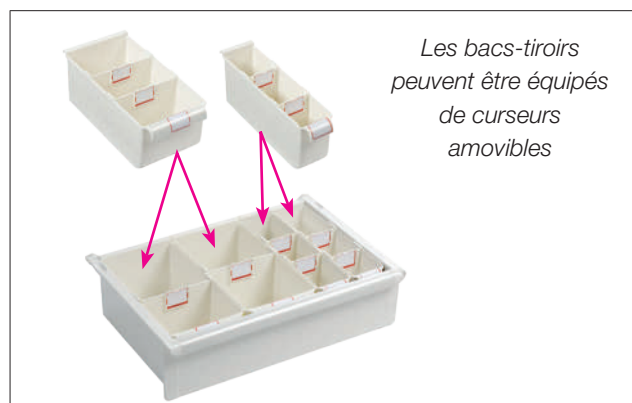

Des bacs-tiroirs sont disponibles pour chaque hauteur de tiroirs, consultez-nous !

KITS POUR TIROIR 8AT075	Référence
<b>Kit 1 x 4 = 4 cases</b>	8AT075_1X4
<b>Kit 2 x 4 = 8 cases</b>	8AT075_2X4
<b>Kit 3 x 2 = 6 cases</b>	8AT075_3X2
<b>Kit 3 x 4 = 12 cases</b>	8AT075_3X4
<b>Kit 6 x 1 = 6 cases</b>	8AT075_6X1
<b>Kit 6 x 2 = 12 cases</b>	8AT075_6X2
<b>Kit 6 x 4 = 24 cases</b>	8AT075_6X4

KITS POUR TIROIR 8AT155	Référence
<b>Kit 1 x 4 = 4 cases</b>	8AT155_1X4
<b>Kit 2 x 2 = 4 cases</b>	8AT155_2X2
<b>Kit 2 x 4 = 8 cases</b>	8AT155_2X4
<b>Kit 3 x 2 = 6 cases</b>	8AT155_3X2
<b>Kit 3 x 4 = 12 cases</b>	8AT155_3X4
<b>Kit 6 x 1 = 6 cases</b>	8AT155_6X1
<b>Kit 6 x 2 = 12 cases</b>	8AT155_6X2

KITS POUR TIROIR 8AT115	Référence
<b>Kit 1 x 4 = 4 cases</b>	8AT115_1X4
<b>Kit 2 x 4 = 8 cases</b>	8AT115_2X4
<b>Kit 3 x 2 = 6 cases</b>	8AT115_3X2
<b>Kit 3 x 4 = 12 cases</b>	8AT115_3X4
<b>Kit 6 x 1 = 6 cases</b>	8AT115_6X1
<b>Kit 6 x 2 = 12 cases</b>	8AT115_6X2
<b>Kit 6 x 4 = 24 cases</b>	8AT115_6X4

KITS POUR TIROIR 8AT235	Référence
<b>Kit 2 x 1 = 2 cases</b>	8AT235_2X1
<b>Kit 2 x 2 = 4 cases</b>	8AT235_2X2
<b>Kit 3 x 2 = 6 cases</b>	8AT235_3X2


## Accessoires et équipements communs

# Tiroirs pour structures 600 x 400

### Identification des tiroirs


	Désignation	Conditionnement	Référence
1	<b>Étiquette blanche</b>	Lot de 20	8AT069
	<b>Étiquette de couleur</b>	Lot de 10	8AT070
2	<b>Protège étiquette</b>	Unité	8AT074

Les étiquettes n'étant pas adhésives, le protège étiquette est indispensable pour maintenir l'étiquette sur la poignée de tiroir.

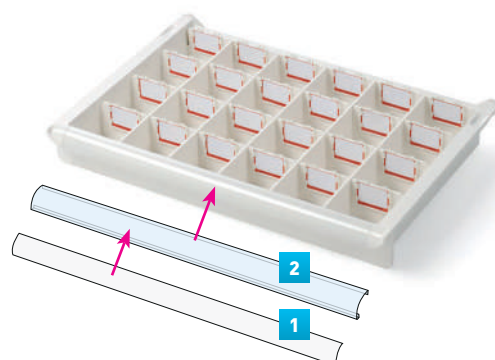

### Tablette de condamnation

Désignation	Référence
<b>Tablette de condamnation avec serrure à code</b>	8Y020_CODE

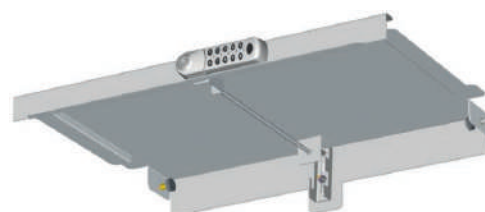





## Accessoires et équipements communs

# Bacs à lèvres pour structures 400 x 400

Nos bacs à lèvres 400 x 450 sont compatibles avec notre chariot d'urgence 400 x 400 et nos chariots 400 x 400 équipés de glissières. Les différentes hauteurs proposées permettent un **aménagement modulable et évolutif**.

Pour organiser vos bacs, vous pouvez utiliser des peignes ou des kits de compartimentage.

Photos non contractuelles

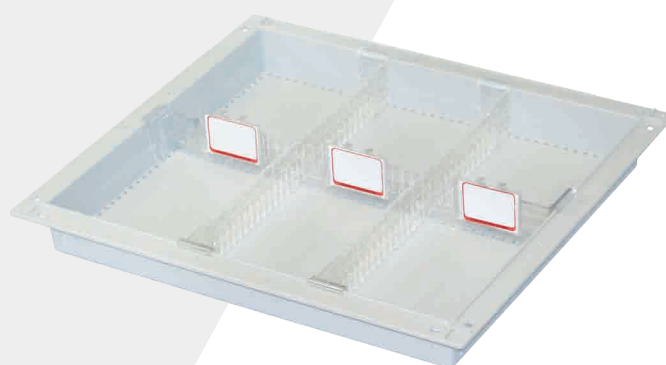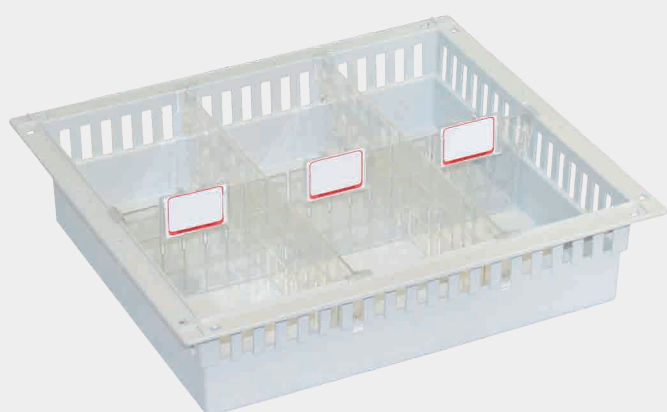

Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Différentes tailles disponibles
- ▶ Grande solidité
- ▶ Nettoyage facile
- ▶ Résistant aux produits couramment utilisés en milieu hospitalier

## Accessoires et équipements communs

# Bacs à lèvres pour structures 400 x 400

### Bacs à lèvres

Nos bacs à lèvres sont proposés en ABS gris.

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Bac à lèvres H. 50</b>	L. 400 x P. 450 x H. 50	BAC4540.205
<b>Bac à lèvres H. 100</b>	L. 400 x P. 450 x H. 100	BAC4540.210




### Compartimentage

#### Peignes


Le compartimentage des bacs à lèvres est possible grâce à des peignes transparents.

	Désignation	Réf. hauteur 50	Réf. hauteur 100
<b>1</b>	<b>Peigne court</b>	3A050_TR_PC	3A100_TR_PC
<b>2</b>	<b>Peigne long</b>	SEP45.205	SEP45.210

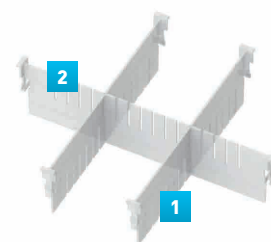


#### Kits de compartimentage

Désignation	Référence
<b>Kit de compartimentage 16 cases pour bac à lèvres H. 50</b>	SEPT450_16H050
<b>Kit de compartimentage 9 cases pour bac à lèvres H. 100</b>	SEPT450_09H100

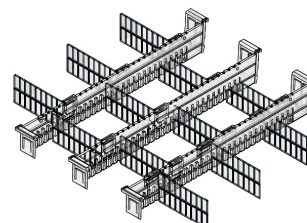

### Butées anti-chute

Désignation	Référence
<b>Paire de butées de fin de sortie</b>	PDA132.W

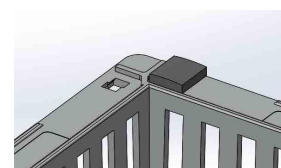



## Accessoires et équipements communs

# Bacs à lèvres pour structures 400 x 400

### Identification

#### Porte-étiquettes

	Désignation	Dimensions (en mm)	Conditionnement	Référence
3	Porte-étiquette horizontal	59 x 45	Lot de 20	8A010
4	Porte-étiquette vertical « 1/2 carte de crédit »	43 x 62	Unité	3A017
5	Porte-étiquette horizontal « 1/2 carte de crédit »	64 x 42	Unité	3A011
6	Porte-étiquette horizontal « à lèvres »	75 x 42	Unité	37487
7	Porte-étiquette horizontal « carte de crédit »	90 x 40	Unité	3A018




#### Supports étiquettes en PVC

	Désignation	Dimensions (en mm)	Conditionnement	Référence
	Support étiquette pour 3A018	85 x 54	Lot de 50	37484
	Support étiquette pour 3A011 et 3A017	60 x 40	Unité	3A012
	Support étiquette pour 37487, 3A017 et 8A010	54 x 40	10 planches de 20	8A004

#### Étiquettes

	Désignation	Dimensions (en mm)	Conditionnement	Référence
8	Étiquette blanche enlevable pour DM	52 x 38	30 planches de 20	8A005
9	Étiquette vierge enlevable pour DM	52 x 38	30 planches de 20	8A005_S
10	Étiquette rouge enlevable	52 x 38	30 planches de 20	8A006
11	Étiquette verte enlevable	52 x 38	30 planches de 20	8A007
	Étiquette orange pour plein / vide		30 planches de 20	8A005_ORANGE
	Étiquette verte pour plein / vide		30 planches de 20	8A005_VERTE

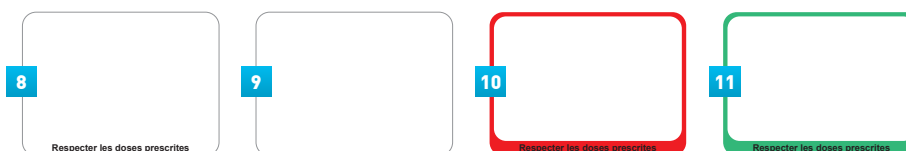

#### Plein / vide

	Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
	Porte-étiquette autocollant	L. 1000 x H. 12	7B006
	Porte-étiquette mural		89362




## Accessoires et équipements communs

# Bacs à lèvres pour structures 400 x 600 et 600 x 400

Nos bacs à lèvres sont compatibles avec l'ensemble des chariots, armoires et rayonnages au format 400 x 600 et 600 x 400. Les différentes hauteurs proposées permettent un **aménagement modulable et évolutif**.

Pour organiser vos bacs, vous pouvez utiliser des peignes ou des kits de compartimentage.

Photos non contractuelles

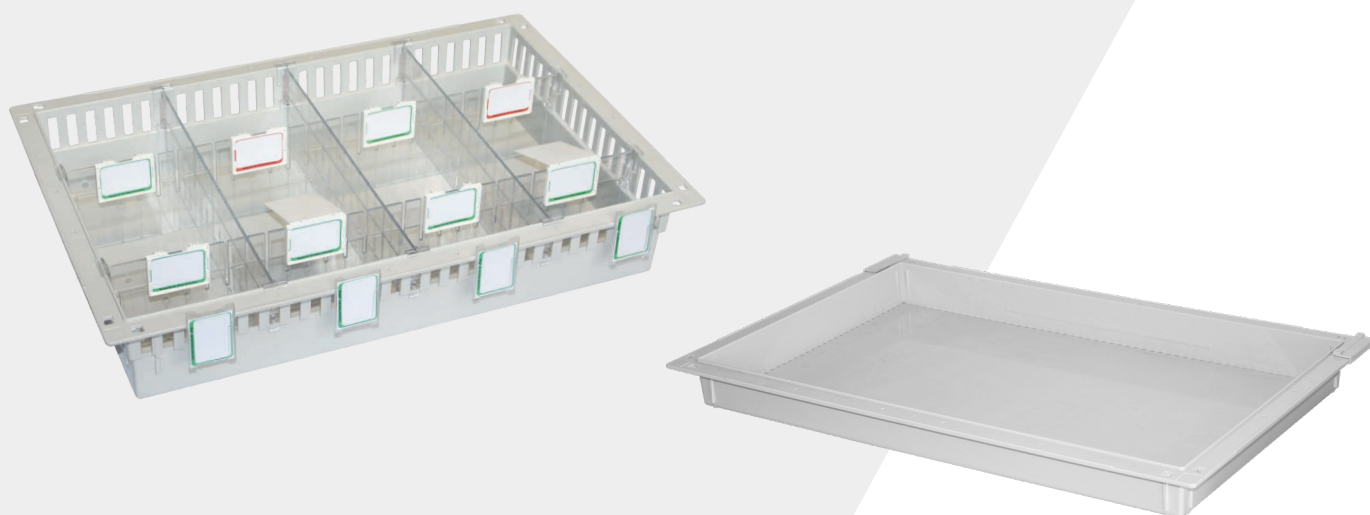

Hygène



Ergonomie

## Points forts

- ▶ Différentes tailles disponibles
- ▶ Grande solidité
- ▶ Nettoyage facile
- ▶ Résistant aux produits couramment utilisés en milieu hospitalier

## Accessoires et équipements communs

# Bacs à lèvres pour structures 400x600 et 600x400

### Bacs à lèvres

Nos bacs à lèvres sont proposés en ABS gris.

Désignation	Réf. bac plein	Réf. bac ajouré
<b>Bac à lèvres H. 50</b>	3A050BP_OP	–
<b>Bac à lèvres H. 100</b>	3A100BP_OP	3A100BA_OP
<b>Bac à lèvres H. 200</b>	3A200BP_OP	3A200BA_OP




### Compartimentage

#### Peignes


Le compartimentage des bacs à lèvres est rendu possible grâce à des peignes courts et longs. Ces peignes, non sécables, sont proposés en ABS gris.

Désignation	Réf. du peigne court <b>1</b>	Réf. du peigne long <b>2</b>
<b>Peigne H. 50</b>	3A050_OP_PC	3A050_OP_PL
<b>Peigne H. 100</b>	3A100_OP_PC	3A100_OP_PL
<b>Peigne H. 200</b>	3A200_OP_PC	3A200_OP_PL

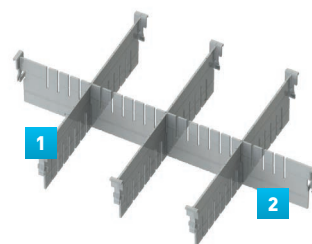


#### Kits de compartimentage

Désignation	Référence
<b>Kit de compartimentage 16 cases pour bac à lèvres H. 50</b>	SEPT600_16H050
<b>Kit de compartimentage 9 cases pour bac à lèvres H. 100</b>	SEPT600_09H100

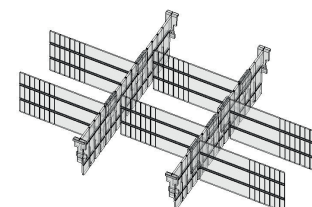

### Butées anti-chute

Désignation	Référence
<b>Paire de butées anti-chute horizontale et inclinée</b>	PDA132.W

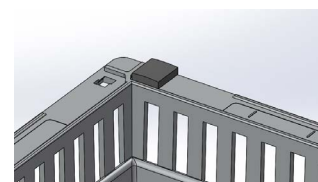

### Couvercle

Un couvercle peut être ajouté au bac à lèvres pour sécuriser le transport ou protéger les produits de la lumière. Deux scellés sont nécessaires pour sceller le couvercle. Le compartimentage d'un bac à lèvre avec couvercle est possible mais se limite à 3 peignes longs et 3 peignes courts, positionnés de manière fixe.

Désignation	Référence
<b>Couvercle pour bac à lèvres</b>	3A025
<b>100 scellés</b>	SCELLES_4



## Accessoires et équipements communs

# Bacs à lèvres pour structures 400 x 600 et 600 x 400

### Identification

#### Porte-étiquettes

	Désignation	Dimensions (en mm)	Conditionnement	Référence
3	Porte-étiquette horizontal	59 x 45	Lot de 20	8A010
4	Porte-étiquette vertical « 1/2 carte de crédit »	43 x 62	Unité	3A017
5	Porte-étiquette horizontal « 1/2 carte de crédit »	64 x 42	Unité	3A011
6	Porte-étiquette horizontal « à lèvres »	75 x 42	Unité	37487
7	Porte-étiquette horizontal « carte de crédit »	90 x 40	Unité	3A018




#### Supports étiquettes en PVC

	Désignation	Dimensions (en mm)	Conditionnement	Référence
	Support étiquette pour 3A018	85 x 54	Lot de 50	37484
	Support étiquette pour 3A011 et 3A017	60 x 40	Unité	3A012
	Support étiquette pour 37487, 3A017 et 8A010	54 x 40	10 planches de 20	8A004

#### Étiquettes

	Désignation	Dimensions (en mm)	Conditionnement	Référence
8	Étiquette blanche enlevable pour DM	52 x 38	30 planches de 20	8A005
9	Étiquette vierge enlevable pour DM	52 x 38	30 planches de 20	8A005_S
10	Étiquette rouge enlevable	52 x 38	30 planches de 20	8A006
11	Étiquette verte enlevable	52 x 38	30 planches de 20	8A007
	Étiquette orange pour plein / vide		30 planches de 20	8A005_ORANGE
	Étiquette verte pour plein / vide		30 planches de 20	8A005_VERTE

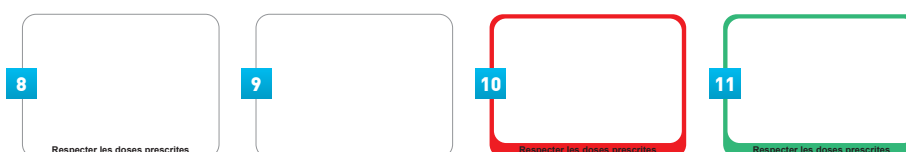

#### Plein / vide

	Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
	Porte-étiquette autocollant	L. 1000 x H. 12	7B006
	Porte-étiquette mural		89362



## Accessoires et équipements

# Tiroirs télescopiques pour chariots Neop

Photos non contractuelles

Nos tiroirs télescopiques 600 x 400 et 400 x 400 sont compatibles avec les chariots Neop. Les 3 hauteurs de tiroirs proposées permettent un aménagement personnalisé. Pour organiser vos tiroirs, vous pouvez utiliser des peignes ou des kits de compartimentage.



**Modulable**



**Ergonomique**

## Points forts

- ▶ Différentes configurations de tiroirs possibles
- ▶ Bacs à lèvres compartimentables
- ▶ Matériaux de qualité
- ▶ Résistant aux produits couramment utilisés en milieu hospitalier

## Accessoires et équipements

# Tiroirs télescopiques pour chariots Neop

### Tiroirs télescopiques

TIROIRS POUR CHARIOTS NEOP 400 x 400	Dimensions utiles (en mm)	Charge admissible	Référence
<b>Tiroir H. 80 mm</b> équipé d'un bac à lèvres plein gris H. 50	L. 340 x P. 390 x H. 66	10 kg maximum	8Y007_4000H080
<b>Tiroir H. 160 mm</b> équipé d'un bac à lèvres ajouré gris H. 100	L. 340 x P. 390 x H. 119	15 kg maximum	8Y007_4000H160
<b>Tiroir H. 240 mm</b> équipé d'un bac à lèvres ajouré gris H. 100	L. 340 x P. 390 x H. 199	30 kg maximum	8Y007_4000H240

TIROIRS POUR CHARIOTS NEOP 600 x 400	Dimensions utiles (en mm)	Charge admissible	Référence
<b>Tiroir H. 80 mm</b> équipé d'un bac à lèvres plein gris H. 50	L. 544 x P. 344 x H. 66	10 kg maximum	8Y007_6000H080
<b>Tiroir H. 160 mm</b> équipé d'un bac à lèvres ajouré gris H. 100	L. 544 x P. 344 x H. 119	15 kg maximum	8Y007_6000H160
<b>Tiroir H. 240 mm</b> équipé d'un bac à lèvres ajouré gris H. 200	L. 544 x P. 344 x H. 215	30 kg maximum	8Y007_6000H240

### Aménagement des chariots

#### Chariots Neop H. 100 600 x 400 et 400 x 400

Nombre de tiroirs par chariot	Tiroir H. 80	Tiroir H. 160	Tiroir H. 240
<b>4</b>	–	2	2
	1	–	3
<b>5</b>	–	5	–
	1	3	1
	2	1	2
<b>6</b>	2	4	–
	3	2	1
	4	–	2
<b>7</b>	4	3	–
	5	1	1
<b>8</b>	6	2	–
	7	–	1
<b>9</b>	8	1	–
<b>10</b>	10	–	–



2 tiroirs H. 80 +  
4 tiroirs H. 160



1 tiroir H. 80 +  
3 tiroirs H. 160 +  
1 tiroir H. 240



## Accessoires et équipements


## Tiroirs télescopiques pour chariots Neop

## Chariots Neop H. 120 600 x 400


Nombre de tiroirs par chariot	Tiroir H. 80	Tiroir H. 160	Tiroir H. 240
5	–	2	3
	1	–	4
6	–	5	1
	1	3	2
	2	1	3
7	1	6	–
	4	4	1
	3	2	2
	4	–	3
8	3	5	–
	4	3	1
	5	1	2
9	5	4	–
	6	2	1
	7	–	2
10	7	3	–
	8	1	1
11	9	2	–
	10	–	1

## Compartimentage des bacs à lèvres

Pour en savoir plus, consultez les fiches des bacs à lèvres.

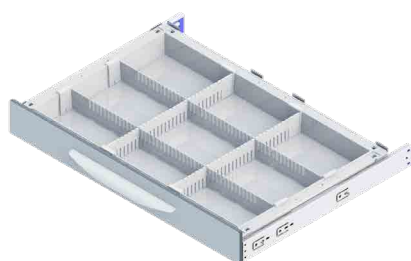

Peignes long + peignes courts

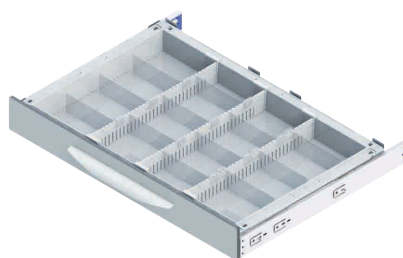

Kits de compartimentage




## Accessoires et équipements

# Piluliers et bacs Modulo® classic

Les piluliers Modulo® classic est l'élément central du circuit du médicament pour un **EHPAD ou le long séjour**. Conçu pour une **préparation hebdomadaire** des médicaments, le concept de **piluliers journaliers détachables** permet une grande modularité au niveau de la **distribution sur 7 ou 8 jours**.

Deux formats de plateaux sont disponibles. Le modèle pour **7 piluliers** permet d'optimiser la surface de stockage dans les salles de soins. Le plateau est compatible avec les chariots de distribution Pili cart®, les armoires de transfert et de stockage Modulo® classic.

Le modèle pour **10 piluliers** est au format 600 x 400. Il est compatible avec les chariots et les armoires 600 x 400 Neop®.

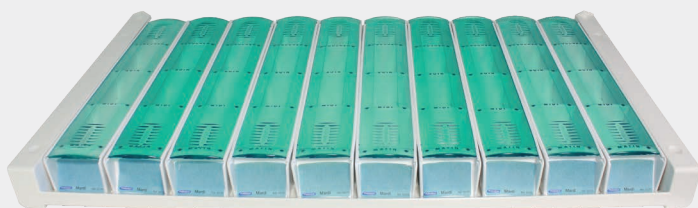

Hygène



Ergonomie

## Points forts

- ▶ Adapté aux formes sèches et buvables
- ▶ Pas de mélange entre les cases
- ▶ Nettoyable en machine (< 60° C)
- ▶ Compatible avec le logiciel de traçabilité Pili® soft

## Accessoires et équipements

# Piluliers et bacs Modulo® classic



### Caractéristiques techniques

#### Pratique et ergonomique

- ▶ Adapté à l'usage des formes sèches et buvables
- ▶ Plateaux gerbables
- ▶ Cloisonnement par curseurs amovibles, incurvés pour une meilleure préhension
- ▶ Tirette des piluliers s'ouvrant dans les deux sens

#### Sécurisant

- ▶ Piluliers journaliers détachables mais solidaires du plateau
- ▶ Plateaux équipés d'une double butée anti-chute
- ▶ Cases des piluliers exemptes de recoin
- ▶ Aucun risque de mélange entre les cases des piluliers
- ▶ Nettoyable en machine à laver jusqu'à 60° C

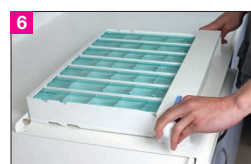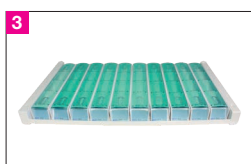

#### PILULIERS JOURNALIERS

	Dimensions (en mm)	Référence
<b>1</b> Plateau avec 7 piluliers journaliers - coloris bleu lagon	L. 410 x P. 340 x H. 55	52100
<b>2</b> Plateau avec 7 piluliers journaliers - coloris framboise	L. 410 x P. 340 x H. 55	52200
Plateau nu pour piluliers journaliers	L. 410 x P. 340 x H. 55	52110
10 calages Pili pour plateau 52110		5E006
10 calages Pili 4.21 pour plateau 52110		5I006
<b>3</b> Plateau avec 10 piluliers journaliers - coloris bleu lagon	L. 600 x P. 400 x H. 50	8AP010BL
Plateau nu pour piluliers journaliers	L. 600 x P. 400 x H. 50	8AP000
10 calages Pili pour plateau 8AP000		5E007
10 calages Pili 4.21 pour plateau 8AP000		5I007
Piluliers journaliers - coloris bleu lagon	L. 55 x P. 300 x H. 40	52140
Piluliers journaliers - coloris framboise	L. 55 x P. 300 x H. 40	52240

#### IDENTIFICATION

	Référence
Étiquettes patients colorées (lot de 504 = 18 planches de 28 étiquettes)	52170
Étiquettes patients blanches (lot de 504 = 18 planches de 28 étiquettes)	52180
Étiquettes patients vierges (lot de 504 = 18 planches de 28 étiquettes)	52160
Protections transparentes pour étiquettes (lot de 252)	52388
Scellés pour bac de transport (lot de 100)	SCELLES_4

#### ACCESSOIRES

	Dimensions (en mm)	Référence
<b>4</b> Grand bac Modulo®	L. 380 x P. 310 x H. 116	46302
Cloison profondeur pour bac 46302 (3 encoches)		46303
Cloison longueur pour bac 46302 (4 encoches)		46304
Pontet 24 trous Ø 56 mm pour bac 46302		46105
<b>5</b> Bac pour 28 gobelets 30/120 ml	L. 380 x P. 310 x H. 55	46328
<b>6</b> Poussoir pour plateaux 52100, 52200 ou 52110 (permet l'ouverture simultanée des 7 piluliers)		20000

## Accessoires et équipements

# Piluliers Modulo® XL

Le système de distribution du médicament Modulo® XL permet une **préparation nominative sur 7 jours**. Ce système se compose d'un plateau au format **600 x 400** et de 7 piluliers équipés de curseurs coulissants et amovibles.

Le système Modulo® XL est compatible avec les chariots et les armoires Neop® qui assurent la chaîne logistique de la préparation, à la pharmacie jusqu'à l'administration au patient.

Photos non contractuelles



Hygène



Ergonomie

## Points forts

- ▶ Préparation nominative sur 7 jours
- ▶ Peut contenir la totalité du traitement du patient (formes sèches, buvables, sachets...)
- ▶ Identification amovible pour le nettoyage
- ▶ Lavable en machine

## Accessoires et équipements

# Piluliers Modulo® XL



### Caractéristiques techniques

- ▶ Chaque pilulier est équipé de :
  - 4 curseurs coulissants et amovibles en ABS.
  - 1 tirette en Polypropylène bleu lagon ou framboise.
- ▶ Le corps du pilulier en POM est exempt de recoin pour un nettoyage efficace en machine à laver.
- ▶ Des systèmes d'évacuation d'eau améliorent le séchage et évitent toute stagnation d'eau.
- ▶ Le plateau en ABS maintient les piluliers solidaires.
- ▶ La double butée antichute sécurise la préhension du plateau.

	Désignation	Dimensions (en mm)	Réf. bleu lagon	Réf. framboise
1	<b>Plateau avec 7 piluliers journaliers Modulo® XL</b> Livré avec 1 planche d'étiquettes pour 4 semaines		5AP040BL	5AP040FR
2	<b>Pilulier journalier Modulo® XL</b>	L. 76 x P. 410 x H. 39	5AM040BL	5AM040FR
3	<b>Plateau Modulo® XL nu pour 7 piluliers Modulo® XL</b>	L. 600 x P. 433 x H. 50	5AP040	
	<b>Tablette 400 x 400 pour 5 piluliers Modulo® XL</b>		8Y018_F400	
4	<b>504 étiquettes pour piluliers Modulo® XL</b> (18 feuilles de 28 étiquettes)		5A001	
	<b>200 supports étiquettes en PVC</b> (10 planches de 20 supports)		8A004	
	<b>Protège étiquette</b>		8AB069_1_6	

## Accessoires et équipements

# Piluliers Modulo® XXL

Pour la préparation nominative des médicaments, PRATICIMA propose le **pilulier journalier** Modulo® XXL équipé de curseurs coulissants et amovibles. Ce pilulier de grande capacité permet de stocker l'ensemble du traitement du patient.

Le pilulier Modulo® XXL est compatible avec les chariots et les armoires Neop® qui assurent la chaîne logistique de la préparation, à la pharmacie jusqu'à l'administration au patient.

Photos non contractuelles



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Peut contenir la totalité du traitement du patient (formes sèches, buvables, sachets...)
- ▶ Sécurisation de l'administration avec l'identification des jours par couleur
- ▶ Identification amovible pour le nettoyage
- ▶ Lavable en machine

## Accessoires et équipements

# Piluliers Modulo® XXL

### Caractéristiques techniques

- ▶ Chaque pilulier est équipé de :
  - 4 curseurs coulissants amovibles en ABS marqués « MATIN, MIDI, SOIR, COUCHER »
  - 1 tirette bleu lagon en polypropylène s'ouvrant dans les 2 sens
- ▶ Corps du pilulier en polypropylène, exempt de recoin pour un nettoyage efficace en machine à laver
- ▶ Système d'évacuation d'eau pour améliorer le séchage et éviter toute stagnation
- ▶ Dimensions du pilulier : L. 76 x P. 359 x H. 61 mm



#### Désignation

#### Référence

	Désignation	Référence
1	<b>Pilulier journalier bleu lagon Modulo® XXL</b>	5AM060BL
2	<b>504 étiquettes pour piluliers Modulo® XL</b> (18 feuilles de 28 étiquettes)	5A001
3	<b>200 supports étiquettes en PVC</b> (10 planches de 20 supports)	8A004
4	<b>Protège étiquette</b>	8AB069_1_6

### Compatibilité



- ▶ Gamme Neop®, notamment avec les chariots à battant : avec l'utilisation d'un tiroir 600 x 400
- ▶ Structures Optistock® : avec l'utilisation d'une cassette de transport




## Accessoires et équipements

# Piluliers Eurojour®

Le système de distribution du médicament Eurojour® permet une **préparation nominative sur 8 jours**. Ce système se compose d'un plateau au format **600 x 400** et de 8 piluliers équipés de curseurs de couleur tampographiés pour un repérage immédiat. Les piluliers ont une forme incurvée permettant une prise des médicaments plus aisée.

Le système Eurojour® est compatible avec les chariots et les armoires Neop® qui assurent la chaîne logistique de la préparation, à la pharmacie jusqu'à l'administration au patient.

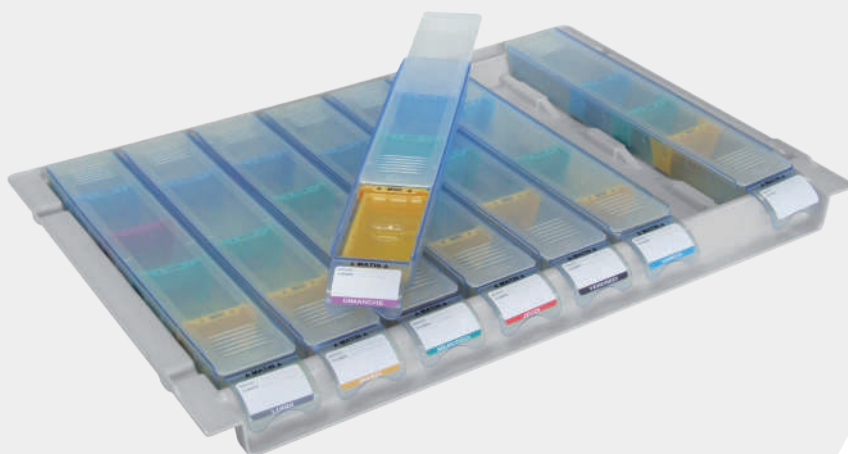

Hygène




Ergonomie

## Points forts

- ▶ Préparation nominative pour 8 jours
- ▶ Peut contenir la totalité du traitement du patient (formes sèches, buvables, sachets...)
- ▶ Lavable en machine
- ▶ Séchage sans rétention d'eau

## Accessoires et équipements

### Piluliers Eurojour®

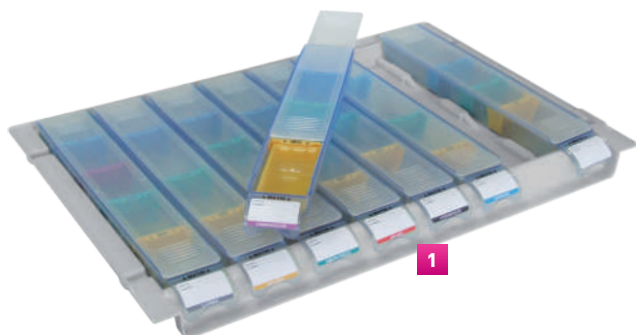

Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHAMBRE : _____						
SERVICE : _____						
NOM : _____						
PRÉNOM : _____						

4

### Caractéristiques techniques

- ▶ Plateau en ABS
- ▶ Corps du pilulier en ABS translucide exempt de recoin pour un nettoyage efficace
- ▶ Pilulier équipé d'un couvercle en Polypropylène et de 3 curseurs de couleur tampographiés (jaune/midi - vert/soir - bleu/nuit)
- ▶ Lavable en machine
- ▶ Séchage sans rétention d'eau

#### Désignation

#### Dimensions (en mm)

#### Référence

<b>1</b>	<b>Plateau avec 8 piluliers journaliers Eurojour®</b>	L. 598 x P. 395 x H. 47	CP23606.72
	<b>Lot de 10 piluliers journaliers Eurojour®</b>	L. 63 x P. 380 x H. 43	CP23002
<b>2</b>	<b>Plateau Eurojour® nu</b>	L. 598 x P. 395 x H. 47	CP23607.72
<b>3</b>	<b>Lot de 6 planches de 32 étiquettes adhésives de couleur</b>		CA29110
<b>4</b>	<b>Lot de 200 étiquettes adhésives blanches</b>		CA29109.00

## Accessoires et équipements


# Plateaux de piluliers Adhésia équipements pour structures 600 x 400

Photos non contractuelles

Spécialistes de la distribution et de la préparation des médicaments en milieu hospitalier, nous proposons une gamme complète de **distributeurs journaliers** et de **semainiers**.

**Adaptés à la polymédication**, nos distributeurs contiennent les médicaments d'un patient pour 24 heures. Ils sont étudiés pour identifier rapidement le nom du patient, les jours de la semaine et les moments de prises. Leur **grande taille** permet d'y loger des comprimés, des poudres effervescentes, des seringues...

Ce **système modulaire** s'adapte à tous les établissements et services, quelle que soit leur taille.

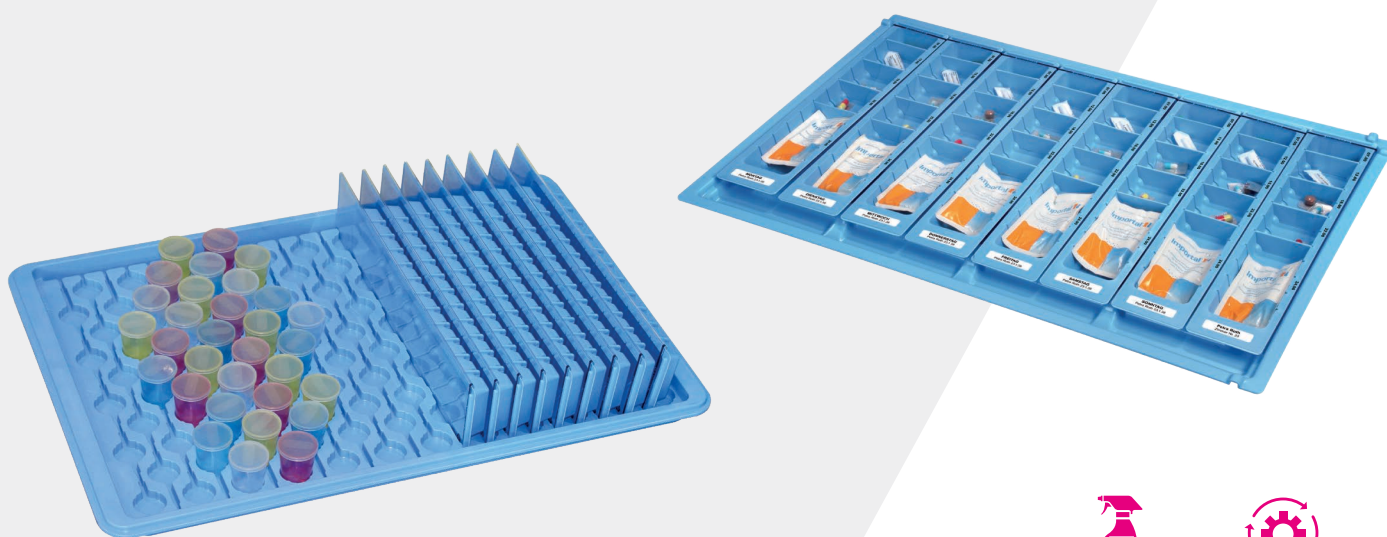

Hygienne



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Distribution journalière ou hebdomadaire
- ▶ Système pratique et fonctionnel
- ▶ Adapté aux formes sèches et buvables
- ▶ Pas de mélange entre les cases
- ▶ Plateaux et distributeurs nettoyables en machine

## Accessoires et équipements

# Plateaux de piluliers Adhésia équipements pour structures 600 x 400

### Plateaux de transport

#### Plateaux pour distributeurs

	Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
1	Plateau nu pour 7 distributeurs EDM161 ou EDM261	L. 600 x P. 400	EDM691
2	Plateau nu pour 8 distributeurs EDM271 ou EDM281	L. 600 x P. 400	EDM1091



1



2

#### Plateau pour distributeurs et gobelets

Nos plateaux en polystyrène peuvent accueillir des distributeurs, rangés horizontalement, ainsi que des gobelets (réf. NA03154). Les différents types de distributeurs peuvent être panachés sur un même plateau.

	Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
3	Plateau nu à 23 rainures et 115 alvéoles	L. 600 x P. 400 x H. 27	EDM251

#### > Capacité et encombrement du plateau

	Capacité maximum	Encombrement en hauteur
Distributeur EDM161	23	88 mm
Distributeur EDM261	11	82 mm
Distributeur EDM271	23	74 mm
Gobelet NA03154	115	50 mm



3

## Accessoires et équipements

# Plateaux de piluliers Adhésia équipements pour structures 600 x 400

### Distributeurs à séparations amovibles

Nos distributeurs journaliers, en polystyrène bleu, sont livrés avec leur couvercle coulissant en PET transparent. Ils comportent des séparations amovibles permettant de créer des compartiments de tailles différentes suivant les besoins de la médication. Ils sont livrés avec 4 séparations mais peuvent en accueillir 11 au total pour une prise de médicaments toutes les 2 heures.



	Désignation	Dimensions (en mm)	Conditionnement	Référence
4	<b>Distributeurs avec 4 séparations amovibles</b>	L. 358 x P. 76 x H. 25	Lot de 100	EDM161
5	<b>Distributeurs avec 4 séparations amovibles</b>	L. 358 x P. 76 x H. 44	Lot de 50	EDM261
6	<b>Distributeurs avec 4 séparations amovibles</b>	L. 336 x P. 66 x H. 25	Lot de 100	EDM271
	<b>Couvercles transparents pour distributeurs EDM161 et EDM261</b>		Lot de 50	EDM169

### Semainiers avec distributeurs à séparations amovibles

Le concept de nos plateaux hebdomadaires, ou semainiers, est basé sur l'utilisation de nos distributeurs journaliers.

**Nos plateaux hebdomadaires permettent également une distribution journalière.** Chaque plateau peut contenir la préparation individuelle des médicaments pour une journée, pour 7 ou 8 patients, selon le modèle choisi.

#### Semainiers à 7 distributeurs



	Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
7	<b>Semainier à 7 distributeurs comprenant :</b> - 1 plateau de rangement EDM691 - 7 distributeurs EDM161 - 1 feuille de 7 étiquettes EDM13J marquées aux jours de la semaine - 1 étiquette d'identification EDM46	L. 600 x P. 400 x H. 23	EDM692
8	<b>Semainier à 7 distributeurs comprenant :</b> - 1 plateau de rangement EDM691 - 7 distributeurs EDM261 - 1 feuille de 7 étiquettes EDM13J marquées aux jours de la semaine - 1 étiquette d'identification EDM46	L. 600 x P. 400 x H. 45	EDM2692




## Accessoires et équipements

# Rails et accessoires compatibles

Pour que nos chariots et armoires répondent parfaitement à vos attentes, nous proposons une **large gamme d'accessoires** conçus dans des matériaux nobles assurant robustesse, facilité d'entretien et une longévité optimale.

Tout a été pensé pour apporter confort de travail et disposer ingénieusement du matériel de soins. Grâce à nos accessoires interchangeables, vous rangerez chaque dispositif médical à sa place.

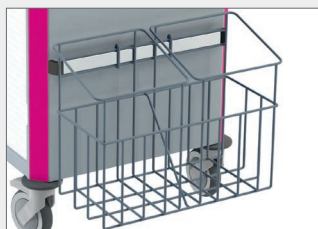

Hygiénique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Fixation des accessoires sans outil
- ▶ Modularité des équipements
- ▶ Accessoires optimisés
- ▶ Matériaux de qualité

## Accessoires et équipements

# Rails et accessoires compatibles

### Rails normalisés

Rails en aluminium vissés sur la structure du chariot, de l'armoire ou du guéridon ce qui permet une résistance à l'usure plus élevée.

#### Rails pour chariots et armoires Neop

<i>RAILS POUR CHARIOTS OU ARMOIRES NEOP 600 x 400 OU 400 x 400</i>	<i>Référence</i>
<b>Rail latéral positionné en bas à droite</b>	8Y030_0400BD
<b>Rail latéral positionné en bas à gauche</b>	8Y030_0400BG
<b>Rail latéral positionné en haut à droite</b>	8Y030_0400HD
<b>Rail latéral positionné en haut à gauche</b>	8Y030_0400HG
<i>RAILS POUR CHARIOTS OU ARMOIRES NEOP 400 x 600</i>	<i>Référence</i>
<b>Rail latéral positionné en bas à droite</b>	8Y030_0600BD
<b>Rail latéral positionné en bas à gauche</b>	8Y030_0600BG
<b>Rail latéral positionné en haut à droite</b>	8Y030_0600HD
<b>Rail latéral positionné en haut à gauche</b>	8Y030_0600HG




#### Rails pour guéridons Agily

<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>
<b>Rail latéral pour guéridons Agily</b>	87126
<b>Rail arrière pour guéridons Agily 600 x 400</b>	87127
<b>Rail arrière pour guéridons Agily 400 x 400</b>	87306

### Accessoires pour rails normalisés

#### Paniers et casiers de rangement

	<i>Désignation</i>	<i>Dimensions hors tout (en mm)</i>	<i>Référence</i>
	<b>Panier fil petit modèle</b>	L. 355 x P. 218 x H. 238	28062N.GR
1	<b>Panier fil grand modèle</b>	L. 405 x P. 218 x H. 238	28061N.GR
2	<b>Casier de rangement</b>	L. 455 x P. 135 x H. 110	28063N.GR
3	<b>Trieur dossiers 3 cases</b>	L. 257 x P. 130 x H. 445	28011N

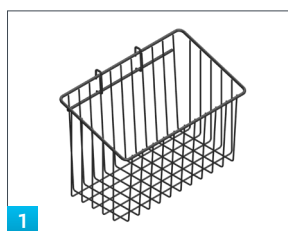




## Accessoires et équipements

## Rails et accessoires compatibles

## Supports pour sac poubelle et récupérateur d'aiguilles

	Désignation	Dimensions hors tout (en mm)	Référence
4	Support simple pour sac poubelle	L. 173 x P. 265 x H. 302	28080.GR
5	Support double pour sac poubelle de 12 L	L. 491 x P. 212 x H. 369	28072N.GR
6	Poubelle pour sac de 25 L avec couvercle et pédale	L. 235 x P. 190 x H. 400	28074N
7	Support universel pour récupérateur d'aiguilles et SHA	L. 128 x P. 93 x H. 199	28039

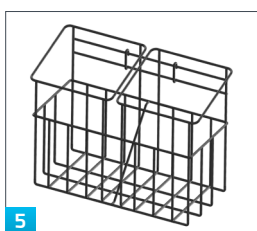


## Tablettes d'extension rabattables

Désignation	Référence
Tablette d'extension pour guéridons Agily avec tablette supérieure en thermoplastique	87301
Tablette d'extension pour chariots Pili cart, Hebdo et Pil 7	8B011



## Autres accessoires

	Désignation	Dimensions hors tout (en mm)	Référence
8	Support normalisé pour boîte à gants	L. 135 x P. 80 x H. 300	28001N.GR
9	Porte-obus normalisé avec sangle de maintien	Diamètre maximum : 140	28400N.GR
	Bloc 3 prises (3 m de câble)	L. 300 x P. 67 x H. 90	28403
10	Carquois à sondes	L. 190 x P. 155 x H. 505	28042N
	Support amovible pour rouleau		28059N.GR
11	Range câble de roue motorisée		8E030
12	Support SHA et savon 1 L airless		28431

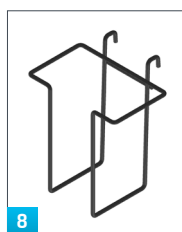



## Accessoires et équipements

# Portiques et accessoires compatibles

Photos non contractuelles

Pour répondre parfaitement à vos attentes, nos chariots peuvent être équipés d'un **portique supérieur doté d'un ou de plusieurs rails** normalisés.

Nous proposons une large gamme d'accessoires compatibles conçus dans des matériaux nobles assurant robustesse, facilité d'entretien et une longévité optimale.

Tout a été pensé pour apporter confort de travail et disposer ingénieusement du matériel de soins. Grâce à nos accessoires interchangeables, vous rangerez chaque dispositif médical à sa place.



Hygiénique



Ergonomique

### Points forts

- ▶ Fixation des accessoires sans outil
- ▶ Modularité des équipements
- ▶ Accessoires optimisés
- ▶ Matériaux de qualité

## Accessoires et équipements

# Portiques et accessoires compatibles

### Portiques

#### Portiques pour chariots et plans de travail mobiles Neop

Pour constituer un portique, sélectionner la référence des montants + le nombre de rails normalisés.

MONTANTS	Référence
<b>Montants pour portique simple colonne</b> compatibles avec les chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en thermoplastique	8Y010TH1
<b>Montants pour portique simple ou double colonne</b> compatibles avec les chariots et plans de travail mobiles Neop équipés d'une tablette supérieure en stratifié compact	8Y010CP1
<b>Montants pour portique triple colonne</b> compatibles avec les plans de travail mobiles Neop équipés d'une tablette supérieure en stratifié compact	8Y010CP2

RAILS NORMALISÉS	Dimensions hors tout (en mm)	Référence
<b>Rail 1 colonne L. 400</b>	L. 400 x P. 10 x H. 30	8Y010_44L1
<b>Rail 2 colonnes L. 400</b>	L. 800 x P. 10 x H. 30	8Y010_44L2
<b>Rail 1 colonne L. 600</b>	L. 600 x P. 10 x H. 30	8Y010_64L1
<b>Rail 2 colonnes L. 600</b>	L. 1200 x P. 10 x H. 30	8Y010_64L2
<b>Rail 3 colonnes L. 600</b>	L. 1800 x P. 10 x H. 30	8Y010_64L3

#### Portiques pour chariots Pili cart simple colonne, Hebdo et Pil 7

Désignation	Référence
<b>Portique 2 rails normalisés</b>	8B013

#### Portiques pour guéridons Agily

Désignation	Référence
<b>Portique 2 rails normalisés pour guéridon Agily 600 x 400</b>	87143
<b>Portique 2 rails normalisés pour guéridon Agily 400 x 400</b>	87302

### Accessoires pour portiques

#### Bacs basculants pour chariots F. 600

Désignation	Dimensions hors tout (en mm)	Référence
<b>4 bacs basculants avec support normalisé</b>	L. 601 x P. 171 x H. 209	28004N
<b>5 bacs basculants avec support normalisé</b>	L. 601 x P. 133 x H. 166	28005N
<b>6 bacs basculants avec support normalisé</b>	L. 601 x P. 93 x H. 114	28006N



## Accessoires et équipements

## Portiques et accessoires compatibles



## Bacs à bec

Désignation	Dimensions hors tout (en mm)	Référence
<b>2 bacs à bec de 4 L avec support normalisé</b>	Dim. du bac : L. 154 x P. 240 x H. 125	28002N
<b>3 bacs à bec de 1 L avec support normalisé</b>	Dim. du bac : L. 105 x P. 165 x H. 85	28003N



## Autres accessoires

Désignation	Dimensions hors tout (en mm)	Référence
<b>2 4 crochets pour solutés</b>	L. 193	28007N
<b>3 Support SHA et savon 1 L airless</b>		28431
<b>4 Casier de rangement</b>	L. 455 x P. 135 x H. 110	28063N.GR
<b>5 Support normalisé pour boîte à gants</b>	L. 135 x P. 80 x H. 300	28001N.GR
<b>6 Tablette pour portique</b> (uniquement compatible avec les chariots Neop F. 600)		8Y01
<b>7 Support écran Vesa 75/100</b> (à fixer sur 2 rails horizontaux)		8E108

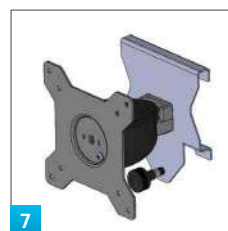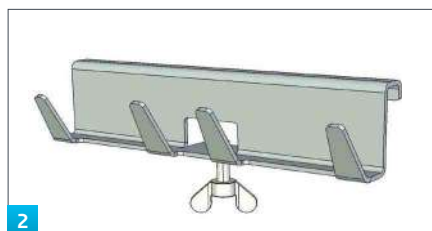




## Accessoires et équipements

# Supports informatiques

L'**informatisation** du circuit du médicament et le dossier patient informatisé (DPI) sont des enjeux majeurs pour les établissements.

Dans ce cadre, PRATICIMA vous propose toute une gamme de supports informatiques compatibles avec l'ensemble de nos chariots et guéridons.

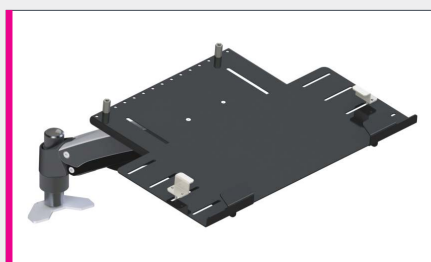

Ergonomique



Hygène

## Points forts

- ▶ Supports informatiques pour tablette tactile, ordinateur portable et écran
- ▶ Ordinateur et tablette sécurisés tout en restant accessible
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

## Accessoires et équipements

# Supports informatiques

### Supports pour écran

Désignation	Référence
<b>Support pour écran Vesa sur bras gaz</b> compatible avec les chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en thermoplastique	8Y009TH5
<b>Support pour écran Vesa sur bras gaz</b> compatible avec les chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en stratifié compact	8Y009CP5
<b>Fixation Vesa latérale pour écran</b> compatible avec les guéridons Agily, les chariots de visite, de change, les chariots Pili cart, Hebdo et Pil 7	2F106



### Supports en compact pour ordinateur portable

#### Supports en compact avec capot de protection

- ▶ Capot thermoformé avec serrure à clé
- ▶ Charnière permettant de maintenir le capot en position ouverte
- ▶ Tablette en stratifié compact blanc L. 520 x P. 455 mm
- ▶ 4 butées anti-chute, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, ajustables selon la profondeur de l'ordinateur
- ▶ 2 brides de fixation ajustables selon la largeur de l'ordinateur
- ▶ Tablette avec 2 trous oblongs permettant le passage des câbles de l'ordinateur
- ▶ Dimensions maxi de l'ordinateur : L. 400 x P. 305 mm



Désignation	Référence
<b>Support pour ordinateur portable en compact avec capot sur bras gaz</b> compatible avec les chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en thermoplastique	8Y009TH2
<b>Support pour ordinateur portable en compact avec capot sur bras gaz</b> compatible avec les chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en stratifié compact	8Y009CP2
<b>Support pour ordinateur portable en compact avec capot</b> compatible avec les guéridons Agily, les chariots de visite, de change, les chariots Pili cart, Hebdo et Pil 7	2F105

#### Supports en compact sans capot de protection

- ▶ Tablette en stratifié compact blanc L. 520 x P. 455 mm
- ▶ 4 butées anti-chute, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, ajustables selon la profondeur de l'ordinateur
- ▶ 2 brides de fixation ajustables selon la largeur de l'ordinateur
- ▶ Tablette avec 2 trous oblongs permettant le passage des câbles de l'ordinateur
- ▶ Dimensions maxi de l'ordinateur : L. 400 x P. 305 mm



Désignation	Référence
<b>Support pour ordinateur portable en compact sans capot sur bras gaz</b> compatible avec les chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en thermoplastique	8Y009TH1
<b>Support pour ordinateur portable en compact sans capot sur bras gaz</b> compatible avec les chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en stratifié compact	8Y009CP1
<b>Support pour ordinateur portable en compact sans capot</b> compatible avec les guéridons Agily, les chariots de visite, de change, les chariots Pili cart, Hebdo et Pil 7	2F101




## Accessoires et équipements

# Supports informatiques

### Supports en tôle pour ordinateur portable

- ▶ Tablette en tôle L. 450 x P. 327-447 mm
- ▶ 2 plis de sécurité à l'avant
- ▶ 2 butées anti-chute à l'arrière
- ▶ 2 brides de fixation ajustables selon la largeur de l'ordinateur
- ▶ Dimensions maxi de l'ordinateur : L. 395 x P. 315 mm

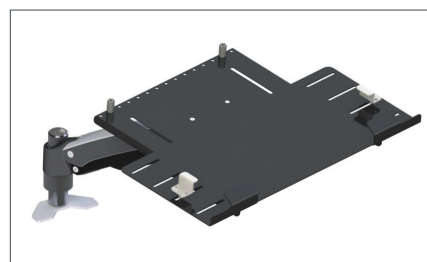

Désignation	Référence
<b>Support pour ordinateur portable en tôle</b> compatible avec les chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en thermoplastique	8Y009TH4
<b>Support pour ordinateur portable en tôle</b> compatible avec les chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en stratifié compact	8Y009CP4
<b>Support pour ordinateur portable en tôle</b> compatible avec les guéridons Agily, les chariots de visite, de change, les chariots Pili cart, Hebdo et Pil 7	2F100

### Supports pour tablette tactile

- ▶ Compatible avec tablette tactile de 9 à 11 pouces
- ▶ Diagonale de la tablette : 270 à 344 mm
- ▶ Épaisseur de la tablette : 7 à 25 mm
- ▶ Poids maximum supporté : 2,5 kg
- ▶ Visualisation multi angles (tourne, s'incline, pivote)
- ▶ Sécurisation à clé



Désignation	Référence
<b>Support tablette tactile sur bras gaz</b> compatible avec les chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en thermoplastique	8Y009TH3
<b>Support tablette tactile sur bras gaz</b> compatible avec les chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en stratifié compact	8Y009CP3
<b>Support tablette tactile sur bras gaz</b> compatible avec les guéridons Agily, les chariots de visite, de change, les chariots Pili cart, Hebdo et Pil 7	2F103

### Accessoires complémentaires

Désignation	Référence
<b>Rallonge pour bras informatique</b>	QUI2F110
<b>Support souris en compact pour support ordinateur portable en compact</b>	28502
<b>Support pour unité client léger</b>	8E231
<b>Guide câble</b>	8E105
<b>Lot de 10 attaches câble</b>	8E109
<b>Passerelle câble Ø 25 en caoutchouc pour perçage Ø 31 mm</b>	QUI8Y003



## Accessoires et équipements

### Accessoires périphériques complémentaires

Pour que nos chariots et armoires répondent parfaitement à vos attentes, nous proposons une **large gamme d'accessoires** conçus dans des matériaux nobles assurant robustesse, facilité d'entretien et une longévité optimale.

Tout a été pensé pour apporter confort de travail et disposer ingénieusement du matériel de soins. Grâce à nos accessoires interchangeables, vous rangerez chaque dispositif médical à sa place.



Hygiénique



Ergonomique

### Points forts

- ▶ Matériaux de qualité
- ▶ Accessoires optimisés
- ▶ Résistant aux produits couramment utilisés en milieu hospitalier

## Accessoires et équipements

# Accessoires périphériques complémentaires

### Poignées de manutention

	Désignation	Référence
1	Poignée ergonomique pour chariots ou armoires Neop	8Y005
2	Poignée droite pour chariots ou armoires Neop *	8F002
	Poignée droite pour guéridons Agily avec tablette supérieure en thermoplastique	87125
	Poignée verticale pour armoire de stockage Neop 400 x 600*	8A131

\*incompatible avec les armoires Neop 400 x 600 et avec les armoires de transfert



### Tiges porte-sérum

	Désignation	Référence
	Tige porte sérum 2 crochets pour chariots Neop	8Y009
	Tige porte sérum + bride de fixation pour guéridons Agily	28422



### Kits cale flacons

	Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
3	Kit cale flacons 5 cases - petit modèle	L. 420 x P. 93 x H. 50	28038
	Kit cale flacons 5 cases - grand modèle	L. 510 x P. 120 x H. 50	28048



### Autres accessoires

	Désignation	Référence
4	Tablette d'extension rabattable pour chariots Neop équipés d'une tablette supérieure en thermoplastique	8Y008_0400
	Planche à massages cardiaques	ACC28402
	Support planche à massages cardiaques pour chariots Neop	8Y008
	Support monitoring pour chariots Neop	8Y010
5	Pupitre A3 (incompatible avec les chariots Neop)	28045




## Accessoires et équipements

# Liens de sécurité numérotés

Nos scellés numérotés sont utilisés pour sécuriser les chariots d'urgences, les chariots contenant des médicaments ou pour le contrôle des bacs de transport.

La conception du scellé permet un serrage au plus près du produit. Une fois le lien serré il n'y a plus d'espace pour une quelconque manipulation.

Ces liens à usage unique permettent une fermeture rapide et sans outil. Ils ont l'avantage d'avoir un diamètre adapté à de petits orifices.

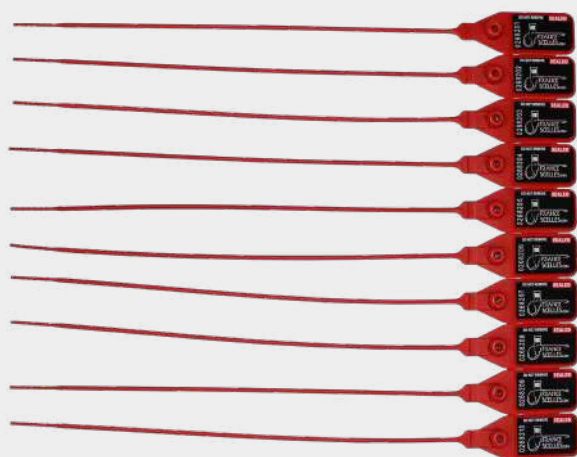

- ▶ Scellé réglable à tige lisse avec insert métallique anti retour
- ▶ Matière : Polyéthylène Haute Densité
- ▶ Couleur : rouge
- ▶ Résistance à la traction : 10 kg
- ▶ Longueur totale : 285 mm
- ▶ Longueur de la tige : 222 mm
- ▶ Diamètre de la tige : 2,3 mm
- ▶ Dimensions de l'étiquette : 18 x 31 mm
- ▶ Numérotation consécutive
- ▶ Conditionnement : lot de 100 (10 plaques de 10 scellés)

**Réf. SCELLES\_4**



## Accessoires et équipements

# Accessoires pour guéridons Résine®

Pour que nos guéridons de soins répondent parfaitement à vos attentes, nous proposons une **large gamme d'accessoires** conçus dans des matériaux nobles assurant robustesse, facilité d'entretien et une longévité optimale.

Tout a été pensé pour apporter confort de travail et disposer ingénieusement du matériel de soins. Grâce à nos accessoires interchangeables, vous rangerez chaque dispositif médical à sa place.



Hygiénique



Ergonomique

## Points forts



- ▶ Accessoires optimisés
- ▶ Modularité des équipements
- ▶ Matériaux de qualité
- ▶ Ergonomique et pratique

## Accessoires et équipements

# Accessoires pour guéridons Résine®

### Accessoires avec accroche sur étaux

Tous ces équipements sont livrés avec le nombre d'étaux nécessaire à leur fixation sur les montants du guéridon.

Désignation	Photo	Référence	Désignation	Photo	Référence
<b>Support universel pour boîte à aiguilles</b>		FN01024	<b>Étau pour tige porte-sérum</b>		FN03825
<b>Tige porte-sérum 2 crochets</b>		FN01038	<b>Support pour bouteille à oxygène</b>		FN01036

### Accessoires complémentaires

Désignation	Photo	Référence	Désignation	Photo	Référence
<b>Tablette rabattable en aluminium</b>		FN02038	<b>Jeu de 4 butées annulaires grises</b>		FA23401
<b>Arceau de sécurité magnétique pour ordinateur portable</b>		DP20010	<b>Rail normalisé pour accessoires standards</b>		9C002
<b>Kit galerie 3 côtés pour guéridon 600 x 400</b>		FA01047	<b>Kit galerie 3 côtés pour guéridon 400 x 400</b>		FA01046

### Aménagements de tiroirs

Désignation	Photo	Référence	Désignation	Photo	Référence
<b>Lot de séparateurs pour tiroir 600 x 400 (16 compartiments)</b>		SEPT20H	<b>Lot de séparateurs pour tiroir 400 x 400</b>		FN03829



## Semainiers Adhésia équipements

# Plateaux de piluliers 205 x 400

Nos plateaux de piluliers 205 x 400 permettent une **distribution hebdomadaire ou journalière**. Chaque plateau peut contenir la préparation individuelle des médicaments pour une journée, pour 7 ou 8 patients, selon le modèle choisi.

Étudiés pour identifier rapidement le nom du patient, les jours de la semaine et les moments de prises, les distributeurs peuvent contenir des comprimés, des poudres effervescentes, des seringues...



Hygène



Ergonomie

### Points forts

- ▶ Distribution journalière ou hebdomadaire
- ▶ Système pratique et fonctionnel
- ▶ Adapté aux formes sèches et buvables
- ▶ Pas de mélange entre les cases
- ▶ Plateaux et distributeurs nettoyables en machine

## Semainiers Adhésia équipements

## Plateaux de piluliers 205 x 400

## Semainier à 7 distributeurs

## Le semainier complet comprend :

- ▶ 1 plateau de rangement en polystyrène (L. 204 x P. 407 x H. 26 mm)
- ▶ 7 distributeurs en polystyrène, marqués aux jours de la semaine (L. 168 x P. 50 x H. 18 mm)
- ▶ 7 couvercles coulissants en PET transparent
- ▶ 1 étiquette adhésive pour l'identification du patient et des heures de prises

Désignation	Référence
Semainier complet à 7 distributeurs	EDM292
Plateau de rangement vide	EDM291
7 distributeurs avec couvercles	EDM01J
100 couvercles	EDM09
Liaisse de 220 étiquettes adhésives	EDM46



## Semainier à 8 distributeurs

## Le semainier complet comprend :

- ▶ 1 plateau de rangement en polystyrène (L. 204 x P. 400 x H. 45 mm)
- ▶ 8 distributeurs en polystyrène, à 3 séparations amovibles (L. 188 x P. 42 x H. 37 mm)
- ▶ 8 couvercles coulissants en PET transparent
- ▶ 1 jeu d'étiquettes matin, midi, soir et réserve
- ▶ 1 jeu d'étiquettes pour indication des heures de prises
- ▶ 1 jeu d'étiquettes marquées aux jours de la semaine
- ▶ 1 jeu d'étiquettes pour identification du patient

Désignation	Référence
Semainier complet à 8 distributeurs	EDM1192
Plateau de rangement vide	EDM1191
280 distributeurs avec 3 séparations amovibles et couvercle	EDM131
280 couvercles	EDM139
Liaisse de 220 étiquettes adhésives	EDM46



## Semainiers Adhésia équipements

# Plateaux de piluliers 450 x 400

Spécialistes de la distribution et de la préparation des médicaments en milieu hospitalier, nous proposons une gamme complète de **distributeurs individuels** et de plateaux de transport.

Chaque distributeur contient les médicaments d'un patient pour **24 heures** et peut être muni d'étiquettes pour l'identification du malade et la prescription médicale. Un couvercle transparent à glissière ferme efficacement chaque case.

Ce **système modulaire** s'adapte à tous les établissements et services, quelle que soit leur taille.



Hygienne



Ergonomie


### Points forts

- ▶ Distribution journalière
- ▶ Système pratique et fonctionnel
- ▶ Adapté aux formes sèches et buvables
- ▶ Pas de mélange entre les cases
- ▶ Plateaux et distributeurs nettoyables en machine

Semainiers Adhésia équipements

# Plateaux de piluliers 450 x 400

## Plateaux de transport

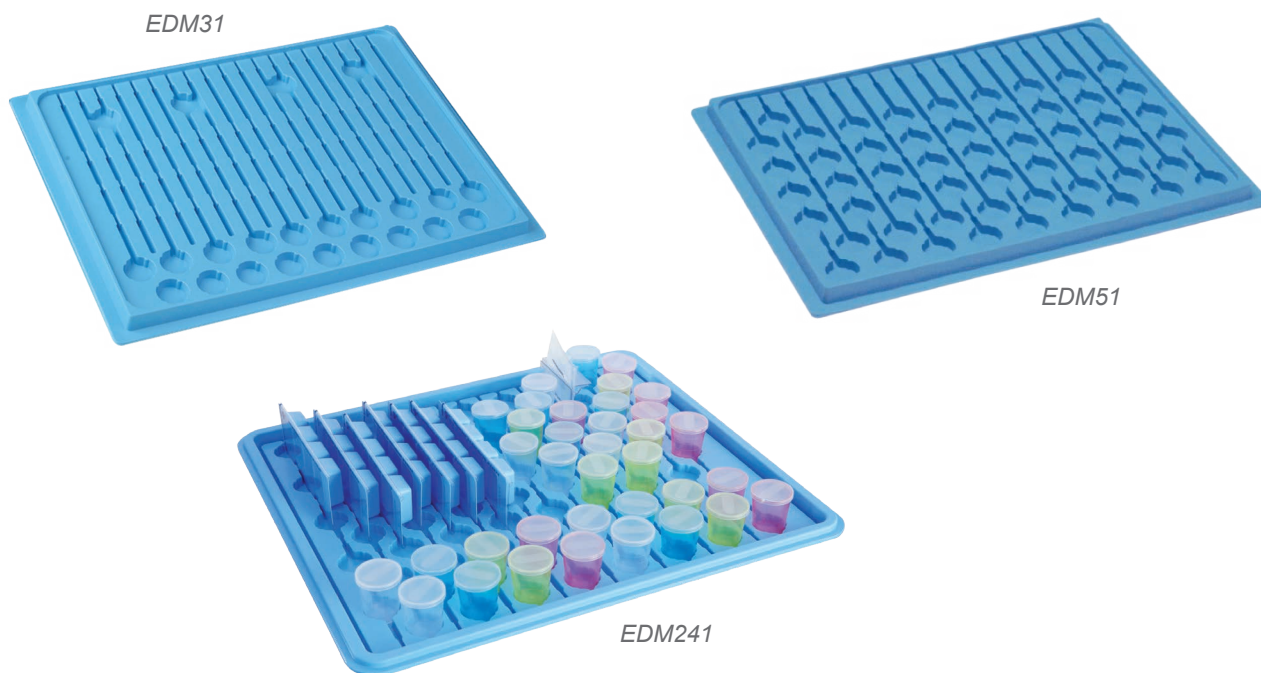

Nos plateaux en polystyrène peuvent accueillir des distributeurs, rangés horizontalement, ainsi que des gobelets (réf. NA03154). Les différents types de distributeurs peuvent être panachés sur un même plateau.

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Plateau nu à 19 rainures et 19 alvéoles</b>	L. 450 x P. 340 x H. 19	EDM31
<b>Plateau nu à 17 rainures et 54 alvéoles</b>	L. 450 x P. 340 x H. 19	EDM51
<b>Plateau nu à 16 rainures et 80 alvéoles</b>	L. 450 x P. 405 x H. 23	EDM241

## Capacité maximum et encombrement sur nos plateaux

	NOMBRE DE DISTRIBUTEURS				NOMBRE DE GOBELETS		
	EDM01 ou EDM11	EDM41 ou EDM61	EDM171	EDM181	seuls	avec distributeurs EDM01 ou EDM11 ou EDM41 ou EDM61	avec distributeurs EDM171 ou EDM181
<b>Plateau EDM31</b>	19	19	10	10	19	19	9
<b>Plateau EDM51</b>	17	17	17	9	54	17	9
<b>Plateau EDM241</b>	16	16	16	8	80	24	16
<b>Encombrement en hauteur</b>	60 mm	95 mm	110 mm	110 mm	50 mm	Selon le distributeur	110 mm

Semainiers Adhésia équipements

# Plateaux de piluliers 450 x 400

## Distributeurs journaliers

Tous nos distributeurs, en polystyrène bleu, sont livrés avec leurs couvercles coulissants en PET transparent (étiquettes en option).

### Distributeurs à 4 compartiments



<i>DISTRIBUTEURS</i>	<i>Dimensions du distributeur (en mm)</i>	<i>Dimensions d'un compartiment (en mm)</i>	<i>Conditionnement</i>	<i>Référence</i>
<b>Distributeurs marqués aux jours de la semaine</b>	L. 168 x P. 50 x H. 18	L. 40 x P. 30 x H. 17	Le jeu de 7	EDM01J
<b>Distributeurs avec compartiments répertoriés 1 - 2 - 3 - 4 sur le couvercle sans support d'étiquette</b>	L. 168 x P. 50 x H. 18	L. 40 x P. 30 x H. 17	100 unités	EDM01
<b>Distributeurs avec compartiments répertoriés 1 - 2 - 3 - 4 sur le couvercle avec support d'étiquette</b>	L. 225 x P. 50 x H. 18	L. 40 x P. 30 x H. 17	100 unités	EDM11
<b>Distributeurs avec 4 grands compartiments</b>	L. 225 x P. 82 x H. 18	L. 50 x P. 60 x H. 17	250 unités	EDM41

<i>ÉTIQUETTES</i>	<i>Conditionnement</i>	<i>Référence</i>
<b>1</b> Étiquettes adhésives (6 médications) pour EDM11	350 unités	EDM13
<b>2</b> Étiquettes adhésives (identification patient et heures de prises) pour EDM41	220 unités	EDM46

<i>COUVERCLES</i>	<i>Conditionnement</i>	<i>Référence</i>
<b>Couvercles pour distributeurs EDM11</b>	250 unités	EDM19
<b>Couvercles pour distributeurs EDM41</b>	250 unités	EDM49

Semainiers Adhésia équipements

# Plateaux de piluliers 450 x 400

## Distributeurs à un volume

Ce type de distributeur est idéal pour ranger des seringues, des ampoules...



EDM61



EDM67\_V02




EDM66

Désignation	Dimensions (en mm)	Conditionnement	Référence
<b>Distributeurs à un volume</b>	L. 225 x P. 82 x H. 18	250 unités	EDM61
<b>Godets de 4 coloris différents</b> (jaune, bleu, rouge et incolore)	L. 60 x P. 50 x H. 17	100 unités	EDM66
<b>Blisters souples et transparents à 4 compartiments</b>	L. 60 x P. 50 x H. 17	500 unités	EDM67_V02
<b>Étiquettes non-adhésives pour 10 médicaments</b> (à placer dans le fond du distributeur)		350 unités	EDM64

## Distributeurs à séparations amovibles

Ces distributeurs à séparations amovibles permettent de créer des compartiments de tailles différentes suivant les besoins de la médication. Ils sont livrés avec 3 séparations amovibles mais peuvent en accueillir 7 au total.

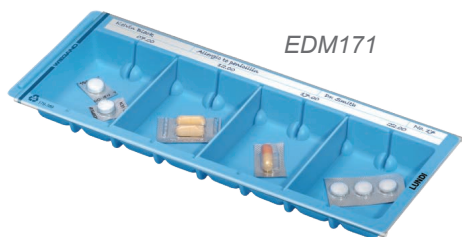

EDM171




EDM181

DISTRIBUTEURS	Dimensions (en mm)	Conditionnement	Référence
<b>Distributeurs avec 3 séparations amovibles</b>	L. 260 x P. 100 x H. 25	100 unités	EDM171
<b>Distributeurs avec 3 séparations amovibles</b>	L. 260 x P. 100 x H. 38	100 unités	EDM181
COUVERCLES		Conditionnement	Référence
<b>Couvercles pour EDM171 et EDM181</b>		100 unités	EDM179

## Étiquettes et porte-étiquettes

Les options suivantes sont compatibles avec les distributeurs EDM41, EDM61, EDM171 et EDM181.

Désignation	Conditionnement	Référence
<b>Porte-étiquette adhésif à coller sur le couvercle</b>	100 unités	EDM142
<b>Étiquettes à glisser dans EDM132 et EDM142</b>	1500 unités	EDM47

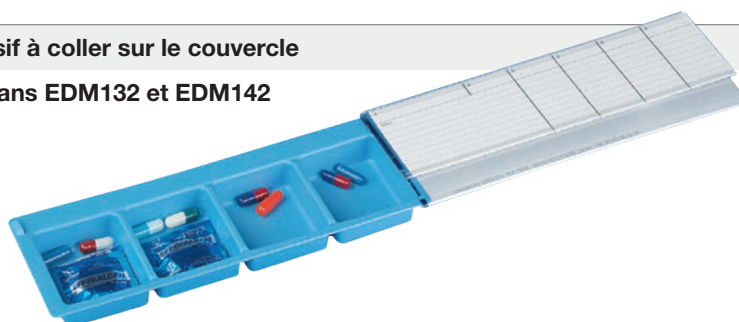

## Semainiers Adhésia équipements

# Bacs et étuis de rangement

Nos bacs et étuis de rangement sont idéals pour les **seniors indépendants** ou les **services d'aide et de soins à domicile**.

Nos semainiers, disponibles en deux tailles, permettent de stocker sept distributeurs marqués aux jours de la semaine.



Hygène



Ergonomie

### Points forts

- ▶ Distribution hebdomadaire
- ▶ Système pratique et fonctionnel
- ▶ Pas de mélange entre les cases
- ▶ Facilement nettoyable

## Semainiers Adhésia équipements

## Bacs et étuis de rangement

## Semainiers



## BACS DE RANGEMENT

## Dimensions (en mm)

## Référence

**Semainier complet comprenant :**

- 1 bac de rangement rigide EDM91 avec couvercle coulissant
- 7 distributeurs journaliers EDM11
- 1 étiquette adhésive EDM46 pour le bac
- 1 feuille d'étiquettes EDM13J marquées aux jours de la semaine

L. 247 x P. 173 x H. 55

EDM92

**Semainier complet comprenant :**

- 1 bac de rangement EDM191
- 7 distributeurs journaliers EDM41J marqués aux jours de la semaine
- 8 étiquettes adhésives EDM46

L. 260 x P. 180 x H. 88

EDM192

## ÉTUIS DE RANGEMENT

## Dimensions (en mm)

## Référence

**Semainier complet comprenant :**

- 1 étui de rangement rigide transparent EDM93
- 7 distributeurs EDM01J marqués aux jours de la semaine
- 1 étiquette adhésive EDM95 pour l'étui

L. 175 x P. 145 x H. 58

EDM94


**Semainier complet comprenant :**

- 1 étui de rangement rigide transparent EDM193
- 7 distributeurs EDM41J marqués aux jours de la semaine
- 7 étiquettes adhésives EDM46 pour les distributeurs
- 1 étiquette adhésive EDM95 pour l'étui

L. 230 x P. 140 x H. 90

EDM194

## Boîtes de rangement

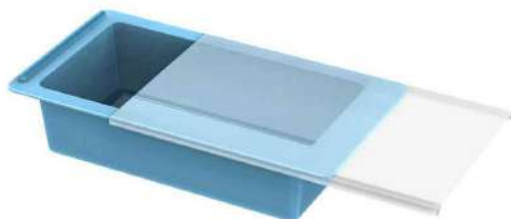

## Désignation

## Dimensions (en mm)

## Référence

**120 boîtes de rangement avec couvercle**

L. 130 x P. 72 x H. 30

EDM111\_V02

**400 boîtes de rangement avec couvercle**

L. 130 x P. 72 x H. 30

EDM111\_V02\_Q2



Accessoires et équipements

# Distribution des liquides

Nos gobelets offrent une **graduation exacte** pour le dosage prescrit des médicaments liquides, ce qui est vital surtout chez les enfants en bas âge et les nourrissons.

Ils sont utilisés, non seulement pour mesurer les médicaments liquides, mais également pour la remise de poudres et de comprimés emballés sous blister. Ils peuvent être placés sur des **plateaux de distribution**.



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Gobelets gradués
- ▶ 3 contenances possibles
- ▶ Livrés avec couvercle
- ▶ Plateaux de transport disponibles

## Accessoires et équipements


# Distribution des liquides

### Gobelets de 30 ml

- ▶ Gobelets gradués de 30 ml
- ▶ Diamètre du gobelet à sa base : 27 mm
- ▶ Diamètre du couvercle : 40 mm
- ▶ Hauteur du gobelet avec couvercle : 42 mm
- ▶ Couvercle à clipser



GOBELETS	Coloris transparent	Coloris jaune	Coloris rouge	Coloris bleu	Coloris panaché
<b>90 gobelets de 30 ml avec couvercle</b>	NA03154.IN	NA03154.JA	NA03154.RO	NA03154.BL	-
<b>9000 gobelets de 30 ml avec couvercle</b>	NA03154.IN_Q2	NA03154.JA_Q2	NA03154.RO_Q2	NA03154.BL_Q2	-
<b>360 gobelets de 30 ml avec couvercle</b>	-	-	-	-	NZ03115

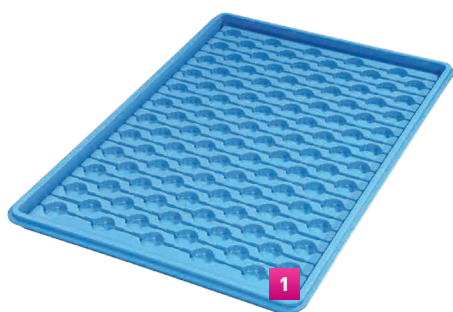

PLATEAUX COMPATIBLES EN POLYSTYRÈNE	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Plateau nu à 19 rainures et 19 alvéoles</b>	L. 450 x P. 340 x H. 19	EDM31
<b>Plateau nu à 17 rainures et 54 alvéoles</b>	L. 450 x P. 340 x H. 19	EDM51
<b>Plateau nu à 16 rainures et 80 alvéoles</b>	L. 450 x P. 405 x H. 23	EDM241
<b>1 Plateau nu à 23 rainures et 115 alvéoles</b>	L. 600 x P. 400 x H. 27	EDM251
<b>2 10 plateaux nus à 30 alvéoles</b>	L. 270 x P. 200 x H. 45	NA03013

### Gobelets de 30 ml et 120 ml compatibles avec les plateaux Modulo

#### Gobelets de 30 ml

- ▶ Gobelets gradués de 30 ml
- ▶ Diamètre du gobelet à sa base : 38 mm
- ▶ Diamètre du couvercle : 45 mm
- ▶ Hauteur du gobelet avec couvercle : 32 mm
- ▶ Couvercle à clipser



Désignation	Coloris transparent	Coloris jaune	Coloris rouge	Coloris bleu
<b>50 gobelets de 30 ml avec couvercle</b>	60380	60382	60384	60386
<b>2000 gobelets de 30 ml avec couvercle</b>	60380_Q2	60382_Q2	60384_Q2	60386_Q2

## Accessoires et équipements

# Distribution des liquides

### Gobelets de 120 ml

- ▶ Diamètre du gobelet à sa base : 40 mm
- ▶ Diamètre du couvercle : 45 mm
- ▶ Hauteur du gobelet avec couvercle : 82 mm
- ▶ Couvercle à clipser



Désignation	Référence
<b>50 gobelets de 120 ml avec couvercle - Coloris transparent</b>	60310

### Équipements complémentaires

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Rouleau de 100 étiquettes pour gobelets 30 / 120 ml</b>		60288
<b>Bac Modulo blanc pour 28 gobelets 30 / 120 ml</b>	L. 380 x P. 310 x H. 55	46328
<b>3 Tiroir pour 60 gobelets 30 / 120 ml</b>	L. 600 x P. 400 x H. 75	8AT060



### Gobelets de 130 ml

- ▶ Gobelets incolores gradués de 130 ml
- ▶ Diamètre du gobelet à sa base : 47 mm
- ▶ Diamètre du couvercle : 63 mm
- ▶ Hauteur du gobelet avec couvercle : 70 mm
- ▶ Couvercle en polypropylène vert à visser
- ▶ Fermeture étanche



GOBELETS	Référence
<b>100 gobelets de 130 ml avec couvercle</b>	GCV140B_2
<b>500 gobelets de 130 ml avec couvercle</b>	GCV140B_2_Q2

PLATEAUX COMPATIBLES EN PVC	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Plateau avec grille perforée à 28 alvéoles</b>	L. 600 x P. 400 x H. 57	BDL6040.F
<b>Plateau avec grille perforée + 28 gobelets</b>	L. 600 x P. 400 x H. 75	BDL28.F





## Accessoires et équipements

# Unité de distribution journalière

Généralement utilisées pour les **doses liquides**, nos boîtes cylindriques peuvent être également employées pour la distribution de médicaments solides.

Ces boîtes peuvent être rassemblées dans une cuvette oblongue. Des étiquettes vous permettront d'indiquer le nom du patient, le jour et le moment de prise sur la cuvette oblongue et sur le couvercle de chaque boîte cylindrique.



Hygène

### Points forts

- ▶ Adapté aux formes sèches et buvables
- ▶ Boîtes cylindriques livrées avec couvercle
- ▶ Différents coloris proposés

## Accessoires et équipements

## Unité de distribution journalière

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>1</b> Unité de distribution journalière comprenant : - 10 cuvettes oblongues - 10 boîtes cylindriques jaunes avec couvercle - 10 boîtes cylindriques bleues avec couvercle - 10 boîtes cylindriques rouges avec couvercle - 40 étiquettes autocollantes rondes pour boîtes cylindriques - 28 étiquettes autocollantes rectangulaires pour cuvettes oblongues		UDM030
<b>30 boîtes cylindriques colorées avec couvercle :</b> - 10 boîtes cylindriques jaunes - 10 boîtes cylindriques bleues - 10 boîtes cylindriques rouges	L. 40 x P. 40 x H. 31	UDM035
<b>2</b> 30 boîtes cylindriques transparentes avec couvercle	L. 40 x P. 40 x H. 31	UDM036
1000 étiquettes autocollantes pour boîtes cylindriques		UDM045
700 étiquettes autocollantes rectangulaires pour boîtes oblongues		UDM046







# PRATICIMA

healthcare solutions

---

Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux  
CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX - FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 00 98 11

Fax : +33 (0)4 74 00 98 36

E-mail : [praticima@praticima.fr](mailto:praticima@praticima.fr)

[www.praticima.fr](http://www.praticima.fr)